

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В.П. Чуев

«06» _____ 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
геля стоматологического – средства вяжущего для обработки зубных лунок,
для ретракции десны при лечении пришеечного кариеса и обработки
корневых каналов после пульпотомии
«АЛЮМОГЕЛЬ (- Форте)»
ТУ 9391-097-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический материал «Алюмогель» применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены, а также для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стоматологический материал выпускается в виде двух гелей: «Алюмогель» и «Алюмогель» (форте). Гелевая форма позволяет применять материал точечно, не растекаясь, при этом достигается максимальная концентрация гемостатика в зоне кровоизлияния.

Гемостатическое действие основного компонента гелей - алюминия хлористого – многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который кроме того обладает бактерицидными свойствами.

Для более эффективного и быстрого гемостаза в гель «Алюмогель» (форте) введены соли железа.

Гемостатические гели «Алюмогель» и «Алюмогель» (форте) не токсичны, просты в применении, не вызывают раздражений, легко смываются струей воды.

Гемостатик «Алюмогель» (форте) с солями железа может временно изменить цвет ткани десны, который восстанавливается через 1-2 дня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тампон из стерильной ваты смазывают гелем и накладывают на кровоточащую поверхность, слегка прижимая, в течение 1 минуты.

При значительной кровоточивости десны перед проведением манипуляций необходимо изолировать обрабатываемый участок ватными валиками, на 1 минуту нанести небольшое количество геля на оральную и вестибулярную поверхности десны. Для усиления гемостаза в зубодесневую борозду ввести ретракционную нить, пропитанную жидкостью «Ре-Корд». Затем гель смывают водой, подсушивают десну струей воздуха и проводят необходимое действие.

Для обработки корневого канала «Алюмогель» вводят в канал с помощью бумажного штифта или корневой иглы, оставляют на 1 минуту. Затем канал промывают физраствором, просушивают и проводят его дальнейшую обработку.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель (шприц)	- 5 мл
Игла (канюля) для нанесения	- 5 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.



АЛЮМОГЕЛЬ

Гель стоматологический - средство
вяжущее для обработки зубных лунок,
для ретракции десны при лечении
пришеечного кариеса и обработки
корневых каналов после пульпотомии

гель 5 мл

Vlad M. Va
TREATING
DENTAL MATERIALS

ALUMOGEL

Dental astringent material for
treating tooth sockets and root canals
after pulpotomy, for gum retraction
when treating cervical caries

gel 5 ml

АЛЮМОГЕЛЬ
ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ 5 мл
ГЕЛЬ

Срок хранения 2 года

