

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ЗЗ "ВладМиВа"»
В.Г. Чуев
2009 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
пасты для временной атравматичной ретракции десны
«АЛЮМОСИЛ»
ТУ 9391-113-45814830-2007

НАЗНАЧЕНИЕ

Паста «Алюмосил» предназначена для временной атравматичной ретракции и осушения десны при восстановлении полости класса II и V, при получении точных оттисков и фиксации коронок и мостовидных протезов, а также для осушения и раскрытия десневой бороздки при пародонтологическом лечении.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стоматологический материал «Алюмосил» представляет собой готовую к применению пасту, обладающую вяжущими и гемостатическими свойствами. Паста «Алюмосил» содержит: алюминий хлористый, определяющий вяжущее, гемостатическое и ретракционное свойства материала; инертный наполнитель, а также вкусовые и технологические добавки.

Паста, введенная в десневой карман или бороздку, обеспечивает увеличение, ретракцию десны и осушает десневое поле. После применения паста легко удаляется воздушно-водной струей.

Пасты одной канюли достаточно для ретракции десны 7-10 зубов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для пасты в канюлях: предварительно канюлю с пастой необходимо ввести в аппликатор-диспенсер. Для этого канюлю помещают в аппликатор вплотную к поршню, так чтобы обрамление канюли было закреплено в аппликаторе (до щелчка). Затем нажатием рукоятки аппликатора обеспечить выход пасты из канюли. Медленно выдавливают пасту в десневую борозду, слегка опираясь на зуб, и постепенно продвигаясь вокруг зуба. Пастой заполняют борозду, выдерживают 1-2 минуты, затем удаляют воздушно-водной струей и проводят плановые манипуляции.

После применения канюлю обработать спиртовым раствором и убрать в упаковку.

Для пасты в шприцах: необходимо снять со шприца колпачок и заменить его на иглу изогнутую одноразовую. Иглу плотно закрепить на шприце и нажатием на поршень выдавить пасту, медленно перемещая шприц вокруг зуба, чтобы обеспечить заполнение бороздки. Затем необходимо снять иглу и накрутить защитный колпачок. Пасту в бороздке выдерживают 1-2 минуты, затем удаляют воздушно-водной струей и проводят плановые манипуляции.

После применения иглу снять со шприца и больше не использовать. Шприц закрыть колпачком.

ФОРМА ВЫПУСКА

I. Канюля с пастой (0,3 г)	- 10 шт.
Аппликатор-диспенсер	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
<i>Выпускается в комплекте с аппликатором и без него.</i>	
II. Паста (шприц)	- 1,5 г
Игла изогнутая	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C. **Избегать попадания влаги!** Срок годности - 2 года.

Разработчик _____ / Е.А. Кузьмина «___» _____ 2009 г.

