



ООО « КЛЕОН »

РФ, 420138, г. Казань, ул. Ю. Фучика 12-53

Тел/факс: +7(843) 239-93-38

ИНН\КПП 1659157421/165901001

р\сч 40702810900000015803 в ОАО « АИКБ «Татфондбанк»

к\сч 30101810100000000815 БИК 049205815

Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013 в вариантах исполнения

Инструкция по применению

Показания к применению: Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013 в вариантах исполнения предназначены для применения в медицинских учреждениях при уходе за лежащими больными, больными, страдающими недержанием, для предотвращения возникновения раздражения кожи и других проблем, связанных с использованием обычных простыней, также для дополнительной защиты белья и других поверхностей, при проведении массажа, промывании отдельных участков тела водой, при проведении гигиенических процедур и диагностических обследований.

Описание: Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013 в вариантах исполнения представляют собой нестерильный нетканый абсорбирующий текстильный материал, изготовленный из натуральных и синтетических материалов для впитывания жидкостей. Изделие для одноразового использования.

Типоразмеры, (см): 20×20, 20×30, 20×40, 25×25, 25×30, 25×40, 30×30, 30×40, 30×50, 30×60, 30×70, 40×40, 40×50, 40×60, 40×70, 40×80, 45×45, 45×50, 45×60, 45×70, 45×80, 45×90, 50×50, 50×60, 50×65, 50×70, 50×75, 50×80, 50×85, 50×90, 50×95, 50×100, 60×60, 60×65, 60×70, 60×75, 60×80, 60×85, 60×90, 60×95, 60×100, 60×105, 60×110, 60×120, 60×130, 60×140, 60×150, 60×160, 60×170, 60×180, 60×190, 60×200, 60×300, 70×70, 70×80, 70×90, 70×100, 70×110, 70×120, 70×130, 70×140, 70×150, 70×160, 70×170, 70×180, 70×190, 70×200, 80×80, 80×90, 80×100, 80×120, 80×140, 80×160, 80×180, 80×200, 90×90, 90×100, 90×120, 90×140, 90×160, 90×170, 90×180, 90×200, 100×100, 100×120, 100×140, 100×160, 100×180, 100×200, 100×250, 140×100, 140×110, 140×120, 140×140, 140×200, 140×250, 200×200, 200×250, 250×250.

Состав: материал нетканый «Спанбонд» с гидрофильной добавкой, целлюлоза распушенная, суперабсорбент, полиэтиленовая пленка, термоклей, антибактериальный состав.

Порядок применения: Перед сном или перед проведением массажа, промыванием отдельных участков тела водой, проведением гигиенических процедур и диагностических обследований постелить пеленку на поверхность, требующую дополнительной защиты.

Противопоказания: Не использовать пациентам с индивидуальной непереносимостью.

Меры предосторожности: Одноразовые пеленки нужно регулярно менять в случае намокания ~~для~~ предотвращения возникновения раздражения кожи. Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Хранение и транспортировка: Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013 в вариантах исполнения хранят и транспортируют в чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при

температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности (65±15)%. Допускается транспортировка при температуре от -20°C до +50 °C.

Пеленки следует хранить в местах, недоступных для детей.

Запрещено хранить пеленки рядом с нагревательными приборами (ближе 1 м) и в местах с повышенной температурой, влажностью. Запрещено хранить пеленки рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия), другими агрессивными средами.

Гарантия изготовителя: Изготовитель ООО «Клеон», Российская Федерация, Республика Татарстан, 420138, г. Казань, ул. Ю. Фучика 12-53, Тел/факс: +7 (843) 239-93-38, e-mail: cleone-kzn@mail.ru, гарантирует соответствие Пеленок впитывающих, одноразовых «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013 в вариантах исполнения заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности – 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Пеленки применяются одноразово и не требуют сервисного, технического обслуживания и ремонта.

Сведения об утилизации: При необходимости обеззараживание использованных пеленок осуществляют, согласно требованиям к обращению с медицинскими отходами. Утилизация использованных и неиспользованных пеленок, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

Не сжигать! Не бросать в канализацию!

Директор ООО «Клеон»



А.В. Тимофеева