


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации-
заявителя

Позднов А.Л.

« 2010 г.

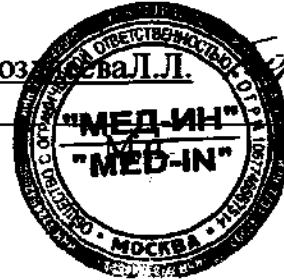

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Многофункционального раствора для всех типов контактных линз.

1. Раствор для ухода за контактными линзами

2. Технические характеристики

1	Материал	Полиэтиленимид д 0,0001 г. - Кокоил гидроксипропил имидазолин 0,0020 г. - ЭДТА 0,100 г. - Буферный изотонический раствор с рН 7,2
---	----------	--

4. Противопоказания – индивидуальная непереносимость

5. Подготовка к работе:

Тщательно вымойте руки;

Поместите линзы в специальный контейнер;

Заполните раствором и закрутите крышки;

Держите линзы в растворе в течение не менее 6 часов;

Перед извлечением линз из контейнера слегка встряхните его;

Теперь линзы готовы к использованию;

Вылейте раствор и закройте контейнер, который останется стерильным благодаря применению нового полимера, обладающего антибактериальным действием.

6. Правила хранения и использования:

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, срок хранения указан на упаковке

1	Срок годности	2 года
2	Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам
3	Упаковка	Упакованы во флаконы объемом 400 мл, 150 мл, 50 мл.