

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МЕДКОМПЛЕКТ»**

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «ПКФ «Медкомплект»



Копылов А.Ю.

28 ноября 2017 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**«Белье и изделия медицинские одноразовые стерильные в  
комплектах по ТУ 9398-002-37492896-2014»**

**РАЗРАБОТАНО:**

ООО «ПКФ «Медкомплект»,

п. Городищи Петушинского р-на, Владимирской обл.

2017 г.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

**1.1.** Настоящее Руководство по применению содержит сведения в объеме достаточном для эффективного и безопасного использования регистрируемых изделий силами штатного персонала медицинских учреждений.

## 1.2. Наименование изделий

«Белье и изделия медицинские одноразовые стерильные в комплектах по ТУ 9398-002-37492896-2014»

## 1.3. Производитель

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 1  
ИНН: 3321032480, ОГРН: 1123316001830 Тел. 8-910-670-39-21;

E-mail: [pkf-medkomplekt@yandex.ru](mailto:pkf-medkomplekt@yandex.ru)

## 1.4. Область применения

Белье и изделия медицинские одноразовые стерильные в комплектах по ТУ 9398-002-37492896-2014 (далее по тексту - изделия) предназначены для одноразового применения при проведении хирургических операций, обследованиях, манипуляциях или процедурах для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и медицинским персоналом, последующей утилизацией.

## 1.5. Показания к применению

Изделия одноразовые применяются во время различных операционных вмешательств для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и медицинским персоналом.

### *Преимущества изделий одноразового применения:*

- удобство в применении;
- высокие защитные свойства для персонала от проникновения жидкостей;
- защита пациента и персонала от различного вида микробных аэрозолей и, как следствие, снижение уровня внутрибольничных осложнений;
- экономическая эффективность при применении при прямых затратах и при скрытых затратах на подготовку многократного белья к применению;
- возможность комплектации различных видов наборов белья и изделий по видам операций;
- длительный срок хранения стерильных одноразовых изделий; - простота утилизации использованных изделий.

Применение одноразовых изделий в операционных, ОРИТ, родильных залах позволяет существенно снизить уровень внутрибольничных инфекций, что неоднократно подтверждалось различными исследованиями.

## 1.6. Противопоказания

Индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов содержащихся в составе медицинских изделий.

1.7. Условия эксплуатации:

Данные медицинские изделия применяется в ЛПУ различного профиля, роддомах и женских консультациях. Изделия одноразовые применяются во время проведения различных операционных вмешательств для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и медицинским персоналом.

1.8. Меры предосторожности

Перед применением внимательно осмотреть упаковку на предмет нарушения целостности. Не использовать комплект, если упаковка повреждена.

Не использовать по окончании срока действия, указанного на упаковке. Белье предназначено только для одноразового применения.

1.9 Условия применения

Белье и изделия медицинские одноразовые стерильные в комплектах по ТУ 9398-002-37492896-2014, применяется для акушерских, гинекологических и общехирургических процедур в операционных залах и стерильных помещениях.

Применение белья и изделий медицинских одноразовых, стерильных в комплектах по ТУ 9398-002-37492896-2014 допускается в нормальных климатических условиях по ГОСТ151150-69.

Упаковку с бельем и изделиями следует вскрыть в стерильном помещении, непосредственно перед операцией.

2 ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Состав изделия

Изделия выпускают по ТУ 9398-002-37492896-2014 «Белье и изделия медицинские одноразовые стерильные в комплектах».

Комплектность

Состав изделий в комплектах должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Комплект белья и изделий медицинских хирургических одноразовых стерильных серии «ОХ» |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Наименование                                                                         | Количество, шт |
| 1                                                                                    | 2              |
| Комплект «ОХ № 1»                                                                    |                |
| - халат                                                                              | 1              |
| - шапочка-колпак                                                                     | 1              |
| - бахилы                                                                             | 1 пара         |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                                                | 1              |
| Комплект «ОХ № 2»                                                                    |                |
| - халат с защитой                                                                    | 1              |
| - шапочка-колпак                                                                     | 1              |
| - бахилы                                                                             | 1 пара         |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                                                | 1              |
| Комплект «ОХ № 3»                                                                    |                |
| - халат с защитой                                                                    | 1              |
| - шапочка-колпак на завязках                                                         | 1              |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                                                | 1              |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <u>Комплект «ОХ № 4»</u>                                 |        |
| - халат                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак на завязках                             | 1      |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                    | 1      |
| <u>Комплект «ОХ № 5»</u>                                 |        |
| - халат                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - бахилы                                                 | 2      |
| <u>Комплект «ОХ № 6»</u>                                 |        |
| - халат                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - бахилы                                                 | 2      |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                    | 1      |
| - фартук                                                 | 1      |
| - нарукавники на резинке/манжете                         | 1 пара |
| - рубашка/куртка                                         | 1      |
| - брюки                                                  | 1      |
| <u>Комплект «ОХ № 7»</u>                                 |        |
| - халат                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - бахилы                                                 | 2      |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                    | 1      |
| - фартук                                                 | 1      |
| <u>Комплект «ОХ № 8»</u>                                 |        |
| - рубашка/куртка                                         | 1      |
| - брюки                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                    | 1      |
| <u>Комплект «ОХ № 9»</u>                                 |        |
| - рубашка/куртка                                         | 1      |
| - брюки                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                    | 1      |
| - бахилы                                                 | 1 пара |
| <u>Комплект «ОХ № 10»</u>                                |        |
| - халат                                                  | 1      |
| - простыня                                               | 4      |
| <u>Комплект «ОХ № 11»</u>                                |        |
| - халат                                                  | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - бахилы                                                 | 1 пара |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках                    | 1      |
| - простыня                                               | 2      |
| <u>Комплект «ОХ № 12»</u>                                |        |
| - халат хирургический                                    | 1      |
| - шапочка-колпак                                         | 1      |
| - бахилы                                                 | 1 пара |
| - маска 3-слойная на резинке/завязках с защитным экраном | 1      |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Комплект «ОХ № 13»</b><br>- халат хирургический<br>- нарукавники на резинке/ манжете<br>- шапочка-колпак<br>- фартук<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках с защитным экраном<br>- перчатки смотровые/хирургические<br>- бахилы | 1<br>1 пара<br>1<br>1<br>1<br>1 пара<br>1 пара |
| <b>Комплект «ОХ № 14»</b><br>- халат хирургический<br>- нарукавники на резинке/ манжете<br>- шапочка-колпак<br>- фартук<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках<br>- перчатки смотровые/хирургические                                | 1<br>1 пара<br>1<br>1<br>1<br>1 пара           |
| <b>Комплект белья и изделий медицинских хирургических операционных одноразовых стерильных серии «БОХ»</b>                                                                                                                             |                                                |
| <b>Комплект «БОХ № 1»:</b><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня<br>- простыня с отверстием<br>- держатель для шнура<br>- салфетка впитывающая<br>- повязка послеоперационная для закрытия ран                          | 1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>1                     |
| <b>Комплект «БОХ № 2»:</b><br>- простыня<br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня с адгезивным краем и впитывающей зоной                                                                                  | 2<br>1<br>3                                    |
| <b>Комплект «БОХ № 3»:</b><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня с липким (адгезивным) краем и впитывающей зоной                                                 | 1<br>1<br>3                                    |
| <b>Комплект «БОХ № 4»:</b><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка с липким (адгезивным) краем                                                                                                                        | 2<br>2                                         |
| <b>Комплект «БОХ № 5»:</b><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка с липким (адгезивным) краем<br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня                                                                    | 2<br>2<br>1<br>1                               |
| <b>Комплект «БОХ № 6»:</b><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка впитывающая<br>- лента операционная                                                            | 1<br>1<br>4<br>4<br>1                          |
| <b>Комплект «БОХ № 7»:</b><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка впитывающая<br>- лента операционная                                                            | 1<br>1<br>4<br>2<br>3                          |
| <b>Комплект «БОХ № 8»:</b><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка впитывающая                                                                                                                                        | 4<br>2                                         |

|                                                                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Комплект «БОХ № 9»:</u><br>- покрытие/чехол для операционного стола<br>- простыня с отверстием<br>- салфетка                                                     | 1<br>1<br>1                |
| <u>Комплект «БОХ № 10»:</u><br>- покрытие/чехол для операционного стола<br>- простыня с липким (адгезивным) краем                                                   | 1<br>4                     |
| <u>Комплект «БОХ № 11»:</u><br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- простыня с отверстием<br>- салфетка                                        | 1<br>1<br>1<br>2           |
| <u>Комплект «БОХ № 12»:</u><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- лента операционная                   | 1<br>1<br>2<br>3           |
| <u>Комплект «БОХ № 13»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка<br>- чехол на инструментальный столик                                           | 4<br>1<br>1                |
| <u>Комплект «БОХ № 14»:</u><br>- халат<br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня                          | 3<br>1<br>2 пары<br>1<br>3 |
| <u>Комплект «БОХ № 15»:</u><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка            | 1<br>1<br>1<br>4           |
| <u>Комплект «БОХ № 16»:</u><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня                                                                    | 1<br>1                     |
| <u>Комплект «БОХ № 17»:</u><br>- простыня с отверстием<br>- простыня                                                                                                | 1<br>1                     |
| <u>Комплект «БОХ № 18»:</u><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка впитывающая                 | 1<br>1<br>4<br>4           |
| <u>Комплект «БОХ № 19»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка с липким (адгезивным) краем<br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня | 1<br>2<br>1<br>1           |
| <u>Комплект «БОХ № 20»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка с липким (адгезивным) краем                                                     | 1<br>2                     |
| <u>Комплект «БОХ № 21»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка                                                                                 | 4<br>1                     |

|                                                                                                                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Комплект «БОХ № 22»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка с липким (адгезивным) краем<br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня       | 1<br>2<br>1<br>2           |
| <u>Комплект «БОХ № 23»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня                                                 | 4<br>1<br>2                |
| <u>Комплект «БОХ № 24»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- покрытие для операционного стола                                                               | 4<br>1                     |
| <u>Комплект «БОХ № 25»:</u><br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка с липким (адгезивным) краем<br>- покрытие/чехол для операционного стола<br>- простыня | 1<br>2<br>1<br>1           |
| <u>Комплект «БОХ № 26»:</u><br>- Покрытие/чехол для операционного стола<br>- простыня с отверстием<br>- салфетка                                                          | 1<br>1<br>1                |
| <u>Комплект «БОХ № 27»:</u><br>- халат<br>- салфетка                                                                                                                      | 1<br>2                     |
| <u>Комплект «БОХ № 28»:</u><br>- чехол на инструментальный столик<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка впитывающая                       | 1<br>2<br>4<br>4           |
| <u>Комплект «БОХ № 29»:</u><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- салфетка                  | 1<br>1<br>1<br>3           |
| <u>Комплект «БОХ № 30»:</u><br>- простыня<br>- бахилы<br>- перчатки смотровые/хирургические                                                                               | 1<br>1 пара<br>1 пара      |
| <u>Комплект «БОХ № 31»:</u><br>- простыня<br>- бахилы<br>- перчатки смотровые/хирургические<br>- брюки операционные                                                       | 1<br>1 пара<br>1 пара<br>1 |
| <u>Комплект «БОХ № 32»:</u><br>- простыня<br>- бахилы<br>- брюки операционные                                                                                             | 1<br>1 пара<br>1           |
| <u>Комплект «БОХ № 33»:</u><br>- простыня<br>- бахилы<br>- шапочка-берет<br>- подкладка впитывающая<br>- лента операционная                                               | 2<br>1 пара<br>1<br>2<br>2 |

|                                                                                                                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Комплект «БОХ № 34»:</b><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня с липким (адгезивным) краем<br>- бахилы<br>- салфетка операционная<br>- лента операционная | 1<br>1<br>1 пара<br>4<br>2           |
| <b>Комплект «БОХ № 35»:</b><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- салфетка операционная<br>- чехол на инструментальный столик                                         | 1<br>4<br>1                          |
| <b>Комплект «БОХ № 36»:</b><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- салфетка операционная<br>- простыня                                                                 | 1<br>4<br>2                          |
| <b>Комплекты белья и изделий медицинских хирургических одноразовых стерильных серии «КБ»</b>                                                                                                |                                      |
| <b>Комплект «КБ № 1»:</b><br>- простыня<br>- пододеяльник<br>- наволочка                                                                                                                    | 1<br>1<br>1                          |
| <b>Комплект «КБ № 2»:</b><br>- простыня<br>- пододеяльник<br>- наволочка                                                                                                                    | 1<br>1<br>2                          |
| <b>Комплект «КБ № 3»:</b><br>- простыня<br>- пододеяльник<br>- наволочка                                                                                                                    | 2<br>1<br>1                          |
| <b>Комплект «КБ № 4»:</b><br>- простыня<br>- пододеяльник<br>- наволочка<br>- салфетка                                                                                                      | 1<br>1<br>1<br>1                     |
| <b>Комплект «КБ № 5»:</b><br>- простыня<br>- пододеяльник<br>- наволочка<br>- салфетка впитывающая                                                                                          | 2<br>1<br>2<br>1                     |
| <b>Комплект «КБ № 6»:</b><br>- простыня<br>- наволочка                                                                                                                                      | 2<br>1                               |
| <b>Комплекты белья и изделий медицинских операционных одноразовых стерильных серии «АК»</b>                                                                                                 |                                      |
| <b>Комплект «АК № 1»:</b><br>- простыня с карманом<br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет                           | 1<br>1<br>2<br>4<br>1<br>1 пара<br>1 |

|                                                                                                                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Комплект «АК № 2»:</u><br>- простыня с карманом<br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет | 1<br>1<br>1<br>4<br>1<br>1 пара<br>1 |
| <u>Комплект «АК № 3»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка                                                                                   | 1<br>2<br>1                          |
| <u>Комплект «АК № 4»:</u><br>- простыня с карманом<br>- простыня                                                                                                  | 1<br>1                               |
| <u>Комплект «АК № 5»:</u><br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет                                                                                | 1<br>1 пара<br>1                     |
| <u>Комплект «АК № 6»:</u><br>- простыня с карманом<br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет | 1<br>1<br>1<br>4<br>1<br>1 пара<br>1 |
| <u>Комплект «АК № 7»:</u><br>- пеленка впитывающая<br>- простыня<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет<br>- салфетка                           | 1<br>2<br>1<br>1 пара<br>1<br>2      |
| <u>Комплект «АК № 8»:</u><br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет                                                                                | 1<br>1 пара<br>1                     |
| <u>Комплект «АК № 9»:</u><br>- пеленка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка                                                                                    | 1<br>2<br>2                          |
| <u>Комплект «АК № 10»:</u><br>- простыня<br>- салфетка<br>- браслет идентификационный                                                                             | 2<br>3<br>2                          |
| <u>Комплект «АК № 11»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- браслет идентификационный                                                   | 1<br>1<br>3<br>2                     |
| <u>Комплект «АК № 12»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка                                                                                  | 1<br>1<br>3                          |

|                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>Комплект «АК № 13»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- браслет идентификационный                                                                                   | 1<br>2<br>3<br>2                          |
| <u>Комплект «АК № 14»:</u><br>- простыня<br>- салфетка впитывающая<br>- салфетка операционная<br>- подкладка впитывающая                                                                          | 2<br>1<br>1<br>1                          |
| <u>Комплект «АК № 15»:</u><br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет<br>- простыня<br>- простыня с карманом<br>- салфетка впитывающая<br>- салфетка<br>- браслет идентификационный | 1<br>1 пара<br>1<br>3<br>1<br>1<br>3<br>2 |
| <u>Комплект «АК № 16»:</u><br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет<br>- простыня с карманом<br>- пеленка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка                                 | 1<br>1 пара<br>1<br>1<br>1<br>2<br>3      |
| <u>Комплект «АК № 17»:</u><br>- пеленка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка                                                                                                                   | 1<br>2<br>2                               |
| <u>Комплект «АК № 18»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- браслет идентификационный                                                                                   | 1<br>2<br>3<br>2                          |
| <u>Комплект «АК № 19»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка                                                                                                                  | 1<br>2<br>3                               |
| <u>Комплект «АК № 20»:</u><br>- простыня с карманом<br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет<br>- салфетка                                | 1<br>1<br>2<br>1<br>1 пара<br>1<br>3      |
| <u>Комплект «АК № 21»:</u><br>- простыня<br>- салфетка                                                                                                                                            | 2<br>3                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <u>Комплект «АК № 22»:</u><br>- рубашка для роженицы<br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- простыня<br>- салфетка впитывающая<br>- салфетка                                                                                        | 1<br>1<br>1 пара<br>2<br>1<br>3                |
| <u>Комплект «АК № 23»:</u><br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- салфетка операционная<br>- простыня                                                                                                                               | 1<br>1 пара<br>2<br>3                          |
| <u>Комплект «АК № 24»:</u><br>- шапочка-берет<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- салфетка впитывающая<br>- простыня<br>- простыня с карманом<br>- салфетка                                                               | 1<br>1<br>1 пара<br>1<br>2<br>1<br>3           |
| <u>Комплект «АК № 25»:</u><br>- салфетка впитывающая<br>- простыня                                                                                                                                                               | 1<br>2                                         |
| <u>Комплект «АК № 26»:</u><br>- халат<br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках длиной                                                                                                             | 1<br>1<br>1 пара<br>1                          |
| <u>Комплект «АК № 27»:</u><br>- пленка впитывающая<br>- простыня                                                                                                                                                                 | 1<br>4                                         |
| <u>Комплект «АК № 28»:</u><br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- халат с защитой<br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- салфетка<br>- салфетка впитывающая                                                    | 5<br>3 пары<br>2<br>1<br>3<br>1                |
| <u>Комплект «АК № 29»:</u><br>- халат с защитой<br>- шапочка-берет<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках<br>- рубашка для роженицы<br>- простыня с карманом<br>- простыня<br>- салфетка<br>- салфетка впитывающая<br>- бахилы | 2<br>5<br>5<br>1<br>1<br>2<br>3<br>1<br>3 пары |
| <u>Комплект «АК № 30»:</u><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- простыня<br>- пленка впитывающая                                                                                                          | 1<br>1<br>1                                    |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>Комплект «АК № 31»:</u><br>- бахилы<br>- простыня<br>- рубашка для роженицы<br>- салфетка впитывающая<br>- шапочка-берет<br>- подкладка впитывающая                                                           | 1 пара<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| <u>Комплект «АК № 32»:</u><br>- пеленка впитывающая<br>- простыня<br>- салфетка<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- шапочка-берет                                                                         | 1<br>1<br>4<br>1<br>1 пара<br>1 |
| <u>Комплект «АК № 33»:</u><br>- простыня с карманом<br>- простыня<br>- пеленка впитывающая<br>- бахилы<br>- шапочка-берет<br>- рубашка для роженицы                                                              | 1<br>1<br>1<br>1 пара<br>1<br>1 |
| <u>Комплект «АК № 34»:</u><br>- шапочка-берет<br>- рубашка для роженицы<br>- бахилы<br>- салфетка впитывающая<br>- салфетка<br>- простыня                                                                        | 1<br>1<br>1 пара<br>1<br>2<br>2 |
| <u>Комплект «АК № 35»:</u><br>- простыня<br>- салфетка впитывающая                                                                                                                                               | 4<br>1                          |
| <u>Комплект «АК № 36»:</u><br>- простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем<br>- чехол на инструментальный столик<br>- бахилы<br>- салфетка впитывающая<br>- салфетка операционная<br>- лента операционная | 1<br>1<br>1 пара<br>1<br>4<br>2 |
| <u>Комплект «АК № 37»:</u><br>- простыня<br>- салфетка впитывающая<br>- салфетка<br>- фартук                                                                                                                     | 2<br>1<br>2<br>1                |
| <u>Комплект «АК № 38»:</u><br>- салфетка<br>- бахилы                                                                                                                                                             | 1<br>1 пара                     |
| <u>Комплект «АК № 39»:</u><br>- халат с защитой;<br>- халат<br>- шапочка-берет<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках                                                                                          | 1<br>1<br>2<br>2                |
| <u>Комплект «АК № 40»:</u><br>- бахилы<br>- шапочка-берет                                                                                                                                                        | 1 пара<br>1                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Комплект «АК № 41»:</u><br>- халат с защитой<br>- халат<br>- шапочка-берет<br>- фартук<br>- бахилы<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках с защитным экраном | 3<br>4<br>7<br>2<br>7 пар<br>4<br>3 |
| <u>Комплект «АК № 42»:</u><br>- салфетка<br>- бахилы<br>- перчатки смотровые/хирургические                                                                                                                 | 1<br>1 пара<br>1 пара               |
| <u>Комплект «АК № 43»:</u><br>- салфетка<br>- перчатки смотровые/хирургические                                                                                                                             | 1<br>1 пара                         |
| <u>Комплект «АК № 44»:</u><br>- халат<br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках<br>- перчатки смотровые/хирургические                                                        | 1<br>1<br>1 пара<br>1<br>1 пара     |
| <u>Комплект «АК № 45»:</u><br>- халат<br>- шапочка-берет<br>- бахилы<br>- маска 3-слойная на резинке/завязках<br>- перчатки смотровые/хирургические                                                        | 3<br>3<br>3 пары<br>3<br>1 пара     |
| <u>Комплект «АК № 46»:</u><br>- простыня<br>- салфетка<br>- бахилы<br>- презерватив для датчика                                                                                                            | 1<br>2<br>1 пара<br>1               |
| <u>Комплект «АК № 47»:</u><br>- простыня<br>- салфетка<br>- бахилы<br>- презерватив для датчика<br>- перчатки смотровые/хирургические                                                                      | 1<br>2<br>1 пара<br>1<br>1 пара     |

Примечание - Для производства изделий применяются материалы, безопасность и качество которых должны быть подтверждены сертификатом соответствия и паспортом качества предприятия-изготовителя или другими документами, удостоверяющими безопасность и качество в установленном порядке.

**Комплекты изделий серии «ОХ»** представляют собой хирургические изделия, предназначенные для надевания хирургами и медперсоналом общей хирургии.

**Комплекты изделий серии «БОХ»** представляют собой хирургические операционные изделия, предназначенные для покрытия и разграничения операционного поля, для использования в качестве подстилочного и покровного материала, а также в качестве медицинского средства для впитывания или сорбционного средства для осушения операционного поля. В комплекты серии «БОХ» также входят изделия, предназначенные надевания хирургами и медперсоналом общей хирургии.

Для накрытия малого инструментального стола может использоваться чехол. Инструментальный стол накрывается для каждой операции.

Простыней одноразового использования укрывается операционный стол и накрывается пациент (2 простыни – меняются на каждой операции). В процессе укладки пациента могут использоваться разовые салфетки.

После обработки рук хирурги одеваются в разовые стерильные халаты и приступают к выполнению хирургических вмешательств.

После обработки операционного поля пациент накрывается одной специализированной простыней с вырезами, отверстиями и т.д., снабженных адгезивными краями, впитывающимися зонами, карманами и т.д. Такой подход позволяет использовать одну одноразовую простыню вместо двух многоразовых и двух салфеток для укрытия пациента.

После окончания операций использованная одноразовая одежда собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

Так же комплекты серии «БОХ» используются в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии одноразовая медицинская одежда (костюм хирургический), шапочка, хирургический халат и непромокаемый фартук надевается при выполнении перевязок или других процедур.

**Комплекты изделий серии «КБ»** представляют собой хирургические изделия, предназначенные для накрытия кушеток, операционных столов и др. с целью защиты пациента от контакта с оборудованием и мебелью операционных залов.

**Комплекты серии «КБ»** представляют собой комплекты, состоящие из простыней, наволочек, пододеяльников, салфеток.

Смена белья производится ежедневно или по мере их загрязнения.

**Комплекты изделий серии «АК»** представляют собой операционные изделия для рождения пациенток гинекологических отделений, предназначенные для использования в акушерских гинекологических операциях с целью защиты операционного поля от инфекций и органических выделений, а также медицинского персонала, принимающего роды в родильном зале.

Одноразовое медицинское белье в отдельных упаковках используется в инфекционных стационарах, в отделениях реанимации и интенсивной терапии (второй халат), а также в отделениях, где существует высокая вероятность загрязнения спецодежды медицинского персонала и постельного белья биологическими жидкостями инфекционных больных.

2.2 Требования к материалам, используемым для изготовления изделий

Комплектуемые покупные изделия, отечественного производства или поставляемые по импорту должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование изделий                              | Материал                                                                                                      |                           | Изготовитель изделия/ Номер регистрационного удостоверения                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Состав                                                                                                        | Плотность, г/кв.м, (±10%) |                                                                                                                                                                                                   |
| Халат;<br>Халат с защитой;<br>Халат хирургический | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S); | 6-150                     | «Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/<br>ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010г.<br>«LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED»/<br>ФСЗ 2011/10269 от 13.10.2011г.<br>ООО «Интмед»/<br>ФСЗ 2011/08991 от 02.02.2011г. |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p>Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51);</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));</p> <p>Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))</p> |       | <p>ООО «Каптель»/<br/>ФСР 2012/13574 от 28.06.2012г.</p> <p>ООО «МедКомплект»/<br/>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009г.</p> <p>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br/>РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.</p> <p>ООО «Инмедиз»/<br/>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012г.</p> <p>«Ксянтао Форчен Медикал Сэеплайз»<br/>(«Ксянтао Фу Юань»)/<br/>ФСЗ 2009/03661 от 28.01.2009г.</p> <p>Новитекс (Новита, Польша)</p> <p>Сонтара (ДюПонт, США)</p>                                                                                                              |
| <p>рюкзак;</p> <p>рюкзак операционные</p>                                      | <p>Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51);</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));</p> <p>Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))</p> | 6-150 | <p>«Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/<br/>ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010г.</p> <p>«LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED»/<br/>ФСЗ 2011/10269 от 13.10.2011г.</p> <p>ООО «Интмед»/<br/>ФСЗ 2011/08991 от 02.02.2011г.</p> <p>ООО «Каптель»/<br/>ФСР 2012/13574 от 28.06.2012г.</p> <p>ООО "МедКомплект"/<br/>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009</p> <p>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br/>РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.</p> <p>ООО «Инмедиз»/<br/>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012г.</p> <p>Новитекс (Новита, Польша)</p> <p>Сонтара (ДюПонт, США)</p> |
| <p>рубашка/куртка</p>                                                          | <p>Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51);</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));</p> <p>Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))</p> | 6-150 | <p>«Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/<br/>ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010г.</p> <p>«LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED»/<br/>ФСЗ 2011/10269 от 13.10.2011г.</p> <p>ООО «Интмед»/<br/>ФСЗ 2011/08991 от 02.02.2011г.</p> <p>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br/>РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.</p> <p>ООО «Инмедиз»/<br/>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012г.</p> <p>Новитекс (Новита, Польша)</p> <p>Сонтара (ДюПонт, США)</p>                                                                                                                     |
| <p>Костюм</p>                                                                  | Изделие состоит из рубашки/куртки и брюк (см. выше).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Шапочка-берет;</p> <p>Шапочка-колпак;</p> <p>Шапочка-колпак на завязках</p> | <p>Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51);</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));</p> <p>Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)</p> <p>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна)</p>                                                                     | 6-150 | <p>«Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/<br/>ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010г.</p> <p>ООО «КИТ»/<br/>ФСР 2010/09673 от 23.12.2010г.</p> <p>ООО «Интмед»/<br/>ФСЗ 2011/08991 от 02.02.2011г.</p> <p>ООО "МедКомплект"/<br/>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009г.</p> <p>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br/>РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.</p> <p>ООО «Инмедиз»/<br/>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012г.</p> <p>«Ксянтао Форчен Медикал Сэеплайз»<br/>(«Ксянтао Фу Юань»)/<br/>ФСЗ 2009/03661 от 28.01.2009г.</p> <p>Новитекс (Новита, Польша)</p>          |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))                                                                                    |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Бахилы                                                                                                                                            | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)); | 6-150                            | «Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/<br>ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010г.<br>ООО "МедКомплект"/<br>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009<br>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br>РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.<br>ООО «Спецмедтехника»/<br>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012г.<br>«Ксянтао Форчен Медикал Сэеплайз» («Ксянтао Фу Юань»)/<br>ФСЗ 2009/03661 от 28.01.2009г.<br>Новитекс (Новита, Польша)                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))                     |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | Полиэтилен (ПВХ-С-7059-М/ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)                                                                                                                | Толщина стенки - от 5 до 100 мкм | ООО «БАЛЕО»/<br>ФСР 2011/12507 от 10.04.2012г.<br>ООО «Комета»/<br>ФСР 2011/12148 от 26.10.2011г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фартук;<br>Нарукавники на резинке манжете                                                                                                         | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)); | 6-150                            | «Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»; ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010г.<br>«LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED»/<br>ФСЗ 2011/10269 от 13.10.2011г.<br>ООО «Интмед»/<br>ФСЗ 2011/08991 от 02.02.2011г.<br>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br>РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.<br>ООО «Инмедиз»/<br>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012г.<br>ООО "МедКомплект"/<br>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                   | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));                                                                                  |                                  | Новитекс (Новита, Польша)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                   | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))                     |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | Полиэтилен (ПВХ-С-7059-М/ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)                                                                                                                | Толщина стенки - от 5 до 120 мкм | ООО «Спецмедтехника»/<br>РЗН 2014/2192 от 19.12.2014 г.<br>ООО «МедКомплект»/<br>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009 г.<br>«Вухан Лифарма Кемикалз Ко.,Лтд»<br>ФСЗ 2008/02102 от 03.07.2008 г.<br>«Лебоо Хелскеа Продактс Лимитед» (Л.Х.П)<br>2011/10269 от 13.10.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Маска 3-слойная на резинке/завязках;<br>Маска 3-слойная на резинке/завязках с фильтром;<br>Маска 3-слойная на резинке/завязках с защитным экраном | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% PP), марки PP1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)); | 6-150                            | «Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/<br>ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010 г.<br>ООО «КИТ»/<br>ФСР 2010/09673 от 23.12.2010г.<br>«LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED»/ ФСЗ 2011/10269 от 13.10.2011 г.<br>ООО «Интмед»/<br>ФСЗ 2011/08991 от 02.02.11 г<br>ООО "МедКомплект"/<br>ФСР 2009/05396 от 24.07.2009 г.<br>ЗАО «Здравмедтех-М»/<br>РЗН 2013/641 от 17.05.2013 г.<br>ООО «Инмедиз»/<br>ФСР 2012/13821 от 23.08.2012 г.<br>«Ксянтао Форчен Медикал Сэеплайз» («Ксянтао Фу Юань»)/<br>ФСЗ 2009/03661 от 28.01.2009 г.<br>Новитекс (Новита, Польша) |
|                                                                                                                                                   | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET));                                                                                  |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (PET) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Перчатки смотровые/хирургические                                                                                                                  | Латекс<br>ПВХ                                                                                                                                                               | -                                | «TG MEDICAL Sdn.Bhd.»/<br>ФСЗ 2012/12488 от 19.07.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Нитрил<br>Винил<br>Неопрен<br>(белый; натурально-бежевый; светло-<br>бежевый; голубой; синий)                                                                                                                                         |       | «Исин Эйч Би Эм Латекс Продакшн Ко. Лтд»/<br>РЗН 2013/1221 от 03.10.2013 г.<br>«Хельм Медикал ГмбХ»/<br>ФСЗ 2008/02979 от 26.11.2008 г.<br>ООО «Полимерные изделия»/<br>ФСР 2008/02605 от 30.04.2008 г.<br>ООО «Фарм-Глобал»/<br>ФСР 2008/02982 от 04.07.2008 г.<br>ООО «Ардейл-Импэкс»/<br>ФСР 2008/03089 от 30.07.2008 г. |
| Презерватив для датчика | Латекс                                                                                                                                                                                                                                |       | «Shanghai BioMed Industrial Co., Ltd»/<br>ФСЗ 2011/09880 от 09.06.2011 г.<br>«Амор Гуммиварен ГмбХ»/<br>ФСЗ 2012/13260 от 22.11.2012 г.<br>ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»<br>ФСР 2007/00033 от 19.03.2007 г.                                                                                                     |
| Подкладка впитывающая   | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд,<br>СС; СМС; СММС; Спанбел (100%<br>полипропилен (100% PP), марки<br>PP1300, 1365S на ламинированной<br>основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF<br>0.33/51);                                             | 6-150 | «Вестфилд Медикал Лимитед» / ФСЗ<br>2011/09161 от 15.03.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла,<br>Акваспан (100-20% вискоза, 0-80%<br>полиэфирные волокна (PET));                                                                                                                                      |       | Новитекс (Новита, Польша)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Сонтара (50% целлюлоза, 50%<br>полиэфирные волокна)<br><br>Спанлейс, Новитекс, Фибрелла,<br>Акваспан (100-20% вискоза, 0-80%<br>полиэфирные волокна (PET) на<br>ламинированной основе основе (ПВД<br>15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)) |       | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Салфетка впитывающая    | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд,<br>СС; СМС; СММС; Спанбел (100%<br>полипропилен (100% PP), марки<br>PP1300, 1365S на ламинированной<br>основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF<br>0.33/51);                                             | 6-150 | ЗАО «Здравмедтех-М»/ РЗН 2013/641 от<br>17.05.2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла,<br>Акваспан (100-20% вискоза, 0-80%<br>полиэфирные волокна (PET));                                                                                                                                      |       | АО ТЗМО С.А./ ФСЗ 2011/09976 от 15.08.2011<br>г.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Сонтара (50% целлюлоза, 50%<br>полиэфирные волокна)                                                                                                                                                                                   |       | Новитекс (Новита, Польша)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла,<br>Акваспан (100-20% вискоза, 0-80%<br>полиэфирные волокна (PET) на<br>ламинированной основе основе (ПВД<br>15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))                                                            |       | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Пеленка впитывающая     | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд,<br>СС; СМС; СММС; Спанбел (100%<br>полипропилен (100% PP), марки<br>PP1300, 1365S на ламинированной<br>основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF<br>0.33/51);                                             | 6-150 | ООО «Интертекс»/<br>ФСР 2011/10226 от 11.03.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла,<br>Акваспан (100-20% вискоза, 0-80%<br>полиэфирные волокна (PET));                                                                                                                                      |       | «Ханьжоу Чжэньци Санитарии Продактс Ко.<br>Лтд.»/ФСЗ 2011/10742 от 29.09.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Сонтара (50% целлюлоза, 50%<br>полиэфирные волокна)                                                                                                                                                                                   |       | «Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити»/<br>ФСЗ 2011/10742 от 29.09.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла,<br>Акваспан (100-20% вискоза, 0-80%<br>полиэфирные волокна (PET) на<br>ламинированной основе основе (ПВД<br>15803-020/ПНД марки EF 0.33/51))                                                            |       | Новитекс (Новита, Польша)<br><br>Сонтара (ДюПонт, США)                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                            |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Чехол на инструментальный столик           | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% РР), марки РР1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51); | 6-150                            | ООО «Производственное предприятие «Барьер»/ ФСР 2012/13574 от 28.06.2012 г.            |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ));                                                                                 |                                  | Новитекс (Новита, Польша)                                                              |
|                                            | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                           |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                  |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51))                    |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                  |
|                                            | Полиэтилен (ПВХ-С-7059-М/ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51)                                                                                                               | Толщина стенки - от 5 до 100 мкм | ООО «Капель»/ ФСР 2012/13574 от 28.06.2012 г.                                          |
| Повязка послеоперационная для закрытия ран | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% РР), марки РР1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51); | 6-150                            | ЗАО «Здравмедтех-П»/ ФСР 2010/09515 от 24.12.2010 г.                                   |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ));                                                                                 |                                  | Новитекс (Новита, Польша)                                                              |
|                                            | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                           |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                  |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51))                    |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                  |
| Лента операционная                         | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% РР), марки РР1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51); | 6-150                            | «Чангжоу Нанфанг Медикал Эпплайанс Фэктори Ко., Лтд.»/ ФСЗ 2008/01442 от 15.04.2008 г. |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ));                                                                                 |                                  | ЗАО «Здравмедтех-П»/ФСР 2010/09515 от 24.12.2010 г.                                    |
|                                            | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                           |                                  | ООО "МедКомплект"/ФСР 2009/05396 от 24.07.2009 г.                                      |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51))                    |                                  | ЗАО «Здравмедтех-М»/ РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.                                      |
|                                            |                                                                                                                                                                            |                                  | «Пауль Хартманн АГ»/ ФСЗ 2011/11245 от 21.10.2014 г.                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                            |                                  | Новитекс (Новита, Польша)                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                            |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                  |
| Рубашка для роженицы                       | Спанбонд, Термобонд, СМС, Айрленд, СС; СМС; СММС; Спанбел (100% полипропилен (100% РР), марки РР1300, 1365S на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки ЕF 0.33/51); | 6-150                            | «Xiantao Daogi Plastic Co., Ltd.»/ ФСЗ 2010/07185 от 05.07.2010 г.                     |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна (РЕТ));                                                                                 |                                  | «Здравмедтех-М»/ РЗН 2013/641 от 17.05.2013г.                                          |
|                                            | Сонтара (50% целлюлоза, 50% полиэфирные волокна)                                                                                                                           |                                  | ООО «Инмедиз»/ ФСР 2012/13821 от 23.08.12 г.                                           |
|                                            | Спанлейс, Новитекс, Фибрелла, Акваспан (100-20% вискоза, 0-80% полиэфирные волокна)                                                                                        |                                  | Новитекс (Новита, Польша)                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                            |                                  | Сонтара (ДюПонт, США)                                                                  |

|                           |                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | полиэфирные волокна (РЕТ) на ламинированной основе (ПВД 15803-020/ПНД марки EF 0.33/51)) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Браслет идентификационный | Винил/пластик                                                                            | - | <p>"Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд." / ФСЗ 2011/10589 от 16.09.2011г.</p> <p>«Дометик С.а.р.л.» /РЗН 2013/604 от 14.05.2013 г.</p> <p>«Алексмед Интеризшил Б.В.» / ФСЗ 2012/12136 от 04.05.2012 г.</p> <p>«Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд.»/ФСЗ 2009/03563 от 25.01.2010 г.</p> |

### 3 Конструкция и назначение изделий

Конструкция и назначение изделий указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия      | Конструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Халат/Халат хирургический | <p>Изделия имеет Т-образный раскрой или раскрой с запахом</p> <p>Способы фиксации изделия Т-образного раскроя на теле: на поясе сзади с помощью двойных завязок или липучек; или на вороте с помощью двойных завязок липучек или «петля-крючок». Изделие с запахом завязывается на пояс или фиксируется с помощью двойных завязок сзади. Длина завязок от 35 до 95см.</p> <p>Размер изделия от 44 до 60. Длина изделия от 90 до 170 см. Длина рукава от 45 до 75 см, ширина рукава от 12 до 25 см. Рукав на резинке или на трикотажных манжетах длиной 3 см.</p>                                                                                                                     | <p>Изделие предназначено для использования в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом, операционным полем. Изделие защищает хирурга и медперсонал от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций.</p> <p>Смена изделия производится после каждой выполненной операции.</p>                                                  |
| Халат с защитой           | <p>Изделие имеет Т-образный раскрой или раскрой с запахом</p> <p>Способы фиксации на теле: на поясе сзади с помощью двойных завязок или липучек; или на вороте с помощью двойных завязок липучек или «петля-крючок». Рукав на резинке или на трикотажных манжетах. Халат снабжен дополнительными защитными вставками из полиэтилена (ламинирование): по передней части халата и рукавах или на переде халата и нижних частях рукавов. Длина изделия от 90 до 170 см. Размер изделия от 44 до 60. Длина защитной зоны от 70 до 165см, ширина защитной зоны от 30 до 60 см. Длина рукава от 45 до 75 см, ширина рукава от 12 до 25 см. Длина защитной зоны рукава от 12 до 25 см.</p>  | <p>Изделие предназначено для использования в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом, операционным полем. Используется медицинскими работниками операционного зала при проведении операций, где необходима высокая степень защиты от проникновения различных жидкостей: органических выделений и жидкостей, тканей пациента. Смена халата с защитой производится после каждой выполненной операции.</p> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Брюки/ Брюки<br/>операционные</b></p> | <p>Изделия без карманов или с передними или задними карманами. Пояс брюк с резинкой или на завязках. Размер изделия от 44 до 60. Длина брюк от 80 до 108 см, ширина брюк от 90 до 128 см. Длина операционных брюк от 20 до 60 см., ширина от 25 до 60 см.</p>                                        | <p>Брюки предназначены для использования в качестве физического барьера предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Брюки используются хирургами и медперсоналом операционного поля при проведении операций для защиты нижней части тела от контаминации различными жидкостями: органическими выделениями, тканями пациента. Брюки операционные предназначены для использования в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом, операционным полем. Брюки операционные используются пациентом для проктологических осмотров или операций или для других медицинских целей. Смена изделия производится после каждой выполненной операции.</p> |
| <p><b>Рубашка/ куртка</b></p>               | <p>Изделие без карманов или с нагрудными или нижними карманами, V-образным вырезом горловины, с длинными или короткими рукавами. Размер изделия от 44 до 60. Длина изделия от 60 до 95 см, ширина от 40 до 65 см. Длина длинного рукава от 50 до 65 см. Длина короткого рукава от 15 до 25 см.</p>  | <p>Изделие предназначено для использования в качестве физического барьера предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Рубашка/куртка используется для контроля распространения микробов от воздуха от кожи, для защиты верхней части тела от инфицирования различными жидкостями. Смена рубашки/куртки производится после каждой выполненной операции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Костюм</b></p>                        | <p>Изделие состоит из рубашки/куртки и брюк (см. выше)</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Изделие предназначено для использования в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Смена костюма производится после каждой выполненной операции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Шапочка-колпак</b></p>                | <p>Изделие цилиндрической формы. Возможно наличие подворота по нижней кромке шапочки-колпака. Высота изделия от 12 до 20 см. Диаметр изделия от 45 до 65 см.</p>                                                                                                                                   | <p>Изделие используется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Шапочка-берет

Шапочку округлой формы в виде берета с объемной сборкой с двух сторон. По краю – мягкая синтетическая полимерная резинка. Или с защипами по краям. Диаметр от 45 до 65 см.

Длина при растянутой резинке от 33 до 45 см.



Изделие надевается непосредственно перед входом в операционный зал. Используется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Для производства шапочек специально используется 100% полипропиленовое полотно пониженной плотности для улучшенной воздухопроницаемости, чтобы кожа головы свободно дышала.

Шапочка-колпак на завязках

Изделие цилиндрической формы фиксируется завязками, расположенными на затылочной части. Возможно наличие подворота по нижней кромке шапочки-колпака. Высота от 12 до 20 см. Диаметр изделия от 45 до 65 см. Длина завязок от 12 до 35 см.



Изделие используется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Завязки обеспечивают плотное прилегание шапочки-колпака к голове.

Бахилы

Парные изделия в виде чехлов или защитных чулков, надеваемых поверху на обувь или непосредственно на ноги. Фиксируются на ноге с помощью резинки или завязок. Бахилы могут быть высокие и низкие: высота от 5 до 70 см. Длина ступни от 30 до 80 см.



Изделия используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Бахилы надеваются непосредственно перед входом в операционный зал.

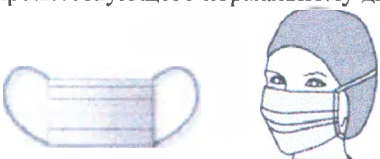
Рубашка для роженицы

Изделие Т-образного или прямоугольного раскроя. Характерная особенность изделия – свободный покрой в области живота.

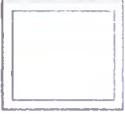
Рубашка прямоугольного раскроя завязывается на нетканый пояс, фиксируется кулиской или с помощью двойных завязок сзади. Рубашка Тобразного раскроя может быть без фиксации или с фиксацией на поясе с помощью пояса или кулиски. Рукав короткий. Размер изделия от 44 до 60. Длина изделия от 90 до 160 см. Ширина от 45 до 90 см.

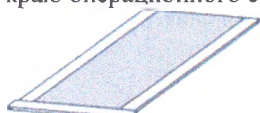


Используется в родильных отделениях для кратковременного одевания роженицы в родовом и послеродовом периоде. Способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и гигиеничности, снижает бактериальную нагрузку на новорожденного, создает эргономичные условия для акушерских манипуляций.

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Фартук</b></p>                                            | <p>Цельное полотно с отверстием/ отверстием из тесьмы для головы и 2-мя завязками по бокам длиной от 50 до 70 см. Надевается через голову и фиксируется за спиной повязками. Длина изделия от 50 до 170см, ширина изделия от 55 до 75см.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Изделие предназначено для общей защиты в любое время любой процедуры, где может быть загрязнение передней части тела хирурга и медперсонала. Обеспечивает надежную защиту от жидкостей.</p>                                                                                                                                         |
| <p><b>Нарукавники на резинке/ манжете</b></p>                   | <p>Изделия цилиндрической формы. Верхний край нарукавника сделан на резинке, на запястье – резинка или манжет. Длина изделия от 35 до 50 см. Ширина изделия в верхней части от 20 до 35 см. Длина манжеты у изделия на манжете – от 3 до 8см, ширина манжета от 5 до 9см.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Изделие обеспечивает надежную защиту хирурга и медперсонала от жидкостей, а также используется в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем.</p>                                                                                          |
| <p><b>Маска 3-слойная на резинке/ завязках</b></p>              | <p>Изделие прямоугольной формы с заушными петлями – двумя резинками по бокам. Длина от 130 до 180 мм, ширина от 70 до 100 мм. В верхней части изделия имеется встроенный гибкий носовой фиксатор. Фиксатор запаян в пластиковую полосу. Длина носового фиксатора от 30 до 120мм. Фиксируется на голове при помощи заушных петель или завязок. У изделия на завязках длина завязок от 20 до 40см. Изделие изготавливается из пористого нетканого материала, не препятствующего нормальному дыханию.</p>  | <p>Изделие, закрывающее нос и рот медицинского работника и защищающее его от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции или осмотра пациента, обеспечивает защиту от различных возможных патогенных микроорганизмов, вирусов, бактерий и загрязняющих веществ из воздуха.</p> |
| <p><b>Маска 3-х слойная на резинке/ завязках с фильтром</b></p> | <p>Изделие прямоугольной формы с заушными петлями – двумя резинками по бокам. Длина изделия от 130 до 180 мм, ширина от 70 до 100 мм. В верхней части изделия имеется встроенный гибкий носовой фиксатор. Фиксатор запаян в пластиковую полосу. Длина носового фиксатора от 30 до 120мм. Фиксируется изделие на голове при помощи заушных петель или завязок. У изделия на завязках длина завязок от 20 до 40см. Изделие выпускается со встроенным бумажным фильтром.</p>                               | <p>Изделие, закрывающее нос и рот медицинского работника и защищающее его от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции или осмотра пациента, обеспечивает защиту от различных возможных патогенных микроорганизмов, вирусов, бактерий и загрязняющих веществ из воздуха.</p> |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Маска 3-х слойная на резинке/ завязках с защитным экраном</p>                                      | <p>Изделие прямоугольной формы с заушными петлями – двумя резинками по бокам. Длина изделия от 130 до 180 мм, ширина - от 70 до 100 мм. В верхней части изделия имеется встроенный гибкий носовой фиксатор. Фиксатор запаян в пластиковую полосу. Длина носового фиксатора от 30 до 120мм. Маска выпускается со встроенным прозрачным защитным экраном для области глаз. Размеры экрана: длина от 140 до 210 мм, ширина 65 до 120 мм. Маска изготавливается из пористого нетканого материала, не препятствующего нормальному дыханию. Экран изготавливается из прозрачного пластика, не препятствующего нормальному зрению. Фиксируется на голове при помощи заушных петель или завязок. У изделия на завязках длина завязок от 20 до 40см.</p> | <p>Изделие, закрывающее нос, рот и глаза медицинского работника. Маска обеспечивает высокую степень защиты от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции или осмотра пациента, а экран обеспечивает защиту области глаз от попадания жидкостей во время операций.</p> |
| <p>Пододеяльник</p>                                                                                   | <p>Изделие прямоугольной формы с отверстием по боковой или нижней части. Швы наружные сварные или простроченные нитью. Длина от 150 до 240 см, ширина от 120 до 240 см.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Используется как защитное покрытие для одеяла, создающее физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения.</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>Заволочка</p>                                                                                      | <p>Изделие прямоугольной или квадратной формы с отверстием по нижней или боковой части и дополнительным загибом для фиксации подушки. Швы наружные сварные или простроченные нитью. Длина от 30 до 90 см, ширина от 30 до 90 см.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Используется как защитное покрытие, создающее физическую преграду, предохраняющую от перекрестного загрязнения.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Простыня с липким (адгезивным) краем<br/>Простыня с липким (адгезивным) краем<br/>операционная</p> | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 50 до 300 см, ширина от 50 до 250 см. По краю изделия – полоса для крепления -адгезивный/ липкий слой.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Изделие используется в различных операциях, где необходима защита тела пациента с фиксацией простыни на операционном поле или на коже пациента.</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>Салфетка/ Салфетка<br/>операционная</p>                                                            | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 10 до 150 см, ширина от 10 до 150 см.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Изделие используется для абсорбирования жидкостей в медицинских целях. Обычно используется для покрытия/очистки ран или царапин и впитывания жидкостей.</p>                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Салфетка с липким (адгезивным) краем/ Салфетка с липким (адгезивным) краем операционная</b></p>                          | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы.<br/>Длина изделия от 10 до 150 см, ширина от 10 до 150 см. По краю изделия – полоса для крепления- адгезивный/ липкий слой.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Изделие используется в различных операциях, где необходима защита участка тела пациента. Фиксацией салфетки на операционном поле на коже пациента.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Простыня/ Простыня операционная</b></p>                                                                                  | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы.<br/>Длина изделия от 50 до 250 см, ширина от 50 до 250 см. Изделие без адгезивного/ липкого края и без отверстий</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Изделие используется для изоляции места хирургического разреза или операционного поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации). Обеспечивает водонепроницаемость операционного поля.</p>                                                                                                                                |
| <p><b>Простыня с отверстием/Простыня с отверстием операционная</b></p>                                                         | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы.<br/>Длина изделия от 50 до 300 см, ширина от 50 до 250 см. Отверстие (отверстия) могут располагаться как по центру простыни, так и по краям простыни. Отверстие (отверстия) следующих форм и размеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- круглой формы диаметром от 3 до 40 см;</li> <li>- прямоугольной/квадратной формы длиной от 6 до 70 см, шириной от 5 до 70 см;</li> <li>- овальной формы длиной от 5 до 55 см, шириной от 3 до 45 см;</li> <li>- треугольное с длинами сторон от 7 до 40 см;</li> <li>- U-образное длиной от 5 до 120 см, шириной от 5 до 60 см и</li> <li>- U-образное с дополнительными круглыми или овальными или прямоугольными отверстиями в количестве от 1 до 3 шт.</li> </ul>  | <p>Изделие используется как покрытие пациента для изоляции места хирургического разреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации).</p>                                                                                                                                                              |
| <p><b>Простыня с впитывающей зоной операционная/ Простыня с липким (адгезивным) краем и впитывающей зоной операционная</b></p> | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 50 до 300 см, ширина изделия от 50 до 250 см. Впитывающая зона длиной от 7 до 120 см, шириной от 5 до 120 см, расположена по центру.<br/>У изделия с липким (адгезивным) слоем полосы с липким (адгезивным) слоем расположены по одной или нескольким сторонам изделия. Впитывающая зона расположена по центру изделия или рядом с липким (адгезивным) краем.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Применяется в качестве барьера между поверхностью стола и пациентом, чтобы сохранить стерильность. Используется в операциях с большим количеством выделяемых биологических жидкостей. Впитывающая зона предназначена для абсорбирования биологических жидкостей и тканей. Липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Впитывающая зона абсорбирует биологические жидкости.</p> |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Простыня с карманом/<br/>Простыня с карманом<br/>операционная/<br/>Простыня с карманом<br/>и отверстием<br/>операционная</p>                  | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы.</p> <p>Длина изделия от 50 до 300 см, ширина от 50 до 250 см. Карман у изделия прямоугольной или квадратной формы расположен по краю изделия. Длина кармана от 20 до 140 см, ширина от 20 до 90 см.</p> <p>Простыня с карманом может иметь отверстия следующих форм и размеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- круглой формы диаметром от 3 до 40 см;</li> <li>- прямоугольной/квадратной формы длиной от 6 до 70 см, шириной от 5 до 70 см;</li> <li>- овальной формы длиной от 5 до 55 см, шириной от 3 до 45 см;</li> <li>- треугольное с длинами сторон от 7 до 40 см;</li> <li>- U-образное длиной от 5 до 120 см, шириной от 5 до 60 см и</li> <li>- U-образное с дополнительными круглыми или овальными или прямоугольными отверстиями в количестве от 1 до 3 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>Изделие используется как покрытие на операционный стол. Применяется в качестве барьера между поверхностью стола и пациентом, чтобы сохранить стерильность. Карман предназначен для сбора биологических жидкостей и тканей. Изделие с отверстием используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации).</p> |
| <p>Простыня с<br/>отверстием и липким<br/>(адгезивным) краем/<br/>Простыня с<br/>отверстием и липким<br/>(адгезивным) краем<br/>операционная</p> | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы.</p> <p>Длина изделия от 50 до 300 см, ширина от 50 до 250 см. Отверстие (отверстия) могут располагаться как по центру простыни, так и краям простыни. Отверстие (отверстия) следующих форм и размеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- круглой формы диаметром от 3 до 40 см;</li> <li>- прямоугольной/квадратной формы длиной от 6 до 70 см, шириной от 5 до 70 см;</li> <li>- овальной формы длиной от 5 до 55 см, шириной от 3 до 45 см;</li> <li>- треугольное с длинами сторон от 7 до 40 см;</li> <li>- U-образное длиной от 5 до 120 см, шириной от 5 до 60 см.</li> <li>- U-образное с дополнительными круглыми или овальными или прямоугольными отверстиями в количестве от 1 до 3 шт.</li> </ul> <p>Варианты расположения липкого (адгезивного) края: - липкий (адгезивный) край вокруг отверстия,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по краю/краям простыни,</li> <li>- вокруг отверстия и по краю/краям простыни.</li> </ul>  | <p>Изделие используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или к операционному полю.</p>                                                                                        |
| <p>Покровитель/ чехол<br/>для<br/>операционного<br/>стола</p>                                                                                    | <p>Изделие прямоугольной или квадратной формы.</p> <p>Длина изделия от 50 до 300 см, ширина от 50 до 200 см. Имеет отвороты для крепления по краю операционного стола.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Используется для покрытия операционного стола, предотвращения его от загрязнения биологическими жидкостями.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Салфетка<br/>впитывающая/<br/>Пеленка<br/>впитывающая/<br/>Подкладка<br/>впитывающая</b></p> | <p>Изделия прямоугольной или квадратной формы. Длина от 40 до 120 см, ширина от 40 до 150 см. Длина подкладки впитывающей от 30 до 60 см, ширина от 80 до 400 мм. Изготовлены изделия из многослойного нетканого материала с абсорбирующим (впитывающим) внутренним слоем и пленочной основой.</p>  | <p>Используется в случаях, когда необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для защиты операционного поля участка тела пациента.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Чехол на<br/>инструментальный<br/>столик</b></p>                                             | <p>Изделие прямоугольной или квадратной формы. Длина изделия от 40 до 140 см, ширина от 40 до 150 см.</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Используется в качестве физического барьера предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала инструментального столика.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Наматрачник</b></p>                                                                          | <p>Изделие прямоугольной или квадратной формы. Крепится к матрасу с помощью резинки, расположенной по краям изделия. Швы наружные сварные или простроченные нитью. Длина изделия от 150 до 220 см, ширина от 50 до 160 см.</p>                                                                      | <p>Используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения пациента и кровяной поверхности. Утилизируется после каждого применения.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Презерватив для<br/>датчика</b></p>                                                          | <p>Длина изделия от 160 до 250 мм, диаметр изделия от 22 до 55 мм, толщина стенки изделия от 0,05 до 0,09 мм <math>\pm 1</math> мм.</p>                                                                                                                                                           | <p>Изделие предназначено для вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Используются врачом при проведении ультразвукового исследования у пациента.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Держатель для шнура</b></p>                                                                  | <p>Изделие прямоугольной формы в виде двухслойной ленты-липучки на адгезивной основе. Длина изделия от 10 до 30 см, ширина изделия от 2 до 5 см.</p>                                                                                                                                              | <p>Изделие предназначено для фиксации большинства трубок или трубообразных изделий любых типов (кабелей, шнуров) пациенту или хирургической простыне во время клинического вмешательства. Используется для прикрепления к коже пациента или простыни открытой стороной (верхней стороной), имеющей липкий (адгезивный) слой. Утилизируется после каждого применения.</p> |
| <p><b>Лента операционная</b></p>                                                                   | <p>Изделие прямоугольной формы в виде самоклеящейся ленты. Лента двухслойная с липким (адгезивным) слоем. Длина изделия от 5 до 90 см, ширина от 2 до 15 см.</p>                                                                                                                                  | <p>Изделие используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (в том числе на небольших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела. Для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Липкий (адгезивный) слой обеспечивает надежную фиксацию изделия.</p>                              |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>вязка</p> <p>леоперационная</p> <p>закрытия ран</p> | <p>Самоклеящаяся повязка прямоугольной или квадратной формы на нетканой или пленочной основе с впитывающей полоской/подушечкой или без нее. Длина изделия от 5 до 50 см, ширина от 4 до 50 см. Фиксирующий слой обеспечивает надежное крепление повязки с четырех сторон. Размеры впитывающего слоя от 3х3 до 5х40 см.</p>                                          | <p>Изделие накладывают поверх места хирургического надреза. Используется для защиты раны от загрязнений и заражений. Изделие с впитывающей полоской/подушечкой помогает заживлять рану, поглощая экссудаты в ранах с умеренным и большим количеством экссудата с минимальным размягчением раны.</p> <p>Повязку необходимо менять каждые 24 часа.</p> |
| <p>аслет</p> <p>идентификационный</p>                  | <p>Изделие прямоугольной формы. На одной его половине – крепеж и информационное окно, где указываются данные пациента (роженницы/ребенка), на другой половине – полоса отверстий (от 3 до 20 шт). В отверстие, соответствующее обхвату запястья пациента, вставляется крепеж и изделие фиксируется на руке пациента. Длина от 7 до 25 см ширина от 0,6 до 5см.</p>  | <p>Используется для идентификации пациента (роженницы/ребенка) с помощью необходимых данных.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>рчатки</p> <p>отровые/хирургичес</p>                | <p>Длина изделий от 18 до 60 см. Размер изделия от XXS до XXL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Изделия предназначены для проведения любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров.</p>                                                                                                                                                                                                                          |

имечание – Реальное исполнение изделий может отличаться от схематического.

**Требования к массе, размерам, внешнему виду изделий собственного производства**

Требования к массе, размерам, внешнему виду изделий собственного производства указаны в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изделий/масса нетканого материала, г. | Характеристика и норма                                       |                                                                |                                                                                            |                                             |                                             |                                                             |                                                     |                                                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                    | Длина изделия, см                                            | ширина изделия, см                                             | Длина защитной зоны, см                                                                    | ширина защитной зоны, см                    | Длина рукава, см                            | Длина защитной зоны рукава, см                              | Ширина рукава внизу, см                             | Длина завязок, см                                                   | Размер                                           |
| Длина от 50 до 350                                 | От 90 до 170<br>(90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170) | от 120 до 170<br>(120; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 170) | -                                                                                          | -                                           | от 45 до 75<br>(45; 50; 55; 60; 65; 70; 75) | -                                                           | от 12 до 25<br>(12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25) | от 35 до 95<br>(35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95) | От 44 до 60 (44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60) |
| Длина от 80 до 450                                 | От 90 до 170<br>(90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170) | от 120 до 170<br>(120; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 170) | от 70 до 165<br>(70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; | от 30 до 60<br>(30; 35; 40; 45; 50; 55; 60) | от 45 до 75<br>(45; 50; 55; 60; 65; 70; 75) | от 12 до 25<br>(12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25) | от 12 до 25<br>(12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25) | от 35 до 95<br>(35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95) | От 44 до 60 (44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60) |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                               | 150; 155;<br>160; 165                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Халат<br>хирургический/<br><br>от 60 до 420                                           | От 90 до<br>170<br>(90; 100;<br>110; 120;<br>130; 140;<br>150; 160;<br>170)                                                                                       | от 120 до<br>170<br>(120; 130;<br>135; 140;<br>145; 150;<br>155; 160;<br>170) |                                                                                                                                    |                                                                                                 | от 45 до 75<br>(45; 50; 55;<br>60; 65; 70;<br>75)                                             |                                                                                                                        | от 12 до 25<br>(12; 14; 15; 16;<br>18; 19; 20; 22;<br>25)                                                                                            | от 35 до 95<br>(35; 40; 45;<br>50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95)                              | От 40 до 60<br>(40; 45; 50; 55;<br>60; 65; 70;<br>75; 80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 128; 130;<br>135; 140; 145;<br>150; 155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185; 190;<br>195; 200; 205;<br>210; 215; 220;<br>225; 230; 235;<br>240; 245; 250;<br>255; 260; 265;<br>270; 275; 280;<br>285; 290; 295;<br>300; 305; 310;<br>315; 320; 325;<br>330; 335; 340;<br>345; 350; 355;<br>360; 365; 370;<br>375; 380; 385;<br>390; 395; 400;<br>405; 410; 415;<br>420; 425; 430;<br>435; 440; 445;<br>450; 455; 460;<br>465; 470; 475;<br>480; 485; 490;<br>495; 500; 505;<br>510; 515; 520;<br>525; 530; 535;<br>540; 545; 550;<br>555; 560; 565;<br>570; 575; 580;<br>585; 590; 595;<br>600; 605; 610;<br>615; 620; 625;<br>630; 635; 640;<br>645; 650; 655;<br>660; 665; 670;<br>675; 680; 685;<br>690; 695; 700;<br>705; 710; 715;<br>720; 725; 730;<br>735; 740; 745;<br>750; 755; 760;<br>765; 770; 775;<br>780; 785; 790;<br>795; 800; 805;<br>810; 815; 820;<br>825; 830; 835;<br>840; 845; 850;<br>855; 860; 865;<br>870; 875; 880;<br>885; 890; 895;<br>900; 905; 910;<br>915; 920; 925;<br>930; 935; 940;<br>945; 950; 955;<br>960; 965; 970;<br>975; 980; 985;<br>990; 995; 1000) |  |
| Брюки/<br>от 40 до 330                                                                | Длина изделия, см<br><br>от 80 до 108<br>(80; 83; 85; 90; 95; 100; 103; 105;<br>108)                                                                              |                                                                               | Ширина изделия, см<br><br>от 90 до 128<br>(90; 95; 100; 105; 110; 115;<br>120; 125; 128)                                           |                                                                                                 | Ширина брюк внизу, см<br><br>от 15 до 27<br>(15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25;<br>27)           |                                                                                                                        | Размер<br><br>От 44 до 60<br>(44; 46; 48; 50; 52;<br>56; 58; 60)                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Брюки<br>операционные/<br>от 20 до 200                                                | От 20 до 60 см + 2см<br>(20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60)                                                                                                      |                                                                               | от 90 до 128<br>(90; 95; 100; 105; 110; 115;<br>120; 125; 128)                                                                     |                                                                                                 | от 25 до 60<br>(25; 28; 30; 35; 40; 45; 50; 55;<br>60)                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Рубашка/<br>куртка/<br><br>от 30 до 300                                               | Длина изделия, см<br><br>от 60 до 95<br>(60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95)                                                                                      |                                                                               | Ширина изделия, см<br><br>от 40 до 65<br>(40; 43; 45; 48; 50; 55; 58;<br>60; 65)                                                   |                                                                                                 | Длина длинного<br>рукава, см<br>от 50 до 65<br>(50; 55; 60; 65)                               | Длина короткого<br>рукава, см<br>от 15 до 25<br>(15; 18; 20; 25)                                                       | Размер<br><br>От 44 до 60<br>(44; 46; 48; 50; 52;<br>56; 58; 60)                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Шапочка-<br>берет/<br><br>От 1,8 до 10                                                | Диаметр, см<br><br>от 45 до 65<br>(45; 46; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56;<br>58; 60; 62; 63; 65)                                                                 |                                                                               | Длина при растянутой резинке, см<br><br>от 33 до 45<br>(33; 35; 37; 40; 43; 45)                                                    |                                                                                                 | Длина в сложенном виде, см<br><br>от 15 до 30<br>(15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30)         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Шапочка-<br>колпак/<br>От 2,0 до 10                                                   | Диаметр, см<br>от 45 до 65<br>(45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 62; 63;<br>65)                                                         |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                 | Высота, см<br>от 12 до 20<br>(12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20)                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Шапочка-<br>колпак<br>на завязках/<br>От 2,5 до 15                                    | Диаметр, см<br>от 45 до 65<br>(45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56;<br>57; 58; 60; 62; 63; 65)                                                         |                                                                               | Высота, см<br>от 12 до 20<br>(12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20)                                                                  |                                                                                                 | Длина завязок, см<br>от 12 до 35<br>(12; 15; 18; 22; 25; 26; 28; 30; 35)                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Бахилы /<br>От 1 до 130                                                               | Высота изделия, см<br>от 5 до 70<br>(5; 7; 10; 13; 14; 15; 17; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40;<br>42; 44; 46; 48; 50; 52; 55; 57; 60; 62; 65; 70)     |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                 | Длина ступни, см<br>от 30 до 80<br>(30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80)                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Фартук/<br>От 1 до 650                                                                | Длина изделия, см<br>от 50 до 170 см<br>(50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100;<br>105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145;<br>150; 155; 160; 165; 170) |                                                                               | Ширина изделия, см<br>от 55 до 75 см<br>(55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64;<br>65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74;<br>75) |                                                                                                 | Длина завязок, см<br>от 20 до 70 см<br>(20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65;<br>70)        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Нарукавники<br>на резинке /<br>От 1 до 250                                            | Длина изделия, см<br><br>от 35 до 50<br>(35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43;<br>44; 45; 46; 47; 48; 49; 50)                                                       |                                                                               | Ширина изделия в<br>верхней части, см<br>от 20 до 35<br>(20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;<br>27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;<br>34; 35)     |                                                                                                 | Длина манжета, см<br>-                                                                        | Ширина манжета, см<br>-                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Нарукавники<br>на манжете/<br>От 1,5 до 320                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                 | от 3 до 8<br>(3; 4; 5; 6; 7; 8)                                                               | от 5 до 9<br>(5; 6; 7; 8; 9)                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Маска 3-<br>слойная на<br>резинке/завязка<br>х<br>От 1,8 до 15                        | Длина, см<br><br>от 13 до 18<br>(13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5;<br>16; 16,5; 17; 17,5; 18)                                                                         |                                                                               | Ширина, см<br><br>от 7 до 10<br>(7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;<br>10)                                                                    |                                                                                                 | Длина завязок, см<br>от 20 до 40<br>(20; 22; 24; 26; 28;<br>30; 32; 34; 36; 38; 40)           | Длина резинки в<br>растянутом<br>состоянии, см<br>от 6 до 18<br>(6; 8; 10; 12; 14; 16;<br>18)                          | Длина носового<br>фиксатора, см<br>от 3 до 12<br>(3; 4; 5; 6; 7; 7,5; 8;<br>9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5;<br>12)                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Маска 3-<br>слойная на<br>резинке/завязка<br>х с защитным<br>экраном/<br>От 6,5 до 32 | Длина, см<br><br>от 13 до 18<br>(13; 13,5; 14; 14,5; 15;<br>15,5; 16; 16,5; 17; 17,5;<br>18)                                                                      |                                                                               | Ширина, см<br><br>от 7 до 10<br>(7; 7,5; 8;<br>8,5; 9;<br>9,5; 10)                                                                 | Длина<br>завязок,<br>см<br>от 20 до 40<br>(20; 22; 24;<br>26; 28; 30;<br>32; 34; 36;<br>38; 40) | Длина резинки в<br>растянутом<br>состоянии, см<br>от 6 до 18<br>(6; 8; 10; 12; 14;<br>16; 18) | Длина носового<br>фиксатора, см<br>от 3 до 12<br>(3; 4; 5; 6; 7;<br>7,5; 8; 8,5; 9;<br>9,5; 10; 10,5; 11;<br>11,5; 12) | Длина<br>экрана<br>/фильтра,<br>см<br>от 14 до 21<br>(14; 14,5;<br>15; 15,5;<br>16; 16,5;<br>17; 17,5;<br>18; 18,5;<br>19; 19,5;<br>20; 20,5;<br>21) | Ширина экр<br>/фильтра, см<br>от 65 до 120<br>(65; 70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110; 115;<br>120) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Маска 3-<br>слойная на<br>резинке/завязка<br>х с фильтром/                            | от 13 до 18<br>(13; 13,5; 14; 14,5; 15;<br>15,5; 16; 16,5; 17; 17,5;<br>18)                                                                                       |                                                                               | от 7 до 10<br>(7; 7,5; 8;<br>8,5; 9;<br>9,5; 10)                                                                                   | от 20 до 40<br>(20; 22; 24;<br>26; 28; 30;<br>32; 34; 36;<br>38; 40)                            | от 6 до 18<br>(6; 8; 10; 12; 14;<br>16; 18)                                                   | от 3 до 12<br>(3; 4; 5; 6; 7;<br>7,5; 8; 8,5; 9;<br>9,5; 10; 10,5; 11;<br>11,5; 12)                                    | от 13 до 18<br>(13; 13,5;<br>14; 14,5;<br>15; 15,5;                                                                                                  | от 70 до 100<br>(70; 75; 80; 85;<br>90; 95; 100)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 до 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | (7; 7,5; 8;<br>8,5; 9;<br>9,5; 10)                                                                                                   | 32; 34; 36;<br>38; 40)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | 9,5; 10; 10,5; 11;<br>11,5; 12)                                                                                                                                                                                                              | 16; 16,5;<br>17; 17,5;<br>18)                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                         | Ширина<br>ладони, см                                                                                                                 | Толщина, мм +0,01                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | исполнение                                                                                                                                                                                 | Размер                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | средний палец                                                                                                                                                                                                                                            | Ладонь (центр)                                                                                                                                                                                                                     | манжета                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| ерчатки<br>отровые/<br>ургические/<br>4 до 21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>от 18 до 60</u><br>(18; 18,5; 19;<br>19,5; 20; 20,5;<br>21; 21,5; 22;<br>22,5; 23; 23,5;<br>24; 24,5; 25;<br>26; 27; 28; 28,5;<br>29; 29,5; 30;<br>30,5; 31; 32; 34;<br>35; 36; 38; 40;<br>42; 44; 46; 48;<br>50; 52; 54; 56;<br>58; 60)       | <u>от 6 до 14</u><br>(6-6,9;<br>6,9-7,7;<br>7,7-8,5;<br>8,5-10,4;<br>10,4-11,7;<br>11,7-13;<br>13-14)                                | <u>от 0,11 до 0,42</u><br>(0,11; 0,12; 0,13;<br>0,14; 0,15; 0,16;<br>0,17; 0,18; 0,19;<br>0,20; 0,21; 0,22;<br>0,23; 0,24; 0,25;<br>0,26; 0,27; 0,28;<br>0,29; 0,30; 0,31;<br>0,32; 0,33; 0,34;<br>0,35; 0,36; 0,37;<br>0,38; 0,39; 0,40;<br>0,41; 0,42) | <u>от 0,10 до 0,38</u><br>(0,10; 0,11; 0,12;<br>0,13; 0,14; 0,15;<br>0,16; 0,17; 0,18;<br>0,19; 0,2; 0,21;<br>0,22; 0,23; 0,24;<br>0,25; 0,26; 0,27;<br>0,28; 0,29; 0,30;<br>0,31; 0,32; 0,33;<br>0,34; 0,35; 0,36;<br>0,37; 0,38) | <u>от 0,11 до 0,40</u><br>(0,11; 0,12;<br>0,13; 0,14; 0,15;<br>0,16; 0,17; 0,18;<br>0,19; 0,20; 0,21;<br>0,22; 0,23; 0,24;<br>0,25; 0,26; 0,27;<br>0,28; 0,29; 0,30;<br>0,31; 0,32; 0,33;<br>0,34; 0,35; 0,36;<br>0,37; 0,38; 0,39;<br>0,40) | гладкие/тексту-<br>рированные/м-<br>икротекстурир-<br>ованные<br>(микрошерохо-<br>ватое<br>нанесение);<br>опудренные<br>(абсорбируем-<br>ый<br>кукурузный<br>крахмал USP)<br>/неопудренные | XXS<br>(меньше 5);<br>XS (5-6); S<br>(6-7); M (7-<br>8); L (8-9);<br>XL (9-10);<br>XXL<br>(больше 10) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ерзватив<br>я датчика<br>1,2 до 2,1                                                                                                                                                                                                               | Длина, см<br><u>от 16 до 25</u><br>(16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5;<br>21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25) |                                                                                                                                                                                                                                                          | Диаметр, см<br><u>от 2,2 до 5,5</u><br>(2,2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,3;<br>3,4; 3,6; 3,8; 4; 4,2; 4,4; 4,6; 4,8; 5;<br>5,3; 5,5)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | Толщина, мм, ± 1<br><u>от 0,05 до 0,09</u><br>(0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09)                                                                                                               |                                                                                                       |
| одкладка<br>итывающая<br>20 до 75                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Полное<br>влагопоглощение,<br>г, не менее                                                                                                                                                                                                    | Обратная<br>сорбция, г, не<br>более                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>от 30 до 60</u><br>(30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40;<br>42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60)                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | <u>от 8 до 40</u><br>(8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;<br>21; 22; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 26; 27; 28; 28,5;<br>29; 29,5; 30; 30,5; 31; 32; 34; 35; 36; 38; 40)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| лфетка<br>итывающая<br>35 до 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>от 40 до 120</u><br>(40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85;<br>90; 95; 100; 105; 110; 115; 120)                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | <u>от 40 до 150</u><br>(40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;<br>100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140;<br>145; 150)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | 300                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| еленка<br>итывающая<br>48 до 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>от 400 до 1200</u><br>(400; 450; 500; 550; 600; 650; 700;<br>750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050;<br>1100; 1150; 1200)                                                                                                                         |                                                                                                                                      | <u>от 40 до 150</u><br>(40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;<br>100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140;<br>145; 150)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | 300                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| тол на<br>струменталь-<br>ый столик<br>70 до 890                                                                                                                                                                                                                                                                                | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>от 40 до 140</u><br>(40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105;<br>110; 115; 120; 125; 130; 135; 140)                                                                                                                           |                                                                                                                                      | <u>от 40 до 150</u><br>(40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120;<br>125; 130; 135; 140; 145; 150)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| овязка<br>слеоперацио-<br>нная для<br>крытия ран<br>0,4 до 85                                                                                                                                                                                                                                                                   | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Размеры впитывающего слоя, см                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>от 5 до 50</u><br>(5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22;<br>24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40;<br>42; 44; 45; 46; 48; 50)                                                                                                    |                                                                                                                                      | <u>от 4 до 50</u><br>(4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22;<br>24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42;<br>44; 45; 46; 48; 50)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | от 3x3 до 5x40 см                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| ента<br>перационная<br>0,19 до 55                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>от 5 до 90 см</u><br>(5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36;<br>38; 40; 42; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 54; 55; 56; 58; 60; 62; 64; 65; 66; 68; 70; 72;<br>74; 75; 76; 78; 80; 82; 84; 85; 86; 88; 90) |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | <u>от 2 до 15</u><br>(2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| раслет<br>дентификацио-<br>нный<br>0,1 до 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>от 7 до 25</u><br>(7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | <u>от 0,6 до 5</u><br>(0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| Рубанка<br>для роженницы<br>0,52 до 125                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Размер                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>от 90 до 160</u><br>(90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140;<br>145; 150; 155; 160; 165; 170)                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | <u>от 45 до 90</u><br>(45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | <u>От 44 до 60</u><br>(44; 46; 48; 50; 52; 54; 56;<br>58; 60)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| Примечания*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 1 Масса одного изделия зависит от линейных размеров данного изделия, вида и поверхностной плотности материалов, которые были использованы производителями при его производстве.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 2 Изделия по цвету могут быть белыми, цветными однотонными или по согласованию с потребителем допускаются изделия с рисунком, узором, надписью. Марки красителей применяемые на производстве при окрашивании тканей: <b>MP67245C MB</b> – светло-голубой, <b>04SAM071</b> – зеленый краситель, <b>CC60332LD Blue</b> – голубой. |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 3 Запах – соответствует данному виду материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |

5 Требования к материалам, используемых для изготовления изделий собственного производства, указаны в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование<br>Изделий/масса одного<br>изделия, г      | Материал                                                                                                                               | Плотность,<br>г/кв.м, (±10%)  | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                         | Примерные марки используемых<br>материалов                                                                                             |                               | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                                 | Внешний вид                                                                                                                                                                                               |       |
| Пододеяльник/<br>От 13 до 1100                          | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                        | От 150 до 240<br><br>(150; 160; 170;<br>180; 190; 200;<br>210; 220; 230;<br>240)                                                                                                                                                                                                             | От 120<br>До 240<br>(120; 130;<br>140; 150;<br>160; 170;<br>180; 190;<br>200; 210;<br>220; 230;<br>240)                                                                                                                                                    | Изделие прямоуголь<br>ной формы с отверстием<br>боковой или ниж<br>ней части. Швы наруж<br>ные сварные<br>простроченные нитью.                                                                            |       |
|                                                         | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     | 29-80                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
| Наволочка/<br>От 1,3 до 150                             | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                        | От 30 до 90<br>(30; 35; 40; 45;<br>50; 55; 60; 65; 70;<br>75; 80; 85; 90)                                                                                                                                                                                                                    | От 30 до 90<br>(30; 35; 40;<br>45; 50; 55;<br>60; 65; 70;<br>75; 80; 85;<br>90)                                                                                                                                                                            | Изделие прямоуголь<br>ной или квадратной форм<br>ы с отверстием по ниж<br>ней боковой части<br>дополнительным загиб<br>ом для фиксации подуш<br>ки. Швы наружные свар<br>ные или прострочен<br>ные нитью. |       |
|                                                         | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс; Фибрелла; Акваспан                                                                                                           | 29-80                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
| Простыня<br>От 2 до 600                                 | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                        | От 50 до 250<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80; 85; 90;<br>95; 100; 105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135; 140;<br>145; 150; 155;<br>160; 165; 170;<br>175; 180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210; 215;<br>220; 225; 230;<br>235; 240; 245;<br>250)                                      | От 50 до 250<br>(50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160; 165;<br>170; 175; 180;<br>185; 190; 195;<br>200; 205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235; 240;<br>245; 250) | Изделие прямоуголь<br>ной или квадратной форм                                                                                                                                                             |       |
|                                                         | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     | 29-80                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Простыня<br>операционная/<br>От 3,5 до 650                                                                                             | 100% целлюлоза                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | 20-60 |
|                                                         |                                                                                                                                        | 100% Целлюлоза ламинированная |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
| Простыня с липким<br>(адгезивным) краем/<br>От 3 до 750 | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                        | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245; 250;<br>260; 270;<br>280; 290; 300) | От 50 до 250<br>(50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160; 165;<br>170; 175; 180;<br>185; 190; 195;<br>200; 205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235; 240;<br>245; 250) | Изделие прямоуголь<br>ной или квадратной форм<br>ы. По краю изделия –<br>полоса для крепления<br>(адгезивный/липкий<br>слой)                                                                              |       |
|                                                         | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     | 29-80                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                         | Простыня с липким<br>(адгезивным) краем<br>операционная/<br>От 4 до 950                                                                | 100% Целлюлоза                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | 20-60 |
|                                                         |                                                                                                                                        | 100% Целлюлоза ламинированная |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
| Простыня с карманом/<br>От 42 до 140                    | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                        | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135;                                                                                                                                                                              | От 50 до 250<br>(50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;                                                                                                                                            | Изделие прямоуголь<br>ной или квадратной фор<br>мы. Карман прямоуголь<br>ной или квадратной фор<br>мы расположен по кра<br>ям изделия                                                                     |       |
|                                                         | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |

| Наименование изделий/масса одного изделия, г                  | Материал                                                                                                                               |                                   | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Примерные марки используемых материалов                                                                                                | Плотность, г/кв.м. ( $\pm 10\%$ ) | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                                                   | Внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Простыня с карманом<br>серийная/<br>4,3 до 1550               | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     | 29-80                             | 140; 145; 150;<br>155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245; 250;<br>260; 270;<br>280; 290; 300)                                                                                                                    | 140; 145; 150;<br>155; 160; 165;<br>170; 175; 180;<br>185; 190; 195;<br>200; 205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235; 240;<br>245; 250)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Простыня с карманом<br>серийная/<br>4,3 до 1550               | 100% Целлюлоза ламинированная                                                                                                          | 20-60                             | Длина кармана<br>От 20 до 140<br>(20; 25; 30; 35;<br>40; 45; 50; 55; 60;<br>65; 70; 75; 80; 85;<br>90; 95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;<br>140)                                                                                                                             | Ширина<br>кармана<br>От 20 до 90<br>(20; 25; 30;<br>35; 40; 45;<br>50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Простыня с отверстием/<br>серийная/<br>2 до 680               | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                            | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245; 250;<br>260; 270;<br>280; 290; 300) | От 50 до 250<br>(50; 55;<br>60; 65; 70;<br>75; 80; 85;<br>90; 95;<br>100; 105;<br>110; 115;<br>120; 125;<br>130; 135;<br>140; 145;<br>150; 155;<br>160; 165;<br>170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195;<br>200; 205;<br>210; 215;<br>220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245;<br>250) | Изделие прямоугольной или квадратной формы. Отверстие (отверстия) располагаются как по центру простыни, так и по краям простыни. Для изделий с карманом: карман прямоугольной или квадратной формы расположен по краю изделия. Для изделий с липким (адгезивным) краем: полоса для крепления (адгезивный/липкий слой) расположена по краю изделия. Отверстие (отверстия) следующих форм и размеров:<br>- круглой формы диаметром от 3 до 40 см с шагом 5,0 мм;                                   |
|                                                               | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Простыня с отверстием/<br>серийная/<br>3,5 до 1120            | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный | 29-80                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | 100% целлюлоза                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Простыня с отверстием/<br>серийная/<br>3,5 до 1120            | 100% Целлюлоза ламинированная                                                                                                          | 20-60                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Простыня с карманом и<br>отверстием<br>серийная/<br>4 до 1380 | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                            | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245; 250;<br>260; 270;<br>280; 290; 300) | От 50 до 250<br>(50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160; 165;<br>170; 175; 180;<br>185; 190; 195;<br>200; 205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235; 240;<br>245; 250)                   | прямоугольной/квадратной формы длиной от 6 до 70 см (с шагом в 5,0 мм), шириной от 5 до 70 см (с шагом в 5,0 мм);<br>- овальной формы длиной от 5 до 55 см (с шагом в 5,0 мм), шириной от 3 до 45 см (с шагом в 5,0 мм);<br>- треугольное с длинами сторон от 7 до 40 см (с шагом в 5,0 мм);<br>- U-образное длиной от 5 до 120 см (с шагом в 5,0 мм), шириной от 5 до 60 см (с шагом в 5,0 мм);<br>- U-образное с дополнительными круглыми или овальными отверстиями в количестве от 1 до 3 шт. |
|                                                               | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Простыня с карманом и<br>отверстием<br>серийная/<br>4 до 1380 | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный | 29-80                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | 100% Целлюлоза ламинированная                                                                                                          |                                   | Длина кармана<br>От 20 до 140<br>(20; 25;<br>30; 35; 40; 45; 50;<br>55; 60; 65; 70; 75;<br>80; 85; 90; 95;<br>100; 105; 110;                                                                                                                                                                 | Ширина<br>кармана<br>От 20 до 90<br>(20; 25; 30;<br>35; 40; 45;<br>50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Наименование<br>Изделий/масса одного<br>изделия, г                                     | Материал                                                                                                                               | Плотность,<br>г/кв.м, (±10%) | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Примерные марки используемых<br>материалов                                                                                             |                              | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ширина, см                                                                                                                                                                                                                                                 | Внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                                                                                                                                        |                              | 115; 120; 125;<br>130; 135; 140)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Простыня с отверстием<br>и липким (адгезивным)<br>краем операционная/<br>От 3,7 до 840 | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                       | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245; 250;<br>260; 270;<br>280;<br>290; 300) | От 50 до 250<br>(50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160; 165;<br>170; 175; 180;<br>185; 190; 195;<br>200; 205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235; 240;<br>245; 250) |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный | 29-80                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | 100% целлюлоза                                                                                                                         | 20-60                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | 100% Целлюлоза ламинированная                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Простыня с<br>впитывающей зоной<br>операционная/<br>От 3,5 до 930                      | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                       | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65;<br>70; 75; 80;<br>85; 90; 95; 100;<br>105; 110;<br>115; 120; 125;<br>130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160;<br>165; 170; 175;<br>180; 185;<br>190; 195; 200;<br>205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235;<br>240; 245; 250;<br>260; 270;<br>280; 290; 300)    | От 50 до 250<br>(50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115; 120;<br>125; 130; 135;<br>140; 145; 150;<br>155; 160; 165;<br>170; 175; 180;<br>185; 190; 195;<br>200; 205; 210;<br>215; 220; 225;<br>230; 235; 240;<br>245; 250) | Изделие прямоугольн<br>или квадратной форм<br>По одной или нескольк<br>сторонам изделие<br>имеются полосы<br>адгезивными свойства<br>(липкие полосы).<br>центру изделия или ряд<br>с адгезивным кра<br>расположена<br>впитывающая зо<br>прямоугольной формы. |
|                                                                                        | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс;<br>Сонтара; Акваспан                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Спанлейс ламинированный;<br>Фибрелла ламинированная; Новитекс<br>ламинированный; Сонтара<br>ламинированный; Акваспан<br>ламинированный | 29-80                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | 100% Целлюлоза ламинированная                                                                                                          | 20-60                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ширина<br>впитывающе<br>й зоны                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        |                                                                                                                                        |                              | Длина<br>впитывающей<br>зоны<br>От 7 до 120<br>(7; 8; 9; 10; 12;<br>14; 15; 16; 18; 20;<br>22; 24; 25; 26; 28;<br>30; 32; 34; 35; 36;<br>38; 40; 42; 44; 45;<br>46; 48; 50; 55; 60;<br>65; 70; 75; 80; 85;<br>90; 95; 100; 105;<br>110; 115; 120)                                               | От 5 до 120<br>(5; 6; 7; 8; 9;<br>10; 12; 14;<br>15; 16; 18;<br>20; 22; 24;<br>25; 26; 28;<br>30; 32; 34;<br>35; 36; 38;<br>40; 42; 44;<br>45; 46; 48;<br>50; 55; 60;<br>65; 70; 75;<br>80; 85; 90;<br>95; 100; 105;<br>110; 115;<br>120)                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Салфетка/<br>От 0,1 до 210                                                             | Спанбонд; СС; СМС; СММС;<br>Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                                | 10-150                       | От 10 до 150<br>(10; 12; 14; 15;<br>16; 18; 20; 22; 24;<br>25; 26; 28; 30; 32;<br>34; 35; 36; 38; 40;<br>42; 44; 45; 46; 48;<br>50; 55; 60; 65; 70;<br>75; 80; 85; 90; 95;<br>100; 105; 110;                                                                                                    | От 10 до 150<br>(10; 12; 14;<br>15; 16; 18;<br>20; 22; 24;<br>25; 26; 28;<br>30; 32; 34;<br>35; 36; 38;<br>40; 42; 44;<br>45; 46; 48;                                                                                                                      | Изделие прямоугольн<br>или квадратной форм<br>Без адгезивного/лип<br>края                                                                                                                                                                                    |
| Салфетка<br>операционная/                                                              | Спанбонд ламинированный; СС<br>ламинированный; Спанбел<br>ламинированный; Термобонд<br>ламинированный; айрлейд<br>ламинированный;      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Наименование изделия/масса одного изделия, г          | Материал                                                                                                                   | Плотность, г/кв.м. (±10%) | Характеристика                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Примерные марки используемых материалов                                                                                    |                           | Длина, см                                                                                                                                                                                                                                    | Ширина, см                                                                                                                                                        | Внешний вид                                                                                                                                                     |
| От 0,15 до 340                                        | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс; Сонтара; Акваспан                                                                            | 29-80                     | 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150)                                                                                                                                                                                                      | 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150)                                                                    | Изделие прямоугольной или квадратной формы с адгезивным/липким краем                                                                                            |
| Салфетка с липким (адгезивным) краем                  | Спанлейс ламинированный; Фибрелла ламинированная; Новитекс ламинированный; Сонтара ламинированный; Акваспан ламинированный |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Операционная/ От 0,16 до 380                          | 100% целлюлоза                                                                                                             | 20-60                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Салфетка с липким (адгезивным) краем/ От 0,16 до 380  | 100% Целлюлоза ламинированная                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Покрывало/чехол для операционного стола / От 2 до 950 | Спанбонд; СС; СМС; СММС; Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                       | 10-150                    | От 50 до 300<br>(50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 260; 270; 280; 290; 300) | От 50 до 200<br>(50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200) | Изделие прямоугольной или квадратной формы.                                                                                                                     |
|                                                       | Спанбонд ламинированный; СС ламинированный; Спанбел ламинированный; Термобонд ламинированный; айрлейд ламинированный;      |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс; Сонтара; Акваспан                                                                            | 29-80                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Спанлейс ламинированный; Фибрелла ламинированная; Новитекс ламинированный; Сонтара ламинированный; Акваспан ламинированный |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Матрацик/ От 6 до 670                                 | Спанбонд; СС; СМС; СММС; Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                       | 10-150                    | От 150 до 220<br>(150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220)                                                                                                                                                                                    | От 50 до 160<br>(50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160)                                         | Изделие прямоугольной или квадратной формы. Крепится с матрасу с помощью резинки, расположенной по краям изделия. Швы наружные сварные или простроченные нитью. |
|                                                       | Спанбонд ламинированный; СС ламинированный; Спанбел ламинированный; Термобонд ламинированный; айрлейд ламинированный;      |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс; Сонтара; Акваспан                                                                            | 29-80                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Спанлейс ламинированный; Фибрелла ламинированная; Новитекс ламинированный; Сонтара ламинированный; Акваспан ламинированный |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Держатель для шнура/до 250                            | Спанбонд; СС; СМС; СММС; Спанбел; Термобонд; айрлейд                                                                       | 10-150                    | От 10 до 30 см<br>(10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30)                                                                                                                                                                       | От 2 до 5<br>(2; 3; 4; 5)                                                                                                                                         | Изделие прямоугольной формы в виде двухслойной ленты-липучки на адгезивной основе для фиксации шнуров, трубок и кабелей                                         |
|                                                       | Спанбонд ламинированный; СС ламинированный; Спанбел ламинированный; Термобонд ламинированный; айрлейд ламинированный;      |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Спанлейс; Фибрелла; Новитекс; Сонтара; Акваспан                                                                            | 29-80                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Спанлейс ламинированный; Фибрелла ламинированная; Новитекс ламинированный; Сонтара ламинированный; Акваспан ламинированный |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |

**Примечания\***

1 Масса одного изделия зависит от линейных размеров этого изделия, от вида и поверхностной плотности используемого при его изготовлении тканого материала.

2 Изделия по цвету могут быть белыми или цветными однотонными. Марки красителей применяемые на производстве при окрашивании тканей: MP67245C MB – светло-голубой, 04SAM071 – зеленый краситель, CC60332LD Blue – голубой.

3 По согласованию с потребителем допускается изготавливать изделия с рисунком, узором, надписью. Марки красителей применяемые на производстве при окрашивании тканей: MP67245C MB – светло-голубой, 04SAM071 – зеленый краситель, CC60332LD Blue – голубой.

4 Запах – соответствует данному виду материала.

6 Изделия собственного производства (кроме изделий из бумаги) по своему исполнению должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6

| Характеристика                               | Единица измерения         | Требование (стандартное исполнение) |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                              |                           | Критическая зона изделия            | Менее критическая зона изделия |
| Микробная проницаемость в сухом состоянии    | Lg (CFU)                  | Не требуется                        | ≤ 2 <sup>а), в)</sup>          |
| Микробная проницаемость во влажном состоянии | BI                        | >2,8 <sup>б)</sup>                  | Не требуется                   |
| Чистота микробная                            | Lg (CFU/дм <sup>2</sup> ) | <2 <sup>в)</sup>                    | <2 <sup>в)</sup>               |
| Чистота в части инородных частиц             | IPM                       | < 3,5                               | < 3,5                          |
| Пылевороотделение                            | Lg                        | < 4,0                               | < 4,0                          |
| Водоупорность                                | H <sub>2</sub> O          | ≥30                                 | ≥10                            |
| Прочность на разрыв в сухом состоянии        | кПа                       | ≥40                                 | ≥40                            |
| Прочность на разрыв во влажном состоянии     | кПа                       | ≥40                                 | Не требуется                   |
| Прочность на растяжение в сухом состоянии    | H                         | >15                                 | >15                            |
| Прочность на растяжение во влажном состоянии | H                         | ≥15                                 | Не требуется                   |

Примечания

а) Условия испытаний: концентрация пробы 10<sup>8</sup> CFU/r talc. и время вибрации 30 мин.

б) Минимальное значимое различие (LSD) для BI, при оценивании, составляет 0,98 при 95%-ном уровне значимости. Данное различие является минимальным различием, необходимым для того, чтобы два материала считались разными. Таким образом, материалы, имеющие различие до 0,98, вероятно, не являются различными; материалы, имеющие различие свыше 0,98, вероятно, являются различными (95 %-ый уровень значимости означает, что наблюдатель (эксперт) должен быть прав 19 раз из 20 для того, чтобы принять эти альтернативы)

в) В соответствии с ГОСТ EN 13795 Lg CFU ≤ 2 означает максимально 300

г) BI = 6,0 в соответствии с ГОСТ EN 13795 означает: проникновение отсутствует. = 6,0 является максимально достижимым значением.

Комплекты серии «ОХ»

Комплект «ОХ № 1»

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также с тканями пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так и персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Предполагается, что перед применением данного комплекта медработник уже надел костюм. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

Комплект «ОХ № 2»

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Халат с защитой применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также с тканями пациента во время проведения операций. Халат с защитой используется медицинскими работниками операционного зала при проведении операций, необходима высокая степень защиты от проникновения различных жидкостей: органических выделений и жидкостей, тканей пациента. Шапочка-колпак применяется как покрытие голо-

торое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Предполагается, что перед применением данного комплекта медработник уже надел костюм. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 3»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также выделениями пациента во время проведения операций. Халат с защитой используется медицинскими работниками операционного зала при проведении операций, где необходима высокая степень защиты от проникновения различных жидкостей: органических выделений и жидкостей, тканей пациента. Шапочка-колпак на завязках применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Завязки обеспечивают плотное прилегание шапочки-колпака к голове. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Предполагается, что перед применением данного комплекта медработник уже надел костюм. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 4»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также выделениями пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак на завязках применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Завязки обеспечивают плотное прилегание шапочки-колпака к голове. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Предполагается, что перед применением данного комплекта медработник уже надел костюм. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 5»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает

непосредственно перед входом в операционный зал. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканей пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов во время хирургической операции. Предполагается, что перед применением данного комплекта медработник уже надел костюм. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 6»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканей пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов во время хирургической операции. Фартук применяется медицинскими работниками для общей защиты во время любой процедуры, где может быть риск загрязнения передней части тела хирурга и медперсонала. Обеспечивает надежную защиту от жидкостей. Нарукавники применяются медицинскими работниками для обеспечения надежной защиты рук хирурга и медперсонала от жидкостей, а также используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом, операционным полем. Рубашка/куртка предназначена для использования в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Рубашка/куртка используется для контролирования распространения микробов по воздуху от кожи, для защиты верхней части тела от инфицирования различными жидкостями. Смена рубашки/куртки производится после каждой выполненной операции. Бронепокрытия используются хирургами и медперсоналом операционного зала при проведении операции для защиты нижней части тела от контаминации различными жидкостями: органическими выделениями, тканями пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 7»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканей пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие

оловы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и крошечных частиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Фартук применяется медицинскими работниками для общей защиты во время любой процедуры, где может быть риск загрязнения передней части тела хирурга и медперсонала. Обеспечивает надежную защиту от жидкостей. Комплект применяется многократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции. Предполагается, что перед применением данного комплекта медработник надевает костюм.

#### **Комплект «ОХ № 8»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и крошечных частиц. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Рубашка/куртка используется для контроля распространения микробов по воздуху от кожи, для защиты верхней части тела от инфицирования различными жидкостями. Смена рубашки/куртки производится после каждой выполненной операции. Брюки используются хирургами и медперсоналом операционного зала во время проведения операции для защиты нижней части тела от контаминации различными жидкостями: органическими выделениями, тканями пациента. Комплект применяется многократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 9»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и крошечных частиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Рубашка/куртка предназначена для использования в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом, операционным полем. Рубашка/куртка используется для контроля распространения микробов по воздуху от кожи, для защиты верхней части тела от инфицирования различными жидкостями. Смена рубашки/куртки производится после каждой выполненной операции. Брюки используются хирургами и медперсоналом операционного зала во время проведения операции для защиты нижней части тела от контаминации различными жидкостями: органическими выделениями, тканями пациента. Комплект применяется

однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «ОХ № 10»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций, при которых пациент лежит на спине. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Простыня применяется для изоляции хирургического разреза или операционного поля от загрязнения (например, микробами и биологическими веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации) и обеспечивает водонепроницаемость операционного поля. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «ОХ № 11»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций, при которых пациент лежит на спине. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Халат хирургический применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Простыня применяется для изоляции хирургического разреза или операционного поля от загрязнения (например, микробами и биологическими веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации) и обеспечивает водонепроницаемость операционного поля. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «ОХ № 12»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций, при которых необходима защита глаз медработника. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Халат хирургический применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Предполагается, что перед применением халата медработник уже надел костюм. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции.

операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции, а экран обеспечивает защиту области глаз от попадания жидкостей во время операций. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 13»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций, при которых необходима защита глаз медработника. Данный комплект обеспечивает высокую степень защиты от перекрестного загрязнения/заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Халат хирургический применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции, а экран обеспечивает защиту области глаз от попадания жидкостей во время операций. Фартук применяется медицинскими работниками для общей защиты во время любой процедуры, где может быть риск загрязнения передней части тела хирурга и медперсонала. Обеспечивает надежную защиту от жидкостей. Наручники применяются медицинскими работниками для обеспечения надежной защиты рук хирурга и медперсонала от жидкостей, а также используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом, операционным полем. Перчатки предназначены для медицинского работника при проведении любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «ОХ № 14»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций. Данный комплект обеспечивает высокую степень защиты от перекрестного загрязнения/заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Данный комплект медперсонал надевает непосредственно перед входом в операционный зал. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Халат хирургический применяется для защиты хирурга и/или медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое

хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции. Фартук применяется медицинскими работниками для общей защиты во время любой процедуры, где может быть риск загрязнения передней части тела хирурга и медперсонала. Обеспечивает надежную защиту от жидкостей. Нарукавники применяются медицинскими работниками для обеспечения надежной защиты хирурга и медперсонала от жидкостей, а также используются в качестве физического барьера предотвращения перекрестного заражения между медицинским работником, пациентом и операционным полем. Перчатки предназначены для медицинского работника при проведении любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплекты серии «БОХ»**

#### **Комплект «БОХ № 1»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием предназначена для перекрестной защиты между пациентом и медработником во время проведения операции и используется для покрытия тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Салфетка впитывающая используется в случаях, когда необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для защиты операционного поля или участка тела пациента. Держатель для шнура используется для прикрепления к коже пациента или простыне открытой стороной (верхней стороной), имеющей клейкий (адгезивный) слой большинства трубок или трубкообразных изделий любых типов (кабелей, шнуров) во время клинического вмешательства. Повязку послеоперационную накладывают поверх места хирургического надреза. Используется для защиты раны от загрязнений и заражений. Повязка с впитывающей полоской/подушечкой помогает заживлять рану, поглощая экссудаты в ранах с умеренным и большим количеством экссудата с минимальным размягчением раны. Повязку необходимо менять каждые 24 часа.

Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 2»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Простыня без отверстия предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием предназначена для перекрестной защиты между пациентом и медработником во время

проведения операции и используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Простыня с липким (адгезивным) краем и впитывающей зоной предназначена для абсорбирования биологических жидкостей и тканей. Липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 3»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и медработником во время проведения операции и используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или к операционному полю. Простыня с липким (адгезивным) краем и впитывающей зоной предназначена для абсорбирования биологических жидкостей и тканей, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 4»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 5»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным

полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 6»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка впитывающая применяется для впитывания биологических жидкостей для защиты операционного поля и участка тела пациента. Лента операционная используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (в том числе на небольших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела. Для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Липкий (адгезивный) слой обеспечивает надежную фиксацию изделия.

Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 7»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка впитывающая применяется для впитывания биологических жидкостей для защиты операционного поля и участка тела пациента. Лента операционная используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (в том числе на небольших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела. Для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Липкий (адгезивный) слой обеспечивает надежную фиксацию изделия.

Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 8»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых

необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка впитывающая применяется для впитывания биологических жидкостей для защиты операционного поля или участка тела пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 9»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол предназначен для покрытия операционного стола, предотвращения его от загрязнения биологическими жидкостями. Простыня с отверстием используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Салфетка используется для абсорбирования жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для очищения ран или царапин и впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 10»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол предназначен для покрытия операционного стола, предотвращения его от загрязнения биологическими жидкостями. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 11»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для очищения ран или царапин и впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 12»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Комплект создает защиту для

инструментального столика, операционного поля, тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментария. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Лента операционная используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (в том числе на небольших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела. Для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Липкий (адгезивный) слой обеспечивает надежную фиксацию изделия. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «БОХ № 13»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Комплект создает защиту инструментария, операционного поля, тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментария. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для очищения ран или царапин и впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «БОХ № 14»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надет костюм. Халаты применяются для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «БОХ № 15»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня предназначена

перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка используется для впитывания жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для очищения ран или царапин и впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «BOX № 16»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «BOX № 17»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «BOX № 18»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает

надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка впитывающая применяется для впитывания биологических жидкостей для защиты операционного поля или участка тела пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 19»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами и веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 20»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами и веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 21»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами и веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для очищения ран или царапин и впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «БОХ № 22»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного загрязнения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «БОХ № 23»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного загрязнения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «БОХ № 24»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Покрытие для операционного стола предназначено для защиты операционного стола от загрязнений биологическими жидкостями. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### Комплект «БОХ № 25»

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Покрытие/чехол операционного стола предназначено для защиты операционного стола от загрязнений биологическими жидкостями. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как

покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка с липким (адгезивным) краем предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем, а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к коже пациента вокруг места хирургического надреза и/или к операционному полю. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 26»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Покрывало/чехол для операционного стола предназначено для защиты операционного стола от загрязнения биологическими жидкостями. Простыня с отверстием используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации). Салфетка используется для абсорбирования жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для очищения ран или царапин от впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 27»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надет костюм и использовал дополнительные меры защиты (например, бахилы, шапочка, маска и т.п.). Чехол применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Салфетки используются для покрытия операционного поля и тела пациента, так же может выступать в качестве сорбционного средства для удаления небольшого количества различного рода жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 28»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций, при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с липким (адгезивным) краем используется для покрытия тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка впитывающая применяется

ывания биологических жидкостей для защиты операционного поля или участка тела пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 29»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка используется для впитывания жидкостей в медицинских целях. Салфетка так же может использоваться для перевязки ран или царапин и впитывания жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 30»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником и пациентом во время проведения различных медицинских манипуляциях. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном помещении. Комплект может применяться при любых видах медицинских осмотров. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Предназначены для надевания пациентом. Перчатки предназначены для медицинского работника при проведении любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно для проведения одной операции или медицинского осмотра и утилизируется в установленном порядке после проведения операции или осмотра.

#### **Комплект «БОХ № 31»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником и пациентом во время проведения различных медицинских манипуляциях. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном помещении. Комплект может применяться при любых видах медицинских осмотров. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Предназначены для надевания пациентом. Брюки предназначены для использования пациентом для медицинских, проктологических осмотров или операций или для других медицинских целей. Перчатки предназначены для медицинского работника при проведении любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно для проведения одной операции или

медицинского осмотра и утилизируется в установленном порядке после проведения операции или осмотра.

### **Комплект «БОХ № 32»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником и пациентом во время проведения различных медицинских манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Комплект может применяться при любых видах медицинских осмотров. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Предназначены для надевания пациентом. Браслеты операционные используются пациентом для медицинских, проктологических осмотров и операций или для других медицинских целей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции или медицинского осмотра и утилизируется в установленном порядке после проведения операции или осмотра.

### **Комплект «БОХ № 33»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций при которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты участка тела пациента. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Шапочка-колпак применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты пациента, так персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Подкладка впитывающая используется в случаях, когда необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты участка тела пациента. Лента операционная используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (включая на небольших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела. Для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Липкий (адгезивный) слой обеспечивает надежную фиксацию изделия. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплект «БОХ № 34»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микроорганизмами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории при катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Простыня с липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микроорганизмами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории при катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает

надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка операционная используется для дополнительного покрытия кушетки, подушки, так же может выступать в качестве сорбционного средства для удаления небольшого количества различного вида жидкостей. Пленка применяется в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Лента операционная используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (в том числе на больших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела. Для крепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Липкий (адгезивный) слой обеспечивает надежную фиксацию изделия. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 35»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Чехол используется в качестве физического барьера для предотвращения взаимного заражения/загрязнения медперсонала и инструментального столика. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка операционная используется для дополнительного покрытия кушетки, подушки, так же может выступать в качестве сорбционного средства для удаления небольшого количества различного вида жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

#### **Комплект «БОХ № 36»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных хирургических операций. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка операционная используется для дополнительного покрытия кушетки, подушки, так же может выступать в качестве сорбционного средства для удаления небольшого количества различного вида жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной операции и утилизируется в установленном порядке после проведения операции.

### **Комплекты серии «КБ»**

#### **Комплект «КБ № 1»**

Используется как защитное покрытие для кушетки, подушки и одеяла. Покрытие создает физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

### **Комплект «КБ № 2»**

Используется как защитное покрытие для кушетки, подушки и одеяла. Покрытие создает физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

### **Комплект «КБ № 3»**

Используется как защитное покрытие для кушетки, подушки и одеяла. Покрытие создает физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

### **Комплект «КБ № 4»**

Используется как защитное покрытие для кушетки, подушки и одеяла. Покрытие создает физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения. Салфетка используется для дополнительного покрытия кушетки, подушки, так же может выступать в качестве сорбционного средства для удаления небольшого количества различного рода жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

### **Комплект «КБ № 5»**

Используется как защитное покрытие для кушетки, подушки и одеяла. Покрытие создает физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

### **Комплект «КБ № 6»**

Используется как защитное покрытие для кушетки и подушки. Покрытие создает физическую преграду, предохраняющую от изнашивания и перекрестного загрязнения. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

## **Комплекты серии «АК»**

### **Комплект «АК № 1»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациента от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня

маном предназначена для сбора биологических отходов. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 2»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентом в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня с маном предназначена для сбора биологических отходов.

Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 3»**

Комплект предназначен для сбора и защиты от подтеканий биологических жидкостей. Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 4»**

Комплект предназначен для сбора и защиты от подтеканий биологических жидкостей. Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с маном предназначена для сбора биологических отходов. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 5»**

Комплект применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентом в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов,

биологических жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 6»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка-берет используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациенткой и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка-впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня-карман предназначена для сбора биологических отходов. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 7»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка-берет используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациенткой и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Пелена-впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 8»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка-берет используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 9»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Пеленка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей и дополнительной защиты пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 10»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Браслет идентификационный используется для идентификации пациента (роженицы/ребенка) с помощью необходимых информационных данных. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 11»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Браслет идентификационный используется для идентификации пациента (роженицы/ребенка) с помощью необходимых информационных данных. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 12»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 13»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Браслет идентификационный используется для идентификации пациента (роженицы/ребенка) с помощью необходимых информационных

данных. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 14»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций, в которых необходима высокая степень впитывания биологических жидкостей для высокой защиты операционного поля или участка тела пациента. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка операционная используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Подкладка впитывающая предназначена для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 15»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня с карманом предназначена для сбора биологических отходов. Браслет идентификационный используется для идентификации пациента (роженницы/ребенка) с помощью необходимых информационных данных. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 16»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Пелена впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня с карманом предназначена для сбора биологических отходов. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 17»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Пеленка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 18»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Браслет идентификационный используется для идентификации пациента (роженицы/ребенка) с помощью необходимых данных. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 19»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 20»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в до родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня с маном предназначена для сбора биологических отходов. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 21»

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях.

Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 22»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 23»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка операционная используется для абсорбирования жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 24»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты, защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов и биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 25»

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 26»

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Комплект может применяться для проведения акушерских или гинекологических манипуляций. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Халат хирургический применяется для защиты хирурга и персонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также выделениями пациента во время проведения операций. Шапочка-берет применяется как покрытие головы, которое хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так и персонала операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и микрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Маска защищает медработника от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции, а экран обеспечивает защиту области глаз от попадания жидкостей во время операций. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 27»

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Пеленка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### Комплект «АК № 28»

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских операций и проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Комплект может применяться для проведения акушерских или гинекологических манипуляций, а также во время процедур, связанных с деторождением. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Халат с защитой используется медицинскими работниками операционного зала при проведении операций, где необходима высокая степень защиты от проникновения различных жидкостей: органических выделений и жидкостей, тканей пациента. Шапочка-берет применяется как покрытие головы, которое

хирургический персонал носит во время операции для защиты как пациента, так персонала от операционной от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза от хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 29»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских осмотров, операций, проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном блоке. Комплект может применяться для проведения акушерских или гинекологических манипуляций, а так же во время процедур, связанных с деторождением. Предполагается, что при применении комплекта медработник уже надел костюм. Бахилы используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Халат с защитой обеспечивает высокую степень защиты медработника. Маска защищает медперсонал от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе операции. Рубашка, бахилы, шапочка-берет предназначены так же и для пациентки. Простыни без кармана и салфетки предназначены для защиты от подтекания биологических жидкостей. Простыня с карманом предназначена для сбора биологических отходов. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением.

#### **Комплект «АК № 30»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных медицинских операций и проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Применяется для защиты врача и пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном блоке. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Комплект может применяться для проведения акушерских или гинекологических манипуляций. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Простыня с отверстием и липким (адгезивным) краем используется как покрытие тела пациента для изоляции места хирургического надреза или хирургического поля от загрязнения (например, микробами, веществами) в различных клинических условиях (например, в операционной или лаборатории по катетеризации), а липкий (адгезивный) край обеспечивает надежную фиксацию простыни к операционному полю. Пеленка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 31»**

Используется при акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется

родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Простыня и салфетка впитывающая предназначены для защиты от подтеканий биологических жидкостей. Подкладка впитывающая предназначена для сбора биологических жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 32»**

используется при акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Простыня и салфетка впитывающая предназначены для защиты от подтеканий биологических жидкостей. Пеленка впитывающая предназначена для сбора биологических жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 33»**

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Пеленка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Простыня с карманом предназначена для сбора биологических отходов. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 34»**

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Рубашка для роженицы используется в родильных отделениях для кратковременного одевания пациентки в родовом и послеродовом периоде, способствует поддержанию в операционной зоне чистоты и защищает пациентку от микроорганизмов и биологических жидкостей. Бахилы предназначены для пациента и одеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов,

биологических жидкостей. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка используется для абсорбирования жидкостей. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 35»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка впитывающая используется для абсорбции биологических жидкостей пациента. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 36»**

Используется во время проведения акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыни и салфетки предназначены для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Бахилы используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Чехол предназначен для покрытия инструментального столика. Лента операционная используется для сплошной фиксации всех видов послеоперационных и раневых повязок (в том числе на небольших поверхностях), для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 37»**

Используется во время проведения акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Простыни и салфетки предназначены для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Фартук предназначен для общей защиты во время любой процедуры, где может быть риск загрязнения передней части тела хирурга и медперсонала. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 38»**

Используется во время проведения акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением и проведением медицинских осмотров. Салфетка предназначена для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Бахилы используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 39»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения осмотров или других манипуляций. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями.

также тканями пациента во время проведения операций. Халат с защитой обеспечивает высокую степень защиты медработника. Маска защищает медперсонал от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе операции. Шапочка-берет применяется как покрытие и защита головы медицинских работников от загрязнений микроорганизмами, биологическими жидкостями. Используется при акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением.

#### **Комплект «АК № 40»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным помещением во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций и во время проведения медицинских осмотров. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением и предназначен для пациентки. Бахилы предназначены для пациента и надеваются им непосредственно на ноги. Шапочка-берет предназначена для пациента и применяется как покрытие и защита головы пациента от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 41»**

Применяется в качестве барьера между медицинскими работниками, пациентом и операционным помещением во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Предназначен для использования медработниками для защиты от перекрестного заражения/загрязнения. Комплект представляет собой защитное белье для 7 (семи) медработников. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

#### **Комплект «АК № 42»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником и пациентом во время проведения различных медицинских манипуляций. Комплект может применяться для защиты пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Комплект может применяться при любых видах медицинских осмотров. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между пациентом и окружающей средой. Предназначены для надевания пациентом. Шапочка предназначена для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Перчатки предназначены для медицинского работника при проведении любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно для проведения одной операции или медицинского осмотра и утилизируется в установленном порядке после проведения операции или осмотра.

#### **Комплект «АК № 43»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником и пациентом во время проведения различных медицинских манипуляций. Комплект может применяться для защиты пациента во время операций, а также для соблюдения санитарно-гигиенических норм в операционном боксе. Комплект может применяться при любых видах медицинских осмотров. Шапочка предназначена для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Перчатки предназначены для медицинского работника при проведении любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно

для проведения одной операции или медицинского осмотра и утилизируется в установленном порядке после проведения операции или осмотра.

#### **Комплект «АК № 44»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения осмотров или других манипуляций. Комплект может использоваться при акушерских или гинекологических манипуляциях. Изделия, входящие в набор, предназначены для медработника. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Бахилы используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Маска защищает медперсонал от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе операции. Шапочка-берет применяется как покрытие и защита головы медицинских работников от загрязнений микроорганизмами, биологическими жидкостями. Бахилы применяются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между пациентом и окружающей средой. Перчатки предназначены для проведения любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением.

#### **Комплект «АК № 45»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения осмотров или других манипуляций. Комплект может использоваться при акушерских или гинекологических манипуляциях. Комплект может применяться во время процедур, связанных с деторождением. Изделия, входящие в набор, предназначены для 3 (трех) медработников. Предполагается, что перед применением комплекта медработник уже надел костюм. Бахилы используются в качестве физического барьера для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Халат применяется для защиты хирурга и медперсонала от прямого контакта с кровью, органическими выделениями и жидкостями, а также тканями пациента во время проведения операций. Маска защищает медперсонал от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе операции. Шапочка-берет применяется как покрытие и защита головы медицинских работников от загрязнений микроорганизмами, биологическими жидкостями. Перчатки предназначены для проведения любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров.

#### **Комплект «АК № 46»**

Применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применяться во время процедур, связанных с проведением ультразвукового исследования. Бахилы предназначены для пациента и одеваются непосредственно на ноги. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка предназначена для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Презерватив для датчика предназначен для вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

применяется в качестве барьера между медицинским работником, пациентом и операционным полем во время проведения различных акушерских или гинекологических манипуляций. Комплект может применять во время процедур, связанных с деторождением. Бахилы предназначены для пациента и одеваются непосредственно на ноги. Простыня предназначена для перекрестной защиты между пациентом и операционным полем. Салфетка предназначена для защиты от подтеканий и сбора биологических жидкостей. Презерватив для датчика предназначен для вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Перчатки предназначены для медицинского работника и используются для проведения любых видов хирургических операций, ассистирующих работ и медицинских осмотров. Комплект применяется однократно для проведения одной манипуляции и утилизируется в установленном порядке.

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделия подвергаются стерилизации паровым или газовым методом в соответствии с документами, утвержденными в установленном порядке.

Стерилизация паровым методом проводится при давлении пара в камере  $2\text{ кг/см}^2$ . Общий цикл режима стерилизации продукции паром составляет до 80 минут. Стерилизация паром проводится в течение 30 минут от температуры  $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ , но не выше  $1350\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

На упаковке изделий, прошедших стерилизацию, должна быть отметка о стерильности.

Гарантийный срок годности стерильных изделий составляет не более 5 лет со дня стерилизации. Проверку стерильности проводят в соответствии с методиками контроля стерильности медицинских изделий, утвержденными в установленном порядке.

Не допускается применение белья по его прямому назначению, в случае нарушения целостности упаковки, так как нарушение целостности упаковки свидетельствует о нарушении стерильности изделий.

## МАРКИРОВКА

### 1. Маркировка потребительской тары

Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на упаковочный материал потребительской тары, или на этикетку, которую наклеивают на потребительскую тару, или на вставку-вкладыш, вкладываемый в каждую единицу потребительской тары.

### 2. Маркировка потребительской тары изделий в отдельных упаковках должна содержать следующие сведения:

- наименование изделий с указанием «стерильные»;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- назначение изделий;
- состав материала;

- размер изделий;
- количество изделий;
- дата изготовления;
- дата стерилизации;
- метод стерилизации;
- условия хранения;
- срок годности;
- способ утилизации;
- символ или надпись «для однократного применения»;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- надпись «Изделие с нарушенной упаковкой не использовать»;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.

#### **4.3. Маркировка потребительской тары комплектов изделий должна содержать следующие сведения:**

- наименование изделий с указанием «стерильные»;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, в случае несовпадения с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории (при наличии);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- наименований входящих изделий;
- состав материала каждого изделия;
- размер каждого изделия;
- количество изделий каждого наименования;
- назначение изделий;
- дата изготовления;
- дата стерилизации;
- метод стерилизации;
- условия хранения; - срок годности;
- способ утилизации;
- символ или надпись «для однократного применения»;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;

надпись «Изделие с нарушенной упаковкой не использовать»;

номер Регистрационного удостоверения (РУ);

обозначение настоящих технических условий.

#### 4. Маркировка транспортной тары

Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на транспортную тару или на этикетку, которую наклеивают на транспортную тару.

Маркировка транспортной тары должна содержать следующие сведения:

наименование изделий с указанием «стерильные»;

наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при совпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)];

товарный знак изготовителя (при наличии);

размер изделий;

количество единиц потребительской тары;

номер серии;

дата изготовления;

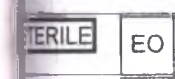
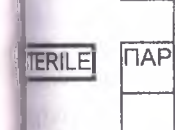
условия хранения;

срок годности;

обозначение настоящих технических условий.

Рекомендуемые условные знаки для маркировки упаковки приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Условное обозначение                                                               | Наименование                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Только для одноразового использования – не подлежит повторному использованию |
|   | Номер по каталогу                                                            |
|   | Годен до                                                                     |
|   | Номер серии                                                                  |
|   | Содержимое                                                                   |
|  | Стерилизовано газовым способом                                               |
|  | Стерилизовано паровым способом                                               |

## 5. УПАКОВКА

5.1 Изделия упаковывают в следующие виды потребительской тары с соединением краев термическим способом или с помощью клейкой ленты, находящейся на краю упаковочного пакета: – пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354;

– пленка полимерная отечественного производства по технической документации или поставляемая по импорту;

– пленка целлюлозная отечественного производства по технической документации или поставляемая по импорту;

– пакеты из бумаги отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту;

– пакеты из комбинированных материалов на основе бумаги отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту; – другие виды потребительской тары по согласованию с потребителем.

5.2 Изделия размерами до 40 x 40 см допускается упаковывать без сложения. Допускается упаковывать без сложения изделия иных размеров по согласованию с потребителем.

5.3 Упаковка должна обеспечивать стерильность изделий.

5.4 Количество изделий в потребительской таре должно соответствовать количеству, указанному в маркировке.

## 6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1 Изделия транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 177 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150.

6.3 Изделия одного наименования, одной даты изготовления, упакованные в потребительскую тару одного вида, упаковывают в следующие виды транспортной тары:

– ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514;

– ящики из гофрированного картона отечественного производства по нормативно-технической документации;

– другие виды транспортной тары по согласованию с потребителем.

6.4 В процессе транспортировки следует использовать чистые средства и соблюдать меры предосторожности во избежание повреждения упаковки и нарушения стерильности; не ставить тяжелый груз на изделия, не допускайте контакта изделия с острыми предметами, не подвергать продукт воздействию солнечных лучей и дождя.

6.5 Хранение изделий должно производиться на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе по ГОСТ 15150.

6.6 Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом или неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок годности изделий не более 5 лет со дня стерилизации.

## ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация использованных изделий должна производиться в соответствии с требованиями ПИИ 2.1.7.2790.

Для работы с использованными изделиями персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

Использованные изделия, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергаются обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению.

Продезинфицированные изделия упаковываются в соответствующие классу отходов барьерные пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожаются в специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе обезвреживания производится в печах мусоросжигательных заводов.

## ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

| Обозначение         | Наименование документа                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТ ISO 11135-2012   | Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена                                                                                                 |
| СТ Р ИСО 11134-00   | Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Промышленная стерилизация влажным теплом.                                                      |
| СТ ISO 11138-2-2012 | Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2. Биологические индикаторы для стерилизации оксидом этилена                                               |
| СТ ISO 11607-2011   | Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования.                                                                                          |
| СТ ISO 11737-2-2011 | Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации                               |
| СТ EN 13795-1-2011  | Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования                            |
| СТ EN 13795-2-2011  | Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний                            |
| СТ EN 13795-3-2011  | Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 3. Требования к исполнению и уровни исполнения |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 | Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества                                 |
| ГОСТ Р 50444-92        | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия                                                                                                                                              |
| ГОСТ Р 53498-2009      | Средства перевязочные пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний                                                                                                                               |
| ГОСТ 5556-81           | Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 427-75            | Линейки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 1770-74           | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия                                                                                                                |
| ГОСТ 4233-77           | Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия                                                                                                                                                                      |
| ГОСТ 6709-72           | Вода дистиллированная. Технические условия                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 9412-93           | Марля медицинская. Общие технические условия.                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ 10354-82          | Пленка полиэтиленовая. Технические условия                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 10399-87          | Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 13514-93          | Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности                                                                                                                                                  |
| ГОСТ 14192-96          | Маркировка грузов                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 15150-69          | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16919-79          | Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств                                                                                                                |
| ГОСТ 17768-90          | Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.                                                                                                                                          |
| ГОСТ 20477-86          | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.                                                                                                                                                            |
| ГОСТ 28498             | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний                                                                                                                                     |
| ГОСТ 31508-2012        | Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования                                                                                                                |
| СанПиН 2.1.7.2790-10   | Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами                                                                                                                                          |
| РД 50-707-91           | Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности<br>Правила и методы контроля показателей надежности                                                                                      |

## 10. РЕКЛАМАЦИЯ

О неблагоприятных явлениях или потенциальных осложнениях, которые обоснованно можно считать связанными с использованием данного изделия, следует сообщать в компанию:

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 11  
кв. 46. ИНН: 3321032480; ОГРН: 1123316001830

Тел. 8-910-670-39-21; e-mail: [pkf-medkomplekt@yandex.ru](mailto:pkf-medkomplekt@yandex.ru)



Таблица А.1

| Наименование<br>МИ     | Размер<br>МИ | Масса изделия с применяемым материалом |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |              | Спанбонд                               | Термобонд             | СМС                   | Айрленд               | СС                    | СМС                   | СММС                  | Спанбонд<br>ламиниро<br>ванный | Спанлейс              | Новитекс              | Фибрелла              | Акваспан              |
| Халат                  | 44           | 50 – 286<br>± 10 г.                    | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.            | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   | 50 – 286<br>± 10 г.   |
|                        | 46           | 51,5 – 394<br>± 10 г.                  | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г.          | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. | 51,5 – 394<br>± 10 г. |
|                        | 48           | 53 – 302<br>± 10 г.                    | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.            | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   | 53 – 302<br>± 10 г.   |
|                        | 50           | 54,5 – 310<br>± 10 г.                  | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г.          | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. | 54,5 – 310<br>± 10 г. |
|                        | 52           | 56 – 318<br>± 12 г.                    | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.            | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   | 56 – 318<br>± 12 г.   |
|                        | 54           | 57,5 – 326<br>± 12 г.                  | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г.          | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. | 57,5 – 326<br>± 12 г. |
|                        | 56           | 59 – 334<br>± 12 г.                    | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.            | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   | 59 – 334<br>± 12 г.   |
|                        | 58           | 61 – 342<br>± 12 г.                    | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.            | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   | 61 – 342<br>± 12 г.   |
|                        | 60           | 63 – 350<br>± 12 г.                    | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.            | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   | 63 – 350<br>± 12 г.   |
| Халат<br>хирургический | 44           | 60-340<br>± 12 г                       | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г               | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      | 60-340<br>± 12 г      |
|                        | 46           | 62-350<br>± 12 г                       | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г               | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      | 62-350<br>± 12 г      |
|                        | 48           | 64-360<br>± 12 г                       | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г               | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      | 64-360<br>± 12 г      |
|                        | 50           | 66-370<br>± 12 г                       | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г               | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      | 66-370<br>± 12 г      |
|                        | 52           | 69-380<br>± 15 г                       | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г               | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      | 69-380<br>± 15 г      |
|                        | 54           | 72-390<br>± 15 г                       | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г               | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      | 70-390<br>± 15 г      |
|                        | 56           | 75-400<br>± 15 г                       | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г               | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      | 73-400<br>± 15 г      |
|                        | 58           | 78-410<br>± 15 г                       | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г               | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      | 76-410<br>± 15 г      |
|                        | 60           | 91-420<br>± 15 г                       | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г               | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      | 79-420<br>± 15 г      |
| Халат с защитой        | 44           | 80-330<br>± 15 г                       | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г               | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      | 80-330<br>± 15 г      |
|                        | 46           | 83-345<br>± 15 г                       | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г               | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      | 83-345<br>± 15 г      |
|                        | 50           | 86-360<br>± 15 г                       | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г               | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      | 86-360<br>± 15 г      |
|                        | 58           | 89-375<br>± 15 г                       | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г               | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      | 89-375<br>± 15 г      |

---

Продолжение таблицы А.1

|                         |    |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|-------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Рубашка/<br>куртка      | 44 | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) | 30(± 3 r) -<br>230 (± 10r) |
|                         | 46 | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   | 31(± 3 r)<br>240(± 10 r)   |
|                         | 48 | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   | 32(± 3 r)<br>250(± 10 r)   |
|                         | 50 | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   | 33(± 3 r)<br>260(± 10 r)   |
|                         | 52 | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  | 34(± 3 r)-<br>270(± 12 r)  |
|                         | 54 | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  | 35(± 3 r)-<br>280(± 12 r)  |
|                         | 56 | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  | 36(± 3 r)-<br>290(± 12 r)  |
|                         | 58 | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  | 37(± 3 r)-<br>300(± 12 r)  |
| Рубашка<br>для роженицы | 44 | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           | 52-109<br>± 10 r           |
|                         | 46 | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           | 53-111<br>± 10 r           |
|                         | 48 | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           | 54-113<br>± 10 r           |
|                         | 50 | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           | 55-115<br>± 10 r           |
|                         | 52 | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           | 56-117<br>± 10 r           |
|                         | 54 | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           | 57-119<br>± 10 r           |
|                         | 56 | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           | 58-121<br>± 10 r           |
|                         | 58 | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           | 59-123<br>± 10 r           |
| Шапочка-берет           | 60 | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           | 60-125<br>± 10 r           |
|                         | 45 | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            | 1,8-6<br>±0,5 r            |
|                         | 46 | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          | 1,9-6,2<br>±0,5 r          |
|                         | 48 | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          | 2,1-6,6<br>±0,5 r          |

ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

### Продолжение таблицы А.1

[illegible]



скреплено печатью

( 39 ) лист/а (ов)

