


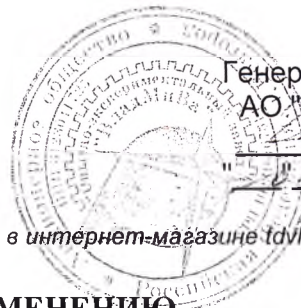

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "ОЗЗ" "ВладМиВа"
В.П. Чуев
" 28.11. " 2018 г.

Версия/Version: №10 от 08.11.2018



Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ медицинского изделия

Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба
«АНГИДРИН»®
по ТУ 9391-035-45814830-2000

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба «АНГИДРИН» (далее по тексту - жидкость «Ангидрин») предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов.

Жидкость «Ангидрин» предназначена для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Область применения – стоматология.

Показания к применению: необходимость проведения обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба или протеза (определяет только врач-стоматолог исходя из проводимого лечения).

Противопоказания к применению: применение жидкости «Ангидрин» не рекомендовано при наличии аллергической реакции или повышенной чувствительности пациента (пользователя) к отдельным компонентам жидкости.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав жидкости «Ангидрин» входят легколетучие органические соединения: этилацетат, изопропиловый спирт и изоамилацетат. Жидкость «Ангидрин» удобна в использовании, легко испаряется и не требует применения осушающей струи сжатого воздуха. Применение жидкости «Ангидрин» позволяет быстро и качественно обезжирить и просушить зубные и протезные поверхности перед фиксацией, обеспечивая адгезию фиксирующего цемента; при обработке культи «живого» зуба не вызывает болезненных ощущений. Время высыхания (улетучивания) – не более 2 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Ватным тампоном, пропитанным жидкостью «Ангидрин», или с помощью пипетки обрабатывают подготовленную полость или поверхность протезируемого зуба или зубного протеза. Высушивание и обезжиривание поверхности происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха. Использование струи сухого и обезжиренного воздуха ускоряет просушивание.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При случайном попадании на слизистую полости рта, на открытые участки кожи у особо чувствительных пациентов (пользователей) может вызвать кратковременное чувство жжения.

В отдельных случаях у особо чувствительных пациентов (пользователей) возможны аллергические реакции на компоненты, входящие в состав жидкости.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон)	- 20 мл или 30 мл
Крышка-капельница	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

или

Жидкость (флакон)	- 100 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С.

транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от – 30 °С до + 30 °С

Срок годности - 3 года.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие изделия в упаковке предприятия-изготовителя в течение его срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ:



Беречь от огня!

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению его срока годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения!!!

УТИЛИЗАЦИЯ

Неиспользованные остатки жидкости «Ангидрин» могут быть отнесены к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Остатки жидкости «Ангидрин» в небольших количествах безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства. Большие количества жидкости рекомендуется собрать в отдельную емкость и сдать на утилизацию в специализированную организацию по сбору и переработке химической продукции.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03514 от 11.09.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке



О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), неуказанных в инструкции побочных эффектов или аллергических реакций просим сообщать производителю.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»

(АО "ОЭЗ "ВладМиВа")

308023, Россия, г. Белгород

ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555

факс (4722) 20-10-10

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Беречь от влаги/Store in a dry place



- Не использовать повторно/Do not reuse



- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight



- Использовать до/Expiry date



- Код (номер) партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer



- Дата изготовления/Date of manufacture



- Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, KK – казахский язык/Kazakh, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, PT – португальский язык/Portuguese. Коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002

В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
_____ листа(ов)

