


**Научно - производственное предприятие
“Элмет”**

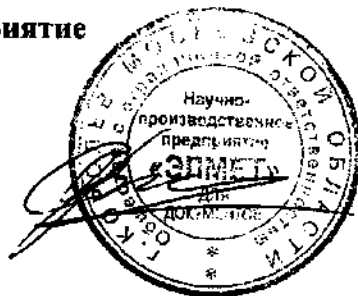

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДУВАНИЯ
СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
“БАЛЛОН ПОЛИТЦЕРА”**

Паспорт

П 02.00.00. ПС

2010г.

Устройство для продувания слуховой трубы «Баллон Политцера» соответствует ТУ 9439-002-23434089-2002

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Баллон Политцера предназначен для продувания слуховой трубы струей воздуха через носовое отверстие
- 1.2. Область применения – оториноларингология
- 1.3. Баллоны Политцера должны применяться только по их прямому назначению и только врачами отоларингологами, прошедшими специальное обучение.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект входят:

1. Резиновый баллон в сборе с металлическим стержнем -1 шт.

2. Металлический сменный наконечник “олива” :

диаметр 12мм.	-1 шт.
диаметр 15мм.	-1 шт.
диаметр 22мм	-1 шт.

2.2. При заказе по требованию заказчика отдельно могут поставаться резиновый баллон, резиновая трубка длиной 45 см диаметром 0,6 см и металлический переходник, а так же оливы с головкой диаметрами 12мм. и 15мм.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Исполнение из следующих материалов:

- для металлических частей латунь марки Л63 ГОСТ 15527 с гальваническим никелевым или никель хромовым покрытием по ГОСТ 9.301, 9.302, 9.303, 9.306-85;
- для резинового баллона пластикат поливинилхлоридный марки пластизоль типа Д-52-899 или типа Д-17 И;
- для трубки силиконовая резина марок ИРП –1338 или 52-336

3.2. Остальные технические данные:

- Диаметр резинового баллона 85 ± 5 мм.;

заменяемы и присоединяются с помощью резьбы;

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Стерилизация и дезинфекция

4.1.1. Дезинфекция. Баллоны Политцера в разобранном виде с полным погружением и заполнением полостей выдерживают в 3% растворе перекиси водорода в течение 60 мин. или кипятят 30±5 минут

4.1.2. Предстерилизационная очистка и стерилизация
Предстерилизационной очистке и стерилизации подвергают сменные наконечники. Предстерилизационную обработку осуществляют ручным или механизированным способом. Вариант Предстерилизационной обработки ручным способом:

- 1) предварительное ополаскивание проточной водой 30 секунд;
- 2) замачивание в моющем растворе при полном погружении изделий на 15 мин при температуре 50С; (моющий раствор: препарат "Прогресс", "Астра", "Лотос" - 5г, вода питьевая - 975г. ГОСТ2874-73);
- 3) мойка в моющем растворе при помощи ватно-марлевого тампона;
- 4) ополаскивание проточной, а затем дистиллированной водой
- 5) дистиллир. воду меняют каждый раз, затем изделия стерильным корнцангом переносят в стерильный бикс, выложенный стерильной салфеткой.

Стерилизацию осуществляют при полном погружении изделий в 6% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18С на 360±5мин, после чего изделия промывают дистиллированной водой. Раствор перекиси водорода может быть использован в течение 7 суток со дня приготовления при условии хранения его в закрытой емкости. Для стерилизации используют

закрытые емкости из стекла, пластмассы или покрытые эмалью (без повреждений).

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Эксплуатация от плюс 45С до плюс 10С и влажности 98% при 35С.