

**Научно - производственное предприятие
"Элмет"**



**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСМОТРА И МАССАЖА
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
"ОТОСКОП ЗИГЛЕ"**

Паспорт

ВЗ 01.00.00. ПС

2009 г.

**Устройство для осмотра и массажа барабанной перепонки
“Отоскоп Зигле” соответствует ТУ 9439-003-23434089-2002**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Отоскоп Зигле предназначен для определения подвижности слуховых косточек, состояния барабанных перепонки

1.2. Область применения – оториноларингология

1.3. Отоскопы Зигле должны применяться только по их прямому назначению и только врачами оториноларингологами, прошедшими специальное обучение.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект входят:

- | | |
|---|--------|
| 1. Воронка | -1 шт. |
| 2. Резиновая груша в сборе с металлическим штуцером | -1 шт. |
| 3. Металлический сменный наконечник : диаметром 5мм | -1шт. |
| диаметр 9мм. | -1 шт. |
| диаметр 7мм. | -1 шт. |
| 4. Резиновая трубка | -1 шт. |
| 5.Этикетка | |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Исполнение из следующих материалов:

- для металлических частей латунь марки Л63 ГОСТ 15527 с гальваническим никелевым или никель хромовым покрытием по ГОСТ 9.301, 9.302, 9.303, 9.306-85;
- для резинового баллона пластикат поливинилхлоридный марки пластизола типа Д-52-899 или типа Д-17 И;
- для трубки силиконовая резина марок ИРП -1338 или 52-336
- выпуклая линза из оптического стекла ГОСТ 3514-76

3.2. Остальные технические данные:

- наконечники взаимозаменяемы и имеют диаметры 4, 5, 7 мм
- отоскоп в сборе обеспечивает прохождение воздуха при ручном нажатии резиновой груши;
- фокусное расстояние линзы 95мм, увеличение 2,6х крат.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Стерилизация и дезинфекция

4.1.1. Дезинфекция. Отоскопы Зигле в разобранном виде с полным погружением и заполнением полостей выдерживают в 3% растворе перекиси водорода в течении 60 мин. или кипятят (30+5) минут

4.1.2. Предстерилизационная очистка и стерилизация
Предстерилизационной очистке и стерилизации подвергают сменные наконечники. Предстерилизационную обработку осуществляют ручным или механизированным способом. Вариант предстерилизационной обработки ручным способом:

- 1) предварительное ополаскивание проточной водой 30 секунд;
- 2) замачивание в моющем растворе при полном погружении изделий на 15 мин при температуре 50С; (моющий раствор: препарат "Прогресс", "Астра", "Лотос" - 5г, вода питьевая - 975г. ГОСТ2874-73);
- 3) мойка в моющем растворе при помощи ватно-марлевого тампона;
- 4) ополаскивание проточной, а затем дистиллированной водой
- 5) стерильную воду меняют каждый раз, затем изделия стерильным корнцангом переносят в стерильный бикс, выложенный стерильной салфеткой.

Стерилизацию осуществляют при полном погружении изделий в 6% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18С на 360±5мин, после чего изделия промывают стерильной водой. Раствор перекиси водорода может быть использован в течение 7 суток со дня приготовления при условии хранения его в закрытой емкости. Для стерилизации используют закрытые емкости из стекла, пластмассы или покрытые эмалью (без повреждений).

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Эксплуатация от плюс 45С до плюс 10С и влажности 98% при 35С.

5.2. Отоскопы Зигле транспортируются всеми транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от минус 50С до плюс 50С в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

5.3. Условия хранения.

Отоскопы Зигле, должны храниться в упаковке в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 С до плюс 40 С и верхнем значении влажности 80% при 25 С.