



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического альгинатного оттискного
«БЕЛОПРИНТ-ХРОМАТИК»
ТУ 9391-102-45814830-2005

НАЗНАЧЕНИЕ

«Белопринт-Хроматик» - альгинатный оттискной материал с индикацией рабочих фаз.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белопринт-Хроматик» - непылящий порошок с коротким временем смачивания, в состав которого входит альгинат натрия, сульфат кальция, отдушка, наполнитель и индикатор структурирования.

Оттиск хорошо воспроизводит рельеф мягких и твердых тканей полости рта, обладает высокой эластичностью и прочностью.

Оптимальная совместимость с гипсом позволяет получить прочную гладкую поверхность гипсовой модели с четкой репродукцией деталей.

Введение индикатора в композицию позволяет визуально контролировать отдельные этапы структурирования материала, что облегчает работу врача-стоматолога и позволяет свести к минимуму время выдержки оттискного материала в полости рта пациента.

«Белопринт-Хроматик» - трехфазный оттискной материал:

- фиолетовая фаза – время смешивания;
- розовая фаза – время обработки;
- белая фаза – введение в полость рта пациента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приготовления оттискной массы к 9 г порошка (2 мерника меньшего объема) добавляют 20 мл воды (1 мерник большего объема). Массу тщательно перемешивают в течение 30-40 секунд до получения однородной пасты и помещают в оттискную ложку. Это соответствует переходу от фиолетового до бледно-розового цвета. После исчезновения окрашивания ложку вводят в полость рта пациента. Продолжительность затвердевания от начала смешивания 3,0 - 3,5 мин. В этом состоянии масса полностью теряет липкость, хорошо отделяется от зубов и слизистой.

Цветовая индикация рабочих фаз **«Белопринт-Хроматик»** соответствует замешиванию материала на дистиллированной или обессоленной воде и при температуре 23°C. В жесткой воде цветовой переход менее интенсивный, а при более высокой температуре процесс отверждения массы проходит быстрее.

Оттиск рекомендуется извлечь из полости рта через 1 мин. после затвердевания, затем промыть струей холодной воды и обработать жидкостью «Ортосол-Дез».

Учитывая возможные объемные изменения при хранении альгинатных оттисков, рекомендуется отливку модели проводить сразу после снятия слепка и последующей обработки водой и дезинфицирующим средством.

Для сохранения качества альгинатного оттиска и отсрочки изготовления гипсовой модели оттиск рекомендуется обработать жидкостью «Ортосол-Импрес» и поместить в плотно закрывающийся пакет.

ВНИМАНИЕ!!! Использование не дистиллированной воды и температура отличная от $+23^{\circ}\text{C}$ приводит к изменению рабочих характеристик материала (жесткая вода и высокая температура сокращают время смешивания и общее рабочее время).

ФОРМА ВЫПУСКА

I. Основная

Порошок (пакет)	- 450 г
Мерник меньшего объема (для порошка)	- 1 шт.
Мерник большего объема (для воды)	- 1 шт.
Пакет п/э типа «Ziplock»	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

II. Пробник

Порошок (пакет-пробник)	- 30 г
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Срок годности - 2 года.

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ООО «ЦИРМИ» Пл. Чуев

2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Материала стоматологического альгинатного оттискного
«БЕЛОПРИНТ»
ТУ 9391-102-45814830-2005

НАЗНАЧЕНИЕ

«Белопринт» - материал на основе альгината натрия для оттисков в протезировании и ортодонтии.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белопринт» - непылящий порошок с коротким временем смачивания, в состав которого входит альгинат натрия, сульфат кальция, пищевой ароматизатор и наполнитель.

Оттиск хорошо воспроизводит рельеф мягких и твердых тканей полости рта, обладает высокой эластичностью и прочностью на разрыв.

Оптимальная совместимость с гипсом позволяет получить прочную гладкую поверхность гипсовой модели с четкой репродукцией деталей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приготовления оттискной массы к 9 г порошка (2 мерника меньшего объема) добавляют 20 мл воды (1 мерник большего объема) или к 30 г порошка (пробник) добавляют 60 мл воды. Массу тщательно перемешивают в течение 30-45 секунд до получения однородной пасты.

Затем готовую массу помещают в оттискную ложку и вводят в полость рта пациента. Продолжительность затвердевания от начала перемешивания 2,5-3,0 мин (при температуре +23⁰С и использовании дистиллированной воды)*. В этом состоянии масса полностью теряет липкость, хорошо отделяется от зубов и слизистой.

Оттиск рекомендуется извлечь из полости рта через 1 мин. после затвердевания, затем промыть струей холодной воды и обработать жидкостью «Ортосол-Дез».

Учитывая возможные объемные изменения при хранении альгинатных оттисков, рекомендуется отливку модели проводить сразу после снятия слепка и последующей промывки водой и дезинфекции.

Для сохранения качества альгинатного оттиска и отсрочки изготовления гипсовой модели оттиск рекомендуется обработать жидкостью «Ортосол-Импрес» и поместить в плотно закрывающийся пакет. Оттиск сохраняет стабильность в течение 72 часов.

***ВНИМАНИЕ!!!** Использование жесткой воды и/или температуры отличной от +23⁰С приводит к изменению времени смешивания и общего времени работы с материалом.

ФОРМА ВЫПУСКА

I. Основная

Порошок (пакет)	- 450 г или 800 г
Мерник меньшего объема (для порошка)	- 1 шт.
Мерник большего объема (для воды)	- 1 шт.
Пакет п/э типа «Ziplock»	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

II. Пробник

Порошок (пакет-пробник)	- 30 г
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.