



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набора порошков абразивных электрокорундовых
для шлифования и полирования зуботехнических изделий из металлов
«БЕЛЭКТ»
ТУ 9391-094-45814830-2003

НАЗНАЧЕНИЕ

Порошок «Белэкт» применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белэкт» представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия (99,5%). Материал уступает по твердости только алмазу и является самым безвредным осколочным продуктом в группе электрокорундов.

Порошок «Белэкт» выпускается по фракциям:

- 90-75 мкм, зернистость № 6
- 106-90 мкм, зернистость № 8
- 125-106 мкм, зернистость № 10
- 150-125 мкм, зернистость № 12
- 300-250 мкм, зернистость № 25
- 355-300 мкм, зернистость № 32
- 40-50 мкм, зернистость М50.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок «Белэкт» применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа.

Область применения электрокорунда зависит от зернистости:

- 150 мкм – удаление паковочной массы, подготовка каркасов перед обжигом, удаление излишек керамической массы металлокерамических коронок;
- 250 мкм – обработка поверхностей благородных и неблагородных сплавов, подготовка каркасов перед обжигом;
- 320 мкм – обработка поверхностей из хромкобальтовых сплавов, подготовка каркасов из неблагородных сплавов перед обжигом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (банка) - 5 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте.

Срок годности - 5 лет.