



Версия/Version: 2019.



Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvfladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора стоматологических жидкостей для обработки слизистой оболочки полости рта
«БЕЛСОЛ»

по ТУ 9391-086-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор стоматологических жидкостей для обработки слизистой оболочки полости рта «БелСол» (далее по тексту – набор жидкостей «БелСол») предназначен для антисептической и профилактической обработки полости рта.

В набор жидкостей «БелСол» входят:

- **жидкость №1** предназначенная для гигиенических и профилактических полосканий полости рта пациента перед стоматологическим приемом, а также перед снятием слепков;

- **жидкость №2** предназначенная для профилактических полосканий и антисептических промываний слизистой поверхности при гингивите и начальных формах пародонтита. Выпускается в следующих исполнениях: жидкость концентрированная, требующая разбавления водой (концентрат); жидкость не требующая разбавления водой (готовая к применению); жидкость гелеобразная (гель), состоящая из жидкости концентрированной с добавлением гелеобразователя;

- **жидкость №3** предназначенная для полосканий при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, при гингивите и пародонтите.

Набор жидкостей «БелСол» предназначен для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения.

Область применения набора жидкостей «БелСол» – стоматология.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гигиенические и профилактические полоскания полости рта пациента перед стоматологическим приемом, а также перед снятием слепков, воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта, гингивит, пародонтит, антисептическая обработка слизистой поверхности.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость №1 – содержит хлорид алюминия, обладающий слегка вяжущим свойством, что способствует снижению кровоточивости десен, очищению полости рта от слизи и пищевых остатков, снижает слюноотделение, а также оказывает микростатическое и микроцидное действие на бактерии в полости рта.

Жидкость №2 водный раствор хлоргексидина биглюконата - антисептика широкого спектра, обладающего бактерицидным действием, снижает образование зубного налета, эффективна в противобляшковом действии.

Жидкость №2 выпускается в следующих исполнениях: жидкость концентрированная, требующая разбавления водой (концентрат); жидкость не требующая разбавления водой (готовая к применению); жидкость гелеобразная (гель), состоящая из жидкости концентрированной с добавлением гелеобразователя

Жидкость №2 (исполнение - концентрат) - содержит в своем составе (2%) хлоргексидина биглюконат

Жидкость №2 (исполнение – готовая к применению) содержит хлоргексидина биглюконат (0,05 %) в пересчете на основное вещество.

Жидкость №2 (исполнение - гель) содержит в своем составе хлоргексидина биглюконат (0,2 %) в пересчете на основное вещество. Гель наносится точечно на пораженные участки, что исключает воздействие хлоргексидина биглюконат на зубную эмаль.

Жидкость №3 - содержит комплекс биологически активных антиоксидантов (бета-каротин, витамин Е, витамин С) - представляет собой прозрачную жидкость оранжевого цвета.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдерживать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Жидкость №1

Раствор для полоскания готовят разбавлением жидкости-концентрата водой в соотношении 1:10 (1 колпачок жидкости на 100 мл воды). Затем перемешивают и дают пациенту прополоскать рот жидкостью (~ 20 мл) в течение 30 секунд.

Жидкость №2

Раствор для антисептических промываний пародонтальных карманов и воспаленных участков слизистой готовят разбавлением жидкости – концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:10 (1 колпачок жидкости на 100 мл воды). После перемешивания раствором с помощью пипетки (или шприца без иглы), орошают слизистую поверхность. Антисептическое промывание пародонтальных карманов жидкостью проводят курсами. Курсы назначаются врачом индивидуально в каждом случае.

Инфицированные каналы зубов промывают с помощью эндодонтической иглы или ирригационного шприца для введения раствора в глубокие отделы канала.

Перед пломбированием (временным и/или постоянным) жидкость №2 наносят на дно и стенки полости на 30-60 секунд, а затем высушивают воздухом.

Жидкость №2 (исполнение - гель)

При воспалении десен (гингивит) наносится на область десен 2 раза в день. Смыть не рекомендуется. После нанесения следует воздержаться от приема пищи в течение 30 мин.

После снятия зубных отложений, пародонтальные карманы обрабатываются гелем (аппликация на область десен). Время экспозиции - 30 мин. Количество процедур зависит от тяжести заболевания.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита, при афтозном стоматите гель наносится на область десен 2 раза в день. Профилактические курсы лечения проводятся 2-3 раза в год.

Для профилактики постэкстракционного альвеолита после удаления зуба обрабатывается лунка обрабатывается гелем. В последующем процедуру повторяют амбулаторно 2-3 раза в день. Длительность курса лечения составляет в среднем 7-10 дней.

Жидкость №3 .

Один колпачок (3 мл) жидкости – концентрата разбавить в 100 мл охлажденной кипяченой воды и перемешать. Образуется оранжево-желтая жидкость, которой дважды в день (утром после еды и на ночь) необходимо полоскать рот в течение 1-2 минут. После полоскания в течение часа воздержаться от приема воды и пищи.

ФОРМА ВЫПУСКА

1) флакон с жидкостью № 1	(100-200) мл	- 1 шт.
флакон с жидкостью № 2	(100-1000) мл	- 1 шт.
флакон с жидкостью № 3	(20 -100) мл	- 1 шт.
крышка – капельница	(к жидкости №3)	- 1 шт.
картонная упаковка		- 3 шт.
инструкция по применению		- 3 шт.

- | | |
|--|-------------|
| 2) флакон с жидкостью № 1 (100-200) мл | - 1 шт. |
| шприц с гелем № 2 (3 – 10) мл | - 1 шт. |
| флакон с жидкостью № 3 (20 -100) мл | - 1 шт. |
| крышка – капельница (к жидкости № 3) | - 1 шт. |
| иглы (к гелю № 2) | - (3-5) шт. |
| картонная упаковка | - 3 шт. |
| инструкция по применению | - 3 шт. |
| | |
| 3) флакон с жидкостью № 1 (100-200) мл | - 1 шт. |
| туба с гелем № 2 (10 - 20) г | - 1 шт. |
| флакон с жидкостью № 3 (20 -100) мл | - 1 шт. |
| крышка – капельница (к жидкости № 3) | - 1 шт. |
| картонная упаковка | - 3 шт. |
| инструкция по применению | - 3 шт. |

Допускается выпуск набора жидкостей «БелСол» другой комплектности или в виде отдельных изделий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Набор жидкостей «БелСол» в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от 5 до 10 °С в защищенном от света месте.

Жидкости №1 и №2 хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от 5 до 25 °С.

Жидкость №3 хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от 5 до 10°С.

Срок годности -3 года.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от 5°С до 25°С.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции, побочных эффектов или аллергических реакций просим сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки набора жидкостей «БелСол» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04655 от 26.09.2017 г.
Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество
"Опытно-экспериментальный завод
"ВладМиВа" (АО "ОЭЗ "ВладМиВа")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555,
факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru

Символы/ Symbols



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Не использовать повторно/Do not reuse



- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight



- Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer



- Дата изготовления/Date of manufacture



- Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, UK – украинский язык/Ukrainian, UZ – узбекский язык/Uzbek, FR – французский язык/French.
- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002



- Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

В данном документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
4 листов

