

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО "ОЗЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
2010 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
лака стоматологического фторирующего однокомпонентного
противокариесного противоболевого
«БЕЛАК-F»
ТУ 9391-012-45814830-2001**

НАЗНАЧЕНИЕ

"Белак-F" применяется для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

"Белак-F" – белый однокомпонентный фторирующий лак. В его состав входят хлороформ, спирт, пленкообразователь, калий фтористый. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После удаления зубного налета поверхность зубов протереть ватным тампоном, изолировать зубы при помощи ватных валиков, просушить воздухом. Затем с помощью аппликатора нанести лак на поверхность зубов и просушить воздушным потоком 3-5 минут. Образовавшаяся пленка сохраняется на зубах в течение 10-12 часов.

ВНИМАНИЕ!!! Не допускать попадания препарата на слизистую.

Во избежание преждевременного удаления пленки, рекомендуется в течение 12 часов не принимать твердую пищу и не чистить зубы. Пленка легко удаляется зубной щеткой.

Для профилактики кариеса у школьников покрывают лаком все зубы: при I степени активности кариеса - 2 раза в год, при II степени - 4 раза в год, при III степени - 6 раз в год.

В качестве лечебного средства при кариесе, гипоплазии эмали, гиперестезии твердых тканей зубов, "Белак-F" применяют курсом до 4 аппликаций с интервалом 3 дня.

Примечание: При хранении лак может расслаиваться, что не сказывается на качестве материала. Перед применением необходимо встряхнуть флакон в течение 20-30 секунд, гомогенность жидкости восстановится.

ФОРМА ВЫПУСКА

Лак (флакон)	- 25 мл
Аппликаторы в п/э пакете типа «Ziplock»	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C *вдали от огня*. Срок годности - 2 года.

Внимание!

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.