

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ДЕ-5»

Бродецкий И.И.

«11» марта 2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Перчатки медицинские диагностические Cranberry латексные опудренные и
неопудренные, нитриловые неопудренные**

производства фирмы «КРАНБЕРРИ (М) СДН. БХД» (Малайзия)
«CRANBERRY (M) SDN. BHD»

1. Назначение

Перчатки медицинские диагностические Cranberry предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения обследований и диагностики, забора крови, лабораторных исследований. Область применения: лечебно-профилактические учреждения любого профиля.

2. Основные характеристики

Характеристики перчаток приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Регистрируемое изделие Перчатки медицинские диагностические Cranberry латексные опудренные и неопудренные, нитриловые неопудренные	
	Sigma Powder Free Latex Exam Gloves, Powdered Latex Exam Gloves	Luv Nitrile Powder Free Exam Gloves, R200 Nitrile Powder Free Exam Gloves
Область применения	Для всех видов диагностических процедур	Для всех видов диагностических процедур
Материал	Натуральный латекс	Нитрил
Способ стерилизации	Нестерильные	Нестерильные
Размеры (длина, ширина), мм		
Extra Small	240-295, 70-80	240-295, 70-80
Small	240-295, 80-90	240-295, 80-90
Medium	240-295, 90-100	240-295, 90-100
Large	240-295, 100-110	240-295, 100-110
Extra Large	240-295, 110-121	240-295, 110-121
Толщина (ладонь, палец), мм	0,1; 0,12	0,05-0,07; 0,07-0,09
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н	9	7,5
Усиление при разрыве после ускоренного старения, Н	6,0	7,0
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %	700	500
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %	500	400

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость натурального латекса.

4. Порядок работы с изделием

Подобрать перчатки согласно размерному ряду и маркировке на упаковке. Обработать руки надлежащим образом, вскрыть упаковку, аккуратно надеть на руку.

5. Правила хранения и использования

Хранение при температуре от +0° до +25° С и относительной влажности от 10 до 80 %. Защищать от влаги и попадания прямых солнечных лучей.

Прошнуровано и пронумеровано
3 (три) листа
(об)

