



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Инвamed»



Аджой Бхардвадж

200__г.


М. П.

**Инструкция по применению изделий компрессионных CompressAR для
остановки кровотечений после установки сосудистых катетеров с
принадлежностями.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Изделия компрессионные для остановки кровотечений после установки сосудистых катетеров должны использоваться врачами или медицинским персоналом, имеющим опыт работы с внутриаrтериальными катетерами.**
- **При использовании изделий компрессионных для остановки кровотечений после установки сосудистых катетеров пациент должен регулярно осматриваться на предмет наличия кровотечения, гематом или признаков тромбоза.**
- **Не оставляйте пациента без присмотра.**
- **Стерильность содержимого упаковки не может быть гарантирована в случае, если упаковка открыта или повреждена.**
- **Изделия компрессионные для остановки кровотечений после установки сосудистых катетеров предназначены только для однократного применения. Не пытайтесь использовать изделия повторно.**
- **Утилизируйте изделия после использования, соблюдая соответствующие рекомендации.**
- **Контакт дисков изделий компрессионных для остановки кровотечений должен быть только с сухой кожей пациента. Не используйте спирт или другие дезинфицирующие средства.**

Компрессор для мануального применения

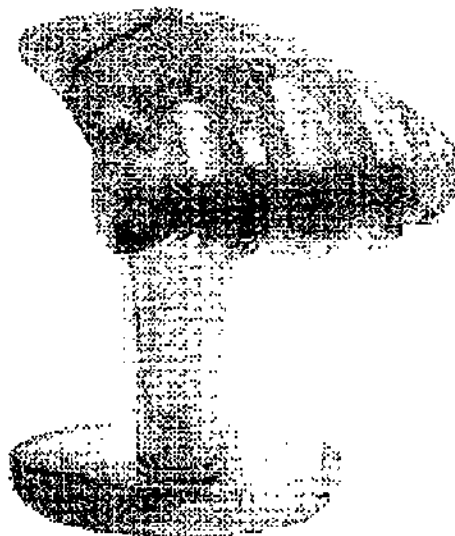

Компрессор для мануального применения

- одноразовая, стерильная система, имеющая специальную форму, предназначенная для облегчения ручной компрессии и обеспечения комфорта пациента при удалении внутриартериального катетера при катетеризации бедренной артерии.



Перед использованием компрессора убедитесь в наличии пульса на периферических сосудах стопы



Применяя правила асептики, откройте упаковку с компрессором. Держите компрессор в стерильных перчатках, установите диск с V-образным вырезом на рукоятку, соедините диск и рукоятку с помощью нажатия.



Обхватите ручку компрессора рукой, ладонь должна комфортно покрывать верхушку рукоятки.



Поместите компрессор нижней поверхностью диска на намеченное место компрессии не прикладывая усилий. Для остановки кровотечения после катетеризации бедренной артерии место компрессии определяется сразу проксимальнее и медиальнее места установки катетера. Катетер должен находиться внутри V-образного выреза диска. Для лучшей установки катетера

Compress AR ® ComfortPress™ рекомендуется пальпировать артерию.




Как только компрессор установлен, катетер может быть удален таким же образом, как и при применении ручной компрессии артерии. Затем надавите ладонью на верхушку рукоятки компрессора до момента остановки кровотечения. После удаления катетера для обеспечения лучшей видимости необходимо удалить кровь с места доступа катетера. Следует убедиться в наличии слабого дистального пульса.

Если рана не кровоточит и пальпируется слабый пульс, давление следует поддерживать с такой же интенсивностью. Через временной промежуток, определяемый врачом, следует оценить гемостаз. В случае, если кровотечение не остановлено полностью, следует проверять в дальнейшем каждые 3-5 минут.




При достижении гемостаза удалите компрессор, избегая резких движений. Слегка похлопайте по поверхности кожи для того, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кожи после катетеризации. Наложите давящую повязку.

Штатив компрессионный

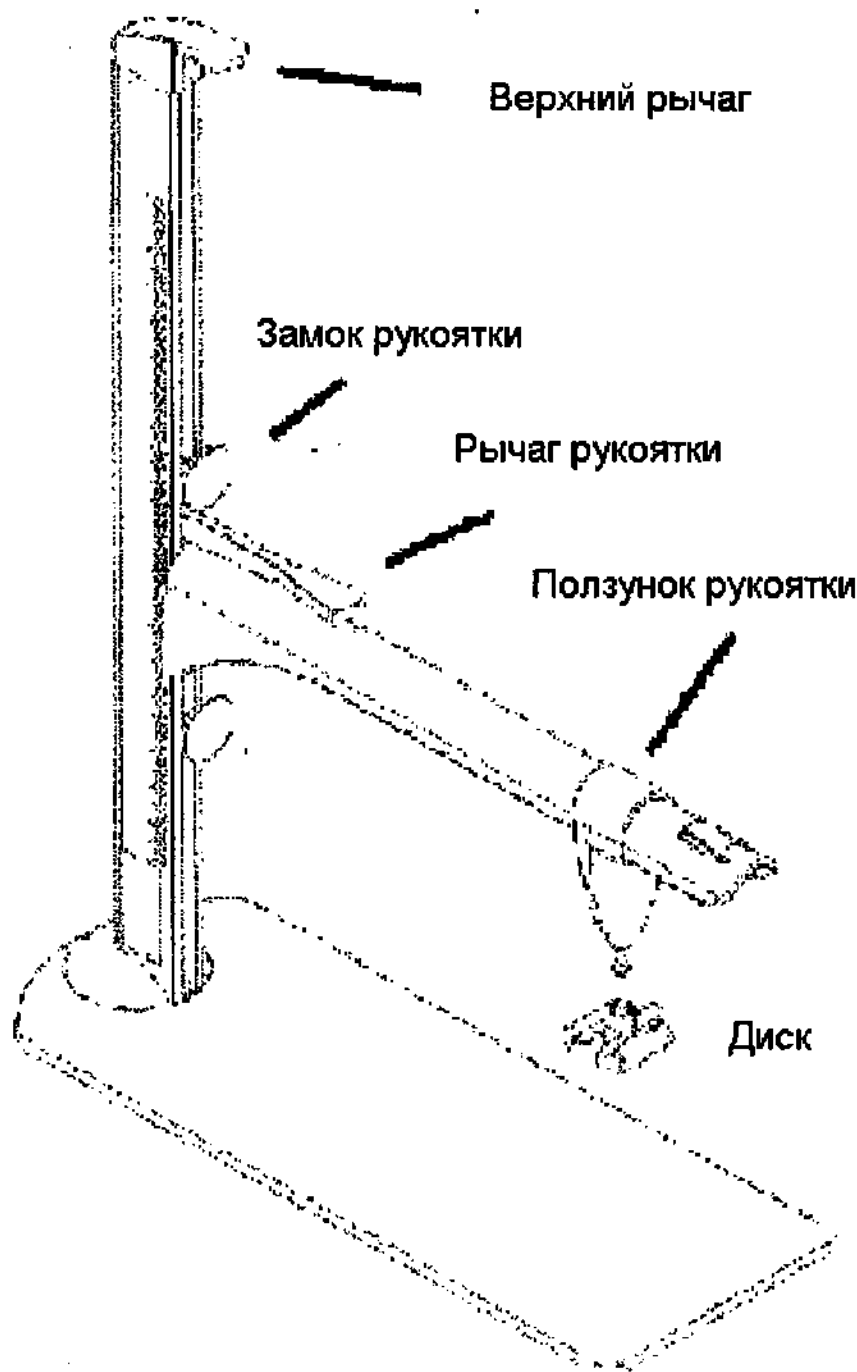

Штатив компрессионный - изделие, предназначенное для компрессии бедренной артерии для остановки кровотечения после ее катетеризации.

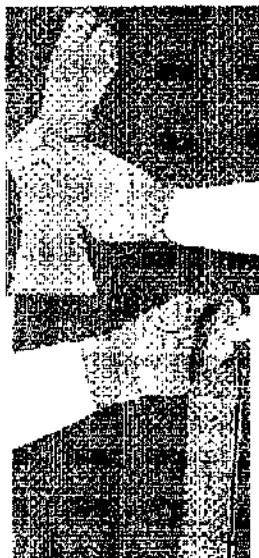

Во время использования штатива регулярно проверяйте наличие пульса на сосудах стопы.

Ослабьте замки рукоятки штатива, поднимите рукоятку, затем снова закрепите замки.

Металлическое основание штатива должно находиться непосредственно под матрасом пациента, на уровне его бедра.

Поднимите верхний рычаг штатива для того, чтобы разблокировать его вертикальную ось, поверните ее в сторону и сохраняйте в таком положении до того момента, пока вы не будете готовы извлечь артериальный катетер.

Расположите стопы пациента на расстоянии ~30 см друг от друга и поверните ногу пациента наружу для того, чтобы четко обозначить расположение паховой связки.



Применяя правила асептики, присоедините стерильный диск к наконечнику ползунка рукоятки штатива. Пропальпируйте место доступа проксимальное и медиальное места пункции.



Поверните рукоятку штатива в положение над местом пункции. Опустите штатив и поверните стерильный диск таким образом, чтобы V-образный вырез совпал с местом артериальной пункции. При контакте диска с кожей катетер должен находиться по центру вырезки диска. Опустите верхний рычаг штатива для блокировки его вертикальной направляющей.

Поместите руки на штатив и рычаг. Аккуратно извлеките катетер и одновременно другой рукой обеспечьте адекватное давление штатива для остановки кровотечения. Небольшое количество крови при извлечении катетера является нормальным. Опустите штатив до полной остановки кровотечения. Проверьте наличие пульса на сосудах стопы. Ослабьте верхний замок штатива, а затем снова закрепите, обеспечив и закрепив соответствующее положение штатива. При достижении гемостаза ослабьте верхний замок штатива, и для того, чтобы снять давление опустите рычаг рукоятки не более чем на 45 градусов. После любого изменения фиксируйте верхний замок для обеспечения безопасного





положения штатива.

В случае признаков повторного кровотечения аккуратно нажмите на штатив для увеличения давления.

Поднимите верхний рычаг штатива для того, чтобы разблокировать вертикальную направляющую и поверните штатив от пациента. Обработайте место пункции согласно соответствующим правилам.