

9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя в течение 1 года со дня ввода в эксплуатацию.

9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, пожаром, стихией;
- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия, при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9.6. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться на предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМОНТАЖ-МЕД» (ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»).

Юридический адрес: Россия, 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, пом. П5, офис 307.

Тел./факс: (831) 437-13-45, 437-13-44.

Адрес электронной почты: mmonta@kis.ru

E-mail: www.mikromontazh.ru

10. Свидетельство о приеме

Тележка больничная ТБП-ММ мод. _____ заводской № _____ соответствует заявленным техническим характеристикам и конструкторской документации.

Представитель ОТК _____

МП

подпись

расшифровка подписи

год, число, месяц

ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»

ТЕЛЕЖКА БОЛЬНИЧНАЯ ТБП-ММ мод. 1401, 1402

ТУ 9451-007-10660186-2016

РУ № ФСР 2011/12067

ПАСПОРТ

СКПГ 3. 883.060 ПС



1. Назначение изделия

1.1. Тележка больничная ТБП-ММ мод. 1401 и 1402 (в дальнейшем – тележка) предназначена для размещения и транспортировки медицинских инструментов, медицинских расходных материалов, перевязочных средств, шовных материалов в помещениях больниц, госпиталей и других лечебных учреждений (процедурных, смотровых, перевязочных, врачебных кабинетах, операционных и т.д.); область применения - вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Противопоказания: отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

2. Технические параметры и характеристики

2.1. Каркас тележки выполнен из стального профиля с порошково-полимерным покрытием. Полки выполнены из нержавеющей или стальной листа с порошково-полимерным покрытием. Тележка имеет самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы тормозами.

2.2. Номинальная нагрузка на каждую полку тележки - не более 50 кг.

2.3. Масса тележки: мод. 1401 - не более 26 кг, мод. 1402 - не более 30 кг.

2.4. Габаритные размеры тележки ТБП-ММ приведены на рис. 1 и 2:

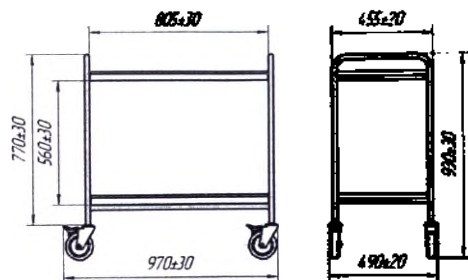


Рис. 1 Тележка больничная ТБП-ММ мод. 1401

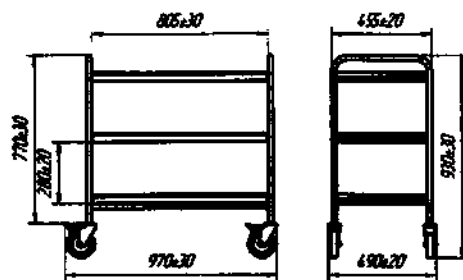


Рис. 2 Тележка больничная ТБП-ММ мод. 1402

*Габаритные размеры, количество и высота установки полок и могут изменяться по предложению заказчика.

2.5. Мод.1401 имеет 2 несъемные полки, мод.1402 имеет 3 несъемные полки.

2.6. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки тележки больничной ТБП-ММ мод. 1401 должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение основного конструкторского документа	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТБП-ММ, мод.1401	СКПГ 3.883.060	1
2. Паспорт	СКПГ 3.883.060 ПС	1

3.2. Комплект поставки тележки больничной ТБП-ММ мод. 1402 должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение основного конструкторского документа	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТБП-ММ, мод.1402	СКПГ 3.883.060-01	1
2. Паспорт	СКПГ 3.883.060 ПС	1

3.3. Тележка поставляется изготовителем в собранном виде, готовая к применению.

температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C. Тележку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

4. Правила эксплуатации медицинского изделия

4.1. Обслуживающий персонал, эксплуатирующий тележку, должен быть ознакомлен с ее устройством и работой составных частей.

4.2. Перед эксплуатацией тележки необходимо проверить ее работоспособность.

5. Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании медицинского изделия

5.1. Запрещается эксплуатировать тележку не по назначению.

5.2. Запрещается оставлять тележку на незаторможенных колесах.

5.3. В целях предотвращения случайного перемещения и опрокидывания нагруженной тележки не следует оставлять ее без присмотра в проходах, на наклонном полу, в местах скопления людей, около дверных проемов и т.п.

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.1. Предохранять тележку от загрязнения.

6.2. Производить смазку подшипниковых узлов колесных опор литолом (солидолом) ГОСТ 4366-76 не реже 1 раза в год, предварительно промыв их бензином.

6.3. Производить санитарную обработку металлических поверхностей тележки моющими средствами, рекомендованными Минздравом России к дезинфекционной обработке наружных поверхностей медицинских изделий.

6.4. Сведения, необходимые для проведения текущего ремонта изделия и его составных частей в условиях эксплуатации.

6.4.1. Текущий ремонт изделия проводится восстановлением лакокрасочного покрытия (при повреждении) методом окраски поврежденных частей изделия.

6.4.2. Нарушение работы колесных опор устраняется их заменой.

6.5. Сведения об организациях, имеющих право производить ремонт.

6.5.1. Ремонт изделия осуществляется техническими службами потребителя.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Тележку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Условия транспортирования тележки - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

7.2. Условия хранения тележки 2С по ГОСТ 15150, температура воздуха -50 до +40°C, при относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Срок хранения тележки 3 года со дня изготовления.

8. Утилизация медицинского изделия

8.1. По окончании срока службы, изделие должно быть утилизировано в соответствии с классом Б СанПиН 2.1.3684-21.

ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»

ТЕЛЕЖКА БОЛЬНИЧНАЯ ТБП-ММ мод. 1801, 1802, 1811, 1821

ТУ 9451-007-10660186-2016

РУ № ФСР 2011/12067

ПАСПОРТ

СКПГ 3. 883.011 ПС



1. Назначение изделия

1.1. Тележка больничная ТБП-ММ мод. 1801, 1802, 1811, 1821 (в дальнейшем – тележка) предназначена для размещения и транспортировки лекарственных средств и медицинских расходных материалов в помещениях больниц, госпиталей и других лечебных учреждений (процедурных, смотровых, перевязочных, врачебных кабинетах, операционных и т.д.); область применения – вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Противопоказания: отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

2. Технические параметры и характеристики

2.1. Каркас тележки выполнен из стального профиля с порошково-полимерным покрытием. Полки выполнены из нержавеющей или стальной листа с порошково-полимерным покрытием. Тележка имеет самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы тормозами.

2.2. Номинальная нагрузка на каждую полку тележки – не более 10 кг.

2.3. Масса тележки: мод. 1801, 1802 – не более 17 кг, мод. 1811, 1821 – не более 15 кг.

4. Правила эксплуатации медицинского изделия

4.1. Тележку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Вид отправки – контейнерами и мелкая отправка.

Условия транспортирования тележки – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

7.2. Условия хранения тележки 2С по ГОСТ 15150, температура воздуха -50 до +40°C, при относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Срок хранения тележки 3 года со дня изготовления.

8. Утилизация медицинского изделия

8.1. По окончании срока службы, изделие должно быть утилизировано в соответствии с классом Б СанПиН 2.1.3684-21.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, и эксплуатации.

9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя в течение 1 года со дня ввода в эксплуатацию.

9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, пожаром, стихией;
- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия, при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9.6. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться на предприятие-изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»

(ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»).

Юридический адрес: Россия, 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, пом. П15, офис 307.

Тел./факс: (831) 437-13-45, 437-13-44.

Адрес электронной почты: mmonta@kis.ru

E-mail: www.mikromontazh.ru

10. Свидетельство о приемке

Тележка больничная ТБП-ММ мод. _____ заводской № _____ соответствует заявленным техническим характеристикам и конструкторской документации.

Представитель ОТК _____

МП

подпись

расшифровка подписи

год, число, месяц

ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»

ТЕЛЕЖКА БОЛЬНИЧНАЯ ТБП-ММ мод. 1502, 1503

ТУ 9451-007-10660186-2016

РУ № ФСР 2011/12067

ПАСПОРТ

СКПГ 3. 883.052 ПС



10. Свидетельство о приёмке

Тележка больничная ТБП-ММ мод. _____ заводской № _____ соответствует заявленным техническим характеристикам и конструкторской документации.

Представитель ОТК _____

МП

подпись

расшифровка подписи

год, число, месяц

1. Назначение изделия

1.1. Тележка больничная ТБП-ММ мод. 1502 и 1503 (в дальнейшем – тележка) предназначена для размещения и транспортировки медицинских приборов и медицинской аппаратуры в помещениях больниц, госпиталей и других лечебных учреждений (процедурных, смотровых, перевязочных, врачебных кабинетах, операционных и т.д.); область применения - вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Противопоказания: отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

2. Технические параметры и характеристики

2.1. Каркас тележки выполнен из стального профиля с порошково-полимерным покрытием. Полки выполнены из нержавеющей или стальной листа с порошково-полимерным покрытием. Тележка имеет самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы тормозами.

2.2. Номинальная нагрузка на каждую полку тележки - не более 20 кг.

2.3. Масса тележки: мод. 1502 - не более 24 кг, мод. 1503 - не более 27 кг.

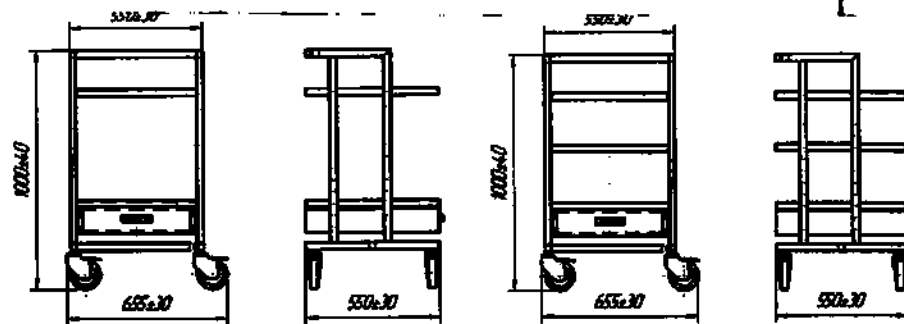


Рис. 1 Тележка больничная
ТБП-ММ мод. 1502

Рис. 2 Тележка больничная
ТБП-ММ мод. 1503

*Габаритные размеры, количество и высота установки полок и могут изменяться по предложению заказчика.

2.5. Мод.1502 имеет 2 полки размером 500 x 550 мм, мод.1503 имеет 3 полки таких же размеров. Под нижней полкой тележки располагается выдвижной ящик размерами 466 x 550 x 100 мм.

2.6. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки тележки больничной ТБП-ММ мод. 1502 должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение основного конструкторского документа	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТБП-ММ, мод.1502	СКПГ 3.883.052	1
2. Выдвижной ящик*	СКПГ 4.171.003-02	
3. Паспорт	СКПГ 3.883.052 ПС	1

3.2. Комплект поставки тележки больничной ТБП-ММ мод. 1503 должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение основного конструкторского документа	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТБП-ММ, мод.1503	СКПГ 3.883.0052	1
2. Выдвижной ящик*	СКПГ 4.171.003-02	
3. Паспорт	СКПГ 3.883.060 ПС	1

4. Правила эксплуатации медицинского изделия

- 4.1. Обслуживающий персонал, эксплуатирующий тележку, должен быть ознакомлен с ее устройством и работой составных частей.
- 4.2. Перед эксплуатацией тележки необходимо проверить ее работоспособность.

5. Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании медицинского изделия

- 5.1. Запрещается эксплуатировать тележку не по назначению.
- 5.2. Запрещается оставлять тележку на незаторможенных колесах.
- 5.3. В целях предотвращения случайного перемещения и опрокидывания нагруженной тележки не следует оставлять ее без присмотра в проходах, на наклонном полу, в местах скопления людей, около дверных проемов и т.п.

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт

- 6.1. Предохранять тележку от загрязнения.
- 6.2. Производить смазку подшипниковых узлов колесных опор литолом (солидолом) ГОСТ 4366-76 не реже 1 раза в год, предварительно промыв их бензином.
- 6.3. Производить санитарную обработку металлических поверхностей тележки моющими средствами, рекомендованными Минздравом России к дезинфекционной обработке наружных поверхностей медицинских изделий.
- 6.4. Сведения, необходимые для проведения текущего ремонта изделия и его составных частей в условиях эксплуатации.
- 6.4.1. Текущий ремонт изделия проводится восстановлением лакокрасочного покрытия (при повреждении) методом окраски поврежденных частей изделия.
- 6.4.2. Нарушение работы колесных опор устраняется их заменой.
- 6.5. Сведения об организациях, имеющих право производить ремонт.
- 6.5.1. Ремонт изделия осуществляется техническими службами потребителя.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Тележку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Условия транспортирования тележки - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

7.2. Условия хранения тележки 2С по ГОСТ 15150, температура воздуха -50 до +40°C, при относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Срок хранения тележки 3 года со дня изготовления.

8. Утилизация медицинского изделия

8.1. По окончании срока службы, изделие должно быть утилизировано в соответствии с классом Б СанПиН 2.1.3684-21.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, и эксплуатации.

9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя в течение 1 года со дня ввода в эксплуатацию.

9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, пожаром, стихией;
- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия, при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9.6. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться на предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМОНТАЖ-МЕД» (ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»).

Юридический адрес: Россия, 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, пом. П5, офис 307.

Тел./факс: (831) 437-13-45, 437-13-44.

Адрес электронной почты: mmonta@kis.ru

E-mail: www.mikromontazh.ru

10. Свидетельство о приёмке

Тележка больничная ТБП-ММ мод. _____ заводской № _____ соответствует заявленным техническим характеристикам и конструкторской документации.

Представитель ОТК _____
МП _____ подпись _____ расшифровка подписи _____
_____ год, число, месяца

ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»

ТЕЛЕЖКА БОЛЬНИЧНАЯ ТБП-ММ мод. 1504, 1505

ТУ 9451-007-10660186-2016

РУ № ФСР 2011/12067

ПАСПОРТ

СКПГ 3. 883.052-01 ПС



1. Назначение изделия

1.1. Тележка больничная ТБП-ММ мод. 1504 и 1505 (в дальнейшем – тележка) предназначена для размещения и транспортировки медицинских приборов и медицинской аппаратуры в помещениях больниц, госпиталей и других лечебных учреждений (процедурных, смотровых, перевязочных, врачебных кабинетах, операционных и т.д.); область применения - вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Противопоказания: отсутствуют.


Возможные побочные действия: отсутствуют.

2. Технические параметры и характеристики

2.1. Каркас тележки выполнен из стального профиля с порошково-полимерным покрытием. Полки выполнены из нержавеющей или стальной листа с порошково-полимерным покрытием. Тележка имеет самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы тормозами.

2.2. Номинальная нагрузка на каждую полку тележки - не более 20 кг.

2.3. Масса тележки: мод. 1504 - не более 33 кг, мод. 1505 - не более 36 кг.

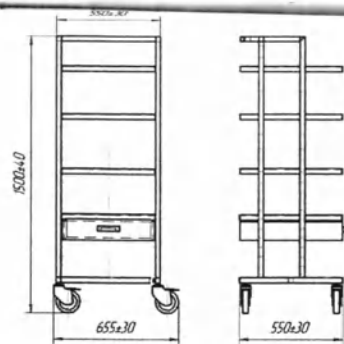

ис. 1 Тележка больничная
ТБП-ММ мод. 1504

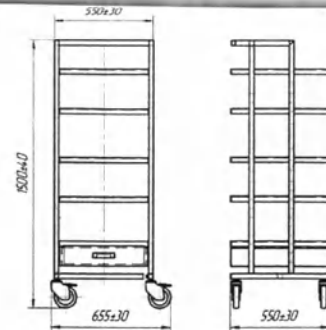


Рис. 2 Тележка больничная
ТБП-ММ мод. 1505

*Габаритные размеры, количество и высота установки полок и могут изменяться по предложению заказчика.

2.5. Мод.1504 имеет 4 полки размером 500 x 550 мм, мод.1505 имеет 5 полки таких же размеров. Под нижней полкой тележки располагается выдвижной ящик размерами 466 x 550 x 100 мм.

2.6. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки тележки больничной ТБП-ММ мод. 1504 должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение основного конструкторского документа	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТБП-ММ, мод.1504	СКПГ 3.883.060-01	1
2. Выдвижной ящик*	СКПГ 4.171.003-02	
3. Паспорт	СКПГ 3.883.052-01 ПС	1

3.2. Комплект поставки тележки больничной ТБП-ММ мод. 1505 должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение основного конструкторского документа	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТБП-ММ, мод.1505	СКПГ 3.883.060-01	1
2. Выдвижной ящик*	СКПГ 4.171.003-02	
3. Паспорт	СКПГ 3.883.052-01 ПС	1

* Выдвижной ящик изготавливается по отдельному заказу.

3.3. Тележка поставляется изготовителем в собранном виде, готовая к применению.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.1. Обслуживающий персонал, эксплуатирующий тележку, должен быть ознакомлен с ее устройством и работой составных частей.

4.2. Перед эксплуатацией тележки необходимо проверить ее работоспособность.

5. Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании медицинского изделия

5.1. Запрещается эксплуатировать тележку не по назначению.

5.2. Запрещается оставлять тележку на незаторможенных колесах.

5.3. В целях предотвращения случайного перемещения и опрокидывания нагруженной тележки не следует оставлять ее без присмотра в проходах, на наклонном полу, в местах скопления людей, около дверных проемов и т.п.

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.1. Предохранять тележку от загрязнения.

6.2. Производить смазку подшипниковых узлов колёсных опор литолом (солидолом) ГОСТ 4366-76 не реже 1 раза в год, предварительно промыв их бензином.

6.3. Производить санитарную обработку металлических поверхностей тележки моющими средствами, рекомендованными Минздравом России к дезинфекционной обработке наружных поверхностей медицинских изделий.

6.4. Сведения, необходимые для проведения текущего ремонта изделия и его составных частей в условиях эксплуатации.

6.4.1. Текущий ремонт изделия проводится восстановлением лакокрасочного покрытия (при повреждении) методом окраски поврежденных частей изделия.

6.4.2. Нарушение работы колесных опор устраняется их заменой.

6.5. Сведения об организациях, имеющих право производить ремонт.

6.5.1. Ремонт изделия осуществляется техническими службами потребителя.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Тележку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Условия транспортирования тележки - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

7.2. Условия хранения тележки 2С по ГОСТ 15150, температура воздуха -50 до +40°C, при относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Срок хранения тележки 3 года со дня изготовления.

8. Утилизация медицинского изделия

8.1. По окончании срока службы, изделие должно быть утилизировано в соответствии с классом Б СанПиН 2.1.3684-21.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

4 листа

Директор ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД»

Л.Н.Кузьмин

