



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПФ ТЕРРА»

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

620137 г.Екатеринбург ул. БОРОВАЯ 22-113

тел/факс +7(343) 223-20-76 89506482622 e-mail: oopfterra@mail.ru

ИНН 6660068077 КПП 666001001 Уральский банк СБ России

БИК 046577674 р/с 40702810016020100120 к/с 30101810500000000674

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**• ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" ПО ТУ 9451-001-12346206-96**

Оглавление

1	Информация о медицинском изделии	1
2	Описание и работа медицинского изделия	2
3	Описание упаковки маркировки и предупреждающих надписей	3
4	Эксплуатация медицинского изделия	3
5	Техническое обслуживание медизделия.....	3
6	Транспортирование и хранение.....	4
7	Гарантийные обязательства.....	4
8	Утилизация и уничтожение медицинского изделия.....	4

1 Информация о медицинском изделии

- Наименование медицинского изделия**
- ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9452-001-12346206-96**
- (ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9452-001-12346206-96)**

КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9452-001-12346206-96)

- Производитель медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ТЕРРА"

(ООО "ПФ ТЕРРА")

620137 г.Екатеринбург ул. БОРОВАЯ 22-113 т/ф (343) 223-20-76

ooopfterra@mail.ru

- Место производства медицинского изделия
- 620137 г.Екатеринбург ул. БЛЮХЕРА д. 28
-

2.Описание и работа медицинского изделия

• ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9452-001-12346206-96

• (ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9451-001-12346206-96) – это оборудование, которое устанавливается в кабинеты врачей общей практики, в отделения реанимации и интенсивной терапии и предназначен для стационарной установки стеклянных флаконов и полиэтиленовых пакетов с физрастворами, кровью плазмами с соответствующими системами при внутривенных вливаниях.

• Конструктивно ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9452-001-12346206-96 (ШТАТИВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВАТИ "ТЕРРА" по ТУ 9451-001-12346206-96) представляет собой штатив из нержавеющей стали или стали покрытой никелем имеющий специальный зажим для крепления к кровати или каталкам (носилкам).

• Особенности устройства

• высокая устойчивость и надежность крепления к кровати или каталке;

- наличие держателей для двух флаконов;
- наличие крючков для двух инфузионных пакетов;
- наличие зажима применяемого для крепления к кровати или каталке;

• все детали штатива выполнены из нержавеющей стали (допускается выполнение из стали с последующим покрытием никелем ХИМ. Н5)

• устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с 0,5 % моющего средства типа лотос или 1% раствора хлорамина;

• устойчив к воздействию климатических факторов для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 50444-92

• устойчив к механическим воздействиям при транспортировке и обладает виброустойчивостью и ударопрочностью в режимах по ГОСТ 50444-92 для изделий групп 3-5

- масса штатива 1,0 кг
- средний срок службы не менее 5 лет
- **Комплектность поставки**
- держатель ШТ 9401.20.000 1 шт
- кронштейн ШТ 9401.30.000 1 шт
- винт ШТ 9401.10.007 2 шт
- винт ШТ 9401.10.008 1 шт
- зажим ШТ 9401.40.000 1 шт
- труба ШТ 9401.10.003 1 шт
- паспорт ШТ 9401.01.000 ПС 1 шт
- этикетка 9452.001.1234620 1 шт

3. Описание упаковки маркировки и предупреждающих надписей

- маркировка- табличка прикрепляемая к штативу
- наименование и адрес изготовителя
- товарный знак
- номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя
- обозначение настоящих технических условий
- упаковка должна соответствовать ГОСТ Р 50444-92
- перед упаковывание штативы должны быть обезжирены и упакованы в картонные коробки или деревянные ящики
- на потребительской таре должны быть указаны
- наименование ли товарный знак предприятия изготовителя;
- наименование изделия;
- год и месяц упаковывания;
- обозначение настоящих технических условий
- транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционных знаков "беречь от влаги" "хрупкое-осторожно"

- **4. Эксплуатация медицинского изделия**
- подготовка штатива к работе:
- распаковать и проверить комплектность по таблице 4.1. прилагаемого паспорта штатива (исп.-02) (паспорт ШТ 9401.10.000 ПС)

• произвести расконсервацию (протереть ветошью, смоченной маловязкими маслами и органическим растворителем по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 443-76 с последующим обдуванием теплым воздухом или приотиранием насухо. промыть горячей водой или моющими средствами с последующей сушкой)

- собрать по рис. 3 прилагаемого паспорта на изделие ШТ 9401.10.000 ПС
- проверить перемещение подвижных частей и их крепление, учитывая характеристики указанные в п.п 3.3-3.6 в прилагаемом паспорте изделия

- произвести дезинфекцию дезинфицирующим агентом по п.3.7. в прилагаемом паспорте на изделие.

-

- **5. Техническое обслуживание медизделия**

- штатив в закреплённом положении к кровати не должен перемещаться относительно кровати (достигается фиксацией винта на зажиме штатива)

- кольца и крючки должны выдержать нагрузку массой не менее 2,5 кг в течении не менее 2 часов (достигается фиксацией ручки на держателе и кронштейне)

- ежедневная дезинфекция штатива 3% раствором перекиси водорода с 0,5 % моющего средства типа лотос или 1% раствора хлорамина;

-

- **6. Транспортирование и хранение**

- транспортирование и хранение по ГОСТ Р 50444-92

- штатив следует хранить в помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 градусов.

- штатив должен быть устойчив к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ 50444-92

-

- **7. Гарантийные обязательства**

- гарантийный срок штатива 2 года со дня изготовления , в течении этого периода изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет штатив по предъявлении гарантийного талона по приложению в паспорте на изделие.

- сведения о рекламациях- в неисправности штатива в период действия гарантийных обязательств а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, владелец штатива должен направлять в адрес предприятия- изготовителя осуществляющее гарантийное обслуживание заявку с указанием адреса, номера телефона, дефектную ведомость и гарантийный талон

-

- **8. Утилизация и уничтожение медицинского изделия**

- после срока годности штатива или выходе его из строя производят его демонтаж

После демонтажа тщательно собирают металлические отходы с целью транспортирования на ближайшее перерабатывающее предприятие.



Бур / Бурчлов ЕМ / 13.07.2012

государство ООО ТРП ТЕРРА

Буренко Е.И.

18.09.2017

