

ОКП 94 5210

Утверждаю
директор ООО ПФ «ТЕРРА»
 Бурликова Е.М.
22.02.1996г

ШТАТИВЫ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ.

ЭТИКЕТКА 9452.001.12346206-96 ЭТ



1996г.

ШТАТИВЫ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ

«ТЕРРА»

Штативы исп. 1, 2, 3 предназначены для стационарной установки стеклянных флаконов и полиэтиленовых пакетов с физрастворами, кровью и плазмами с соответствующими системами для внутренних вливаний в лечебных учреждениях.

Устройство исп.4 предназначено для удержания руки пациента при заборе, вливании крови, а также других процедур в лечебных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные размеры штативов приведены на рис.1-4

Масса штативов не более 2,5 кг

Штативы выдерживают нагрузку не более 3,5кг

Кольца и крючки выдерживают нагрузку не более 2,5 кг

Усилия:

- для перемещения штативов без нагрузки по ровному полу- не более 30Н
- перемещение колец вдоль трубы не более 30Н
- фиксация штатива исп. 3 на кровати не более 90 Н

Штативы устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 моющего средства по ГОСТ 25644 или раствором хлорамина, ТУ 6-01-46899387-16-89.

Средний срок службы –не менее 10 лет


Условия хранения - в диапазоне температур от +10° С до 42° С
Серия

Годен

					9452.001.12346206-96 ЭТ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШТАТИВЫ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ Этикетка	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Устинов	<i>Устинов</i>	22.02.96		01	2	4
Проа.		Бурликова	<i>Бурликова</i>	22.02.96				
Н.контр.		Гольмберг	<i>Гольмберг</i>	22.02.96				


**Штативы длительных внутривенных вливаний предназначенные
для установки на пол.**

рис.1 исп.1

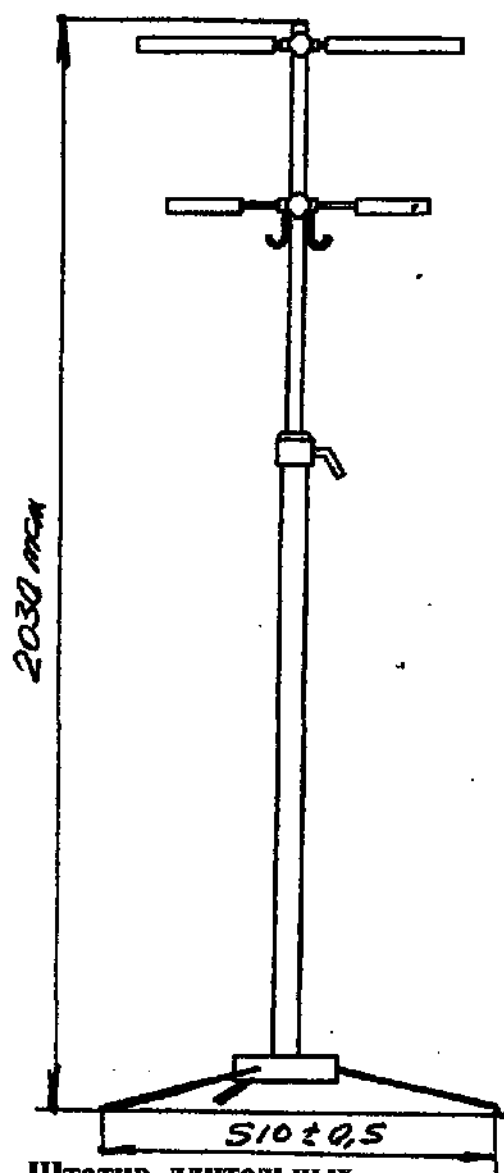

**Штатив длительных
внутривенных вливаний на
трех ножках «ТЕРРА»**

рис.2 исп.2

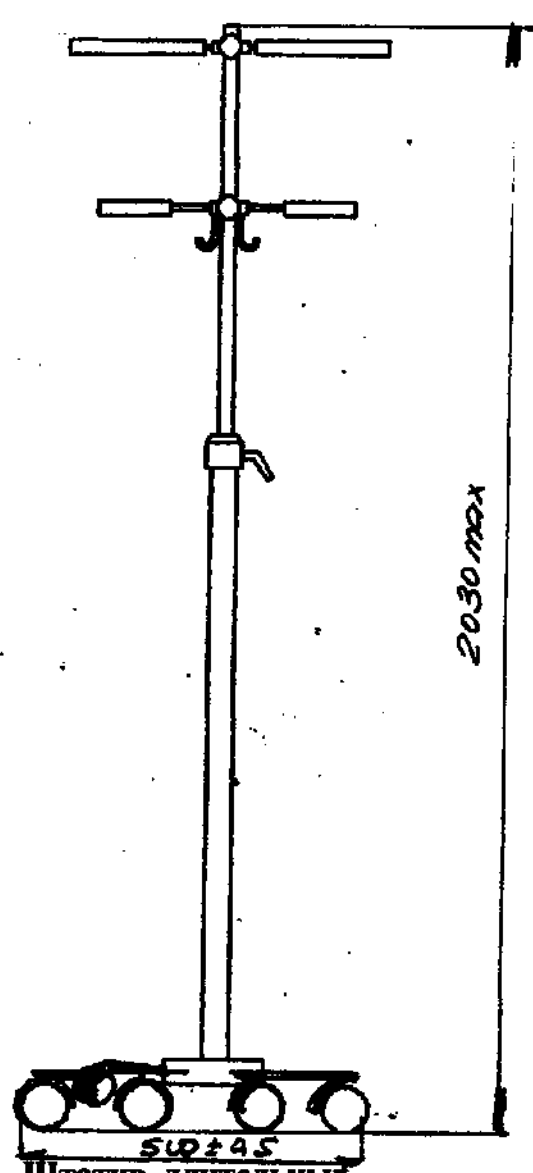


**Штатив длительных
внутривенных вливаний
на пяти колесах «ТЕРРА»**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9452.001.12346206-96 ЭТ


Лист
3

Рис.3 исп.3

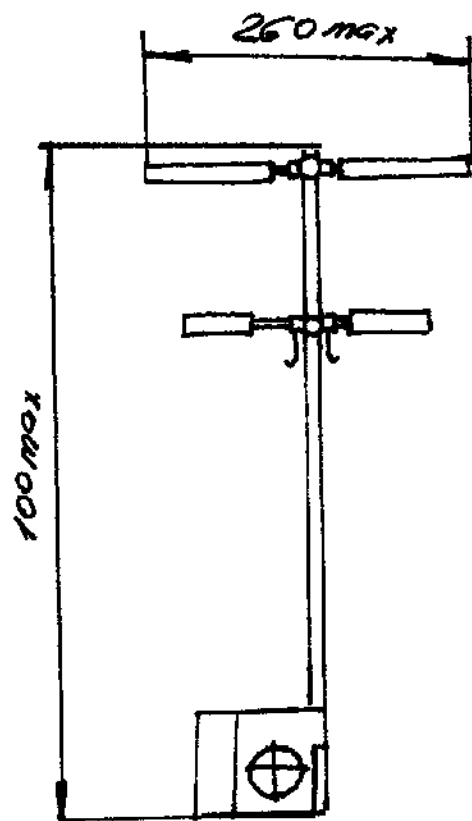

Штатив длительных внутривенных вливаний для крепления к кровати «ТЕРРА»


рис.4 исп.4

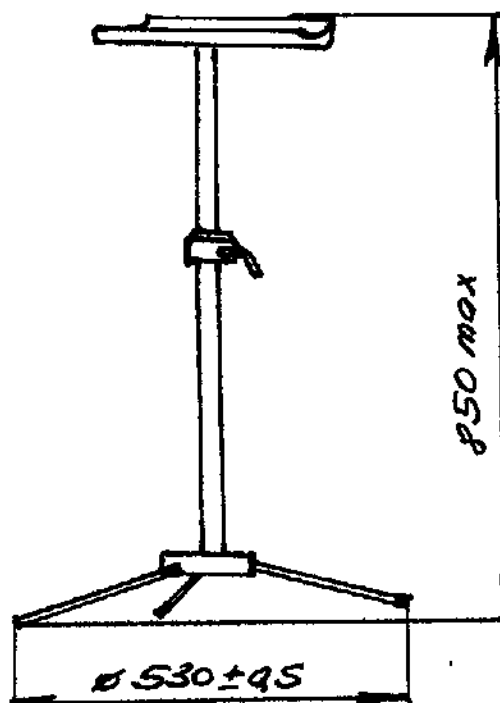

Устройство с подлокотником для проведения внутривенных процедур на трех ножках «ТЕРРА»

					9452.001.12346206-96 ЭТ	Лист 4
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		

Продлировано
Пронумеровано
4 (четыре) листа
директор ООО ЦО "Т
Бурликова Е.М.

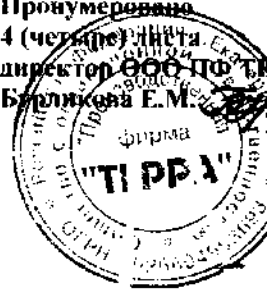

ППА



Форма инструкции по применению изделия

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200__ г. № _____

Руководитель организации-
заявителя

Туршинов Е.М. Ф.И.О.
«01» _____ 2001 г.
М.Д. ТЕРРА

ИНСТРУКЦИЯ


по применению _____ Штатива длительных внутривенных вливаний на трех ножках
«ТЕРРА» _____

(наименование изделия медицинского назначения)

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** штатив предназначен для установки стеклянных флаконов и полиэтиленовых пакетов с физрастворами, кровью и плазмами с соответствующими системами при внутривенных вливаниях.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** максимальная высота штатива в раздвинутом виде 2030мм; усилие перемещения подвижных частей штатива в свободном состоянии должно быть не более 10Н; штатив выдерживает нагрузку не более 3,5кг; штатив устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина; средний срок службы не менее 5 лет при ресурсе в течение срока службы не более 3600 циклов.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** не имеется
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** при первичном применении подготовка штатива производится следующим образом:
 - 1) распаковать и проверить комплектность по таблице паспорта к штативу
 - 2) произвести расконсервацию (протереть ветошью, смоченной маловязкими маслами и органическим растворителем по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 443-76 с последующим обдуванием теплым воздухом или протираанием насухо; промыть горячей водой или моющими средствами с последующей сушкой
 - 3) собрать штатив по соответствующему рисунку на данный штатив в паспорте
 - 4) проверить перемещение подвижных частей и их крепление, учитывая характеристики указанные в паспорте на данный штатив.

5) произвести дезинфекцию дезинфицирующим агентом указанным в паспорте на штатив.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ: после подготовки штатива к работе необходимо собрать штатив согласно рис. предоставленного в паспорте на штатив; затем вставить флаконы с физраствором в кольцо кронштейна 2—горловиной флакона и надеть на дно флакона кольцо держателя 1 при этом крепко зафиксировав держатель и кронштейн с помощью винта 3; на крючки 4 надеть полиэтиленовые пакеты с физрастворами, кровью или плазмами; при необходимости выдвинуть верхнюю трубу 5 из нижней трубы 6 зафиксировав их место соединения с помощью ручки 6; во флаконы и пакеты вставить соответствующие системы для внутривенных вливаний.

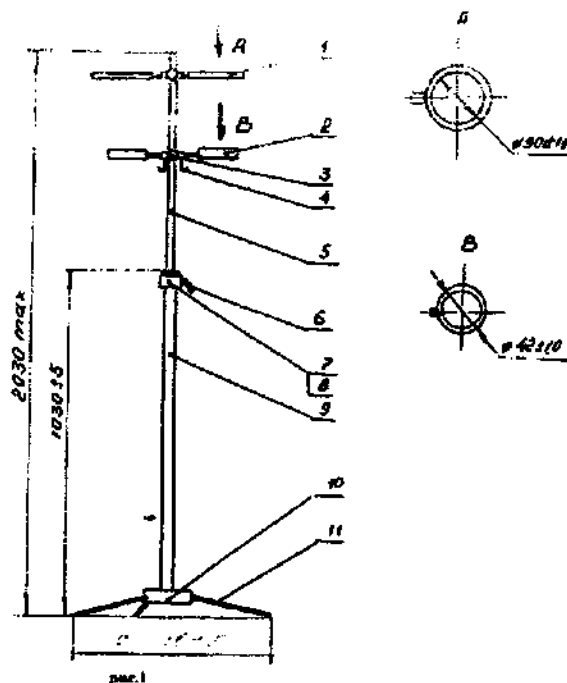

1-Кольцо держателя; 2- Кольцо кронштейна; 3-Винт; 4-Крючок;

5-Труба верхняя; 6-Труба; 7-Ручка; 8-Винт; 9-Труба нижняя;

10-Основа; 11-Педаль

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: штатив следует хранить в помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 градусов.

Должность ответственного за
производство

Тур Ф.И.О.
(подпись)
/Турчилов ЕМ/