

Генеральный директор
ООО «МедТехКомплект»



А.Г.Трофименко

_____ 2013г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Диски стоматологические алмазные
с вращением вокруг собственной оси»**

производства: ЧП «Диалог», Украина / ПП «Діалог», Україна

1. Назначение
2. Основные характеристики
3. Техническая спецификация
4. Подготовка к работе и порядок работы
5. Правила хранения и использования
6. Дезинфекция и стерилизация
7. Гарантии изготовителя
8. Организация-изготовитель

1. Назначение

Диски стоматологические алмазные с вращением вокруг собственной оси (см. Приложение), производства ЧП «Диалог», Украина / ПП «Діалог», Україна предназначены для обработки искусственных зубов и зуботехнических материалов при работе с соответствующими наконечниками.

Применяются в стоматологии.

2. Основные характеристики

Основными компонентами, используемыми при изготовлении дисков стоматологических алмазных с вращением вокруг собственной оси, являются нержавеющая сталь и натуральный или искусственный алмазный порошок.

Для алмазного покрытия используется техника гальванопластики.

Диски обладают антикоррозийными свойствами, устойчивы к предстерилизационной обработке, дезинфекции и стерилизации воздушными методами.

Диски представляют собой инструменты для разрезания стоматологических материалов (керамики, металла, композитов) при изготовлении искусственных зубов или мостов. Не применяются интраорально, так как используются только для зуботехнической лаборатории.

Диски производятся трех степеней зернистости: экстрамелкие, мелкие, средние.

Алмазные диски имеют алмазные зерна размером от 10 до 126 мкм, которые зафиксированы на металлическом основании.

По размеру рабочей части диски делятся по номерам:

- от 140 (14,0 мм) до 250 (25,0 мм).

По форме и типу хвостовика различают диски с дискодержателем: диаметр 2,35 мм; длина 44,5 мм и диски без дискодержателя.

Диски стоматологические алмазные с вращением вокруг собственной оси целесообразно применять в бормашинах со скоростью вращения не менее 2000 об/мин.

Во избежание чрезмерного нагревания дискам стоматологическим алмазным с вращением вокруг собственной оси необходимо обеспечить достаточное охлаждение воздушно-водяным спреем (не менее 50 мл/мин).

3. Техническая спецификация

Основные параметры и размеры.

Обозначения применяемые в кодировке: ГОСТ 30215-94 (ISO 6360-1-85), ГОСТ 30216-94 (ISO 6360-2-85)

Код состоит из пяти цифр, по три цифры в каждой группе.

Каждая группа несет информацию об определенном свойстве инструмента.

Пример: **806.315.001.524.012**

- **806** - код типа рабочей части инструмента: алмаз, нанесенный гальваническим способом;
- **315** - код формы и тип хвостовика или крепления инструмента - диаметр 1,6 мм, длина 21 мм;
- **001** - код геометрической формы рабочей части инструмента по стандарту ISO 6360 – сферическая рабочая часть;
- **524** - код «зернистости» маркируется цветом кольца - средняя (100 мкм);
- **012** - размер рабочей части инструмента, выраженный в 1/10 долях миллиметра - 1,2 мм.

3.1. Диски алмазные различных типоразмеров в кодировке ISO:

3.1.1. Код материала и метод нанесения: 806 – алмаз, нанесенный гальваническим способом.

3.1.2. Код формы и тип хвостовика: 104, 900.

104 – диаметр 2,35 мм; длина 44,5 мм.

900 – отверстие под дискодержатель.

3.1.3. Код геометрической формы рабочей части инструмента: 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360.

- 320 - диск с режущей боковой поверхностью с дискодержателем; диск с режущей боковой поверхностью;
- 321 - диск с режущей боковой и прилегающими торцовыми поверхностями с дискодержателем; диск с режущей боковой и прилегающими торцовыми поверхностями;
- 322 - диск с режущей боковой и прилегающей обратной поверхностями с дискодержателем; диск с режущей боковой и прилегающей обратной поверхностями;
- 323 - диск с режущей боковой и торцовой прилегающими поверхностями с дискодержателем; диск с режущей боковой и торцовой прилегающими поверхностями;
- 327 - диск с режущими поверхностями с дискодержателем; диск с режущими поверхностями;
- 328 - диск с боковой и обратной режущими поверхностями с дискодержателем; диск с боковой и обратной режущими поверхностями;
- 329 - диск с боковой и наружной режущими поверхностями с дискодержателем; диск с боковой и наружной режущими поверхностями;
- 330 - диск с обратной режущей поверхностью с дискодержателем; диск с обратной режущей поверхностью;
- 331 - диск с торцовой наружной режущей поверхностью с дискодержателем; диск с торцовой наружной режущей поверхностью;
- 332 - диск с отверстиями и режущими боковой и прилегающими поверхностями с дискодержателем; диск с отверстиями и режущими боковой и прилегающими поверхностями;
- 335 - диск с отверстиями и режущими боковой и торцовыми поверхностями с дискодержателем; диск с отверстиями и режущими боковой и торцовыми поверхностями;
- 336 - диск с отверстиями и режущими боковой и обратной поверхностями с дискодержателем; диск с отверстиями и режущими боковой и обратной поверхностями;
- 337 - диск с отверстиями и режущими боковой и торцовой поверхностями с дискодержателем; диск с отверстиями и режущими боковой и торцовой поверхностями;
- 340 - тонкий диск с режущими боковой и торцовыми прилегающими поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с режущими боковой и торцовыми прилегающими поверхностями;
- 341 - тонкий диск с режущими боковой и обратной прилегающей поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с режущими боковой и обратной прилегающей поверхностями;
- 342 - тонкий диск с режущими боковой и торцовой прилегающей поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с режущими боковой и торцовой прилегающей поверхностями;
- 345 - тонкий диск с режущими поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с режущими поверхностями;
- 346 - тонкий диск с режущими боковой и обратной поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с режущими боковой и обратной поверхностями;
- 347 - тонкий диск с режущими боковой и торцовыми поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с режущими боковой и торцовыми поверхностями;
- 350 - тонкий диск с отверстиями с дискодержателем; тонкий диск с отверстиями;
- 351 - тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и обратной поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и обратной поверхностями;

352 - тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и торцовой поверхностями с дискодержателем; тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и торцовой поверхностями;

355 - очень тонкий диск с режущими боковой и прилегающими поверхностями с дискодержателем; очень тонкий диск с режущими боковой и прилегающими поверхностями;

356 - очень тонкий диск с режущими боковой и обратной прилегающей поверхностями с дискодержателем; очень тонкий диск с режущими боковой и обратной прилегающей поверхностями;

357 - очень тонкий диск с режущими боковой и торцовой прилегающей поверхностями с дискодержателем; очень тонкий диск с режущими боковой и торцовой прилегающей поверхностями;

358 - очень тонкий диск с режущими поверхностями с дискодержателем; очень тонкий диск с режущими поверхностями;

359 - очень тонкий диск с режущими боковой и обратной поверхностями с дискодержателем; очень тонкий диск с режущими боковой и обратной поверхностями;

360 - очень тонкий диск с режущими боковой и торцовой поверхностями с дискодержателем; очень тонкий диск с режущими боковой и торцовой поверхностями.

3.1.4. Код зернистости: 504, 514, 524.

504 – экстремелкие (от 10 до 36 мкм).

514 – мелкие (от 27 до 76 мкм).

524 – средние (от 64 до 126 мкм).

3.1.5. Размер рабочей части от 14,0 мм (140) до 25,0 мм (250): 140, 160, 180, 200, 220; 250.

4. Подготовка к работе и порядок работы

Диск следует вставить в узел крепления наконечника на максимальную глубину до упора.

Перед подачей диска к объекту необходимо вывести его на нужную частоту вращения.

Во избежание поломки не допускать перекашивания и использования инструмента в качестве рычага.

В зависимости от применения изделия рекомендуется надевать защитные очки.

Пользователю следует избегать прикосновения к инструментам без защитных перчаток.

Неправильное использование инструмента приводит к снижению его срока службы, ухудшает результаты работы и повышает риск травматизма.

Несоблюдение максимально допустимых оборотов вращения приводит к увеличению риска поломки инструмента.

В случае, если диаметр рабочей части превышает диаметр хвостовика, при больших оборотах вращения могут возникнуть значительные центробежные силы, которые способны привести к изгибанию хвостовика и/или поломке инструмента. В связи с этим нельзя допускать превышения максимально допустимой частоты вращения. При применении инструментов необходимо избегать чрезмерных прижимных усилий, так как в случае с режущими инструментами они могут привести к повреждению лезвий инструмента, а также турбинных или угловых наконечников.

Рекомендуемое усилие давления, в зависимости от вида препарирования, должно находиться в пределах 0,3-2 N (30-200р).

Выкрошенные рабочие части инструмента образуют шероховатую поверхность на зубе и могут привести к поломке инструмента.

5. Правила хранения, использования и утилизации

Хранить инструменты необходимо в сухом состоянии.

Следует защищать инструменты от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и пыли.

Во избежание чрезмерного нагревания обеспечить достаточное охлаждение при использовании инструмента воздушно-водяным спреем (не менее 50 мл/мин).

Выврошенные и деформированные рабочие поверхности инструмента могут вызывать вибрацию.

Изогнутые, изношенные инструменты или инструменты с радиальным биением подлежат немедленной замене.

Изделие нельзя утилизировать совместно с бытовыми отходами. Собранные отдельно, диски передаются дистрибьютору или в пункт приема отходов для повторного использования или утилизации. Сбор отходов обеспечивает дистрибьютор (договорные сервисные организации или договорные сервисные техники). Диски утилизируются по окончании срока эксплуатации или в случае повреждения (царапины, сколы, трещины и т.д.) в соответствии с применяемыми национальными законодательными нормами совместно с другими промышленными отходами.

Изделия ремонту не подлежат.

6. Дезинфекция и стерилизация

Инструменты стоматологические вращающиеся перед первым применением дезинфицируются, очищаются, высушиваются и стерилизуются. После каждого применения эти операции необходимо повторить.

Диски	метод	средство	время	стерилизация
стоматологические алмазные с вращением вокруг собственной оси	Механическая чистка, термическая дезинфекция	Вода 96-100 С	30 мин	Паром 121 С, 15 мин 134 С, 5 мин

Диски можно стерилизовать в автоклавах и других рекомендованных для данного вида инструмента стерилизаторах.

После стерилизации диски необходимо просушить.

7. Гарантии изготовителя

Гарантии изготовителя по ГОСТ 19126.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

8. Организация-изготовитель

Частное предприятие «Диалог», Украина, 53400, Днепропетровская обл., г.Марганец, ул. Загородная, 3 / ПП «Діалог», Україна, 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Заміска, 3, телефон: +380 56 736 0918, тел./факс: +380 56 6561994, ppdialog@rambler.ru

Генеральный директор
ООО «МедТехКомплект»



А.Г.Трофименко

**Приложение к инструкции по применению медицинского изделия:
«Диски стоматологические алмазные с вращением вокруг собственной оси»**

1. Диск с режущей боковой поверхностью с дискодержателем (806.104.320.504.140, 806.104.320.514.140, 806.104.320.524.140, 806.104.320.504.160, 806.104.320.514.160, 806.104.320.524.160, 806.104.320.504.180, 806.104.320.514.180, 806.104.320.524.180, 806.104.320.504.200, 806.104.320.514.200, 806.104.320.524.200, 806.104.320.504.220, 806.104.320.514.220, 806.104.320.524.220, 806.104.320.504.250, 806.104.320.514.250, 806.104.320.524.250;
2. Диск с режущей боковой поверхностью:
806.900.320.504.140, 806.900.320.514.140, 806.900.320.524.140, 806.900.320.504.160, 806.900.320.514.160, 806.900.320.524.160, 806.900.320.504.180, 806.900.320.514.180, 806.900.320.524.180, 806.900.320.504.200, 806.900.320.514.200, 806.900.320.524.200, 806.900.320.504.220, 806.900.320.514.220, 806.900.320.524.220, 806.900.320.504.250, 806.900.320.514.250, 806.900.320.524.250;
3. Диск с режущей боковой и прилегающими торцовыми поверхностями с дискодержателем:
806.104.321.504.140, 806.104.321.514.140, 806.104.321.524.140, 806.104.321.504.160, 806.104.321.514.160, 806.104.321.524.160, 806.104.321.504.180, 806.104.321.514.180, 806.104.321.524.180, 806.104.321.504.200, 806.104.321.514.200, 806.104.321.524.200, 806.104.321.504.220, 806.104.321.514.220, 806.104.321.524.220, 806.104.321.504.250, 806.104.321.514.250, 806.104.321.524.250;
4. Диск с режущей боковой и прилегающими торцовыми поверхностями:
806.900.321.504.140, 806.900.321.514.140, 806.900.321.524.140, 806.900.321.504.160, 806.900.321.514.160, 806.900.321.524.160, 806.900.321.504.180, 806.900.321.514.180, 806.900.321.524.180, 806.900.321.504.200, 806.900.321.514.200, 806.900.321.524.200, 806.900.321.504.220, 806.900.321.514.220, 806.900.321.524.220, 806.900.321.504.250, 806.900.321.514.250, 806.900.321.524.250;
5. Диск с режущей боковой и прилегающей обратной поверхностями с дискодержателем:
806.104.322.504.140, 806.104.322.514.140, 806.104.322.524.140, 806.104.322.504.160, 806.104.322.514.160, 806.104.322.524.160, 806.104.322.504.180, 806.104.322.514.180, 806.104.322.524.180, 806.104.322.504.200, 806.104.322.514.200, 806.104.322.524.200, 806.104.322.504.220, 806.104.322.514.220, 806.104.322.524.220, 806.104.322.504.250, 806.104.322.514.250, 806.104.322.524.250;
6. Диск с режущей боковой и прилегающей обратной поверхностями:
806.900.322.504.140, 806.900.322.514.140, 806.900.322.524.140, 806.900.322.504.160, 806.900.322.514.160, 806.900.322.524.160, 806.900.322.504.180, 806.900.322.514.180, 806.900.322.524.180, 806.900.322.504.200, 806.900.322.514.200, 806.900.322.524.200, 806.900.322.504.220, 806.900.322.514.220, 806.900.322.524.220, 806.900.322.504.250, 806.900.322.514.250, 806.900.322.524.250;
7. Диск с режущей боковой и торцовой прилегающими поверхностями с дискодержателем:
806.104.323.504.140, 806.104.323.514.140, 806.104.323.524.140, 806.104.323.504.160, 806.104.323.514.160, 806.104.323.524.160, 806.104.323.504.180, 806.104.323.514.180, 806.104.323.524.180, 806.104.323.504.200, 806.104.323.514.200, 806.104.323.524.200, 806.104.323.504.220, 806.104.323.514.220, 806.104.323.524.220, 806.104.323.504.250, 806.104.323.514.250, 806.104.323.524.250;
8. Диск с режущей боковой и торцовой прилегающими поверхностями:
806.900.323.504.140, 806.900.323.514.140, 806.900.323.524.140, 806.900.323.504.160, 806.900.323.514.160, 806.900.323.524.160, 806.900.323.504.180, 806.900.323.514.180, 806.900.323.524.180, 806.900.323.504.200, 806.900.323.514.200, 806.900.323.524.200, 806.900.323.504.220, 806.900.323.514.220, 806.900.323.524.220, 806.900.323.504.250, 806.900.323.514.250, 806.900.323.524.250;
9. Диск с режущими поверхностями с дискодержателем:
806.104.327.504.140, 806.104.327.514.140, 806.104.327.524.140, 806.104.327.504.160, 806.104.327.514.160, 806.104.327.524.160, 806.104.327.504.180, 806.104.327.514.180, 806.104.327.524.180, 806.104.327.504.200, 806.104.327.514.200, 806.104.327.524.200, 806.104.327.504.220, 806.104.327.514.220, 806.104.327.524.220, 806.104.327.504.250, 806.104.327.514.250, 806.104.327.524.250;
10. Диск с режущими поверхностями:
806.900.327.504.140, 806.900.327.514.140, 806.900.327.524.140, 806.900.327.504.160, 806.900.327.514.160, 806.900.327.524.160, 806.900.327.504.180, 806.900.327.514.180, 806.900.327.524.180, 806.900.327.504.200, 806.900.327.514.200, 806.900.327.524.200, 806.900.327.504.220, 806.900.327.514.220, 806.900.327.524.220, 806.900.327.504.250, 806.900.327.514.250, 806.900.327.524.250;
11. Диск с боковой и обратной режущими поверхностями с дискодержателем:
806.104.328.504.140, 806.104.328.514.140, 806.104.328.524.140, 806.104.328.504.160, 806.104.328.514.160, 806.104.328.524.160, 806.104.328.504.180, 806.104.328.514.180, 806.104.328.524.180, 806.104.328.504.200,

806.104.328.514.200, 806.104.328.524.200, 806.104.328.504.220, 806.104.328.514.220, 806.104.328.524.220, 806.104.328.504.250, 806.104.328.514.250, 806.104.328.524.250)

12. Диск с боковой и обратной режущими поверхностями:

806.900.328.504.140, 806.900.328.514.140, 806.900.328.524.140, 806.900.328.504.160, 806.900.328.514.160, 806.900.328.524.160, 806.900.328.504.180, 806.900.328.514.180, 806.900.328.524.180, 806.900.328.504.200, 806.900.328.514.200, 806.900.328.524.200, 806.900.328.504.220, 806.900.328.514.220, 806.900.328.524.220, 806.900.328.504.250, 806.900.328.514.250, 806.900.328.524.250;

13. Диск с боковой и наружной режущими поверхностями с дискодержателем:

806.104.329.504.140, 806.104.329.514.140, 806.104.329.524.140, 806.104.329.504.160, 806.104.329.514.160, 806.104.329.524.160, 806.104.329.504.180, 806.104.329.514.180, 806.104.329.524.180, 806.104.329.504.200, 806.104.329.514.200, 806.104.329.524.200, 806.104.329.504.220, 806.104.329.514.220, 806.104.329.524.220, 806.104.329.504.250, 806.104.329.514.250, 806.104.329.524.250;

14. Диск с боковой и наружной режущими поверхностями:

806.900.329.504.140, 806.900.329.514.140, 806.900.329.524.140, 806.900.329.504.160, 806.900.329.514.160, 806.900.329.524.160, 806.900.329.504.180, 806.900.329.514.180, 806.900.329.524.180, 806.900.329.504.200, 806.900.329.514.200, 806.900.329.524.200, 806.900.329.504.220, 806.900.329.514.220, 806.900.329.524.220, 806.900.329.504.250, 806.900.329.514.250, 806.900.329.524.250)

15. Диск с обратной режущей поверхностью с дискодержателем:

806.104.330.504.140, 806.104.330.514.140, 806.104.330.524.140, 806.104.330.504.160, 806.104.330.514.160, 806.104.330.524.160, 806.104.330.504.180, 806.104.330.514.180, 806.104.330.524.180, 806.104.330.504.200, 806.104.330.514.200, 806.104.330.524.200, 806.104.330.504.220, 806.104.330.514.220, 806.104.330.524.220, 806.104.330.504.250, 806.104.330.514.250, 806.104.330.524.250;

16. Диск с обратной режущей поверхностью:

806.900.330.504.140, 806.900.330.514.140, 806.900.330.524.140, 806.900.330.504.160, 806.900.330.514.160, 806.900.330.524.160, 806.900.330.504.180, 806.900.330.514.180, 806.900.330.524.180, 806.900.330.504.200, 806.900.330.514.200, 806.900.330.524.200, 806.900.330.504.220, 806.900.330.514.220, 806.900.330.524.220, 806.900.330.504.250, 806.900.330.514.250, 806.900.330.524.250;

17. Диск с торцевой наружной режущей поверхностью с дискодержателем:

806.104.331.504.140, 806.104.331.514.140, 806.104.331.524.140, 806.104.331.504.160, 806.104.331.514.160, 806.104.331.524.160, 806.104.331.504.180, 806.104.331.514.180, 806.104.331.524.180, 806.104.331.504.200, 806.104.331.514.200, 806.104.331.524.200, 806.104.331.504.220, 806.104.331.514.220, 806.104.331.524.220, 806.104.331.504.250, 806.104.331.514.250, 806.104.331.524.250;

18. Диск с торцевой наружной режущей поверхностью:

806.900.331.504.140, 806.900.331.514.140, 806.900.331.524.140, 806.900.331.504.160, 806.900.331.514.160, 806.900.331.524.160, 806.900.331.504.180, 806.900.331.514.180, 806.900.331.524.180, 806.900.331.504.200, 806.900.331.514.200, 806.900.331.524.200, 806.900.331.504.220, 806.900.331.514.220, 806.900.331.524.220, 806.900.331.504.250, 806.900.331.514.250, 806.900.331.524.250;

19. Диск с отверстиями и режущими боковой и прилегающими поверхностями с дискодержателем:

806.104.332.504.140, 806.104.332.514.140, 806.104.332.524.140, 806.104.332.504.160, 806.104.332.514.160, 806.104.332.524.160, 806.104.332.504.180, 806.104.332.514.180, 806.104.332.524.180, 806.104.332.504.200, 806.104.332.514.200, 806.104.332.524.200, 806.104.332.504.220, 806.104.332.514.220, 806.104.332.524.220, 806.104.332.504.250, 806.104.332.514.250, 806.104.332.524.250;

20. Диск с отверстиями и режущими боковой и прилегающими поверхностями:

806.900.332.504.140, 806.900.332.514.140, 806.900.332.524.140, 806.900.332.504.160, 806.900.332.514.160, 806.900.332.524.160, 806.900.332.504.180, 806.900.332.514.180, 806.900.332.524.180, 806.900.332.504.200, 806.900.332.514.200, 806.900.332.524.200, 806.900.332.504.220, 806.900.332.514.220, 806.900.332.524.220, 806.900.332.504.250, 806.900.332.514.250, 806.900.332.524.250;

21. Диск с отверстиями и режущими боковой и торцевыми поверхностями с дискодержателем:

806.104.335.504.140, 806.104.335.514.140, 806.104.335.524.140, 806.104.335.504.160, 806.104.335.514.160, 806.104.335.524.160, 806.104.335.504.180, 806.104.335.514.180, 806.104.335.524.180, 806.104.335.504.200, 806.104.335.514.200, 806.104.335.524.200, 806.104.335.504.220, 806.104.335.514.220, 806.104.335.524.220, 806.104.335.504.250, 806.104.335.514.250, 806.104.335.524.250;

22. Диск с отверстиями и режущими боковой и торцевыми поверхностями:

806.900.335.504.140, 806.900.335.514.140, 806.900.335.524.140, 806.900.335.504.160, 806.900.335.514.160, 806.900.335.524.160, 806.900.335.504.180, 806.900.335.514.180, 806.900.335.524.180, 806.900.335.504.200, 806.900.335.514.200, 806.900.335.524.200, 806.900.335.504.220, 806.900.335.514.220, 806.900.335.524.220, 806.900.335.504.250, 806.900.335.514.250, 806.900.335.524.250;

806.900.345.524.160, 806.900.345.504.180, 806.900.345.514.180, 806.900.345.524.180, 806.900.345.504.200, 806.900.345.514.200, 806.900.345.524.200, 806.900.345.504.220, 806.900.345.514.220, 806.900.345.524.220, 806.900.345.504.250, 806.900.345.514.250, 806.900.345.524.250;

35. Тонкий диск с режущими боковой и обратной поверхностями с дискодержателем:

806.104.346.504.140, 806.104.346.514.140, 806.104.346.524.140, 806.104.346.504.160, 806.104.346.514.160, 806.104.346.524.160, 806.104.346.504.180, 806.104.346.514.180, 806.104.346.524.180, 806.104.346.504.200, 806.104.346.514.200, 806.104.346.524.200, 806.104.346.504.220, 806.104.346.514.220, 806.104.346.524.220, 806.104.346.504.250, 806.104.346.514.250, 806.104.346.524.250;

36. Тонкий диск с режущими боковой и обратной поверхностями:

806.900.346.504.140, 806.900.346.514.140, 806.900.346.524.140, 806.900.346.504.160, 806.900.346.514.160, 806.900.346.524.160, 806.900.346.504.180, 806.900.346.514.180, 806.900.346.524.180, 806.900.346.504.200, 806.900.346.514.200, 806.900.346.524.200, 806.900.346.504.220, 806.900.346.514.220, 806.900.346.524.220, 806.900.346.504.250, 806.900.346.514.250, 806.900.346.524.250;

37. Тонкий диск с режущими боковой и торцовыми поверхностями с дискодержателем:

806.104.347.504.140, 806.104.347.514.140, 806.104.347.524.140, 806.104.347.504.160, 806.104.347.514.160, 806.104.347.524.160, 806.104.347.504.180, 806.104.347.514.180, 806.104.347.524.180, 806.104.347.504.200, 806.104.347.514.200, 806.104.347.524.200, 806.104.347.504.220, 806.104.347.514.220, 806.104.347.524.220, 806.104.347.504.250, 806.104.347.514.250, 806.104.347.524.250;

38. Тонкий диск с режущими боковой и торцовыми поверхностями:

806.900.347.504.140, 806.900.347.514.140, 806.900.347.524.140, 806.900.347.504.160, 806.900.347.514.160, 806.900.347.524.160, 806.900.347.504.180, 806.900.347.514.180, 806.900.347.524.180, 806.900.347.504.200, 806.900.347.514.200, 806.900.347.524.200, 806.900.347.504.220, 806.900.347.514.220, 806.900.347.524.220, 806.900.347.504.250, 806.900.347.514.250, 806.900.347.524.250;

39. Тонкий диск с отверстиями с дискодержателем:

806.104.350.504.140, 806.104.350.514.140, 806.104.350.524.140, 806.104.350.504.160, 806.104.350.514.160, 806.104.350.524.160, 806.104.350.504.180, 806.104.350.514.180, 806.104.350.524.180, 806.104.350.504.200, 806.104.350.514.200, 806.104.350.524.200, 806.104.350.504.220, 806.104.350.514.220, 806.104.350.524.220, 806.104.350.504.250, 806.104.350.514.250, 806.104.350.524.250;

40. Тонкий диск с отверстиями:

806.900.350.504.140, 806.900.350.514.140, 806.900.350.524.140, 806.900.350.504.160, 806.900.350.514.160, 806.900.350.524.160, 806.900.350.504.180, 806.900.350.514.180, 806.900.350.524.180, 806.900.350.504.200, 806.900.350.514.200, 806.900.350.524.200, 806.900.350.504.220, 806.900.350.514.220, 806.900.350.524.220, 806.900.350.504.250, 806.900.350.514.250, 806.900.350.524.250;

41. Тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и обратной поверхностями с дискодержателем:

(806.104.351.504.140, 806.104.351.514.140, 806.104.351.524.140, 806.104.351.504.160, 806.104.351.514.160, 806.104.351.524.160, 806.104.351.504.180, 806.104.351.514.180, 806.104.351.524.180, 806.104.351.504.200, 806.104.351.514.200, 806.104.351.524.200, 806.104.351.504.220, 806.104.351.514.220, 806.104.351.524.220, 806.104.351.504.250, 806.104.351.514.250, 806.104.351.524.250)

42. Тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и обратной поверхностями:

806.900.351.504.140, 806.900.351.514.140, 806.900.351.524.140, 806.900.351.504.160, 806.900.351.514.160, 806.900.351.524.160, 806.900.351.504.180, 806.900.351.514.180, 806.900.351.524.180, 806.900.351.504.200, 806.900.351.514.200, 806.900.351.524.200, 806.900.351.504.220, 806.900.351.514.220, 806.900.351.524.220, 806.900.351.504.250, 806.900.351.514.250, 806.900.351.524.250;

43. Тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и торцовой поверхностями с дискодержателем:

806.104.352.504.140, 806.104.352.514.140, 806.104.352.524.140, 806.104.352.504.160, 806.104.352.514.160, 806.104.352.524.160, 806.104.352.504.180, 806.104.352.514.180, 806.104.352.524.180, 806.104.352.504.200, 806.104.352.514.200, 806.104.352.524.200, 806.104.352.504.220, 806.104.352.514.220, 806.104.352.524.220, 806.104.352.504.250, 806.104.352.514.250, 806.104.352.524.250;

44. Тонкий диск с отверстиями и режущими боковой и торцовой поверхностями:

806.900.352.504.140, 806.900.352.514.140, 806.900.352.524.140, 806.900.352.504.160, 806.900.352.514.160, 806.900.352.524.160, 806.900.352.504.180, 806.900.352.514.180, 806.900.352.524.180, 806.900.352.504.200, 806.900.352.514.200, 806.900.352.524.200, 806.900.352.504.220, 806.900.352.514.220, 806.900.352.524.220, 806.900.352.504.250, 806.900.352.514.250, 806.900.352.524.250;

45. Очень тонкий диск с режущими боковой и прилегающими поверхностями с дискодержателем:

806.104.355.504.140, 806.104.355.514.140, 806.104.355.524.140, 806.104.355.504.160, 806.104.355.514.160, 806.104.355.524.160, 806.104.355.504.180, 806.104.355.514.180, 806.104.355.524.180, 806.104.355.504.200, 806.104.355.514.200, 806.104.355.524.200, 806.104.355.504.220, 806.104.355.514.220, 806.104.355.524.220,

806.900.360.514.200, 806.900.360.524.200, 806.900.360.504.220, 806.900.360.514.220, 806.900.360.524.220,
806.900.360.504.250, 806.900.360.514.250, 806.900.360.524.250.

Генеральный директор
ООО «МедТехКомплект»



А.Г.Трофименко

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

11 лист(ов)



Генеральный директор
ООО «МедТех Парк»
А.Т. Трофимов