

1. Погрузить выступающие части тестовых полосок в образец мочи на 10-15 сек. Не опускать в мочу пластиковый корпус кассеты
2. Оценить результат в течение 5 минут по каждому из окон:

C

T

- наркотик не обнаружен.

C

T

- наркотик обнаружен.

C

T

- тест непригоден или процедура проведена неправильно.
3. Не учитывать результаты по истечении 10 мин.

Тест используется только для обнаружения наркотика (или его метаболитов) в моче. Не использовать для количественного определения наркотика в моче или для выявления обильности.
Открывать пакет непосредственно перед применением.
Только для диагностики *in vitro*. Не использовать, если тестовый планшет плохо запаян. Тест предназначен для домашнего применения.
Чувствительность определения - 500 нг/мл.
Не принимать внутрь.
Хранить при температуре от 2 °C до 30 °C в запечатанном в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Отпускается без рецепта.

Серия:
Изгот.:
Годен до:



Дистрибьютор: ООО «Вектор-Фарм»,
630559, Новосибирская обл., р.п.Колыцово, д/я 100
тел. (383)363-27-23, www.vector-medica.ru

Регистрационное удостоверение № _____
Производитель: IND - Инд Диагностик Инк., Канада
(IND Diagnostic Inc., 1629 Fosters Way, Delta, B.C. V3M 6S7 Canada).

Нарконтроль[®]


Экспресс-тест на выявление
5 видов наркотиков

1 тест-кассета

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ЗА 5 МИНУТ

Кокаин
Амфетамин
Метамфетамин
Марихуана
Морфин

DDA 5 Panel
(COP/AMP/MET/COC/THC)
LOT: DDA12191M19
EXP: 01/2015

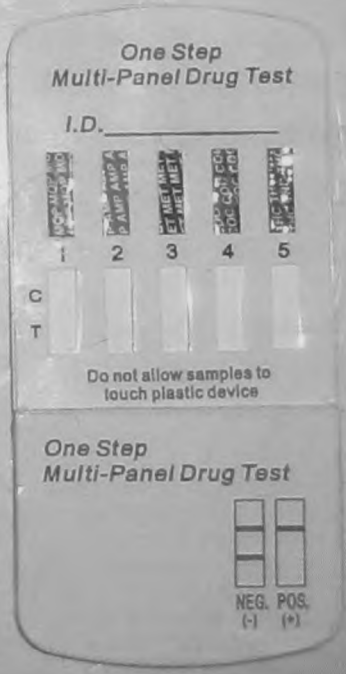

One Step
Multi-Panel Drug Test

I.D. _____

1 2 3

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

1. Погрузить выступающие части тестовых полосок в образец мочи на 10-15 сек. Не опускать в мочу пластиковый корпус кассеты.

2. Оценить результат в течение 5 минут по каждому из окон:

C T - наркотик не обнаружен.

C T - наркотик обнаружен.

C T - тест непригоден или процедура проведена неправильно.

3. Не учитывать результаты по истечении 10 мин.



Тест используется только для качественного определения наркотика (или его метаболитов) и не предназначен для количественного определения наркотика в моче или степени опьянения.

Открывать пакет непосредственно перед проведением тестирования.

Только для диагностики in vitro. Не использовать, если пакет порван или плохо запаян. Тест предназначен для однократного применения.

Чувствительность определения - 500 нг/мл.

Не принимать внутрь.

Хранить при температуре от 2 °C до 30 °C в запечатанной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Отпускается без рецепта.

Серия:

Изгот.:

Годен до:



4 605635 005237

Регистрационное удостоверение № _____

Дистрибьютор: ООО «Вектор-Фарм»,
630559, Новосибирская обл., р.п.Кольцово, а/я 100,
тел. (383)363-27-23, www.vector-medica.ru.

Производитель: "ИНД ДИАГНОСТИК ИНК.", Канада
(IND Diagnostic Inc., 1629 Fosters Way, Delta, B.C. V3M 6S7 Canada).

Нарконтроль

Экспресс-тест на выявление
3 видов наркотиков

1 тест-
кассета

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ЗА 5 МИНУТ

Маришуана
Амфетамин
Морфин



One Step
Multi-Panel Drug Test

I.D. _____

1 2 3

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

Do not allow samples to
touch plastic device

* remove this cap before dipping test card

One Step
Multi-Panel Drug Test

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T

C T


C T

C T


C T

MDMA
LOT: 3-MD04172
EXP: 05/2013

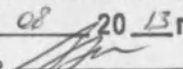

СОГЛАСОВАНО
" 20 " 08 20 13 г.
Подпись 

One Step
Multi-Panel Drug Test

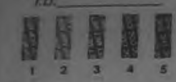

Do not allow samples to
touch plastic device

1. Погрузить выступающие части
тестовых полосок в образец мочи
на 10-15 сек. Не опускать в мочу
пластиковый корпус кассеты.

2. Оценить результат в течение 5
минут по каждому из окон:

C T ☐ - наркотик не
обнаружен.

C T ☐ - наркотик
обнаружен.

C T ☐ - тест непригоден
или процедура
проведена неправильно.

3. Не учитывать результаты по
истечении 10 мин.

Тест используется только для качественного определения
наркотика (или его метаболитов) и не предназначен для
количественного определения наркотика в моче или степени
опьянения.

Открывать пакет непосредственно перед проведением
тестирования.

Только для диагностики in vitro. Не использовать, если пакет порван
или плохо запаян. Тест предназначен для однократного
применения.

Чувствительность определения - 500 нг/мл.
Не принимать внутрь.

Хранить при температуре от 2 °C до 30 °C в запечатанной упаковке
в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Отпускается без рецепта.

Серия:

Изгот.:

Годен до:



Дистрибьютор: ООО «Вектор-Фарм»,
630559, Новосибирская обл., р.п.Кольцово, а/я 100.
тел. (383)363-27-23, www.vector-medica.ru.

Производитель: IND "ИНД Диагностика Инк.", Канада
(IND Diagnostic Inc., 1629 Fosters Way, Delta, B.C., V3M 6S7 Canada).

Регистрационное удостоверение №

Нарконтроль

Экспресс-тест на выявление
5 видов наркотиков

1 тест-
кассета

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ЗА 5 МИНУТ

Кокаин
Амфетамин
Метамфетамин
Марижуана
Морфин



DDA 5 Panel
(COC/AMP/MET/COB/THC)
LOT: DDA12191M19
EXP: 01/2013

One Step
Multi-Panel Drug Test

I.D. _____



C
T

Do not allow samples to
touch plastic device

One Step
Multi-Panel Drug Test

NEG. POS.
(-) (+)

Скачать



СОГЛАСОВАНО
" 20 " 08 20 15 г.
Подпись _____