

Иглы корневые граненные (в дальнейшем – иглы) предназначены для медикаментозной обработки корневых каналов зуба.

Иглы предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях.

Иглы предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ 4.2).

Количество изделий в одной упаковке 500 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Иглы изготовлены из стальной углеродистой проволоки I или III класса ГОСТ 9389-75.

Установленный ресурс до списания – не менее 4 обработок корневых каналов зуба.

Средний ресурс до списания – не менее 10 обработок корневых каналов зуба.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Иглы дезинфицируются сухим горячим воздухом при температуре $(120^{+4})^{\circ}\text{C}$, время выдержки (45^{+5}) мин.

Предстерилизационная очистка игл проводится предварительным ополаскиванием проточной водой в течение $(0,5^{+0,1})$ мин, замачиванием в моющем растворе "Биолот" при температуре $(40^{+5})^{\circ}\text{C}$ в течение (15^{+1}) мин, мойкой игл в растворе "Биолот" в течение $(0,5^{+0,1})$ мин, ополаскиванием проточной водой в течение (3^{+1}) мин, ополаскиванием дистиллированной водой в течение $(0,5^{+0,1})$ мин, и сушкой горячим воздухом при температуре $(85^{+2})^{\circ}\text{C}$ до полного исчезновения влаги.

Иглы стерилизуются сухим горячим воздухом при температуре $(180^{+2})^{\circ}\text{C}$, время выдержки (60^{+5}) мин.

Серв. примеч.

Сприн. №

Подпись и дата

Имя, № дубля

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2 вкл	168-88	10.02.88	0802.7.051.000 3Т			
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Налобат	10.02.88		ИГЛЫ КОРНЕВЫЕ ГРАНЕНЫЕ		
Проект	Утышев	10.02.88		Лист	Лист	Листов
ГЛАВНОСТ.	Чикишев	10.02.88		A	2	3
И. ком. пр.	Салихьянова	10.02.88		ЭТИКЕТКА		
Утвердил						

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

2^③Предельный срок защиты без переконсервации 3 года

Дата выпуска и консервации _____

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Иглы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40⁰С и относительной влажности 80% при 25⁰С, воздух не должен содержать коррозионно-активных примесей.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Иглы соответствуют техническим условиям ТУ 64-I-959-77 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ^③ _____

Представитель ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2^③Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением этикетки по адресу: 420022, Казань, ул. С. Сайдешева, 12 Казанский медико-инструментальный завод.

И. № подл. 1815684
Подпись и дата 12.03.84
Взам. инв. №
Инв. № дубл.

3 560-87 11- 2.1.17

0802.7.051.000 ЗТ

Лист

3