


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия: «АППАРАТ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «Узормед®» по ТУ 26.60.13-002-20734945-2017 в 5-ти исполнениях в составе с принадлежностями», производства ООО БИНОМ, Россия.



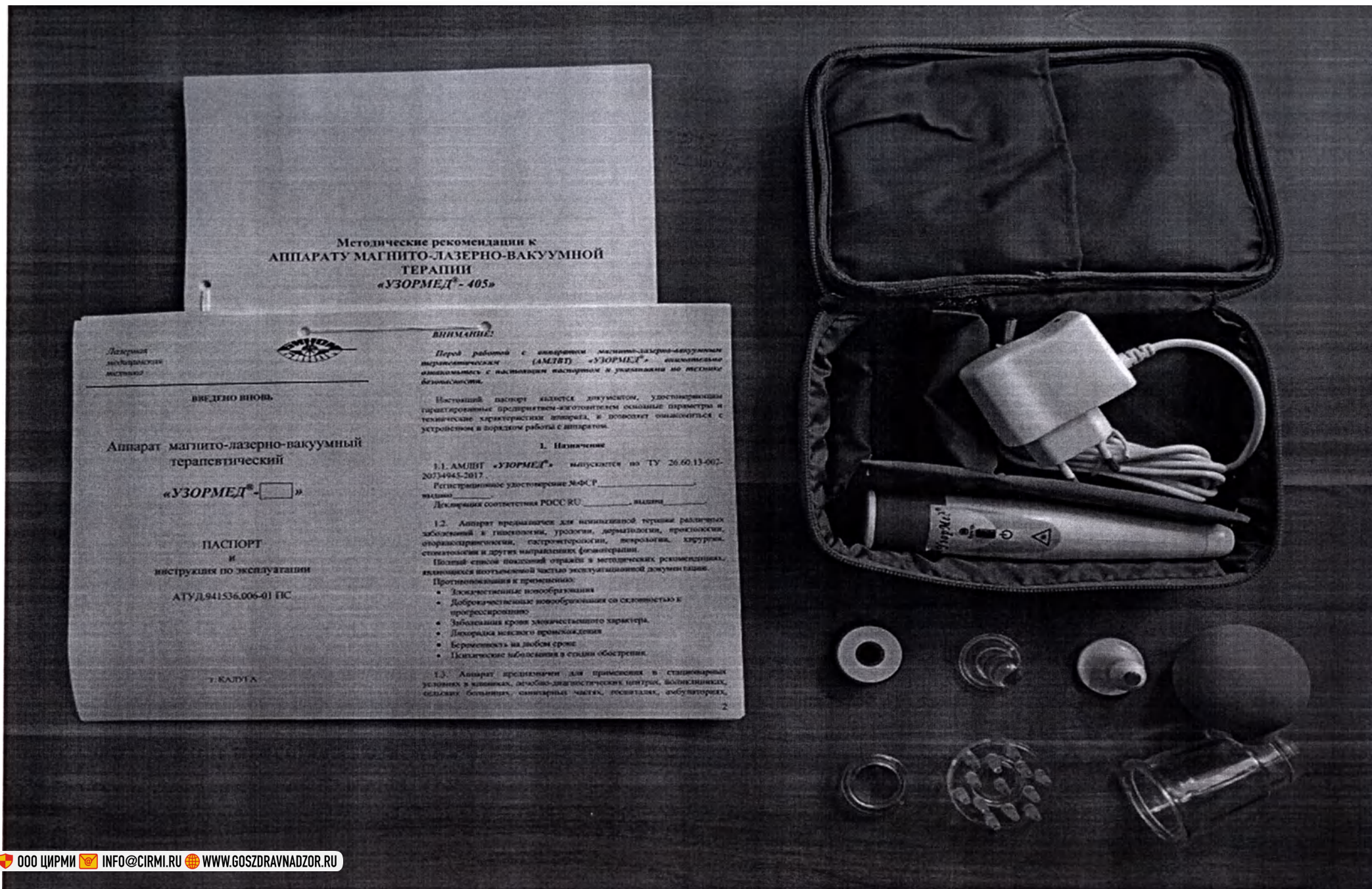

Методические рекомендации к
АППАРАТУ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ
ТЕРАПИИ «УЗОРМЕД®-650»

Автор: Е.Л. Малиновский
кандидат медицинских наук

Лазерное
медицинское
устройство



ВВЕДЮ В ИСП.

Аппарат магнито-лазерно-вакуумный
терапевтический

«УЗОРМЕД®-☐»

ПАСПОРТ
и
инструкция по эксплуатации

АТУД.941536.006-01 ПС

г. КАЛУГА

ВНИМАНИЕ!

Перед работой с аппаратом магнито-лазерно-вакуумным
терапевтическим (АМЛВТ) «УЗОРМЕД®» внимательно
ознакомьтесь с настоящим паспортом и указаниями по технике
безопасности.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим
принятые на предприятии-изготовителе основные параметры и
технические характеристики аппарата, и позволяет ознакомиться с
устройством и порядком работы с аппаратом.

1. Назначение

1.1. АМЛВТ «УЗОРМЕД®» выпускается по ТУ 26.60.13-002-
20734945-2017.

Регистрационное удостоверение №ФСР _____,
выдано _____.

Декларация соответствия РОССТУД. _____, выдана _____.

1.2. Аппарат предназначен для неинвазивной терапии различных
заболеваний в гинекологии, урологии, дерматологии, проктологии,
отоларингологии, гастроэнтерологии, неврологии, хирургии,
стоматологии и других направлениях физиотерапии.

Полный список показаний отражен в методических рекомендациях,
являющихся неотъемлемой частью эксплуатационной документации.


Противопоказания к применению:

- Злокачественные новообразования
- Доброкачественные новообразования со склонностью к
прогрессированию
- Заболевания крови злокачественного характера
- Дисorders неясного происхождения
- Беременность на любом сроке
- Психические заболевания в стадии обострения

1.3. Аппарат предназначен для применения в стационарных
условиях и в домашних, лечебно-диагностических центрах, поликлиниках,
сельских больницах, санаториях, частях, госпиталях, диспансерах.





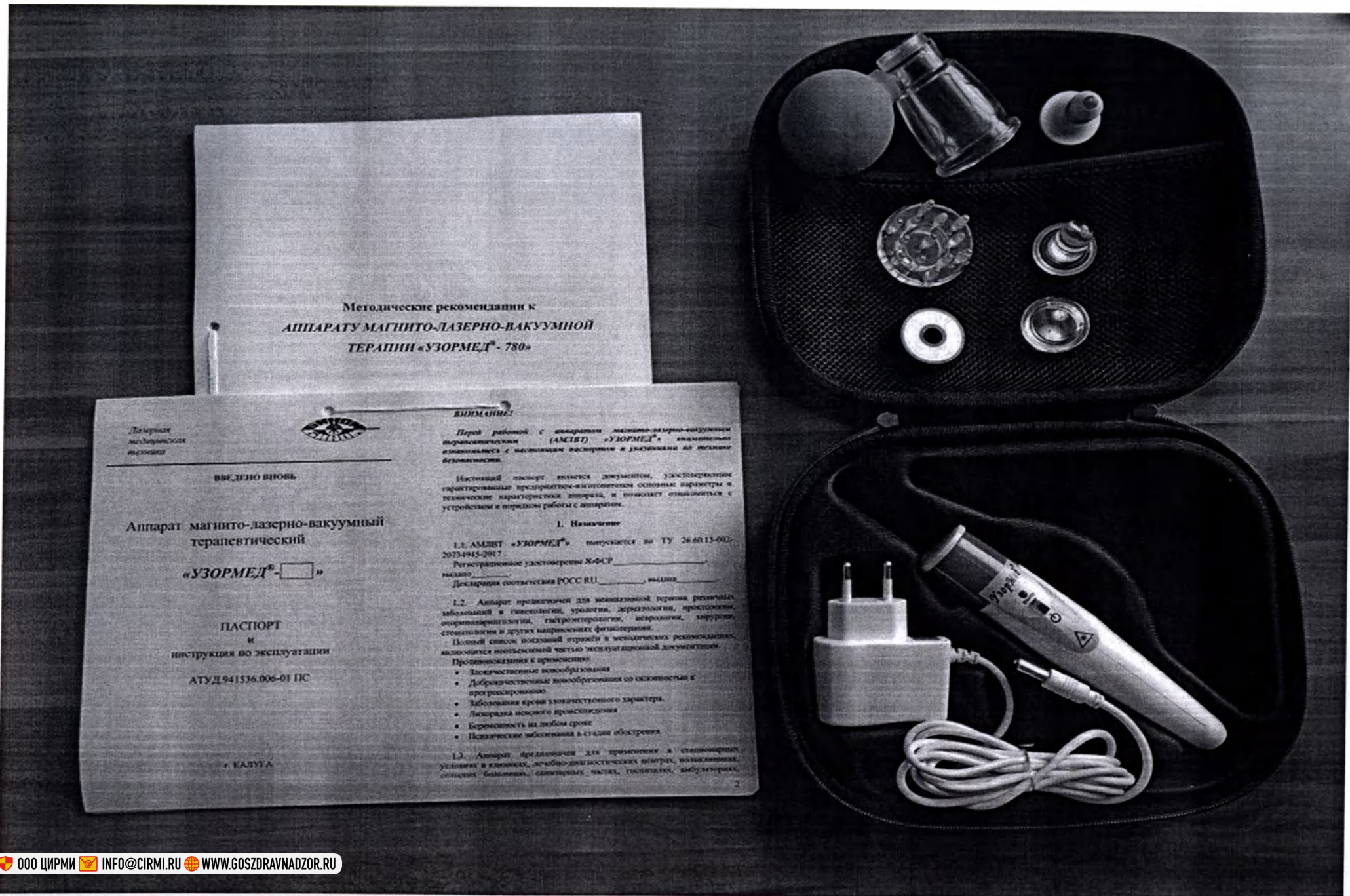



АППАРАТ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «Узормед®» по ТУ 26.60.13-002-20734945-2017 в 5-ти исполнениях в составе с принадлежностями, исполнение «Узормед® - 890».

**Методические рекомендации к
АППАРАТУ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-
ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «УЗОРМЕД»[®]-890»**

Aspergillus
medicinalis
racemosa



参考文献

Аппарат магнито-лазерно-вакуумный
терапевтический
«УЗОРМЕД[®] - 890»

ПАСПОРТ
и
инструкция по эксплуатации

ATUD 941536.006 HC

APPENDIX

Перед работами с аммиачной азотной-серной азотной
терминальными (АМЗТ) «СТОПНЕД» аммиачной
удобрениями с аммиачной азотной и серной азотной
безопасности.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантируемые производителем и изготовителем основные параметры и технические характеристики эталона, и подлежит ознакомлению с содержанием и проведением работы с аппаратом.

К. НАПОЧЕНИЕ

1.1 АМЛПГ «УЗОРМЕД» с одобрения от ТУ 26.00.13-002-
20734945-2017.

Регистрационный удостоверение № ДСР _____
Выдан _____
Декларация о соответствии РСТ: RU _____


1.2. Ассортимент представляет собой совокупность различных видов растений и грибов, животных, микроорганизмов, насекомых, беспозвоночных, позвоночных, высших растений и других живых организмов, населяющих территорию.

- [illegible]

4.2. Адреса для отправки для примечаний и замечаний
в журнал в колонках: «Имя», «Адрес», «Телефон», «Почта»
«Служба», «Место», «Содержание», «Самостоятельные работы», «Результаты»



АППАРАТ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «Узормед®» по ТУ 26.60.13-002-20734945-2017 в 5-ти исполнениях в составе с принадлежностями, исполнение «Узормед® - 890».

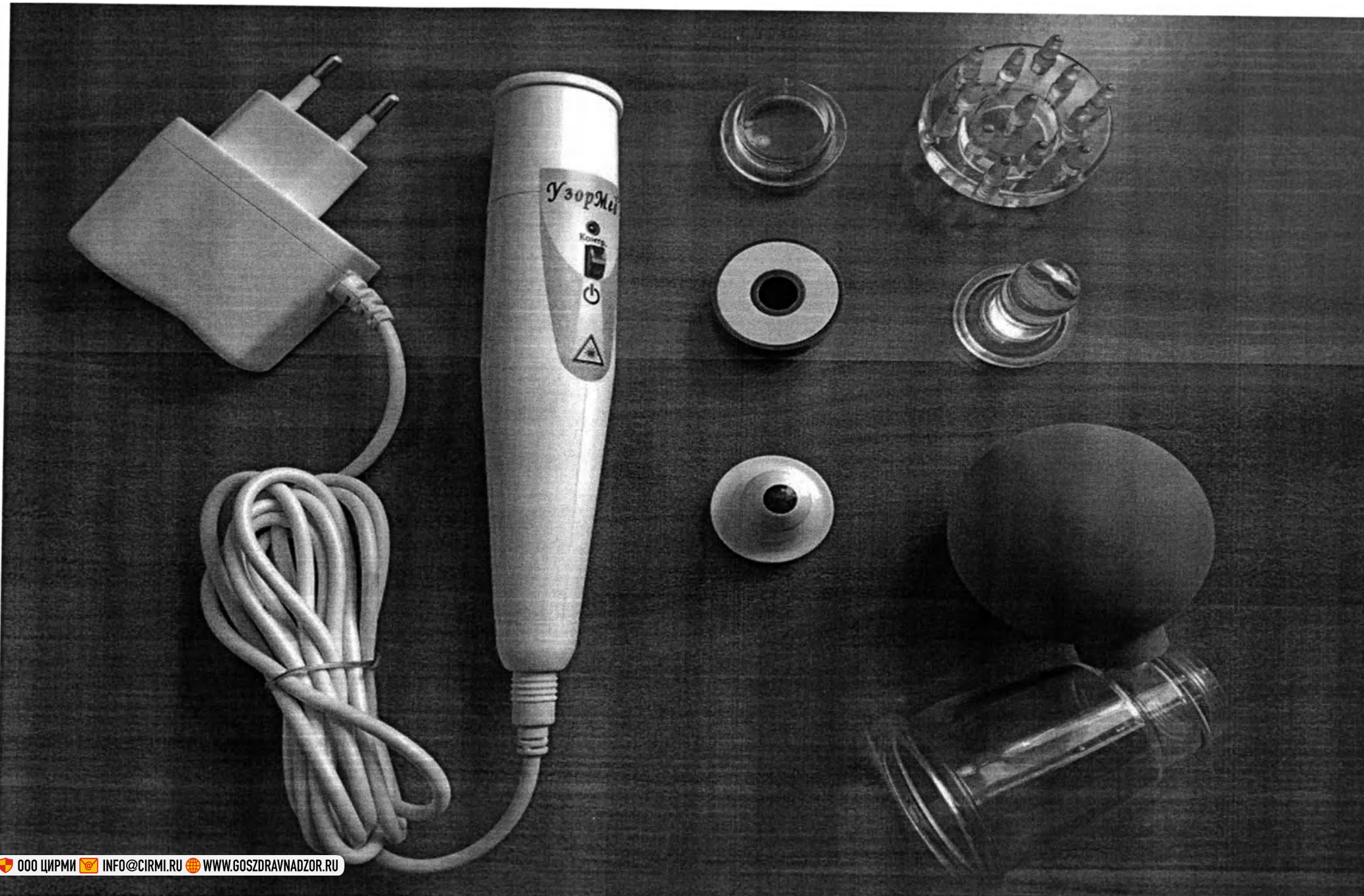

Методические рекомендации к
АППАРАТУ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ
ТЕРАПИИ «УЗОРМЕД®-900»

Лазерная
медицинская
техника



ВВЕДЕНО ВНОВЬ

Аппарат магнито-лазерно-вакуумный
терапевтический

«УЗОРМЕД®- ☐ »

ПАСПОРТ
и
инструкция по эксплуатации

АТУД.941536.006-01 ПС

г. КАЛУГА

ВНИМАНИЕ!

Перед работой с аппаратом магнито-лазерно-вакуумной
терапевтической (АМЛВТ) «УЗОРМЕД®» внимательно
ознакомьтесь с настоящим паспортом и инструкцией по технике
безопасности.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим
гарантированное соответствие изготовителем основных параметров и
технические характеристики аппарата, и позволяет ознакомиться с
устройством и порядком работы с аппаратом.

1. Назначение

1.1. АМЛВТ «УЗОРМЕД®» выпускается по ТУ 26.60.13-002-
20734945-2017.

Регистрационное удостоверение №ФСР _____

выдан _____

Декларация соответствия РОСС RU: _____

1.2. Аппарат предназначен для неинвазивной терапии различных
заболеваний в гинекологии, урологии, дерматологии, проктологии,
оториноларингологии, гастроэнтерологии, неврологии, хирургии,
стоматологии и других направлениях физиотерапии.

Полный список показаний описан в методических рекомендациях,
являющихся неотъемлемой частью эксплуатационной документации.

Противопоказания к применению:

- Заболевания половой системы
- Доброкачественные новообразования с склонностью к
прогрессированию
- Заболевания крови, связанные с нарушением
коагуляции
- Любые виды тяжелой патологии
- Беременность на любом сроке
- Психические заболевания в стадии обострения

1.3. Аппарат предназначен для применения в стационарных
условиях в клиниках, лечебно-диагностических центрах, поликлиниках,
офтальмологических, стоматологических, дерматологических, гинекологических,
ухо-носо-горловых, детских, психиатрических, неврологических, онкологических,
хирургических, урологических, дерматологических, проктологических, стоматологических,
оториноларингологических, гастроэнтерологических, неврологических, хирургических,
стоматологических и других направлениях физиотерапии.



АППАРАТ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «Узормед®» по ТУ 26.60.13-002-20734945-2017 в 5-ти исполнениях в составе с принадлежностями, исполнение «Узормед® - 900».



Принадлежности к изделию: «АППАРАТ МАГНИТО-ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «Узормед®» по ТУ 26.60.13-002-20734945-2017 в 5-ти исполнениях в составе с принадлежностями»:

1. магнитная насадка МН;
2. световодная насадка ПН;
3. световодная насадка для косметологии (НС-К);
4. световодная насадка для оториноларингологии (НС-ЛОР);
5. световодная насадка-расчёска (НР);
6. лазерно-вакуумная насадка (ЛВН).



печатью 13 лист
ООО «БИНОМ»
Директор Чернов А.В.

