

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ГК Пальма"



О.В. Якубович

2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Простыни одноразовые нестерильные

по ТУ 32.50.50- 016-83228278-2017

1. Наименование

Простыни одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-016-83228278-2017,

в исполнениях:

1. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм
2. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм
3. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм
4. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм
5. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
6. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм
7. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм
8. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм
9. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм
10. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
11. Простыня нетканая зеленая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
12. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
13. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
14. Простыня нетканая зеленая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
15. Простыня нетканая голубая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
16. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
17. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
18. Простыня нетканая голубая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
19. Простыня нетканая белая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
20. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
21. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
22. Простыня нетканая белая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
23. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
24. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
25. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
26. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
27. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
28. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
29. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
30. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм

31. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
32. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
33. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
34. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
35. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
36. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
37. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
38. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
39. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
40. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
41. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
42. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
43. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
44. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
45. Простыня нетканая зеленая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
46. Простыня нетканая голубая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
47. Простыня нетканая белая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
48. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм с липким

71. Простыня влагозащитная нетканая белая размером (1400±60)х(2000±60)мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40±10)мм

72. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700\pm60)\times(1400\pm60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
73. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400\pm60)\times(2000\pm60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
74. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700\pm60)\times(1400\pm60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
75. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400\pm60)\times(2000\pm60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
76. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700\pm60)\times(1400\pm60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм
77. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400\pm60)\times(2000\pm60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

2. Назначение

Простыни используются для ухода за лежащими больными, а также в качестве разовой подстилки при обследовании и амбулаторном приеме больных.

3. Область применения

Простыни одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50 - 016-83228278-2017 используются в качестве защиты для кроватей, больничных кушеток и кресел в стационарных и амбулаторных медицинских учреждений а также в домашних условиях.

4. Показания для применения

Предназначены для применения в качестве защиты для кроватей, больничных кушеток и кресел в стационарных и амбулаторных медицинских учреждений, а также в домашних условия, как высококвалифицированным медицинским персоналом, так и младшим медицинским персоналом и пациентами.

5. Противопоказания для применения

Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

6. Возможные побочные эффекты при применении.

Побочные эффекты при использовании простыней не выявлены.

7. Меры предосторожности при применении

Использование простыней не требует никаких мер предосторожности.

8. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

Простыни транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования простыней - по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Условия хранения простыней на складах поставщика и потребителя должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

9. Срок годности

Гарантийный срок годности простыней – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортирования, указанных в п.8

10. Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Пальма» (ООО «ГК Пальма»).

Адрес: Россия, 117105 г. Москва, Нагорный проезд, д 12, корп. 1, этаж 3, пом. II ком. № 15

Телефон: (495)921-37-19,

www.palma-med.ru.

Место производства медицинского изделия: Россия, 117105, г. Москва, пр. Нагорный, д.12, корп.1

11. Комплектация

В комплект поставки Простыней должны входить:

- простыня одного исполнения, типа, цвета и размера в количестве 1,2,3,4 либо кратное 2-м или 5-ти шт., но не более 50шт.
- этикетка - 1 шт.

- упаковка – 1 шт.

12. Технические характеристики

На поверхности Простыни не допускаются разрывы и складки.

Для влагозащитных бумажно-полиэтиленовых и влагозащитных нетканых простыней не допускается отсутствие полиэтиленового покрытия.

На липком элементе не допускается наличие запрессованных складок.

Поверхностная плотность влагозащитных бумажно-полиэтиленовых Простыней должна быть не менее 30 г/м².

Поверхностная плотность Простыней нетканых и Простыней влагозащитных нетканых должна быть не менее 15 г/м².

Сопротивление отслаиванию липкого элемента должно быть не менее 25 Н/м.

Влагостойкость Простыней влагозащитных бумажно-полиэтиленовых и Простыней влагозащитных нетканых должна быть не более 20 капель/м².

Разрушающее усилие материала Простыни в сухом состоянии в продольном направлении должно быть не менее 200Н/м, в сухом состоянии в поперечном направлении - не менее 100 Н/м.

Разрушающее усилие материала Простыни во влажном состоянии в продольном направлении должно быть не менее 100Н/м, во влажном состоянии в поперечном направлении - не менее 50 Н/м.

13. Порядок работы с изделием. Требования к применению и эксплуатации.

Вскрыть упаковку, вынуть и расправить простыню. Применить по назначению.

14. Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

Использованные изделия Простыни одноразовые нестерильные относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №163).

Сшито и заверено печатью 2
(Сшито) лист 05




Генеральный директор
Якубович О.В.

[Handwritten signature]



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "ГК Пальма"

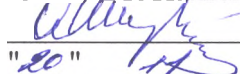
"20" 2017 г. О.В. Якубович

ЭТИКЕТКА

Простыни одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-016-83228278-2017, в следующих исполнениях:

1. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм
2. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм
3. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм
4. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм
5. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
6. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм
7. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм
8. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм
9. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм
10. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
11. Простыня нетканая зеленая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
12. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
13. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
14. Простыня нетканая зеленая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
15. Простыня нетканая голубая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
16. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
17. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
18. Простыня нетканая голубая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
19. Простыня нетканая белая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
20. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
21. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
22. Простыня нетканая белая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
23. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
24. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
25. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
26. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
27. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
28. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
29. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
30. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
31. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером

короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

59. Простыня нетканая зеленая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

60. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

61. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

62. Простыня нетканая голубая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

63. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

64. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

65. Простыня нетканая белая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

66. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

67. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

68. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

69. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

70. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

71. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

72. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

73. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

74. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

75. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

76. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

77. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

- назначение: «для ухода за лежачими больными, а также в качестве разовой подстилки при приеме больных»

- количество изделий;

- слово «нестерильные», «одноразовые»;

- номер партии с обозначением цвета;

- дата изготовления (месяц, две последние цифры года);

- годен до ... (указывают месяц и две последние цифры года);

- номер регистрационного удостоверения и дата регистрации;

- штрих-код;
- знак соответствия;
- номер упаковщика;
- Условия транспортирования – по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150

Условия хранения – по условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150 «Хранить в защищенном от солнечного света месте», или символы «Не допускать воздействие солнечного света», «Беречь от влаги», «Температурный диапазон» по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

- Условия утилизации: Простыни одноразовые стерильные относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).
- символы применяемые при маркировании медицинского изделия, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Пальма» (ООО «ГК Пальма»).

Адрес: Россия, 117105 г. Москва, Нагорный проезд, д 12, корп. 1, этаж 3, пом. II ком. № 15.

Телефон: (495)921-37-19, www.palma-med.ru.

Адреса места производства медицинского изделия: Россия, 117105, г. Москва, пр. Нагорный, д.12, корп.1

ООО «ГК ПАЛЬМА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГК Пальма»



О.В. Якубович

«20»

1 2017г.

Простыни одноразовые нестерильные

ЭТИКЕТКА

2017

1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Простыни одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-016-83228278-2017, в следующих исполнениях:

1. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм
2. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм
3. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм
4. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм
5. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
6. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм
7. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм
8. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм
9. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм
10. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
11. Простыня нетканая зеленая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
12. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
13. Простыня нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
14. Простыня нетканая зеленая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
15. Простыня нетканая голубая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
16. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
17. Простыня нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
18. Простыня нетканая голубая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
19. Простыня нетканая белая размером $(450\pm 50)\times(450\pm 50)$ мм
20. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(800\pm 60)$ мм
21. Простыня нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
22. Простыня нетканая белая размером $(800\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
23. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
24. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
25. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
26. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
27. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700\pm 60)\times(1400\pm 60)$ мм
28. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм
29. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
30. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
31. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(350\pm 50)\times(350\pm 50)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
32. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(650\pm 60)$ мм с липким элементом по одной стороне шириной (40 ± 10) мм
33. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
34. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
35. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая зеленая размером $(650\pm 60)\times(2000\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
36. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(900\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
37. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером $(650\pm 60)\times(1200\pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм
38. Простыня влагозащитная бумажно-полиэтиленовая голубая размером

64. Простыня нетканая белая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по

короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

65. Простыня нетканая белая размером $(800 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

66. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

67. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

68. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

69. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

70. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

71. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по длинной стороне шириной (40 ± 10) мм

72. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

73. Простыня влагозащитная нетканая зеленая размером $(1400 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

74. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

75. Простыня влагозащитная нетканая голубая размером $(1400 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

76. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(700 \pm 60) \times (1400 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

77. Простыня влагозащитная нетканая белая размером $(1400 \pm 60) \times (2000 \pm 60)$ мм с липким элементом по короткой стороне шириной (40 ± 10) мм

предназначены для ухода за лежащими больными, а также в качестве разовой подстилки при обследовании и амбулаторном приеме больных.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Коды: ОКП 93 9370

ОКПД2 32.50.50.000

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. На поверхности Простыни не допускаются разрывы и складки. Для влагозащитных бумажно-полиэтиленовых и влагозащитных нетканых простыней не допускается отсутствие влагозащитного покрытия.

3.2. На липком элементе не допускается наличие запрессованных складок.

Этикетка

Лист

4

3.3. Поверхностная плотность влагозащитных бумажно-полиэтиленовых Простыней должна быть не менее 30 г/ м².

3.4. Поверхностная плотность Простыней нетканых и Простыней влагозащитных нетканых должна быть не менее 15 г/ м².

3.5. Сопротивление отслаиванию липкого элемента должно быть не менее 25 Н/м.

3.6. Влагостойкость Простыней влагозащитных бумажно-полиэтиленовых и Простыней влагозащитных нетканых должна быть не более 20 капель/м².

3.7. Разрушающее усилие материала Простыни в сухом состоянии в продольном направлении должно быть не менее 200Н/м, в сухом состоянии в поперечном направлении - не менее 100 Н/м.

Разрушающее усилие материала Простыни во влажном состоянии в продольном направлении должно быть не менее 100Н/м, во влажном состоянии в поперечном направлении - не менее 50 Н/м.

3.10. Простыни в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании и хранении по условиям хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вскрыть упаковку, вынуть и расправить простыню. Применить по назначению.

5. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения простыней на складах поставщика и потребителя должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

6. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЙ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ

В комплект поставки Простыней должны входить:

- простыня одного исполнения, типа, цвета и размера в количестве 1,2,3,4 либо кратное 2-м или 5-ти шт., но не более 50шт.
- этикетка - 1 шт.

Этикетка

Лист

5

- упаковка — 1 шт.

7. ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ТУ 32.50.50 - 016-83228278-2017.

8. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЯ

Простыни одноразовые нестерильные соответствуют техническим условиям ТУ 32.50.50-016-83228278-2017 и признаны годными к эксплуатации.

Ставится знак, указывающий о соответствии, номер регистрационного удостоверения МЗ РФ и дата регистрации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие средства всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности изделия — 5 лет с даты изготовления.


10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ ОТК

Ставится штамп ОТК

11. ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ

Указывается номер партии с обозначением цвета, дата изготовления и срок годности.

Сшито и заверено печатью 10
(Десять) лист 26

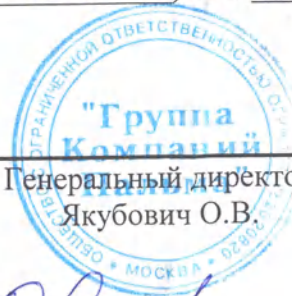

Генеральный директор
Якубович О.В.