

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»
В.П. Чуев
2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического подкладочного компомерного
светового отверждения
«ИЗОЛАЙН»
ТУ 9391-115-45814830-2008

НАЗНАЧЕНИЕ

«Изолайн» применяется в качестве подкладки (непрямая изоляция пульпы) под композитные реставрации.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Изолайн» - однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный материал, содержащий гидроксиапатит, стеклоиономерный наполнитель, полимерное связующее, инициаторы и активаторы полимеризации.

Материал «Изолайн» обладает фторовыделением, стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами. Материал «Изолайн» позволяет компенсировать внутренние напряжения, возникающие в процессе полимеризационной усадки композитных материалов. Контролируемое короткое время отверждения (20 секунд) и насадки для прямого нанесения создают дополнительные удобства в использовании материала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Провести подготовку кариозной полости зуба в соответствии с общепринятыми методиками. При пломбировании глубоких полостей на участок дентина, находящийся в непосредственной близости к пульпе, следует нанести лечебный материал, содержащий гидроокись кальция.

Внимание! Недопустимо применение эвгенолсодержащих стоматологических материалов.

Подготовленную поверхность зуба протравить гелем на основе ортофосфорной кислоты в соответствии с инструкцией используемого материала, промыть и высушить.

Для достижения максимального сцепления материала с тканями зуба рекомендуется провести обработку поверхности зуба «ДентЛайт» адгезивом, в противном случае величина адгезии материала будет сопоставима с адгезией стеклоиономерных цемента.

Нанести материал «Изолайн» на подготовленную поверхность зуба, используя насадку к шприцу и распределить слоем не более 1 мм.

Провести отверждение подкладочного материала «Изолайн» светом галогеновой лампы длиной волны 450-500 нм в течение 20-30 сек. Торец световода необходимо держать в непосредственной близости к отверждаемому материалу. Если источник света невозможно близко поднести к материалу, то необходимо продлить время отверждения.

Дальнейшее восстановление кариозной полости провести в соответствии с инструкцией используемого композитного материала.

Внимание! «Изолайн» - светоотверждаемый материал, поэтому по окончании работы с материалом необходимо снять дозировочную насадку и накрутить защитный колпачок.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	- 2 г
Иглы изогнутые	- 5 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом *темном* месте при температуре от +5°C до +25°C.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Срок годности – 2 года.

Несоблюдение условий хранения сокращает срок годности материала и может привести к изменению рабочих характеристик материала.

