


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ПКФ Центр Моды
«Медстильсервис»


Д. Ю. Бурцев

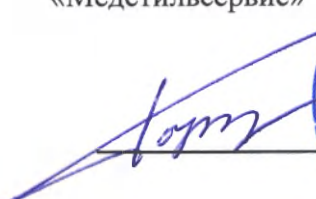

Костюмы медицинские хирургические мужские
по ТУ 9398-001-46823190-2003

Инструкция по применению

2018

Назначение и область применения медицинского изделия

Костюмы медицинские хирургические мужские (в дальнейшем – Костюм(ы)), предназначены для медицинского персонала лечебных учреждений.

Область применения – стационарные, амбулаторные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Показания для применения медицинского изделия

Для ношения медицинским персоналом лечебных учреждений.

Противопоказания для применения медицинского изделия

Индивидуальная непереносимость компонентов ткани.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции – побочные действия отсутствуют.

Основные технические характеристики.

Костюм состоит из блузона и брюк. В зависимости от эксплуатации и конструкции костюмы изготавливаются двух типов:

Тип А – состоит из блузона с застёжкой спереди и брюк, предназначен для медицинского персонала лечебных учреждений (рис.1).

Тип Б - состоит из блузона (без застёжки) и брюк, предназначен для медицинского персонала хирургических отделений лечебных учреждений (рис.2)

В костюмах типа А блузон с центральной бортовой застёжкой. На полочках два боковых кармана, на левой полочке - два нагрудных кармана. Спинка на кокетке, со швом посередине, по линии талии - хлястики, скреплённые между собой двумя пуговицами. В боковых швах - разрезы. Рукава втачные, длинные.

Брюки на притачном поясе, стянутом по линии талии лентой эластичной, на передних половинках карманы с отрезным бочком.

В костюмах типа Б перед блузона с V-образным вырезом, с двумя боковыми карманами и двумя нагрудными карманами слева. В боковых швах - разрезы. Рукава втачные короткие.

Брюки на притачном поясе, стянутом по линии талии лентой эластичной, на правую заднюю половинку настрочен накладной карман.



Рис.1



Рис.2

Допускается изготавливать

Блузоны:

- с кокетками различной формы и размеров;
- с различными видами, размерами, количеством и местом расположения карманов или без них;
- с рукавами различного покрова и длины, со шлицами, с манжетами или без них, с различными видами регулировок внизу по обхвату руки, различными видами оформления низа рукавов;
- с различной формой воротника и без него;
- с различными рельефами, складками и отделочными строчками;
- со шлицами или разрезами в среднем шве спинки, боковых швах или рельефах;
- с различными видами застёжки переда или спинки;
- с различными видами хлястиков и без них;
- с различными видами отделок.

Брюки:

- различной длины;
- с различными видами и местом расположения карманов и без них;
- с различными видами регулировок по линии талии и низу брюк;
- с гульфиком.

Размеры блузона и брюк соответствуют указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Обозначение роста	Размер, см	
	Рост типовой фигуры человека	Интервал роста человека
2	158, 164	155,0-166,9
4	170, 176	167,0-178,9
6	182, 188	179,0-191,0

Таблица 2

Обозначение размера	Размер, см	
	Обхват груди типовой фигуры человека	Интервал обхвата груди человека
44	88	86,0-89,9
46	92	90,0-93,9
48	96	94,0-97,9
50	100	98,0-101,9
52	104	102,0-105,9
54	108	106,0-109,9
56	112	110,0-113,9
58	116	114,0-117,9
60	120	118,0-123,0

Измерения готовых изделий соответствуют указанным Приложении А к данной инструкции, таблица 3 и рис. 3, 4

Костюмы изготавливаются из ткани сорочечной или костюмной отбеленной и гладкокрашеной.

Порядок работы с изделием

1. Подобрать костюм необходимого типа и размера.
2. Надеть его на себя, застегнуть пуговицы (если имеются).

Уход за изделием

После носки Костюмы подлежат стирке в воде с добавлением дезинфицирующих антибактериальных средств для стирки. Температурный режим стирки от 40°C до 85°C, время стирки 20-40 минут в зависимости от загрязнения изделия, а так же, при необходимости, к дезинфекции методами согласно МУ-287-113. Сушка допускается в стиральной машине (режим сушки), а также на плечиках, сушилке для белья или бельевой веревке при комнатной температуре.

При необходимости, костюм отгладить.

Костюмы гарантировано выдерживают 50 обработок.

Комплектность

Костюм выпускаются в следующей комплектности:

- Блузон - 1 шт.
- Брюки - 1 шт.
- Этикетка (ярлык) - 1 шт.
- Потребительская упаковка (пакет) - 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 экз.

Маркировка

На этикетке (ярлыке), прикреплённой на изделие указано:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
- координаты изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- номер модели;
- размер, рост;
- дата изготовления.

Упаковка

Костюмы упакованы в пакет из полиэтилена, затем костюмы в потребительской упаковке уложены в коробки из гофрированного картона. Инструкция по применению уложена в пакет из полиэтиленовой пленки и вложена в транспортную тару (картонная коробка). Картонная коробка оклеена лентой полимерной с липким слоем (скотчем).

Транспортирование и хранение

Костюмы, упакованные в транспортную тару, транспортируются в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Рекомендуемая температура транспортирования от -50°C до +50°C.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +40°C

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие костюмов требованиям ТУ 9398-001-46823190-2003 при соблюдении потребителями условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных настоящей инструкции по применению.

Гарантийный срок использования не менее 12 месяцев со дня отгрузки костюмов потребителю.

Костюм сохраняет свойства в течение всего срока использования (при соблюдении правил хранения и применения), а также после стирок и проведения дезинфекционной обработки, в соответствии с нормативно-технической документацией.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация производится в соответствии с инструкциями, утвержденными в медицинском учреждении и согласно правил и норматива СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса А.

Производитель медицинского изделия

Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма Центр Моды «Медстильсервис» (ЗАО «ПКФ Центр Моды «Медстильсервис»):

Адрес (место нахождения): Россия, 127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корпус 2

E-mail: zakaz@msservic.ru

Тел. +7 (495) 646-34-71, 646-34-73

Костюмы соответствуют требованиям национальных стандартов: ГОСТ 31399-2009

Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды; ГОСТ Р ИСО 10993-2 и серии ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Инструкция выпущена впервые (2018)

Измерения готовых изделий



Рис.3. Костюм. Тип А



Рис.4. Костюм. Тип Б

см

Таблица 3

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ									Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
	БЛУЗОН												
1	Длина спинки											1	
	Тип А	2	158-164	77,5	78,5	78,5	78,5	79,5	79,5	79,5	80,5	80,5	±1,0
		4	170-176	80,5	81,5	81,5	81,5	82,5	82,5	82,5	83,5	83,5	
		6	182-188	83,5	84,5	84,5	84,5	85,5	85,5	85,5	86,5	86,5	
	Тип Б	2	158-164	70,5	71,5	71,5	71,5	72,5	72,5	72,5	73,5	73,5	±1,0
		4	170-176	73,5	74,5	74,5	74,5	75,5	75,5	75,5	76,5	76,5	
		6	182-188	76,5	77,5	77,5	77,5	78,5	78,5	78,5	79,5	79,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте												
	ТипА	2-6	158-188	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	±0,5
	Тип Б	2-6	158-188	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа												
	ТипА	2	158-164	78,6	80,1	80,6	81,1	82,6	83,3	84,0	85,7	86,4	±1,0
		4	170-176	81,6	83,1	83,6	84,1	85,6	86,3	87,0	88,7	89,4	
		6	182-188	84,6	86,1	86,6	87,1	88,6	89,3	90,0	91,7	92,4	
	Тип Б	2	158-164	71,8	73,3	73,8	74,3	75,8	76,5	77,2	78,9	79,6	±1,0
		4	170-176	74,8	76,3	76,8	77,3	78,8	79,5	80,2	81,9	82,6	
		6	182-188	77,8	79,3	79,8	80,3	81,8	82,5	83,2	84,9	85,6	

Измерения готовых изделий



Рис.3. Костюм. Тип А



Рис.4. Костюм. Тип Б

см

Таблица 3

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ									Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
	БЛУЗОН												
1	Длина спинки											1	
	Тип А	2	158-164	77,5	78,5	78,5	78,5	79,5	79,5	79,5	80,5	80,5	±1,0
		4	170-176	80,5	81,5	81,5	81,5	82,5	82,5	82,5	83,5	83,5	
		6	182-188	83,5	84,5	84,5	84,5	85,5	85,5	85,5	86,5	86,5	
	Тип Б	2	158-164	70,5	71,5	71,5	71,5	72,5	72,5	72,5	73,5	73,5	±1,0
		4	170-176	73,5	74,5	74,5	74,5	75,5	75,5	75,5	76,5	76,5	
		6	182-188	76,5	77,5	77,5	77,5	78,5	78,5	78,5	79,5	79,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте												
	Тип А	2-6	158-188	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	±0,5
	Тип Б	2-6	158-188	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа												
	Тип А	2	158-164	78,6	80,1	80,6	81,1	82,6	83,3	84,0	85,7	86,4	±1,0
		4	170-176	81,6	83,1	83,6	84,1	85,6	86,3	87,0	88,7	89,4	
		6	182-188	84,6	86,1	86,6	87,1	88,6	89,3	90,0	91,7	92,4	
	Тип Б	2	158-164	71,8	73,3	73,8	74,3	75,8	76,5	77,2	78,9	79,6	±1,0
		4	170-176	74,8	76,3	76,8	77,3	78,8	79,5	80,2	81,9	82,6	
		6	182-188	77,8	79,3	79,8	80,3	81,8	82,5	83,2	84,9	85,6	

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ									Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до борта в самом узком месте												
	Тип А	2-6	158-188	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	±0,5
	Ширина переда												
	Тип Б	2-6	158-188	42,0	43,2	44,4	45,6	46,8	48,0	49,2	50,4	51,6	±0,5
5	Ширина изделия на уровне глубины проймы.												
	Тип А	2-6	158-188	57,4	59,4	61,4	63,4	65,4	67,4	69,4	71,4	73,4	±1,0
	Тип Б	2-6	158-188	54,2	56,2	58,2	60,2	62,2	64,2	66,2	68,2	70,2	±1,0
6	Длина рукава от высшей точки оката до низа												
	Тип А	2	158-164	58,6	58,8	58,9	59,1	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	±1,0
		4	170-176	61,6	61,8	61,9	62,1	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	
		6	182-188	64,6	64,8	64,9	65,1	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
	Тип Б	2	158-164	26,8	27,0	27,1	27,3	27,4	28,6	28,8	29,0	29,2	±1,0
		4	170-176	28,8	29,0	29,1	29,3	29,4	30,6	30,8	31,0	31,2	
		6	182-188	28,8	29,0	29,1	29,3	29,4	30,6	30,8	31,0	31,2	
7	Ширина рукава под проймой												
	Тип А	2-6	158-188	21,8	22,6	23,4	24,2	25,2	26,1	26,9	27,8	28,6	±0,5
	Тип Б	2-6	158-188	21,8	22,6	23,4	24,2	25,2	26,1	26,9	27,8	28,6	±0,5

см

Продолжение табл.3

Продолжение табл.5														
Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ									Допускаемое отклонение	
				88	92	96	100	104	108	112	116	120		
	БРЮКИ													
1	Длина по боковому шву	2	158-164	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	104,0	104,0	104,0	104,0	±1,0	
		4	170-176	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	110,0	110,0	110,0	110,0		
		6	182-188	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	116,0	116,0	116,0	116,0		
2	Длина по шаговому шву	2	158-164	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	±1,0	
		4	170-176	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5		
		6	182-188	87,5	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	83,5		
3	Ширина на уровне среднего шва	2-6	158-188	32,5	33,7	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7	40,9	42,1	±1,0	
4	Ширина брюк в талии (при стянутой ленте эластичной)	2-6	158-188	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	±1,0	
5	Ширина брюк внизу	2-6	158-188	20,0	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	24,8	±1,0	

Генеральный директор
ЗАО «ЦНФ Центр Моды
«Мелстильсервис»



Д. Ю. Бурцев

Прочито, пронумеровано,
скреплено печатью

ЛИСТОВ