

«Утверждаю»
Директор ООО «Юникорн Медикл»

В. А. Фомина
« 26 » 10 2012 г.



Инструкция по применению
изделия медицинского назначения:

«Перчатки медицинские Armilla стерильные и нестерильные»,
производства Yixing HBM Latex Production Co., Ltd., KHP

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Перчатки медицинские Armilla стерильные и нестерильные предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, хирургических операциях, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациентов и исследователя/медицинских работников от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перчатки изготавливаются из латекса, поливинилхлорида (винил).

Для людей, имеющих аллергическую реакцию на натуральный латекс, следует использовать перчатки из синтетических материалов - поливинилхлорида (винил).

1. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

2. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие с внутренним синтетическим покрытием, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5);

3. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, с внутренним полиуретановым покрытием, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

4. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные без валика опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

5. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные без валика опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие с внутренним антибактериальным покрытием с адгезивной полосой, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

6. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные без валика опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие с внутренним антибактериальным покрытием, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

7. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные/нестерильные опудренные/неопудренные анатомической формы, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

8. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие синие/зеленые, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

9. Перчатки хирургические Armilla неопреновые стерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие синие/зеленые, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

10. Перчатки хирургические Armilla полиизопреновые стерильные /нестерильные неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

11. Перчатки хирургические Armilla неопреновые стерильные/нестерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

12. Перчатки хирургические Armilla изопреновые стерильные/нестерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

13. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные/нестерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие удлиненные, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

14. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные не опудренные ортопедические повышенной прочности, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

15. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

16. Перчатки хирургические Armilla латексные стерильные неопудренные с увлажнителем (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

17. Перчатки диагностические Armilla нитриловые стерильные/нестерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

18. Перчатки диагностические Armilla латексные стерильные/нестерильные опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

19. Перчатки диагностические Armilla виниловые нестерильные опудренные/неопудренные, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

20. Перчатки диагностические Armilla латексные нестерильные неопудренные с Aloe Vera, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

21. Перчатки диагностические Armilla латексные нестерильные неопудренные с уровнем pH 5,5, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
22. Перчатки диагностические Armilla латексные нестерильные опудренные с зеленой мятой, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
23. Перчатки диагностические Armilla виниловые нестерильные неопудренные с Aloe Vera, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
24. Перчатки диагностические Armilla латексные повышенной прочности, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
25. Перчатки диагностические Armilla нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
26. Перчатки диагностические Armilla нитриловые для отделений с повышенным риском инфицирования, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
27. Перчатки диагностические Armilla нитриловые повышенной прочности, (размер 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перчатки предназначены только для однократного применения.

Перчатки необходимо надевать на чистые руки, обработанные в соответствии с правилами по гигиене рук медицинского персонала, установленными соответствующими нормативными документами по гигиене рук.

Перед применением опудренных перчаток, после надевания, с них необходимо удалить пудру влажным стерильным тампоном, стерильной влажной салфеткой или иным эффективным методом.

Необходимо снимать перчатки после осуществления манипуляций с пациентом.

Нельзя использовать одну пару перчаток более, чем с одним пациентом.

Необходимо менять перчатки во время манипуляций с одним пациентом, при переходе от контаминированного участка тела к чистому.

Использованные перчатки сбрасывают в специальную емкость для сбора отходов и подвергают дезинфекции и утилизации.

4 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Перчатки очень просты в применении, их использование не требует специальных знаний и навыков:

Нестерильные перчатки:

- необходимо достать перчатку из потребительской коробки;

- удерживая перчатку за край манжеты одной рукой, ввести в нее другую руку таким образом, чтобы каждый палец занял предназначенное для него место;
- нестерильные перчатки нельзя использовать в стерильных помещениях.

Время применения одной пары перчаток должно быть непродолжительным. Рекомендуется менять перчатки не реже 1 раза в 15 минут.

Стерильные перчатки:

- применение стерильных перчаток недопустимо при нарушении целостности индивидуальной упаковки;
- необходимо достать упакованную в индивидуальный пакет пару перчаток из групповой упаковки;
- следуя указаниям на индивидуальной упаковке, открыть ее и извлечь внутреннюю индивидуальную упаковку (крафт-бумагу), в которую перчатки непосредственно упакованы;
- взять с крафт-бумаги одну перчатку (левой рукой); натянуть перчатку на кисть правой руки, держа перчатку за край манжеты большим и указательным пальцами;
- взять с крафт-бумаги вторую перчатку, засунув пальцы правой руки под отворот манжеты перчатки;
- надеть перчатку на кисть, отведя руку в сторону и слегка согнув ее в локте;
- расправить/подтянуть манжеты перчаток.

