

« 24 » / N 09 2012 г.

« 19.09.2012 г.

1. Наименование ИМН и описание: Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби», 15 мл, (Aqualor baby, 15 ml) производства «Аурена Лабораторис Эй Би», Швеция / Augena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, 653 50 Karlstad, Sweden - прозрачная бесцветная жидкость без запаха, представляющая собой раствор натуральной стерильной изотонической морской воды, расфасованный в пластиковые флаконы объемом 15 мл.

2. Состав: Натуральная стерильная изотоническая морская вода (содержание NaCl 9 г/л). Содержит все активные вещества и микроэлементы морской воды, необходимые для поддержания нормального физиологического состояния слизистой полости носа и носоглотки: K, Mg, Na, Cl, Se, I, Ca, Zn, Cu, Fe и др.

Не содержит консервантов.

3. Форма выпуска: Средство расфасовано в пластиковые флаконы объемом 15 мл.

4. Свойства:

- Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа и носоглотки;

- тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки, активно очищая их от бактерий, вирусов, аллергенов, корочек, слизи и загрязнений.

5. Показания к применению:

- Облегчение острых и хронических инфекционных и воспалительных заболеваний полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение в период эпидемии ОРВИ и гриппа;

- ежедневная гигиена полости носа.

6. Противопоказания: Ограничений к применению нет. Может применяться для детей с первых дней жизни.

7. Способ применения и дозы:

Капать по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день, при необходимости можно чаще.

В целях гигиены, а также для облегчения состояния при острых и хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях закапывают по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

Длительность и кратность применения средства не ограничены.

8. Побочные действия: не выявлены. Лекарственное взаимодействие не отмечалось.


9. Условия хранения: при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

10. Срок годности: 3 года. Использовать до даты, указанной на упаковке. После вскрытия флакона использовать в течение 45 дней.

11. Условия отпуска из аптек: без рецепта.

12. Производитель: «Аурена Лабораторис Эй Би», Швеция, «Aurena Laboratories AB», Fjärrviksvägen 22, 653 50 Karlstad, Sweden.

Генеральный директор
ЗАО «Фармамед»

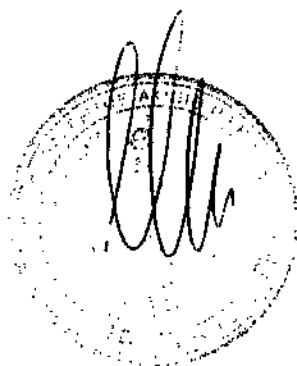

Е.В. Ерофеев