

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации-заявителя
Генеральный директор
ООО «ШУСТЕР ФАРМАСЬЮТИКЛ»

А. Б. Шустер

«20» апреля 2012 г.
М.п.



Руководство по эксплуатации

Карандаш-ингалятор «ДУПЛЕТ ВУЛКАН ДАО»

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для использования в комплексной терапии и для профилактики симптомов простуды:
-заложенности носа
-насморка
-головной боли

Обладает антисептическим действием, тонизирует.

Может применяться как средство ароматерапии.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Карандаш для ингаляций представляет собой пластмассовый тюбик с колпачком и находящимся внутри тюбика фильтром, пропитанным ингредиентами.

Габаритные размеры ингалятора, не более:

45*36*20 мм

Масса ингалятора, не более: 5±0,1г

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата

Дети моложе 7 лет

Беременность и кормление грудью

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

Снять пластиковую крышку, поднести корпус ингалятора к носу. Медленно и спокойно вдыхать и выдыхать через носовые ходы. В комплексной терапии симптомов простуды использовать 3-6 раз в день, по 2-10 вдохов за 1 прием. В целях профилактики ингаляции проводить 1-2 раза в день. Перед применением ингалятора нос должен быть хорошо очищен.

Перед первым применением необходимо провести пробную ингаляцию 2-5 вдохов для оценки индивидуальной переносимости компонентов препарата.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, исключающим попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре 15-25°C в местах, недоступных для детей.

Дезинфекцию ингалятора следует проводить химическим способом – 3-х кратным протиранием салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода.

Изготовитель гарантирует соответствие ингалятора требованиям технических условий ТУ 9398-001-85806621-2012 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности 3 года.

Главный инженер
Плотников В. П.

 Ф.И.О.