

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Гео-Оникс»

 Васин А.П.

«___» _____ 2010г.

М.п.



Инструкция

Изделия медицинские для дыхательной терапии (наименование изделия медицинского назначения)

Инструкция

Изделия медицинские для дыхательной терапии

Дыхательный контур подсоедините к выходному отверстию аппарата ИВЛ. Если необходимо, подсоедините бактериальный фильтр к выходу воздуха, затем подсоедините дыхательный контур пациента к бактериальному фильтру. При различных вариантах комплектации контура, его комплектуют влагосборниками, переходниками, камерой увлажнителя, гибким нагревателем, мешком.

Маска ларингеальная. Перед введением манжета маски должна быть полностью сдута и приобрести клиновидную форму, без каких-либо складок. Аккуратно сдуйте манжету с помощью шприца подсоединенного к трубке для раздувания/сдувания манжеты, для придания последней правильной формы необходимой для введения. Заднюю поверхность манжеты смазывают. Маска может быть введена с помощью стандартной техники «указательного пальца», в зависимости от доступа к голове пациента.

Маска кислородная с распылителем прикладывается на лицо пациента и присоединяется к источнику кислорода. Встроенный распылитель предназначен для ингаляционного введения лекарственных средств.

Маска наркозная накладывается на лицо пациента и присоединяется к дыхательной трубке.

Мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ (тестовое легкое) присоединяется к дыхательной трубке.

Мешок дыхательный типа Амбу присоединяется к маске.

Камера увлажнителя установить на нагревательную базу до щелчка, удалить защитную крышку синего цвета, потянув за кольцо. Присоединить дыхательную трубку к камере увлажнителя.

Фильтр . вирусобактериальный- подсоединить с одной стороны к аппарату ИВЛ, с другой к дыхательному контуру пациента, тепловлагообменный- подсоединить к тройнику пациента.

Тройник пациента подсоединить к дыхательной трубке

Переходник прямой подсоединить к дыхательной трубке

Т-образный переходник подсоединить к дыхательной трубке

Угловой переходник подсоединить к дыхательной трубке

Трубки дыхательные присоединяются с помощью переходников.

Влагосборник предназначен для сбора излишней влаги в вдых\выдых дыхательных смесях. Присоединяется к дыхательным трубкам.

Система очистки дыхательных путей предназначена для очистки дыхательных путей перед интубацией.

Гибкий нагреватель предназначен для контролируемого нагрева дыхательных смесей. Подсоединяется к камере увлажнителя и дыхательной трубке

-Перед использованием убедитесь в целостности упаковки, проверьте сроки годности Медицинских расходных материалов для терапии:

-**Дыхательный контур**

-**Маска ларингеальная.**

-**Маска кислородная с распылителем**

-**Маска наркозная**

-**Мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ (тестовое легкое)**

-**Мешок дыхательный типа Амбу**

-**Камера увлажнителя**

-**Фильтр .**

-**Тройник пациента**

-**Переходник прямой**

-**Т-образный переходник**

-**Угловой переходник**

-**Трубки дыхательные**

-**Влагосборник**

-**Устройство очистки дыхательных путей**

-Предварительно обработав руки раствором антисептика и надев перчатки, аккуратно вскройте упаковку, извлеките расходный материал, не нарушая его стерильность

-Проведите соответствующие манипуляции


4

-Завершив манипуляции и убедившись в правильном положении расходного материала, обработайте место операции антисептиком

-Использованная игла подлежит утилизации

Генеральный директор

ООО «Гео-Оникс»

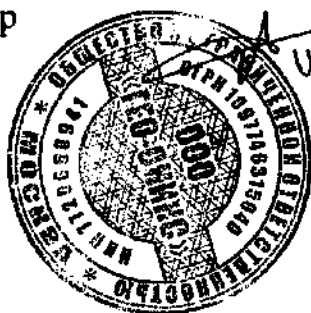

А.П.Васин



Сертификат
и
мероприятий
4.01.01

Сертификат
сертификат
Васильев А.П.