

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
массы термопластичной зуботехнической оттисковой
«МАССТЕР»
ТУ 9391-047-45814830-2000

НАЗНАЧЕНИЕ

Масса слепочная термопластичная «Масстер» применяется в зуботехнической практике для получения оттисков при изготовлении вкладок, коронок, а также для получения функциональных и компрессионных оттисков, для изготовления полных съемных протезов при лечении пациентов с полной потерей зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- «Масстер» - представляет собой многокомпонентную систему, в состав которой входят термопластичные вещества (стеарин, парафин, синтетический воск), модифицированные добавлением смолы (канифоль) и наполнителей (оксид цинка, тальк) для достижения требуемых свойств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В водяную баню, нагретую до температуры (50-60)°С, погружают стандартную оттисковую ложку и пластинку «Масстер» (желательно «Масстер» поместить на листок целлофана, пергамента или полиэтиленовой пленки).

Размягченную пластинку «Масстер» формуют пальцами в виде валика (для нижней челюсти) или в виде диска (для верхней челюсти), распределяют по поверхности нагретой стандартной ложки, вводят в полость рта и получают слепок. Полученный слепок выводят из полости рта.

После полного затвердевания по слепку отливают гипсовую модель по общепринятой технологии.

Гипсовую модель со слепком погружают в горячую воду и выдерживают до размягчения слепка, после чего он легко отделяется от гипсовой модели.

Примечание: повторно применять материал не рекомендуется.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пять пластин по 40,0 г	-	200,0 г
Инструкция по применению	-	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре от +5°С до +25°С.

Срок годности – 5 лет.

При транспортировании в зимнее время (t ниже 0°С) материал необходимо выдержать при t +18°С...+23°С в течение суток.