




ООО «Эндокарбон»

А.В. Вертаев

« 13 » мая 2015 г.

Фотографическое изображение
Устройства интрамедуллярного для остеосинтеза бедренной кости
ТУ 9438-005-76751996-2014

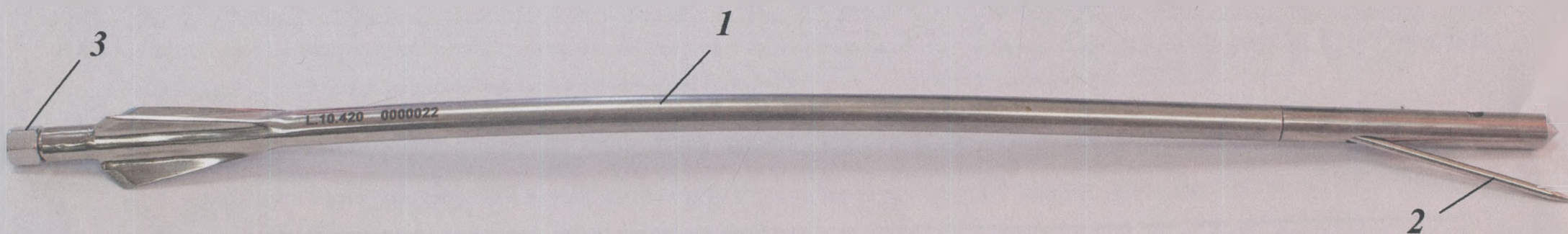

Устройство интрамедуллярное для остеосинтеза бедренной кости по ТУ 9438-005-76751996-2014

- 1 - протяженный цилиндрический корпус устройства интрамедуллярного для остеосинтеза бедренной кости по ТУ 9438-005-76751996-2014*
- 2 - фиксирующий упругий элемент устройства интрамедуллярного для остеосинтеза бедренной кости по ТУ 9438-005-76751996-2014*
- 3 - заглушка устройства интрамедуллярного для остеосинтеза бедренной кости по ТУ 9438-005-76751996-2014*

1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Устройство интрамедуллярное состоит из протяженного цилиндрического корпуса, фиксирующего упругого элемента и заглушки. Устройство предназначено для фиксации бедренной кости путем

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.2 Устройство изготовлено из биологически инертного,

КОНТЕЙНЕРА С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДАННЫМИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ. В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5.2 До- и послеоперационное лечение пациента определяется в каждом отдельном случае хирургом индивидуально. Однако, использование приведенных ниже рекомендаций, разработанных на основании конструкционной специфики устройства, позволит

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИМПЛАНТАЦИИ

6.1 Хирург собирает устройство в рабочее состояние. Для этого навинчивают на корпус с проксимального конца навигационную систему. Помещают внутрь центрального канала фиксирующий упругий элемент, дистальный конец которого погружают в сквозной косопоперечный канал с возможностью его выдвижения за пределы наружной поверхности корпуса после установки стержня в костномозговой канал.

6.2 Хирургу произвести разрез, послойно рассекая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

7 ФОРМА ПОСТАВКИ

7.1 Комплект изделия состоит из:

— устройства в потребительской таре, состоящее из протяженного цилиндрического корпуса, фиксирующего упругого элемента и заглушки;

- почтовой карточки пациента;
- идентификационной наклейки;
- инструкции по использованию;

