



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
жидкости для выявления устьев каналов зубов
«КОЛОР-ТЕСТ № 4»
ТУ 9391-036-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость «Колор-тест № 4» предназначена для выявления устьев каналов сложной морфологии, склерозированных каналов, а также в случаях плохой проходимости каналов и кальцификации.

СВОЙСТВА

Жидкость «Колор-тест № 4» содержит в качестве диагностического индикатора краситель – фуксин, способный окрашивать деминерализованный, а также иррегулярный дентин, который формируется слоями в течение всей жизни, при этом сокращая объем пульпы и изменяя структуру и форму канала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В случаях затруднений эндодонтических манипуляций при склеротических изменениях в каналах необходимо очистить пульповую камеру от продуктов распада, промыть, просушить струей теплого воздуха. Затем 1-2 капли жидкости «Колор-тест № 4» внести в полость на 40-60 секунд, после чего смыть водой.

Дентин в устье канала остается окрашенным в более интенсивный цвет по сравнению с другими участками твердых тканей, что позволяет сразу обнаружить устье канала и легко расширить выявленный канал.

Жидкость «Колор-тест № 4» можно применять неоднократно при проведении эндодонтических работ.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон)	- 5 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности - 2 года.

При транспортировании в зимнее время (t ниже 0°C) материал необходимо выдержать при t +18°C...+23°C в течение суток.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «ЗЗЗ «Визит»
В.П. Муев
2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора жидкостей для диагностической оценки
гигиены полости рта
«КОЛОР-ТЕСТ»
ТУ 9391-036-46814830-2001

КОЛОР-ТЕСТ № 1

НАЗНАЧЕНИЕ

«Колор-тест № 1» предназначен для выявления воспалительных процессов мягких тканей полости рта (проба Шиллера-Писарева). Проба является объективным тестом для оценки степени заболеваний пародонта и оценки эффективности проведенного лечения. Проба может использоваться для определения распространенности воспаления и границ оперативного вмешательства при гингивэктомии, кюретаже пародонтальных карманов, для выявления поддесневых зубных отложений.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Свойства **«Колор-тест № 1»**, в состав которого входят иод, иодистый калий и основа, определяются способностью гликогена (количество которого увеличивается при воспалении) давать окраску в процессе взаимодействия с иодсодержащими растворами. При нанесении жидкости **«Колор-тест» № 1** на мягкие ткани полости рта происходит окрашивание воспаленных участков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На десневой край нанести жидкость **«Колор-тест № 1»**. По степени окрашивания воспаленной слизистой (от светло-бурого цвета до темно-коричневого) можно судить о степени воспаления в десне.

Если окрашивания нет, то проба оценивается как отрицательная.

КОЛОР-ТЕСТ № 2

НАЗНАЧЕНИЕ

«Колор-тест № 2» предназначен для выявления размягченной эмали и дентина при кариесе.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав **«Колор-тест № 2»** входит фуксин основной, который адсорбируется на поврежденном белке твердых тканей зуба и окрашивает в красно-фиолетовый цвет размягченные эмаль и дентин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Колор-тест № 2» применяется на зубах, полностью очищенных от твердого и мягкого налета.

Ватным аппликатором равномерно нанести «Колор-тест № 2» на поверхность зубов на 1 минуту.

Затем промыть полость рта водой в течение 10-20 сек. для удаления незафиксированной окраски.

Места повреждения эмали и дентина, окрашенные в красно-фиолетовый цвет, отчетливо выделяются.

КОЛОРИ-ТЕСТ № 3

НАЗНАЧЕНИЕ

«Колор-тест № 3» предназначен для выявления мягкого и твердого зубного налета и оценки гигиены полости рта врачом или самостоятельно пациентом в домашних условиях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Содержащаяся в жидкости № 3 метиленовая синь окрашивает бактериальный зубной налет в синий цвет, не изменяя цвета интактных твердых тканей и слизистой оболочки полости рта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выявления налета ватным аппликатором нанести «Колор-тест № 3» на поверхность зубов. Затем промыть полость рта водой в течение 10-20 сек. для удаления незафиксированной окраски.

Зубной налет, окрашенный в синий цвет, удалить щеткой или резиновым полиром с полирующими пастами «Полидент».

ФОРМА ВЫПУСКА

(выпускаются отдельно):

«Колор-тест № 1» (жидкость) (флакон)	- 20 мл
«Колор-тест № 2» (жидкость) (флакон)	- 20 мл
«Колор-тест № 3» (жидкость) (флакон)	- 20 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности - 2 года.

