

«УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»
В.П. Чуев
« » 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического кальцийсодержащего
подкладочного рентгеноконтрастного
«КАЛЬЦЕВИТ»
ТУ 9391-061-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический материал «Кальцевит» применяется в качестве лечебной подкладки для регенерации не только травмированной, но и воспаленной пульпы зуба при обратимых формах пульпита:

- травматического;
- острого серозного;
- хронического фиброзного,

а также в качестве подкладки при лечении глубокого кариеса под постоянные пломбы из любых пломбировочных материалов.

СВОЙСТВА

Стоматологический материал «Кальцевит» выпускается в виде порошка, затворяемого дистиллированной водой, или в виде готовой к применению пасты. Основной компонент подкладочного материала - гидроокись кальция - обеспечивает высокое значение pH материала (не менее 12,8), оказывает длительное и интенсивное антимикробное действие, повышает регенерирующую способность пульпы и стимулирует образование вторичного дентина. Рентгеноконтрастные добавки делают материал непроницаемым для рентгеновских лучей. Пастообразователь на водной основе обеспечивает глубокое проникновение материала в канальца дентина и их запечатывание.

Внимание! Следует избегать длительного контакта материала с воздухом, т.к. углекислый газ воздуха снижает активность гидроокиси кальция.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для получения пасты на стеклянной пластине металлическим шпателем смешивают 1 мерник (0,08 - 0,10 г) порошка с 2-3 каплями (0,05 - 0,08 г) дистиллированной воды в течение 1 минуты до получения пластичной пасты. При температуре 18-23°C и относительной влажности воздуха 45-55% материал на пластине остается пластичным в течение 6 минут.

Для лечения глубокого кариеса пасту вносят на дно просушенной полости точечно. Избыток материала удаляют. Затем

струей сжатого воздуха сушат, изолируют стеклоиономерным цементом и реставрируют коронку зуба.

Для регенерации пульпы пасту применяют после формирования полости, тщательной экскавации пораженного дентина и обработки полости (или вскрытого «окна пульпы») раствором антисептика. Просушенную полость заполняют пастой до дентино-эмалевого соединения, сушат струей сжатого воздуха и герметично закрывают стеклоиономерным цементом. Оставляют под наблюдением на 10 дней. В следующее посещение при отсутствии боли у пациента в области леченого зуба лечебную повязку убирают полностью или частично оставляют, чтобы не травмировать пульпу, повторяют процедуру инструментальной и антисептической обработки полости. Затем наносят твердеющую прочную лечебную прокладку (кальций-салицилатный материал «Кальцесил») и изолируют стеклоиономерным цементом. После чего реставрируют коронку зуба.

Контрольное обследование проводят через 3-6 месяцев.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	- 7,0 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
или	
Порошок (банка)	- 7,0 г
Капельница для дистиллированной воды	- 1 шт.
Мерник	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.

При транспортировании в зимнее время (t ниже 0°C) материал необходимо выдержать при t +18°C...+23°C в течение суток.