

Масштаб 1:1

Размер 70 x 85 мм



Изготовитель: АО "Елатомский приборный завод"

Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com, INTERNET: www.elamed.com

Контейнер для биопроб 25мл
по ТУ 9398-021-24320270-2004

Регистрационное удостоверение №

№ партии

Дата изготовления

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 45, высота – 46;
- масса, не более 12 г;
- номинальная вместимость, не более 23 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;
- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от минус 50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – не менее 3 года с даты изготовления

Правила эксплуатации


- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
- извлечь контейнер из упаковки;
- снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
- поместить биоматериал в стакан контейнера;
- установить крышку, завинчивая ее по часовой стрелке до упора.

Сведения о пациентах (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной под шагрень, маркером

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Однократное применение
Для in vitro диагностики
НЕСТЕРИЛЬНО

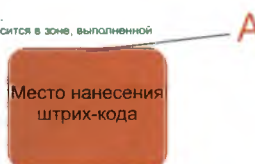

PANTONE 355 C



Фон участка А - Белый

Штрих-код выполнить черным цветом на белом фоне

КОПИЯ
ВЕРНА



Масштаб 1:1

Размеры 100 x 120 мм



Изготовитель: АО "Елатомский приборный завод"

Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57

E-mail: admin@elamed.com,

INTERNET: www.elamed.com

Контейнер для биопроб 100мл
по ТУ 9398-021-24320270-2004

Регистрационное удостоверение №

№ партии

Дата изготовления

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 62, высота – 75;
- масса, не более 24 г;
- номинальная вместимость, не более 99 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;
- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от минус 50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – не менее 3 года с даты изготовления.

Правила эксплуатации:

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
 - извлечь контейнер из упаковки;
 - снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
 - поместить биоматериал в стакан контейнера;
 - установить крышку, завинчивая ее по часовой стрелке до упора.
- Сведения о пациентах (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной под шагрень, маркером.

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Однократное применение
Для in vitro диагностики
НЕСТЕРИЛЬНО



Место нанесения
штрих-кода



PANTONE 355 C



Фон участка А - Белый

Штрих-код выполнить черным цветом на белом фоне

КОПИЯ
ВЕРНА

