

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»
В.П. Чув
« » 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
лака стоматологического реминерализующего декоративного для
окрашивания твердых тканей зубов
«КОЛОРДЕНТ»
ТУ 9391-120-45814830-2009

НАЗНАЧЕНИЕ

Лак «КолорДент» предназначен для окрашивания эмали зубов в белый цвет с глянцевым или перламутровым блеском, а также для декоративного окрашивания зубов в различные цвета (желтый, синий, черный и т.д.).

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак «КолорДент» содержит: природный пленкообразователь, способный образовывать тонкую прочную пленку, обладающий антисептическими и бактерицидными свойствами; растворитель; загуститель; колеровочную пасту на основе диоксида титана или пигментов другого цвета, а также реминерализующую добавку (гидроксиапатит), способствующую восстановлению минеральной структуры зуба.

Лак безопасен в использовании, не вредит слизистой оболочке полости рта, легко удаляется зубной щеткой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед применением хорошо встряхнуть флакон.
- Выбрать лак необходимого оттенка или цвета.
- Очистить и высушить поверхность зубов марлевым шариком или диском.
- Нанести лак тонким слоем на поверхность зуба в направлении от десны к режущему краю.
- Подождать 1,5-2,5 минуты (не закрывая рта).
- При необходимости, нанести лак повторно (после полного высыхания первого слоя).
- После применения флакон с лаком плотно закрыть крышкой.
- **Не наносить лак на влажную поверхность зубов.**

ФОРМА ВЫПУСКА

Набор лаков следующих цветов:

белая эмаль тон 1 (флакон) – 5 мл
белая эмаль тон 2 (флакон) – 5 мл
изумрудные искры (флакон) – 5 мл
серебряные искры (флакон) – 5 мл
золотые искры (флакон) – 5 мл
черный (флакон) – 5 мл

сиреневый (флакон) – 5 мл
розовый (флакон) – 5 мл
желтый (флакон) – 5 мл
красный (флакон) – 5 мл
синий (флакон) – 5 мл
зеленый (флакон) – 5 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

КОЛОРИДЕНТ

лак стоматологический декоративный
для окрашивания твердых тканей зуба

ВНИМАНИЕ!

Содержит фториды, которые способствуют
укреплению эмали и предотвращают развитие
кариеса. Не рекомендуется использовать
при беременности и кормлении грудью.

Срок годности: 36 месяцев
Срок хранения: 36 месяцев
Условия хранения: в сухом, защищенном
от света месте.

Содержит фториды, которые способствуют
укреплению эмали и предотвращают развитие
кариеса. Не рекомендуется использовать
при беременности и кормлении грудью.

Содержит фториды, которые способствуют
укреплению эмали и предотвращают развитие
кариеса. Не рекомендуется использовать
при беременности и кормлении грудью.

КОЛОРИДЕНТ

