

«УТВЕРЖДАЮ»:



Генеральный директор
ОООЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
2010 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического
на основе синтетического кальцийфосфата
для восстановления дефектов твердых тканей
"КЛИПДЕНТ"
ТУ 9391-121-45814830-2009**

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал стоматологический «Клипдент» предназначен для:

- заполнения дефектов, оставшихся в челюсти после удаления зубов;
- восстановления дефектов твердых тканей после оперативных вмешательств;
- заполнения пародонтальных дефектов;
- закрытия фуркаций;
- заполнения дефекта после удаления кисты.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал стоматологический «Клипдент» представляет собой готовый к применению комплект гранул крупной (500-1000 мкм) и мелкой (100-500 мкм) фракций синтетического кальцийфосфата с сорастворителем. Выбор размера гранул зависит от величины дефекта. Чем больше дефект, тем больший размер гранул должен быть использован. Гранулы покрыты оболочкой из полилактида-гликолида. Сорастворитель содержит метилпирролидон. При смешивании гранул с сорастворителем материал становится пластичным и удобным для внесения в место дефекта. После контакта с кровью или ротовой жидкостью материал уплотняется, пакует дефект, облегчая процедуру ушивания раны. Материал полностью резорбируется в интервале от 9 до 15 месяцев. Резорбция протекает параллельно процессу регенерации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением гранулы смешивают с сорастворителем. Затем материал «Клипдент» вносят в место дефекта непосредственно из шприца. В контакте с кровью или слюной полимерная масса уплотняется и остается в месте заполнения дефекта. Лунку, заполненную материалом, зашивают. Перед заполнением пародонтального дефекта предварительно очищают твердые ткани от

зубной бляшки, из карманов удаляют некротические ткани и осколки после полировки корня.

Материал «Клипдент» применяют без сорастворителя в качестве вставки, изготовленной непосредственно после удаления зуба или корня по его слепку. Удаленный зуб или корень промывают под струей проточной воды и механически очищают от остатков мягких тканей периодонта.

В репликатор помещают силиконовую слепочную массу, в которую слегка вдавливают удаленный корень и получают слепок. Затем слепок извлекают из репликатора, разрезают скальпелем и извлекают корень естественного зуба. Полученные части слепка складывают и помещают в репликатор. Слепок тщательно дезинфицируют спиртовым раствором, высушивают и заполняют гранулами «Клипдент». Гранулы слегка уплотняют, и слепок нагревают до температуры 80⁰С и выдерживают в течение 2-3 минут для оплавления полимера на поверхности гранул и их спекания. Открытую поверхность полученной копии корня зуба формируют и заплавляют с помощью нагревающей ручки. После охлаждения готовую корневую вставку извлекают из слепка и сразу помещают в лунку удаленного корня.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гранулы 500-1000 мкм (шприц)	- 0,25 г или 0,5 г
Сорастворитель (флакон)	- 1мл
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Сорастворитель выпускается в комплекте и как отдельное изделие.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5⁰С до +25⁰С.

Избегать попадания влаги!

Срок годности - 2 года.

КЛИПДЕНТ

