

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Планета»



Койфман М.И.

2018 г.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
КОЛЛЕКТИВНОГО СПАСАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА, «ПЛАНЕТА»
по ТУ 21.20.24-005-57933757-2017

Инструкция по применению
ПЛНТ.942849.001 ИП

г. Санкт-Петербург



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	8
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	13
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	14
5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	18
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	18
7. ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	19
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	20
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	21
11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22
12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	23
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	31



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 3 из 36

Настоящая инструкция по применению распространяется на Аптечку первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета» по ТУ 21.20.24-005-57933757-2017 (далее – аптечка), и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках аптечки, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения аптечки, отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 Входящие в аптечку лекарственные средства и медицинские изделия являются неприкосновенным запасом.

 Навыками оказания первой помощи должны владеть все члены экипажа судна.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования аптечки, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «Планета»

Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60

Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09; E-mail: 3362669@gmail.com



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 4 из 36

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета» (далее – аптечка) предназначена для оказания первой помощи пострадавшим, находящимся на коллективном спасательном средстве.

Условия применения – коллективные спасательные средства (спасательные шлюпки, спасательные плоты).

Командный состав судна должен владеть и уметь применять навыки оказания первой помощи для выживания в экстремальных условиях на воде, а также уметь распознать те случаи, когда лечение без опасности для жизни больного или пострадавшего можно отложить до прибытия более квалифицированного персонала.

Конструктивно аптечка представляет собой футляр, наполненный лекарственными средствами, перевязочным материалом и другими медицинскими изделиями, предназначенными для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве в море, на реках и озерах после эвакуации с аварийного судна.

Аптечка изготавливается в нескольких исполнениях, согласно таблице 2.

Аптечка укомплектована лекарственными средствами и другими медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Входящие в аптечку лекарственные средства и медицинские изделия являются неприкосновенным запасом.

Перечень вложений аптечки приведен в Приложении А.

В зависимости от потенциального риска применения аптечка относится к классу 3 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид аптечки в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 279970 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид климатического исполнения футляра аптечки – В 1 по ГОСТ Р 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации футляр аптечки относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации футляр аптечки относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.



1.2 Потребители

Аптечка может использоваться детьми и взрослыми.



Навыками оказания первой помощи должны владеть все члены экипажа судна.

1.3 Показания

Первую помощь оказывают для спасения жизни пострадавшего, предотвращения дополнительного травмирования, устранения шока и облегчения боли:

- оказание само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве (спасательной шлюпке, спасательном плоту) в море, на реках и озерах после эвакуации с аварийного судна;
- снятие нервно-эмоциональных стрессов при эвакуации с терпящего аварию судна.

Все показания к применению лекарственного средства/медицинского изделия в составе аптечки указаны в информационном листке-инструкции, который вкладывается в упаковку лекарства/медицинского изделия, или в инструкции по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.



Внимание! Перед использованием медикамента необходимо ознакомиться с информационным листком-инструкцией, вложенным в упаковку лекарства/медицинского изделия, или инструкцией по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.

1.4 Противопоказания

Одновременно лекарственные препараты и другие медицинские изделия в составе аптечки имеют и противопоказания – состояния, заболевания, при которых основное или побочное их действие может принести человеку вред.

Все противопоказания к применению лекарственного средства/медицинского изделия в составе аптечки указаны в информационном листке-инструкции, который вкладывается в упаковку лекарства/медицинского изделия, или в инструкции по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.



Внимание! Перед использованием медикамента необходимо ознакомиться с информационным листком-инструкцией, вложенным в упаковку лекарства/медицинского изделия, или инструкцией по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.

1.5 Побочные эффекты

Практически все лекарственные средства/медицинские изделия имеют побочное действие.

Все побочные эффекты от применения лекарственного средства/медицинского изделия в составе аптечки указаны в информационном листке-инструкции, который вкладывается в упаковку лекарства/медицинского изделия, или в инструкции по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 6 из 36

⚠ Внимание! Перед использованием медикамента необходимо ознакомиться с информационным листком-инструкцией, вложенным в упаковку лекарства/медицинского изделия, или инструкцией по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.

Изучив побочные действия лекарственных средств/медицинских изделий и реакцию организма на них, можно избежать неприятных последствий.

1.6 Меры предосторожности

⚠ Внимание!

- Используйте аптечку только в соответствии с данной инструкцией.
- Перед использованием медикамента необходимо ознакомиться с его особенностями (показаниями, противопоказаниями, побочными эффектами), приведенными в информационном листке-инструкции, вложенном в упаковку лекарства/медицинского изделия, или в инструкции по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.
- Не используйте аптечку при наличии на поверхности футляра трещин, расслоений, посторонних включений, выступающих над поверхностью, и при самопроизвольном раскрытии футляра аптечки.

1.7 Общий вид аптечки

Конструктивно аптечка представляет собой футляр (мягкий/жесткий), наполненный лекарственными средствами, перевязочным материалом и другими медицинскими изделиями, предназначенными для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве в море, на реках и озерах после эвакуации с аварийного судна.

Мягкий футляр аптечки конструктивно представляет собой пакет из плотного материала с замком zip-lock (Рисунок 1, а).

Жесткий футляр аптечки конструктивно представляет собой ведро с ручкой, закрытое крышкой (Рисунок 1, б).




ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 7 из 36

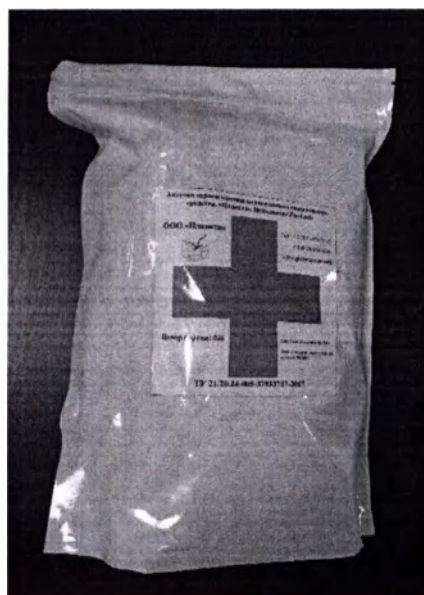

а)



б)

Рисунок 1 – Футляр аптечки

а) – мягкий футляр (пакет); б) – жесткий футляр (ведро с крышкой)

Таблица 1 – Основные размеры футляра аптечки

Тип футляра	Размеры	Допускаемое отклонение
Мягкий футляр (пакет)	Ширина: 250 мм	$\pm 5,0$ мм
	Высота: 340 мм	$\pm 5,0$ мм
	Толщина (плотность): 110 мкм	$\pm 1,0$ мкм
Жесткий футляр (ведро с крышкой)	Объем: 6 л	$\pm 0,01$ л
	Верхний диаметр: 230 мм	$\pm 5,0$ мм
	Нижний диаметр: 205 мм	$\pm 5,0$ мм
	Высота: 190 мм	$\pm 5,0$ мм

Перечень вложений аптечки и краткие сведения по назначению и применению содержимого аптечки представлены в Приложении А и Приложении Б соответственно.



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Аптечка соответствует ГОСТ Р 50444-92, требованиям технических условий ТУ 21.20.24-005-57933757-2017 и комплекту конструкторской документации, согласно таблице 2, утвержденной в установленном порядке.

Таблица 2 – Перечень исполнений Аптечки первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета» в полной (ассортиментной) номенклатуре

Наименование исполнения	Обозначение документа	Отличительные особенности исполнений	
		Перечень вложений (Приложение А)	Тип футляра
Исполнение Шлюпка	ПЛНТ.942849.001-01	Таблица А.1	Жесткий футляр (ведро с крышкой) Рисунок 1, б
Исполнение Zip-Lock	ПЛНТ.942849.001-02	Таблица А.2	Мягкий футляр (пакет) Рисунок 1, а
Исполнение Zip-Lock Плот	ПЛНТ.942849.001-03	Таблица А.3	Мягкий футляр (пакет) Рисунок 1, а

2.1.2 Основные размеры футляра аптечки и их допускаемые отклонения соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

2.1.3 Масса аптечки в полной комплектации с футляром и масса пустого футляра не более значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 – Масса Аптечки первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета»

Наименование исполнения	Масса аптечки с футляром, г	Тип футляра	Масса пустого футляра, г
Исполнение Шлюпка	860	Жесткий футляр (ведро с крышкой)	250
Исполнение Zip-Lock	670	Мягкий футляр (пакет)	30
Исполнение Zip-Lock Плот	830		



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 9 из 36

2.1.4 Футляр аптечки обеспечивает водонепроницаемое хранение входящих в аптечку медикаментов, перевязочных средств и других медицинских инструментов.

2.1.5 Жесткий футляр аптечки изготовлен с закрывающейся крышкой, обеспечивающей плотное её прилегание к корпусу футляра, исключающей самопроизвольное открывание аптечки при переноске, с возможностью плотного закрывания аптечки после вскрытия для сохранности лекарственных средств и других медицинских изделий после неоднократного использования.

2.1.6 Мягкий футляр аптечки имеет замок «zip-lock», обеспечивающий плотное закрывание футляра, исключающий самопроизвольное открывание аптечки при переноске, с возможностью плотного закрывания аптечки после вскрытия для сохранности лекарственных средств и других медицинских изделий после неоднократного использования.

2.1.7 Поверхности футляра без трещин, расслоений, посторонних включений, выступающих над поверхностью.

2.1.8 Уложенные изделия не препятствуют плотному закрыванию футляра аптечки.

2.1.9 Наружные поверхности футляра аптечки устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 (3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003).

2.1.10 Футляр аптечки при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения В 1 по ГОСТ 15150-69.

2.1.11 Футляр аптечки обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 2 по ГОСТ Р 50444-92.

2.1.12 Аптечка в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: при транспортировании и хранении для условий хранения 1, в контролируемом диапазоне температур от плюс 15°C до плюс 25 °C.

2.1.13 Аптечка в транспортной упаковке обладает устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92.

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении аптечки, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве аптечки, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления футляра аптечки используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 4.

Таблица 4 – Сырье, материалы и покупные изделия для изготовления футляра аптечки

№	Наименование изделия, его частей	Наименование, марка, изготовитель материала	Тип контакта
1. Жесткий футляр аптечки			
1.1	Ведро, в т.ч. крышка	Полипропилен марки бален 01270, производство ООО «Тара.ру», Россия	кратковременный с неповрежденной кожей
1.2	Ручка ведра металлическая с пластмассовой вставкой	Нержавеющая сталь AISI 430, производство ООО «Тара.ру», Россия	
		Полипропилен марки бален 01270, производство ООО «Тара.ру», Россия	
2. Мягкий футляр аптечки			
2.1	Пакет	Многослойная металлизированная (фольгированная) пленка плотностью 110 мкм, производство ООО «УпакТехнологии», Россия	кратковременный с неповрежденной кожей
2.2	Замок Zip-Lock	Полипропилен марки 01030 Бален, производство ООО «УпакТехнологии», Россия	

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средний срок службы футляра аптечки не менее двух лет. Критерием предельного состояния является нарушение требований п.п. 2.1.4-2.1.7.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 11 из 36

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки аптечки соответствует таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность

№	Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
1	Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Шлюпка	ПЛНТ.942849.001-01	1
2	Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Zip-Lock	ПЛНТ.942849.001-02	1
3	Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Zip-Lock Плот	ПЛНТ.942849.001-03	1
-	Эксплуатационная документация: Инструкция по применению	ПЛНТ.942849.001 ИП	1

Примечания:

1. Исполнение и количество аптечек определяется при заказе по согласованию с заказчиком.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 Маркировка в полном объеме нанесена на этикетку, прикрепленную к крышке жесткого футляра (ведра с крышкой) или к одной из сторон мягкого футляра (пакета), и содержит следующие информационные данные:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, web-сайт и телефон;
- наименование изделия;
- номер партии;
- дату комплектации аптечки;
- дату проверки лекарственных средств;
- обозначение настоящих технических условий;

2.5.3 Маркировка групповой тары также дополнительно содержит:

- количество изделий в упаковке;
- дату упаковки;
- отметку ОТК.



2.5.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка аптечки соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации изготовителя.

2.6.2 Каждая аптечка уложена в потребительскую тару – одноразовую упаковку, изготовленную по нормативно-технической документации изготовителя, соответствующей требованиям действующих стандартов, запаивную термическим способом с открытой стороны. Материал упаковки: полиэтиленовая плёнка по ГОСТ 10354-82.

2.6.3 Индивидуальная потребительская упаковка обеспечивает герметичность и защиту аптечки от внешних воздействий в течение срока хранения, а также невозможность повторного запечатывания вскрытой упаковки: факт вскрытия упаковки очевиден.

2.6.4 Допускается по согласованию с заказчиком не укладывать укомплектованные аптечки в полиэтиленовые пакеты.

2.6.5 Аптечка в индивидуальной потребительской упаковке количества, определенного заказом, помещена в групповую упаковку – ящики фанерные по ГОСТ 5959-80 или ящики дощатые по ГОСТ 2991-85 или из плиты древесноволокнистой по ГОСТ 4598-86, или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации.

2.6.6 Габаритные размеры ящиков кратны размеру поддона по ГОСТ 33757-2016.

2.6.7 Укладка аптечек исключает возможность их свободного перемещения при транспортировании, свободное пространство в ящиках заполнено: алигнином медицинским по ГОСТ 12923-82, бумагой оберточной по ГОСТ 8273-75, бумажной и картонной макулатурой марок МС-1, МС-2 и МС-7 по ГОСТ 10700-97.

2.6.8 Торцы фанерного, дощатого ящика или ящика из древесно-волоконной плиты обиты лентой по ГОСТ 3560-73. Концы ленты скреплены замком и опломбированы вместе с деревянной планкой ящика.

2.6.9 Упаковывание изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, проводится по ГОСТ 15846-2002.

2.6.10 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту аптечки от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

2.6.11 Масса изделия в транспортной таре не более 10 кг.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 13 из 36

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Аптечка соответствует требованиям токсикологической, санитарно-химической и биологической безопасности в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993-2011, а также действующих стандартов, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Медицинские изделия и лекарственные средства, входящие в аптечку, отвечают требованиям соответствующих стандартов, технических условий или других предусмотренных документов, имеют разрешение Росздравнадзора РФ на серийное производство.

3.3 Аптечка укомплектована медицинскими изделиями и лекарственными средствами, остаточный срок годности которых не менее 80% от полного срока годности, указанного в соответствующих документах.



4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

⚠ Каждая партия аптечек проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

⚠ Запрещается размещать аптечки совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами, растворителями и другими агрессивными веществами.

⚠ Аптечку следует хранить в помещениях, где:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность до 80 %.

⚠ Футляр аптечки следует использовать только для хранения медикаментов, перевязочных средств и медицинских инструментов.

⚠ Лицо (работник корабельного лазарета), ответственное за приобретение, хранение и периодическое пополнение аптечек лекарственными средствами и медицинскими изделиями, по истечении их сроков годности или в случае их использования, для оказания первой помощи должен обеспечить:

- проведение ревизии аптечек, в срок - не реже 1 раза в квартал;
- контроль за истечением сроков годности лекарственных средств и других медицинских изделий, входящих в состав аптечки, и своевременное пополнение аптечек;
- своевременное пополнение аптечек в случае использования лекарственных средств и других медицинских изделий;

ПРИМЕЧАНИЕ: Укомплектование аптечек проводить только лекарственными средствами и медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

⚠ Не допускается замена лекарственных средств и медицинских изделий, входящих в состав аптечки, в соответствии с Приложением А, аналогами или средствами и изделиями, близкими по фармакологическому действию.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 15 из 36

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании аптечки впервые после ее приобретения проверьте соответствие ее комплектности по разделу 2.4 настоящей инструкции.

 **Внимание!** Навыками оказания первой помощи должны владеть все члены экипажа судна.

Командный состав судна должен владеть и уметь применять навыки оказания первой помощи для выживания в экстремальных условиях на воде, а также уметь распознать те случаи, когда лечение без опасности для жизни больного или пострадавшего можно отложить до прибытия более квалифицированного персонала.

 Ответственный работник корабельного лазарета при эвакуации с аварийного судна должен проследить за тем, чтобы командир (старший) коллективного спасательного средства или лицо, его заменяющее, взял с собой аптечку первой помощи на борт спасательной шлюпки или спасательного плота.

Командир (старший) коллективного спасательного средства или лицо, его заменяющее, отвечает за непосредственное благополучие своей команды и пассажиров (физическую безопасность, состояние здоровья и моральное состояние).



4.3 Описание Аптечки первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета»

4.3.1 Исполнение Шлюпка

Аптечка представляет собой ведро с ручкой, закрытое крышкой (жесткий футляр, Рисунок 1, б), наполненное лекарственными средствами, перевязочным материалом и другими медицинскими изделиями, согласно таблице А.1 (Приложение А), предназначенными для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве в море, на реках и озерах после эвакуации с аварийного судна.

4.3.2 Исполнение Zip-Lock

Аптечка представляет собой пакет из плотного материала с замком zip-lock (мягкий футляр, Рисунок 1, а), наполненный лекарственными средствами, перевязочным материалом и другими медицинскими изделиями, согласно таблице А.2 (Приложение А), предназначенными для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве в море, на реках и озерах после эвакуации с аварийного судна.

4.3.3 Исполнение Zip-Lock Плот

Аптечка представляет собой пакет из плотного материала с замком zip-lock (мягкий футляр, Рисунок 1, а), наполненный лекарственными средствами, перевязочным материалом и другими медицинскими изделиями, согласно таблице А.3 (Приложение А), предназначенными для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве в море, на реках и озерах после эвакуации с аварийного судна.



4.4 Порядок работы

Для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и различных заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся на спасательном плавсредстве, входящие в состав аптечки лекарственные препараты, перевязочные средства и медицинский инструмент необходимо применять установленным образом.

- Для применения содержимого аптечки аккуратно откройте крышку футляра аптечки (замок пакета), достаньте необходимые лекарственные препараты, перевязочные средства или медицинский инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для оказания само- и взаимопомощи лекарственные препараты, перевязочные средства и медицинский инструмент из футляра аптечки извлекаются по мере необходимости.

- Используйте содержимое аптечки для оказания само- и взаимопомощи в соответствии с показаниями и противопоказаниями, прописанными в информационном листке-инструкции, вложенном в упаковку лекарства/медицинского изделия, или в инструкции по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента, и в соответствии с краткими инструкциями по применению содержимого аптечки (Приложение Б).

 Перед использованием медикамента необходимо ознакомиться с информационным листком-инструкцией, вложенным в упаковку лекарства/медицинского изделия, или инструкцией по применению, нанесенной непосредственно на упаковку медикамента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примите рекомендуемое количество таблеток, указанное в описании каждого препарата, и запейте таблетки водой. При отсутствии воды таблетки необходимо разжевать и проглотить.

 Установленные дозировки лекарственных средств необходимо строго соблюдать во избежание снижения их эффективности или проявления отрицательного воздействия на организм.

- После использования медицинское изделие или лекарственное средство аккуратно уложите в футляр аптечки, затем закройте футляр аптечки.

 **Важно!** Для сохранности лекарственных средств и медицинских изделий необходимо плотно закрывать аптечку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Медицинские изделия, не подлежащие повторному использованию, подлежат утилизации согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 18 из 36

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений. Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию согласно разделу 5.1 настоящей инструкции.

5.1 Наружные поверхности футляра аптечки протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113-98.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение аптечки должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование аптечек, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться специальными транспортными средствами с поддержанием температуры перевозки и хранения в пределах от плюс 15 °С до плюс 25 °С.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

6.2 Условия транспортирования аптечки должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С и относительной влажности до 80 %).

6.3 Условия хранения аптечки в упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С и относительной влажности до 80 %).

6.4 Не допускается транспортирование и хранение аптечки совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами, растворителями и другими агрессивными веществами.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 19 из 36

7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Определение класса опасности и паспортизация лекарственных средств регулируется ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 01.01.2017).

7.2 Сбор, учёт и утилизация лекарственных средств должны выполняться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Г.

7.3 Сбор и утилизация лекарственных средств группы Г проводится с учетом степени токсичности каждого вида отходов, согласно методическим рекомендациям по определению уровня токсичности, классификатору и другим действующим нормативным документам.

7.4 Футляры аптечек с истекшим сроком годности или имеющие механические дефекты утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.279-10.

7.5 Аптечка подлежит утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователей, или свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

7.6 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование аптечки должно осуществляться в соответствии с прилагаемой Инструкцией по применению.

8.2 Не допускается замена лекарственных средств и медицинских изделий, входящих в состав аптечки, в соответствии с Приложением А, аналогами или средствами и изделиями, близкими по фармакологическому действию.

8.3 По истечении сроков годности медицинских изделий и лекарственных средств, входящих в состав аптечки, или в случае их использования, аптечку необходимо пополнить.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 20 из 36

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета» производства ООО «Планета»

Исполнение _____

Номер партии _____

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 21 из 36

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета»

Исполнение _____

Номер партии _____

упакована на предприятии-изготовителе ООО «Планета» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 22 из 36

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и номер партии изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 23 из 36

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества аптечки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения лекарственных средств и других медицинских изделий определен их изготовителем и указан на этикетке.

12.3 Гарантийный срок хранения футляра аптечки в условиях 1 по ГОСТ 15150-69, в контролируемом диапазоне температур от плюс 15°C до плюс 25 °C – 2 года.

12.4 Гарантийный срок эксплуатации футляра аптечки – 1 год со дня начала эксплуатации.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок футляра аптечки указан в инструкции и исчисляется с даты изготовления. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

- Несовпадения номера партии изделия с гарантийным талоном.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 24 из 36

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Аптечка первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета»

Исполнение _____

Номер партии _____

Приобретена _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 25 из 36

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНОГО
СПАСАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА, «ПЛАНЕТА»

Таблица А.1 – Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Шлюпка

№	Наименование, форма выпуска (размеры)	Производитель (страна производителя)*	Номер регистрационного удостоверения	Коли- чество
Медикаменты для внутреннего применения				
1	Анальгин в таб. 0,5 N10	ОАО «Марбиофарм» (Россия)	ЛС-002585	2 уп.
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	Р N000451/01	
		ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	Р N000530/01	
		ЗАО «Медисорб» (Россия)	Р N002062/01	
		ОАО «Ирбитский химфармзавод» (Россия)	Р N003134/01	
2	Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 N10	ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия)	Р N003627/01	3 уп.
		ЗАО «Медисорб» (Россия)	Р N002019/01	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	Р N001190/01	
		ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	Р N003846/01	
		ОАО «Ирбитский химфармзавод» (Россия)	Р N003119/01	
3	Валидол в таб. по 0,06г N10	ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	Р N000085/01	2 уп.
		ОАО «Марбиофарм» (Россия)	ЛП-000612	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	Р N001400/01	
4	Валериана экстракт в таб. по 0,02г. N50	ООО «Парафарм» (Россия)	RU 77.99.88.003.E00478 6.03.15	1 уп.
		ООО «Озон» (Россия)	ЛСР-009033/10	
		РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь)	ЛС-000062	
5	Циннаризин 25мг N50	Pharma AD (Болгария)	ЛСР-005782/10	1 уп.
		Sopharma AD (Болгария)	П N015329/01	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	ЛС-001635	
Медикаменты для наружного применения				
6	Аммиак (нашатырный спирт) раствор для наружного применения и ингаляций 10% - 40мл	ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-001759/09	1 фл.
		ООО «Йодные Технологии и Маркетинг» (Россия)	ЛС-000163	
		ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-010398/09	
7	Йод 5% спирт р-р 10 мл или Йод спирт. р-р 5% фл. с кистью 20мл «Йод-леккер+»	ООО «Йодные технологии и маркетинг» (Россия)	Р N002181/01-2013	2 фл.
		ОАО «Самарамедпром» (Россия)	ЛС-000100	
		ООО «Леккер» (Россия)	РУ РЗН 2013/219	



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 26 из 36

Таблица А.1 (продолжение)

№	Наименование, форма выпуска (размеры)	Производитель (страна производителя)*	Номер регистрационного удостоверения	Коли- чество
8	Линимент бальзамический по Вишневскому – 30,0	ООО «Тулская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-004804	1 уп.
		ООО «Озон» (Россия)	ЛП 001516	
9	Цинковая мазь 10% 25г	ООО «Тулская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛП-001817	1 уп.
		ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-005106/10	
10	Салфетка с перекисью водорода 130мм x 180мм	ООО «ТД «АППОЛО» (Россия)	№РЗН 2013/716	5 шт.
Перевязочные средства				
11	Бинт марлевый стерильный 0,1x5м	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2011/12626	2 шт.
		ООО «АПСАНА» (Россия)	№ФСР 2008/03217	
12	Бинт марлевый стерильный 0,14x7 м	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2011/12626	2 шт.
13	Вата нестерильная 50,0г	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2009/06267	1 уп.
14	Пластырь бактерицидный, не менее 1,9*7,2	ОАО «Верофарм» (Россия)	№ФСР 2008/03213	10 шт.
15	Салфетки стерильные, не менее (45*29) см N5	ООО «Ахтамар» (Россия)	№ФСР 2011/12069	1 уп.
		ООО «АПСАНА» (Россия)	№ФСР 2008/03219	
16	Салфетки спиртовые, не менее 6*10см	ООО «МК «АСЕПТИКА» (Россия)	№ФСР 2009/05438	3 уп.
17	Пакет перевязочный стерильный	ООО «ТД «АППОЛО» (Россия)	№ФСР 2010/07563	1 уп.
		ООО «Ингакамф» (Россия)	№ФСР2008/03791	
Медицинский инструментарий				
18	Жгут кровоостанавливающий	ЗАО «Виталфарм» (Россия)	№ФСР 2008/03466	1 шт.
		ООО «Объединение Альфапластик» (Россия)	№ФСР 2007/00032	
		ООО «Киевгума» (Украина)	ФСЗ 2012/12991	
19	Ножницы тупоконечные прямые	«СУРДЖИВЕЛЛ», SURGIWELL, Defence Road – Near Polytech staff Coloney, Sialkot, Pakistan (Пакистан)	ФСЗ 2008/02888	1 шт.
20	Пинцет анатомический 12,5см	ООО «Полимерные изделия» (Россия)	№ФСР 2010/07936	1 шт.

Примечания:

1. * Аптечка должна комплектоваться медицинскими изделиями и лекарственными средствами одного из производителей, указанных в перечне вложений.
2. Комплектация аптечки регламентируется национальными правилами, портовые власти имеют право требовать доукомплектации аптечек (при заходе в иностранные порты).
3. По истечении сроков годности медицинских изделий и лекарственных средств, входящих в состав аптечки, или в случае их использования, аптечку необходимо пополнить.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 27 из 36

Таблица А.2 – Перечень вложений, входящих в Аптечку первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Zip-Lock

№	Наименование, форма выпуска (размеры)	Производитель (страна производителя)*	Номер регистрационного удостоверения	Коли- чество
Медикаменты для внутреннего применения				
1	Анальгин в таб. 0,5 N10	ОАО «Марбиофарм» (Россия)	ЛС-002585	2 уп.
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	P N000451/01	
		ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	P N000530/01	
		ЗАО «Медисорб» (Россия)	P N002062/01	
		ОАО «Ирбитский химфармзавод» (Россия)	P N003134/01	
2	Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 N10	ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия)	P N003627/01	3 уп.
		ЗАО «Медисорб» (Россия)	P N002019/01	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	P N001190/01	
		ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	P N003846/01	
		ОАО «Ирбитский химфармзавод» (Россия)	P N003119/01	
3	Валидол в таб. по 0,06г N10	ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	P N000085/01	2 уп.
		ОАО «Марбиофарм» (Россия)	ЛП-000612	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	P N001400/01	
4	Валериана экстракт в таб. по 0,02г. N50	ООО «Парафарм» (Россия)	RU 77.99.88.003.E00478 6.03.15	1 уп.
		ООО «Озон» (Россия)	ЛСП-009033/10	
		РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь)	ЛС-000062	
5	Циннаризин 25мг N50	Pharma AD (Болгария)	ЛСП-005782/10	1 уп.
		Sopharma AD (Болгария)	П N015329/01	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	ЛС-001635	
Медикаменты для наружного применения				
6	Аммиак (нашатырный спирт) раствор для наружного применения и ингаляций 10% - 40мл	ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСП-001759/09	1 фл.
		ООО «Йодные Технологии и Маркетинг» (Россия)	ЛС-000163	
		ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСП-010398/09	
7	Йод 5% спирт р-р 10 мл или Йод спирт. р-р 5% фл. с кистью 20мл «Йод-леккер+»	ООО «Йодные технологии и маркетинг» (Россия)	P N002181/01-2013	2 фл.
		ОАО «Самарамедпром» (Россия)	ЛС-000100	
		ООО «Леккер» (Россия)	РУ РЗН 2013/219	



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 28 из 36

Таблица А.2 (продолжение)

№	Наименование, форма выпуска (размеры)	Производитель (страна производителя)*	Номер регистрационного удостоверения	Коли- чество
8	Линимент бальзамический по Вишневскому – 30,0	ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-004804	1 уп..
		ООО «Озон» (Россия)	ЛП 001516	
9	Цинковая мазь 10% 25г	ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛП-001817	1 уп.
		ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-005106/10	
10	Салфетка с перекисью водорода 130мм x 180мм	ООО «ТД «АППОЛО» (Россия)	№РЗН 2013/716	5 шт.
Перевязочные средства				
11	Бинт марлевый стерильный 0,1x5м	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2011/12626	2 шт.
		ООО «АПСАНА» (Россия)	№ФСР 2008/03217	
12	Бинт марлевый стерильный 0,14x7 м	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2011/12626	2 шт.
13	Вата гигиеническая нестерильная 50,0 г	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2009/06267	1 уп.
14	Пластырь бактерицидный, не менее 1,9*7,2	ОАО «Верофарм» (Россия)	№ФСР 2008/03213	10 шт.
15	Салфетки стерильные, не менее (45*29) см N5	ООО «Ахтамар» (Россия)	№ФСР 2011/12069	1 уп.
		ООО «АПСАНА» (Россия)	№ФСР 2008/03219	
16	Салфетки спиртовые, не менее 6*10см	ООО «МК «АСЕПТИКА» (Россия)	№ФСР 2009/05438	3 уп.
17	Пакет перевязочный стерильный	ООО «ТД «АППОЛО» (Россия)	№ФСР 2010/07563	1 уп.
		ООО «Ингакамф» (Россия)	№ФСР2008/03791	
Медицинский инструментарий				
18	Жгут кровоостанавливающий	ЗАО «Виталфарм» (Россия)	№ФСР 2008/03466	1 шт.
		ООО «Объединение Альфапластик» (Россия)	№ФСР 2007/00032	
		ООО «Киевгума» (Украина)	ФСЗ 2012/12991	
19	Ножницы тупоконечные прямые	«СУРДЖИВЕЛЛ», SURGIWELL, Defence Road – Near Polytech staff Coloney, Sialkot, Pakistan (Пакистан)	ФСЗ 2008/02888	1 шт.
20	Пинцет анатомический 12,5см	ООО «Полимерные изделия» (Россия)	№ФСР 2010/07936	1 шт.

Примечания:

1. * Аптечка должна комплектоваться медицинскими изделиями и лекарственными средствами любого из производителей, указанных в перечне вложений.
2. Комплектация аптечки регламентируется национальными правилами, портовые власти имеют право требовать доукомплектации аптечек (при заходе в иностранные порты).
3. По истечении сроков годности медицинских изделий и лекарственных средств, входящих в состав аптечки, или в случае их использования, аптечку необходимо пополнить.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 29 из 36

Таблица А.3 – Перечень вложений, входящих в Аптечку первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Zip-Lock Плот

№	Наименование, форма выпуска (размеры)	Производитель (страна производителя)*	Номер регистрационного удостоверения	Коли- чество
Медикаменты для внутреннего применения				
1	Анальгин в таб. 0,5 N10	ОАО «Марбиофарм» (Россия)	ЛС-002585	2 уп.
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	Р N000451/01	
		ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	Р N000530/01	
		ЗАО «Медисорб» (Россия)	Р N002062/01	
		ОАО «Ирбитский химфармзавод» (Россия)	Р N003134/01	
2	Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 N10	ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия)	Р N003627/01	3 уп.
		ЗАО «Медисорб» (Россия)	Р N002019/01	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	Р N001190/01	
		ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	Р N003846/01	
		ОАО «Ирбитский химфармзавод» (Россия)	Р N003119/01	
3	Валидол в таб. по 0,06г N10	ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Россия)	Р N000085/01	1 уп.
		ОАО «Марбиофарм» (Россия)	ЛП-000612	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	Р N001400/01	
4	Циннаризин 25мг N50	Pharma AD (Болгария)	ЛСР-005782/10	2 уп.
		Sopharma AD (Болгария)	П N015329/01	
		ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)	ЛС-001635	
Медикаменты для наружного применения				
5	Йод 5% спирт р-р 10 мл или Йод спирт. р-р 5% фл. с кистью 20мл «Йод-леккер+»	ООО «Йодные технологии и маркетинг» (Россия)	Р N002181/01-2013	2 фл.
		ОАО «Самарамедпром» (Россия)	ЛС-000100	
		ООО «Леккер» (Россия)	РУ РЗН 2013/219	
6	Аммиак (нашатырный спирт) раствор для наружного применения и ингаляций 10% - 40мл	ООО «Йодные технологии и маркетинг» (Россия)	ЛС-000163	1 фл.
		ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-001759/09	
7	Меновазин р-р для наружного применения спиртовой 40 мл	ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-010401/09	2 фл.
		ОАО «Самарамедпром» (Россия)	ЛСР-005779/10	
8	Цинковая мазь 10% 25г	ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛП-001817	1 уп.
		ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия)	ЛСР-005106/10	
Перевязочные средства				
9	Бинт марлевый стерильный 0,1x5м	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2011/12626	2 шт.
		ООО «АПСАНА» (Россия)	№ФСР 2008/03217	



ООО «Планета»

Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 30 из 36

Таблица А.3 (продолжение)

№	Наименование, форма выпуска (размеры)	Производитель (страна производителя)*	Номер регистрационного удостоверения	Коли- чество
10	Бинт марлевый стерильный 0,14x7 м	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2011/12626	2 шт.
11	Вата нестерильная 50,0 г	ООО «Русвата» (Россия)	№ФСР 2009/06267	1 уп.
12	Салфетки стерильные, не менее (45*29) см N5	ООО «Ахтамар» (Россия)	№ФСР 2011/12069	2 уп.
		ООО «АПСАНА» (Россия)	№ФСР 2008/03219	
13	Пакет перевязочный сте- рильный	ООО «ТД «АППОЛО» (Россия)	№ФСР 2010/07563	1 уп.
		ООО «Ингакамф» (Россия)	№ФСР2008/03791	
Медицинский инструментарий				
14	Жгут кровоостанавливаю- щий	ЗАО «Виталфарм» (Россия)	№ФСР 2008/03466	1 шт.
		ООО «Объединение Альфапластик» (Рос- сия)	№ФСР 2007/00032	
		ООО «Киевгума» (Украина)	ФСЗ 2012/12991	
15	Ножницы тупоконечные прямые	«СУРДЖИВЕЛЛ», SURGIWELL, Defence Road – Near Polytech staff Coloney, Sialkot, Pakistan (Пакистан)	ФСЗ 2008/02888	1 шт.

Примечания:

1. * Аптечка должна комплектоваться медицинскими изделиями и лекарственными средствами одного из производителей, указанных в перечне вложений.
2. Комплектация аптечки регламентируется национальными правилами, портовые власти имеют право требовать доукомплектации аптечек (при заходе в иностранные порты).
3. По истечении сроков годности медицинских изделий и лекарственных средств, входящих в состав аптечки, или в случае их использования, аптечку необходимо пополнить.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 31 из 36

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРИМЕНЕНИЯ СОДЕРЖИМОГО АПТЕЧКИ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНОГО СПАСАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА, «ПЛАНЕТА»,
Таблица Б.1 – Краткая инструкция о правилах применения содержимого Аптечки первой по-
мощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Шлюпка

№	Наименование медицинских из- делий	Фармакологическое действие	Указание по применению
Медикаменты для внутреннего применения			
1	Анальгин	Анальгезирующее (обез- боливающее)	Принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день при болях различного происхождения (головная, зубная, боли в мышцах, боли при переломах, ушибах, ранениях и т.п.), кроме болей в животе.
2	Ацетилсалици- ловая кислота	Противовоспалительное, жаропонижающее, аналь- гезирующее, антиагрега- ционное	Принимать как болеутоляющее и жаропонижающее средство по 1-2 таблетке 3 раза в день.
3	Валидол	Сосудорасширяющее, се- дативное	Принимать при острой боли в области сердца и стеснении в груди. Одну таблетку положить под язык и держать ее до полного рассасывания. Если в течение 20 минут после приема валидола боль не прошла, то следует принять еще одну таб- летку.
4	Валериана	Седативное	Принимать 1 таблетку при нервном возбуждении.
5	Циннаризин	Сосудорасширяющее, улучшающее мозговое кровообращение, улуч- шающее периферическое кровообращение	Принимать при появлении признаков морской бо- лезни (укачивании) по 1 таблетке 3 раза в день.
Медикаменты для наружного применения			
6	Аммиак (наша- тырный спирт)	Аналептическое (стиму- лятор дыхания), антисеп- тическое	Применять при потере сознания для стимуляции ды- хания при обморочном состоянии (в т.ч. при отрав- лении угарным газом). Содержимое ампулы вылить на ватный тампон, тампон отжать и поднести к каж- дой ноздре пострадавшего.
7	Йод спиртовой	Гиполипидемическое, ан- тисептическое, отвлека- ющее, противомикроб- ное.	Применять для дезинфекции кожи вокруг ран, а также для обработки небольших порезов и ссадин с целью предотвращения инфекции. Обработать края раны.
8	Линимент баль- замический по Вишневскому	Антисептическое, мест- нораздражающее	Применять при ожогах и обморожениях. На обож- женный участок или место обморожения кожи наложить стерильную салфетку, смоченную лини- ментом Вишневского, и прибинтовать ее, предвари- тельно закрыв слоем ваты.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 32 из 36

Таблица Б.1 (продолжение)

№	Наименование медицинских изделий	Фармакологическое действие	Указание по применению
9	Цинковая мазь	Противобактериальное	Применять при воспалительных поражениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины, опрелости). Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи или на те участки, которые необходимо защитить от действия солнца или иных погодных факторов 2-3 раза в день. Обладает антисептическим действием.
10	Салфетка с перекисью водорода	Антисептическое	Применять для обработки раневых поверхностей (мелких ран, ссадин, порезов), предупреждения инфицирования поврежденных участков кожи, санации ран перед перевязкой. На раневую поверхность (поврежденный участок кожи) наложить салфетку.
Перевязочные средства			
11	Бинт марлевый стерильный	Адсорбирующее, фиксирующее	Применять при кровотечении. Забинтовать рану, предварительно положив на нее стерильные салфетки; для фиксации тампонов из хирургической ваты, повязок и других медицинских изделий.
13	Вата нестерильная	Адсорбирующее	Применять для тампонов, наложения давящих повязок при кровотечениях.
14	Пластырь бактерицидный	Антибактериальное, фиксирующее	Применять при микропорезах, небольших ссадинах. Наклеить на раневую поверхность. Также применять для закрепления повязок на ранах.
15	Салфетки стерильные	Адсорбирующее	Применять для обработки раневой поверхности.
16	Салфетки спиртовые	Антимикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее	Применять для очищения и обеззараживания кожи, а также как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи.
17	Пакет перевязочный стерильный	Антисептическое, адсорбирующее	Применять при ранах и ожогах как давящую стерильную повязку. Наложить на открытую рану. Пакет вскрыть, приложить стерильной поверхностью к ране ватно-марлевую подушечку и бинтом укрепить ее в нужном положении.
Медицинский инструментарий			
18	Жгут кровоостанавливающий	Кровоостанавливающее	Применять для остановки кровотечения. Наложить поверх одежды на время не более чем на 1-1,5 часа (летом), 20-30 минут зимой).
19	Ножницы тупоконечные прямые	Режущее и раздавливающее	Применять для разрезания перевязочного материала.
20	Пинцет анатомический	Захватывающее	Применять для захватывания и удержания биотканей организма с целью временной остановки кровотечения.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 33 из 36

Таблица Б.2 – Краткая инструкция о правилах применения содержимого Аптечки первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Zip-Lock

№	Наименование медицинских изделий	Фармакологическое действие	Указание по применению
Медикаменты для внутреннего применения			
1	Анальгин	Анальгезирующее (обезболивающее)	Принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день при болях различного происхождения (головная, зубная, боли в мышцах, боли при переломах, ушибах, ранениях и т.п.), кроме болей в животе.
2	Ацетилсалициловая кислота	Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное	Принимать как болеутоляющее и жаропонижающее средство по 1-2 таблетке 3 раза в день.
3	Валидол	Сосудорасширяющее, седативное	Принимать при острой боли в области сердца и стеснении в груди. Одну таблетку положить под язык и держать ее до полного рассасывания. Если в течение 20 минут после приема валидола боль не прошла, то следует принять еще одну таблетку.
4	Валериана	Седативное	Принимать 1 таблетку при нервном возбуждении.
5	Циннаризин	Сосудорасширяющее, улучшающее мозговое кровообращение, улучшающее периферическое кровообращение	Принимать при появлении признаков морской болезни (укачивании) по 1 таблетке 3 раза в день.
Медикаменты для наружного применения			
6	Аммиак (нашатырный спирт)	Аналептическое (стимулятор дыхания), антисептическое	Применять при потере сознания для стимуляции дыхания при обморочном состоянии (в т.ч. при отравлении угарным газом). Содержимое ампулы вылить на ватный тампон, тампон отжать и поднести к каждой ноздре пострадавшего.
7	Йод спиртовой	Гиполипидемическое, антисептическое, отвлекающее, противомикробное	Применять для дезинфекции кожи вокруг ран, а также для обработки небольших порезов и ссадин с целью предотвращения инфекции. Обработать края раны.
8	Линимент бальзамический по Вишневскому	Антисептическое, местнораздражающее	Применять при ожогах и обморожениях. На обожженный участок или место обморожения кожи наложить стерильную салфетку, смоченную линиментом Вишневского, и прибинтовать ее, предварительно закрыв слоем ваты.



ООО «Планета»
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60
Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09
E-mail: 3362669@gmail.com

Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП

Версия: 1.1

Страница: 34 из 36

Таблица Б.2 (продолжение)

№	Наименование медицинских изделий	Фармакологическое действие	Указание по применению
9	Цинковая мазь	Противобактериальное	Применять при воспалительных поражениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины, опрелости). Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи или на те участки, которые необходимо защитить от действия солнца или иных погодных факторов 2-3 раза в день. Обладает антисептическим действием.
10	Салфетка с перекисью водорода	Антисептическое	Применять для обработки раневых поверхностей (мелких ран, ссадин, порезов), предупреждения инфицирования поврежденных участков кожи, санации ран перед перевязкой. На раневую поверхность (поврежденный участок кожи) наложить салфетку.
Перевязочные средства			
11	Бинт марлевый стерильный	Адсорбирующее, фиксирующее	Применять при кровотечении. Забинтовать рану, предварительно положив на нее стерильные салфетки; для фиксации тампонов из хирургической ваты, повязок и других медицинских изделий.
13	Вата нестерильная	Адсорбирующее	Применять для тампонов, наложения давящих повязок при кровотечениях.
14	Пластырь бактерицидный	Антибактериальное, фиксирующее	Применять при микропорезах, небольших ссадинах. Наклеить на раневую поверхность. Также применять для закрепления повязок на ранах.
15	Салфетки стерильные	Адсорбирующее	Применять для обработки раневой поверхности.
16	Салфетки спиртовые	Антимикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее	Применять для очищения и обеззараживания кожи, а также как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи.
17	Пакет перевязочный стерильный	Антисептическое, адсорбирующее	Применять при ранах и ожогах как давящую стерильную повязку. Наложить на открытую рану. Пакет вскрыть, приложить стерильной поверхностью к ране ватно-марлевую подушечку и бинтом укрепить ее в нужном положении.
Медицинский инструментарий			
18	Жгут кровоостанавливающий	Кровоостанавливающее	Применять для остановки кровотечения. Наложить поверх одежды на время не более чем на 1-1,5 часа (летом), 20-30 минут (зимой).
19	Ножницы тупоконечные прямые	Режущее и раздавливающее	Применять для разрезания перевязочного материала.
20	Пинцет анатомический	Захватывающее	Применять для захватывания и удержания биотканей организма с целью временной остановки кровотечения.

	ООО «Планета» Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60 Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09 E-mail: 3362669@gmail.com	Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП
		Версия: 1.1
		Страница: 35 из 36

Таблица Б.3 – Краткая инструкция о правилах применения содержимого Аптечки первой помощи коллективного спасательного средства, «Планета». Исполнение Zip-Lock Плот

№	Наименование медицинских изделий	Фармакологическое действие	Указание по применению
Медикаменты для внутреннего применения			
1	Анальгин	Анальгезирующее (обезболивающее)	Принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день при болях различного происхождения (головная, зубная, боли в мышцах, боли при переломах, ушибах, ранениях и т.п.), кроме болей в животе.
2	Ацетилсалициловая кислота	Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное	Принимать как болеутоляющее и жаропонижающее средство по 1-2 таблетке 3 раза в день.
3	Валидол	Сосудорасширяющее, седативное	Принимать при острой боли в области сердца и стеснении в груди. Одну таблетку положить под язык и держать ее до полного рассасывания. Если в течение 20 минут после приема валидола боль не прошла, то следует принять еще одну таблетку.
4	Циннаризин	Сосудорасширяющее, улучшающее мозговое кровообращение, улучшающее периферическое кровообращение	Принимать при появлении признаков морской болезни (укачивании) по 1 таблетке 3 раза в день.
Медикаменты для наружного применения			
5	Йод спиртовой	Гиполипидемическое, антисептическое, отвлекающее, противомикробное.	Применять для дезинфекции кожи вокруг ран, а также для обработки небольших порезов и ссадин с целью предотвращения инфекции. Обработать края раны.
6	Аммиак (нашатырный спирт)	Аналептическое (стимулятор дыхания), антисептическое	Применять при потере сознания для стимуляции дыхания при обморочном состоянии (в т.ч. при отравлении угарным газом). Содержимое ампулы вылить на ватный тампон, тампон отжать и поднести к каждой ноздре пострадавшего.
7	Меновазин	Анальгезирующее (обезболивающее)	Применять при невралгиях, болях в суставах, при травмах (ушибах, растяжении мышц и связок) для снижения болевых ощущений. Раствор использовать только наружно, для чего меновазин нанести на пораженную кожу и втереть (до трех раз в день).

	ООО «Планета» Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 20, литер В, помещение 60 Тел.: +7 (812) 454-75-72, +7 (812) 454-02-09 E-mail: 3362669@gmail.com	Документ: ПЛНТ.942849.001 ИП
		Версия: 1.1
		Страница: 36 из 36

Таблица Б.3 (продолжение)

№	Наименование медицинских изделий	Фармакологическое действие	Указание по применению
Перевязочные средства			
8	Цинковая мазь	Противобактериальное	Применять при воспалительных поражениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины, опрелости). Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи или на те участки, которые необходимо защитить от действия солнца или иных погодных факторов 2-3 раза в день. Обладает антисептическим действием.
9	Бинт марлевый стерильный	Адсорбирующее, фиксирующее	Применять при кровотечении. Забинтовать рану, предварительно положив на нее стерильные салфетки; для фиксации тампонов из хирургической ваты, повязок и других медицинских изделий.
10	Вата нестерильная	Адсорбирующее	Применять для тампонов, наложения давящих повязок при кровотечениях.
11	Салфетки стерильные	Адсорбирующее	Применять для обработки раневой поверхности.
12	Пакет перевязочный стерильный	Антисептическое, адсорбирующее	Применять при ранах и ожогах как давящую стерильную повязку. Наложить на открытую рану. Пакет вскрыть, приложить стерильной поверхностью к ране ватно-марлевую подушечку и бинтом укрепить ее в нужном положении
Медицинский инструментарий			
14	Жгут кровоостанавливающий	Кровоостанавливающее	Применять для остановки кровотечения. Наложить поверх одежды на время не более чем на 1-1,5 часа (летом), 20-30 минут (зимой).
15	Ножницы тупоконечные прямые	Режущее и раздавливающее	Применять для разрезания перевязочного материала.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 36 лист(ов)

(подпись шесть)

Генеральный директор

ООО «Планета»

Койфман М.И.

«20» *сентября* 2018г

