

Утверждено:

Эмма Хьюз

Дата: 3 марта 2017 года

(Подпись)

ФИО ответственного лица

Печать

Инструкция для потребителей:

Презервативы Contex®

Производитель:

«Рекитт Бенкизер Хелскаэр (ЮК) Лтд», Соединенное Королевство

Эксплуатационная документация

Презервативы Contex®

Пожалуйста, перед применением внимательно прочитайте инструкцию, особенно если вы хотите использовать презервативы для орального или анального секса.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы используются в качестве барьерной контрацепции, а также для защиты от заболеваний, передающихся половым путем.

Использование презервативов помогает предотвратить нежелательную беременность и защититься от ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем.

ВИДЫ ПРОДУКТА

Выпускаются следующие варианты изделия:

1. Classic - гладкие
2. Lights - гладкие, тонкие
3. Forced - гладкие, повышенной прочности
4. Extra Large - гладкие, увеличенного размера
5. Tornado - гладкие, специальной формы
6. Imperial - гладкие, плотнооблегающие
7. Ribbed - с ребристой текстурой
8. Dotted - с точечной текстурой
9. Romantic Love - гладкие, ароматизированные
10. Extra Sensation - с крупными точками и ребрами
11. Colour (red, orange, yellow) - гладкие, цветные
12. Relief - набор презервативов Context Dotted (6 презервативов) и Context Ribbed (6 презервативов)
13. Magic Box - набор презервативов Context Extra Sensation (6 штук), Context Dotted (4 штуки), Context Ribbed (4 штуки) и Context Romantic Love (4 штуки)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Презервативы изготовлены из натурального каучукового латекса. При осмотре на поверхности не должно быть трещин, отверстий, пузырей, посторонних включений, подтеков и наплывов, превышающих допуск по толщине. Накопитель презерватива должен быть без надрывов и ущемлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Contex Classic	
Характеристика	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05-0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	1,5±0,3
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	1,6 ± 0,5
Вес презерватива в первичной упаковке, г	2,5 ± 0,5
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Lights	
Характеристика	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2

Contex Lights	
Технические параметры	Спецификация
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	1,2±0,3
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	1,4 ±0,5
Вес презерватива в первичной упаковке, г	2,5 ± 0,5
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Freed	
Технические параметры	Спецификация
Длина презерватива, мм	190 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52,5 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный

Contex Forced	
Технический параметр	Спецификация
Масса презерватива, г (сухой)	$1,85 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,1 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,0 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Extra Large	
Технический параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	220 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	57 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,7 \pm 0,3$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,9 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,1 \pm 0,5$

Contex Extra Large	
Характеристика	Значение
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Tornado	
Характеристика	Значение
Длина презерватива, мм	220 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	57 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,7 \pm 0,3$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,9 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,1 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17

Contex Tornado	
Технический параметр	Спецификация
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Imperial	
Технический параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	190 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	$52,5 \pm 2$
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,45 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,7 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,7 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Ribbed	
Технический параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10

Contex Ribbed	
Наименование параметра	Спецификация
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	53 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	Не применимо к текстурированным презервативам
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Коралловый
Масса презерватива, г (сухой)	$1,85 \pm 0,50$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,0 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,1 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Contex Dotted	
Наименование параметра	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	Не применимо к текстурированным презервативам

Contex Dotted	
Технические параметры	Спецификации
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,65 \pm 0,50$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,8 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,8 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Contex Romantic Love	
Технические параметры	Спецификации
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05-0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Красный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,5 \pm 0,3$

Contex Romantic Love	
Технический параметр	Спецификация
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,6 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,5 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Contex Extra Sensation	
Технический параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	195 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	Не применимо к текстурированным презервативам
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$2,5 \pm 0,5$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,6 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,35 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 600

% (после старения)	
--------------------	--

ConTex Extra Sensation	
Измеряемый параметр	Спецификация
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

ConTex Colour (Red)	
Измеряемый параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Красный
Масса презерватива, г (сухой)	1,5±0,3
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	1,6 ± 0,5
Вес презерватива в первичной упаковке, г	2,5 ± 0,5
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания

	абсорбирующей бумаги
--	----------------------

Contex Colour (Red)	
Технические параметры	Стандартные значения

*ГОСТ 4645-81

Contex Colour (Orange)	
Технические параметры	Стандартные значения
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Оранжевый
Масса презерватива, г (сухой)	$1,5 \pm 0,3$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,7 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,5 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Conex Colour (Yellow)	
Исследовательский параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Желтый
Масса презерватива, г (сухой)	$1,5 \pm 0,3$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,6 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,5 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен *
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

УПАКОВКА

Картонные коробки, содержащие 3, 6, 12, 18, 30 презервативов и любые сочетания презервативов в наборах, служащих вторичной потребительской упаковкой. Каждый презерватив упакован в индивидуальную упаковку из фольги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Презервативы из натурального латекса могут вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок.

При наличии повышенной чувствительности или аллергии на латекс - необходима консультация врача, или следует пользоваться презервативами, изготовленными из синтетического латекса.

Не использовать лубриканты на масляной основе (вазелин, детское масло, некоторые пессарии). Необходимо всегда читать инструкцию на упаковке лубриканта. Перед использованием презервативов следует проконсультироваться со специалистом, так как некоторые лекарственные средства для местного применения могут повредить презерватив.

Следует немедленно прекратить использование презерватива и проконсультироваться с врачом в случае появления дискомфорта, при разрыве презерватива (сделать это как можно раньше, в течение 72 часов).

Ни один метод контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ: Не использовать презерватив при нарушении целостности индивидуальной упаковки. Перед использованием следует проверить срок годности презерватива.

Следует надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и осторожно извлечь презерватив.

Убедиться, что презерватив не вывернут наизнанку. Необходимо сжать накопитель на конце презерватива и надеть презерватив на головку эрегированного пениса. Размотать презерватив до основания эрегированного пениса до сексуального контакта. Следует убедиться, что презерватив не слишком сжимает и не соскальзывает, так как это может привести к его повреждению.

Сразу после эякуляции осторожно снять презерватив. Презерватив следует крепко придерживать у основания полового члена до снятия. Выбросить презерватив в мусорное ведро. Не смывать презерватив в унитаз.

Для анального секса использовать дополнительную смазку снаружи презерватива.

Использовать каждый раз новый презерватив для разного вида секса.

Презервативы предназначены только для одноразового применения. Повторное использование может повысить риск разрыва или инфицирования.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия осуществляется в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами транспортировки грузов со специальным температурным режимом от -50 °С до + 50 °С (относительная влажность 80 % при 25 °С). Следует избегать механического повреждения и попадания прямых солнечных лучей. Избегать контакта с масляными продуктами, фенолами и их производными, нефтяными маслами, бензином, керосином, и другими органическими веществами. После транспортировки презервативов при минусовой температуре, их следует распаковывать после выдерживания в течение 1 дня при нормальных климатических условиях.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Изделие следует хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25°С и при относительной влажности до 80% на расстоянии не ближе 1 м до нагревательных приборов. Следует избегать механического повреждения и попадания прямых солнечных лучей. В случае обнаружения признаков разрушения по свойствам материала (липкость, хрупкость), изделие должно быть утилизировано.

Избегать контакта с масляными продуктами, фенолами и их производными, нефтяными маслами, бензином, керосином, и другими органическими веществами.

Срок годности:

Classic - 5 лет
Lights - 5 лет
Forced - 5 лет
Extra Large - 5 лет
Imperial - 5 лет
Ribbed - 5 лет
Dotted - 5 лет
Relief - 5 лет
Tornado - 5 лет
Romantic Love - 5 лет
Extra Sensation - 5 лет
Colour (red, orange, yellow) - 5 лет
Magic Box - 5 лет

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ Изделие должно использоваться в соответствии с инструкциями по применению.

Изделие утилизируется как бытовые отходы. Не выбрасывать в канализацию.

В клиниках утилизация презервативов выполняется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Не применимо, так как изделие должно быть утилизировано после однократного применения одним пользователем.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При правильной эксплуатации, хранении и утилизации презервативы Contex не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Презервативы Contex соответствуют требованиям Директивы совета ЕС 93/42/ЕЕС и применимого для данной области законодательства.

Качество изделий гарантировано при надлежащем хранении и использовании.

РЕКЛАМАЦИИ

В случае возникновения рекламаций относительно изделия следует обратиться в ООО «Рекитт Бенквизер Хэлскэр». Юридический адрес: Россия, 125009, г. Москва, улица Тверская, д.16/2
Телефон: +7 (495) 961 25 65; факс: +7 (495) 961 25 66.

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Паршиной Оксаной Игоревной.

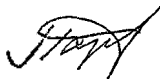

Российская Федерация. Город Москва.

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, **Боронина Евгения Владимировна**, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы **Бахтадзе Эльмиры Юрьевны**, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Паршиной Оксаны Игоревны**.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 2-856

Взыскано по тарифу **100 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —

Е.В. Боронина

Подпись

Печать



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....
ВРИО Нотариуса.....)

Подпись

Печать

Российская Федерация. Город Москва

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, **Боронина Евгения Владимировна**, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы **Бахтадзе Эльмиры Юрьевны**, свидетельствую верность копии с представленного мне эксплуатационного файла с переводом.

Зарегистрировано в реестре: № 2-857

Взыскано по тарифу: 200 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —

Е.В. Боронина



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....

ВРИО Нотариуса.....)

Утверждено:

Эмма Хьюз

Дата: 22.02.17 г.

(Подпись)

ФИО ответственного лица

Печать

Инструкция для потребителей:

Презервативы Contex®


Производитель:

«Рекитт Бенкисер Хелскзар (ЮК) Лтд.», Соединенное Королевство

Инструкция для потребителей

(Листок-вкладыш)

Презервативы Contex®

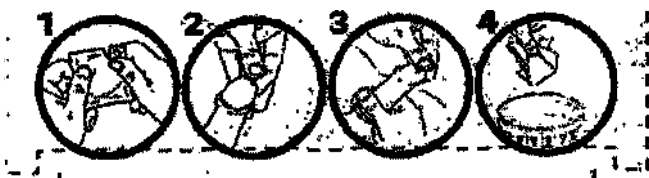

Пожалуйста, перед применением внимательно прочитайте инструкцию, особенно если вы собираетесь использовать презервативы для орального или анального секса.

Презервативы используются в качестве барьерного средства контрацепции, а также для защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Использование презервативов помогает предотвратить нежелательную беременность и защититься от ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергия как на натуральный латекс, так и на любые компоненты презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Натуральный латекс может вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок. При наличии повышенной чувствительности или аллергии на латекс – проконсультируйтесь с врачом или попробуйте презервативы из синтетического латекса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать лубриканты (смазки) нефтяного происхождения или на масляной основе (вазелин, детское масло, некоторые лессарии и т.д.). Всегда читать инструкцию на упаковке лубриканта (смазки). Перед использованием презервативов проконсультироваться со специалистом, так как некоторые лекарственные средства для местного применения могут вызывать повреждение презерватива. Проконсультироваться с врачом о совместимости презервативов с другими противозачаточными средствами.

Немедленно прекратить использование презерватива и обратиться за медицинской помощью в следующих случаях:

- неприятные ощущения;
- разрыв презерватива (сделать это как можно раньше в течение 72 часов).

Ни один метод контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Не использовать презерватив при нарушении целостности индивидуальной упаковки. Перед использованием проверить срок годности презерватива.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надрвать упаковку со стороны зубчатой кромки и осторожно извлечь презерватив.

Убедиться, что презерватив не вывернут наизнанку. Сжать накопитель на конце презерватива и надеть презерватив на головку эрегированного пениса. Размотать презерватив до основания эрегированного пениса до сексуального контакта/ до того, как он коснется партнера. Убедиться, что презерватив не слишком сжимает и не соскальзывает, так как это может привести к его повреждению.

Сразу после эякуляции, после окончания полового акта, осторожно снять презерватив. Плотнo придержать презерватив у основания пениса перед снятием. Выбросить презерватив в мусорное ведро. Не смывать презерватив в унитаз.

При необходимости (и для анального секса) следует использовать дополнительную смазку. Использовать каждый раз новый презерватив для нового вида секса.

Презервативы предназначены только для однократного использования. Повторное использование может привести к повреждению презерватива или увеличить риск возникновения инфекции.

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Паршиной Оксаной Игоревной.



Российская Федерация. Город Москва.

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Боронина Евгения Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы Бахтадзе Эльмиры Юрьевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Паршиной Оксаны Игоревны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 4-886

Взыскано по тарифу 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —

Е.В. Боронина

Подпись

Печать

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....

ВРИО Нотариуса.....)

Подпись

Печать

Российская Федерация. Город Москва

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Боронина Евгения Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы Бахтадзе Эльмиры Юрьевны, свидетельствую верность копии с представленного мне письма с переводом.

Зарегистрировано в реестре: № 4-886

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —

Е.В. Боронина



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....

ВРИО Нотариуса.....

