

Утверждено:

Эмма Хьюз

Дата: 3 марта 2017 года

(Подпись)

ФИО ответственного лица

Печать

Эксплуатационная документация:

Презервативы марки Durex®

Производитель:

«Рекитт Бенкизер Хелскап (ЮК) Лтд», Соединенное Королевство

Эксплуатационная документация

Презервативы марки Durex®

Пожалуйста, перед применением внимательно прочитайте инструкцию, особенно если вы собираетесь использовать презервативы для орального или анального секса.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы используются в качестве барьерной контрацепции, а также для защиты от заболеваний, передающихся половым путем.

Использование презервативов помогает предотвратить нежелательную беременность и защититься от ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Выпускаются следующие варианты изделия:

1. Classic - гладкие
2. Extra Safe - гладкие, утолщенные
3. Elite - гладкие, сверхтонкие
4. Fruity Mix (strawberry, orange, banana) - гладкие, цветные
5. Select (strawberry, orange, banana) - гладкие, цветные
6. Intense Orgasmic - рельефные
7. Invisible - ультратонкие
8. Pleasuremax - с ребрами и пупырышками
9. Sensation - с пупырышками
10. XXL - гладкие, увеличенного размера
11. Comfort XL - гладкие, увеличенного размера

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Презервативы изготовлены из натурального каучукового латекса, бесцветные/цветные/ароматизированные и гладкие/текстурированные. При осмотре на поверхности презервативов не должно быть трещин, отверстий, пузырей, посторонних включений, подтеков и наплывов, превышающих допуск по толщине. Накопитель презерватива должен быть без надрывов и ущемлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Durex Classic	
Технические характеристики	Единицы измерения
Длина презерватива, мм	195 ±10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	1,60 ± 0,3
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	1,90 ± 0,5
Вес презерватива в первичной упаковке, г	2,80 ± 0,5
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Durex Extra Safe	
Технические характеристики	Единицы измерения
Длина презерватива, мм	195 ±10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2

Durex Extra Safe	
Конструктивный параметр	Спецификация
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,80 \pm 0,3$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,10 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,10 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Durex Elite	
Конструктивный параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	195 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,40 \pm 0,3$

Durex Elite	
Технические характеристики	Согласно ГОСТ
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,70 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,70 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Durex Intense Orgasmic	
Технические характеристики	Согласно ГОСТ
Длина презерватива, мм	195 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	Не применимо к текстурированным презервативам
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$2,5 \pm 0,5$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,9 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,7 \pm 0,5$
Относительное	Не менее 700

удлинение при разрыве, %	
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Durex Intense Orgasmic	
Измеряемый параметр	Спецификация
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Durex Invisible	
Измеряемый параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,043 - 0,052
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$0,95 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$1,2 \pm 0,5$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,0 \pm 0,5$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600

Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Durex Pleasuremax	
Технический индекс и параметры	Спецификация
Длина презерватива, мм	195 ±10
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	Не применимо для текстурированных презервативов
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	2,5 ± 0,5
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	2,6 ± 0,5
Вес презерватива в первичной упаковке, г	3,35 ± 0,50
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

Durex Sensation	
Технические условия параметры	Спецификации
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	53±2
Длина накопителя, мм	Не менее 11

Durex Sensation	
Технические условия параметры	Спецификации
Толщина, мм	Не применимо для текстурированных презервативов
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	1,79 ± 0,50
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	2,20 ± 0,50
Вес презерватива в первичной упаковке, г	2,95 ± 0,50
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

Durex XXL	
Технические данные параметры	Спецификация
Длина презерватива, мм	Не менее 220
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2 "
Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$2,24 \pm 0,30$

Durex XXL	
Технические данные параметры	Спецификация
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,75 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,50 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

Durex Fruity Mix (Strawberry)	
Технические данные параметры	Спецификация
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина	53 ± 2

презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Красный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,76 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,17 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,92 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600

Durex Fruity Mix (Strawberry)	
Испытательный номер	Испытательный номер
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Durex Fruity Mix (Orange)	
Испытательный номер	Испытательный номер
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	53 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11

Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Оранжевый
Масса презерватива, г (сухой)	$1,76 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,17 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,92 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17

Durex Fruity Mix (apple, pear)	
Технический параметр	Требования
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Durex Fruity Mix (Banana)	
Технический параметр	Требования
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	53 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05 - 0,09

Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Желтый
Масса презерватива, г (сухой)	$1,76 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,17 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,92 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Durex Select (Strawberry)	
Технический описание параметра	Спецификация
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	53 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05-0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Красный
Масса презерватива, г (сухой)	$1,76 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,17 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,92 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Durex Select (Orange)	
Технический описание параметра	Спецификация
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина презерватива, мм	53 ± 2

(измерена в 30 мм от венчика)	-
Длина накопителя, мм	Не менее 11

Durex Select (apple/pear)	
Измерительный параметр	Спецификация
Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Оранжевый
Масса презерватива, г (сухой)	1,76 ± 0,30
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	2,17 ± 0,50
Вес презерватива в первичной упаковке, г	2,92 ± 0,50
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Durex Select (Banana)	
Измерительный параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	Не менее 180
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	53 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11

Толщина, мм	0,05–0,09
Толщина венчика, мм	1-2
Цвет	Желтый

Durex Select (Banana) (Банан)	
Механические свойства	Специфические свойства
Масса презерватива, г (сухой)	$1,76 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,17 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$2,92 \pm 0,50$
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Отсутствие признаков окрашивания абсорбирующей бумаги

*ГОСТ 4645-81

Durex Comfort XL	
Механические свойства	Специфические свойства
Длина презерватива, мм	Не менее 220
Ширина презерватива, мм (измерена в 30 мм от венчика)	56 ± 2
Длина накопителя, мм	Не менее 11
Толщина, мм	0,05 - 0,09
Толщина венчика, мм	1-2

Цвет	Бесцветный
Масса презерватива, г (сухой)	$2,24 \pm 0,30$
Масса сухого презерватива с пудрой и лубрикантом, г	$2,75 \pm 0,50$
Вес презерватива в первичной упаковке, г	$3,50 \pm 0,50$

Durex Comfort XL	
Характеристики	Стандарты
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное удлинение при разрыве, % (после старения)	Не менее 600
Герметичность	Герметичен*
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17
Цветостойкость	Не применимо

*ГОСТ 4645-81

УПАКОВКА

Картонные коробки, содержащие 3, 6, 12, 18, 30 презервативов и любые сочетания презервативов в наборах, служащих вторичной потребительской упаковкой. Каждый презерватив упакован в индивидуальную упаковку из фольги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Презервативы из натурального латекса могут вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок. При наличии повышенной чувствительности или аллергии на латекс - необходима консультация врача, или следует пользоваться презервативами, изготовленными из синтетического латекса.

Не использовать лубриканты на масляной основе (вазелин, детское масло, некоторые пессарии). Необходимо всегда читать инструкцию на упаковке лубриканта. Перед использованием презервативов следует проконсультироваться со специалистом, так как некоторые лекарственные средства для местного применения могут повредить презерватив.

Следует немедленно прекратить использование презерватива и обратиться за медицинской помощью в случае появления дискомфорта, при разрыве презерватива (сделать это как можно раньше, в течение 72 часов).

Ни один метод контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ: Не использовать презерватив при нарушении целостности индивидуальной упаковки. Перед использованием следует проверить срок годности презерватива.

Следует надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и осторожно извлечь презерватив.

Убедиться, что презерватив не вывернут наизнанку. Необходимо сжать накопитель на конце презерватива и надеть презерватив на головку эрегированного пениса. Размотать презерватив до основания эрегированного пениса до сексуального контакта. Следует убедиться, что презерватив не слишком сжимает и не соскальзывает, так как это может привести к его повреждению.

Сразу после эякуляции осторожно снять презерватив. Презерватив следует крепко придерживать у основания полового члена до снятия. Выбросить презерватив в мусорное ведро. Не смывать презерватив в унитаз.

Для анального секса использовать дополнительную смазку снаружи презерватива.

Использовать каждый раз новый презерватив для разного вида секса.

Презервативы предназначены только для одноразового применения. Повторное использование может повысить риск разрыва или инфицирования.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия осуществляется в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами транспортировки грузов с соблюдением температурного режима от -50 °C до + 50 °C (относительная влажность 80 % при 25 °C). Следует избегать механического повреждения и попадания прямых солнечных лучей. Избегать контакта с масляными продуктами, фенолами и их производными, нефтяными маслами, бензином, керосином, и другими органическими веществами. После транспортировки презервативов при минусовой температуре, их следует распаковывать после выдерживания в течение 1 суток при нормальных климатических условиях.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Изделие следует хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Следует избегать механического повреждения и воздействия прямых солнечных лучей. В случае обнаружения признаков разрушения по свойствам материала (липкость, хрупкость), продукт должен быть утилизирован.

Избегать контакта с масляными продуктами, фенолами и их производными, нефтяными маслами, бензином, керосином, и другими органическими веществами.

Срок годности:

Classic - 5 лет.

Extra Safe - 5 лет.

Elite - 5 лет.

Fruity Mix:

- strawberry - 5 лет.

- orange - 5 лет.

- banana - 5 лет.

Select:

- strawberry - 5 лет;
- orange - 5 лет;
- banana - 5 лет.

Intense Orgasmic - 5 лет.

Invisible - 5 лет.

Pleasuremax - 5 лет.

Sensation - 5 лет.

XXL - 5 лет.

Comfort XL - 5 лет.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Изделие утилизируется как бытовые отходы. Не выбрасывать в канализацию.

В клиниках утилизация презервативов выполняется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Не применимо, так как изделие должно быть утилизировано после однократного применения одним пользователем.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При правильной эксплуатации, хранении и утилизации презервативы марки Durex не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Презервативы марки Durex соответствуют требованиям Директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС и примененного для данной области законодательства. Качество изделий гарантировано при надлежащем хранении и использовании.

РЕКЛАМАЦИИ

В случае возникновения рекламаций относительно изделия следует обратиться в ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр». Юридический адрес: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.16/2.
Телефон: +7 (495) 961 25 65; факс: +7 (495) 961 25 66.

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Паришиной Оксаной Игоревной.

Российская Федерация. Город Москва.

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Боронина Евгения Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы Бахтадзе Эльмиры Юрьевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Паршиной Оксаны Игоревны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 2854

Взыскано по тарифу 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: --

Е.В. Боронина

Подпись

Печать

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....
ВРИО Нотариуса.....)



Российская Федерация. Город Москва

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Боронина Евгения Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы Бахтадзе Эльмиры Юрьевны, свидетельствую верность копии с представленного мне эксплуатационного файла с переводом.

Зарегистрировано в реестре: № 2855

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: --

Е.В. Боронина



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....
ВРИО Нотариуса.....)

[Handwritten signature]

Утверждено:

Эмма Хьюз

Дата: 22.02.17 г.

(Подпись)

ФИО ответственного лица

Печать

Инструкция для потребителей:

Презервативы марки Durex ®


Производитель:

«Рекитт Бенкизер Хелскап (ЮК) Лтд», Соединенное Королевство

Инструкция для потребителей

(Листок-вкладыш)

Презервативы марки Durex®

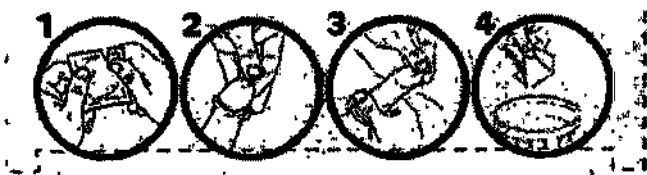

Пожалуйста, перед применением внимательно прочитайте инструкцию, особенно если вы собираетесь использовать презервативы для орального или анального секса.

Презервативы используются в качестве барьерного средства контрацепции, а также для защиты от заболеваний, передающихся половым путем.

Использование презервативов помогает предотвратить нежелательную беременность и защититься от ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергия как на натуральный латекс, так и на любые компоненты презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Натуральный латекс может вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок. При наличии повышенной чувствительности или аллергии на латекс – проконсультируйтесь с врачом или попробуйте презервативы из синтетического латекса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать лубриканты (смазки) нефтяного происхождения или на масляной основе (вазелин, детское масло, некоторые pessaries и т.д.). Всегда читать инструкцию на упаковке лубриканта (смазки). Перед использованием презервативов проконсультироваться со специалистом, так как некоторые лекарственные средства для местного применения могут вызывать повреждение презерватива. Проконсультироваться с врачом о совместимости презервативов с другими противозачаточными средствами.

Немедленно прекратить использование презерватива и обратиться за медицинской помощью в следующих случаях:

- неприятные ощущения;
- разрыв презерватива (сделать это как можно раньше в течение 72 часов).

Ни один метод контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Не использовать презерватив при нарушении целостности индивидуальной упаковки. Перед использованием проверить срок годности презерватива.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надрвать упаковку со стороны зубчатой кромки и осторожно извлечь презерватив.

Убедиться, что презерватив не вывернут наизнанку. Сжать накопитель на конце презерватива и надеть презерватив на головку эрегированного пениса. Размотать презерватив до основания эрегированного пениса до сексуального контакта/ до того, как он коснется партнера. Убедиться, что презерватив не слишком сжимает и не соскальзывает, так как это может привести к его повреждению.

Сразу после эякуляции, после окончания полового акта, осторожно снять презерватив. Плотно придержать презерватив у основания пениса перед снятием. Выбросить презерватив в мусорное ведро. Не смывать презерватив в унитаз.

При необходимости (и для анального секса) следует использовать дополнительную смазку. Использовать каждый раз новый презерватив для нового вида секса.

Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное использование может привести к повреждению презерватива или увеличить риск возникновения инфекции.

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Паршиной Оксаной Игоревной.



Российская Федерация. Город Москва.

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, **Боронина Евгения Владимировна**, временно исполняющая обязанности нотариуса г. **Москвы Бахтадзе Эльмиры Юрьевны**, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Паршиной Оксаны Игоревны**.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № **4-884**

Взыскано по тарифу **100 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —

Е.В. Боронина

Подпись

Печать

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....
ВРИО Нотариуса.....)

Подпись

Печать

Российская Федерация. Город Москва

Двадцать второго марта две тысячи семнадцатого года.

Я, **Боронина Евгения Владимировна**, временно исполняющая обязанности нотариуса г. **Москвы Бахтадзе Эльмиры Юрьевны**, свидетельствую верность копии с представленного мне письма переводчика

Зарегистрировано в реестре: № **4-885**

Взыскано по тарифу: **100 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —

Е.В. Боронина



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.....лист.....
ВРИО Нотариуса.....)

