

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УФИМСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП «Уфимское ПрОП»

Минздравсоцразвития России

К.Г.Исхакова

2011 г.

**БАНДАЖИ ПОСЛЕРОДОВЫЕ
БН2-12ПР**

Памятка по пользованию

Бандажи послеродовые БН2-12ПР предназначены для ношения в послеродовом периоде с целью более быстрого сокращения мышц брюшной стенки и тазового дна, а также предотвращения опущения органов брюшной полости и малого таза.

1 Описание конструкции

Бандажи могут быть изготовлены составными из передних и задних деталей из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани.

Бандаж послеродовый изготавливается с широким поясом-подхватом и дополнительными поясами из сдвоенной ленты эластичной бандажной с застежками текстильными «контакт».

Пояс-подхват вшит под планку, закрывающую стык деталей бандажа и имеет нашитую на краю пояса с внутренней стороны ленту крючковую застежки текстильной «контакт». На лицевой стороне изделия нашита лента петельная застежки текстильной «контакт».

На швы соединений деталей бандажей могут быть настроены планки из основной ткани. Для придания жесткости изделиям под планки могут быть вставлены планшетки.

Допускается бандажи изготавливать с чулкодержателями.

2. Надевание и пользование бандажными изделиями

Бандаж следует надевать в положении лежа.

Рекомендуется надевать бандажи на нижнее белье.

Бандажи плотно прилегают к телу, не оказывая болезненного давления и не смещаясь вдоль тела человека.

Крепление бандажей не защемляет кожу тела человека и не стесняет дыхание и кровообращение.

3 Уход за бандажными изделиями

При загрязнении бандаж необходимо протирать от загрязнения спиртовым раствором или влажным мыльным тампоном.

Моющие порошки, жидкости применять не рекомендуется.

Нельзя сушить бандажи на отопительных батареях, печах и обогревательных приборах.

4 Гарантии изготовителя


Гарантийный срок эксплуатации бандажей – три месяца со дня выдачи пользователю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие-изготовитель производит замену бандажа бесплатно.

Директор



К.Г. Исхакова

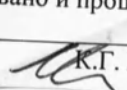

Пронумеровано и прошнуровано 2
листов
Директор  К.Г. Исхакова