

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УФИМСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП «Уфимское ПрОП»

Минздравсопразвития России

К.Г.Исхакова

2011 г.

**Бандажи дородовые БН2-11ДР
Памятка по пользованию**

Бандажи дородовые БН2-11ДР предназначены для предохранения брюшной стенки женщины от растяжения со второго триместра беременности, сохранения правильного положения плода и обеспечения его нормального кровообращения, а также поддержания матки и снятия нагрузки с живота и нижней части спины.

1 Описание конструкции

Бандажи могут быть изготовлены составными из передних и задних деталей из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани.

Бандажи дородовые изготавливаются с втачанными боковыми вставками из ленты эластичной бандажной по высоте изделия, двойным поясом - подхватом и шнуровкой посередине передней и задней деталей.

Пояс- подхват притачан по середине передней части бандажа внизу на расстоянии не менее 20 мм. от нижнего края изделия и изготовлен из эластичной бандажной ленты с паточками из основной ткани, застегивающийся на крючки или блочки с каждой стороны.

На швы соединений деталей бандажей могут быть настроены планки из основной ткани. Для придания жесткости изделиям под планки могут быть вставлены планшетки.

Допускается бандажи изготавливать с чулкодержателями.

2. Надевание и пользование бандажными изделиями

Бандаж следует надевать в положении лежа.

Рекомендуется надевать бандажи на нижнее белье.

Бандажи плотно прилегают к телу, не оказывая болезненного давления и не смещаясь вдоль тела человека.

Крепление бандажей не защемляет кожу тела человека и не стесняет дыхание и кровообращение.

3 Уход за бандажными изделиями

При загрязнении бандаж необходимо протирать от загрязнения спиртовым раствором или влажным мыльным тампоном.

Моющие порошки, жидкости применять не рекомендуется.

Нельзя сушить бандажи на отопительных батареях, печах и обогревательных приборах.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации бандажей – три месяца со дня выдачи пользователю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие- изготовитель производит замену бандажа бесплатно.

Директор



К.Г. Исхакова

