

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

«15» августа 2018 г.



**Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических
лабораторий по ТУ32.50.30-002-14692415-2017**

Руководство по эксплуатации

2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	4
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.....	7
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	7
7. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8
8. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	8
9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	8
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	9
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий предназначена для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических и других исследований.

Область применения: может применяться в любых лабораторных отделениях лечебно-профилактических учреждений.

Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-002-14692415-2017 в следующих исполнениях:


1. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПн-ТС 01 модели: ШПн-ТС 01-01, ШПн-ТС 01-02, ШПн-ТС 01-03, ШПн-ТС 01-04, ШПн-ТС 01-05, ШПн-ТС 01-06, ШПн-ТС 01-07, ШПн-ТС 01-08, ШПн-ТС 01-09, ШПн-ТС 01-10, ШПн-ТС 01-11, ШПн-ТС 01-12, ШПн-ТС 01-13, ШПн-ТС 01-14;
2. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПк-ТС 01 модели: ШПк-ТС 01-01, ШПк-ТС 01-02, ШПк-ТС 01-03, ШПк-ТС 01-04, ШПк-ТС 01-05, ШПк-ТС 01-06, ШПк-ТС 01-07, ШПк-ТС 01-08, ШПк-ТС 01-09, ШПк-ТС 01-10, ШПк-ТС 01-11, ШПк-ТС 01-12, ШПк-ТС 01-13, ШПк-ТС 01-14;
3. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПн-ТС 02 модели: ШПн-ТС 02-01, ШПн-ТС 02-02, ШПн-ТС 02-03, ШПн-ТС 02-04, ШПн-ТС 02-05, ШПн-ТС 02-06, ШПн-ТС 02-07, ШПн-ТС 02-08, ШПн-ТС 02-09, ШПн-ТС 02-10, ШПн-ТС 02-11, ШПн-ТС 02-12, ШПн-ТС 02-13, ШПн-ТС 02-14;
4. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПк-ТС 02 модели: ШПк-ТС 02-01, ШПк-ТС 02-02, ШПк-ТС 02-03, ШПк-ТС 02-04, ШПк-ТС 02-05, ШПк-ТС 02-06, ШПк-ТС 02-07, ШПк-ТС 02-08, ШПк-ТС 02-09, ШПк-ТС 02-10, ШПк-ТС 02-11, ШПк-ТС 02-12, ШПк-ТС 02-13, ШПк-ТС 02-14;
5. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПн-ТС 03 модели: ШПн-ТС 03-01, ШПн-ТС 03-02, ШПн-ТС 03-03, ШПн-ТС 03-04, ШПн-ТС 03-05, ШПн-ТС 03-06, ШПн-ТС 03-07, ШПн-ТС 03-08, ШПн-ТС 03-09, ШПн-ТС 03-10, ШПн-ТС 03-11, ШПн-ТС 03-12, ШПн-ТС 03-13, ШПн-ТС 03-14;
6. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПк-ТС 03 модели: ШПк-ТС 03-01, ШПк-ТС 03-02, ШПк-ТС 03-03, ШПк-ТС 03-04, ШПк-ТС 03-05, ШПк-ТС 03-06, ШПк-ТС 03-07, ШПк-ТС 03-08, ШПк-ТС 03-09, ШПк-ТС 03-10, ШПк-ТС 03-11, ШПк-ТС 03-12, ШПк-ТС 03-13, ШПк-ТС 03-14;
7. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПн-ТС 04 модели: ШПн-ТС 04-01, ШПн-ТС 04-02, ШПн-ТС 04-03, ШПн-ТС 04-04, ШПн-ТС 04-05, ШПн-ТС 04-06, ШПн-ТС 04-07, ШПн-ТС 04-08, ШПн-ТС 04-09, ШПн-ТС 04-10, ШПн-ТС 04-11, ШПн-ТС 04-12, ШПн-ТС 04-13, ШПн-ТС 04-14 ШПн-ТС 04-15, ШПн-ТС 04-16;
8. Ширма-перегородка медицинская для клинико-диагностических лабораторий ШПк-ТС 04 модели: ШПк-ТС 04-01, ШПк-ТС 04-02, ШПк-ТС 04-03, ШПк-ТС 04-04, ШПк-ТС 04-05, ШПк-

ТС 04-06, ШПк-ТС 04-07, ШПк-ТС 04-08, ШПк-ТС 04-09, ШПк-ТС 04-10, ШПк-ТС 04-11, ШПк-ТС 04-12, ШПк-ТС 04-13, ШПк-ТС 04-14, ШПк-ТС 04-15, ШПк-ТС 04-16.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания отсутствуют.
Возможные побочные действия отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

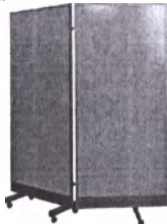№	Наименование	Внешний вид	Техническое описание				
1	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 01		Габаритные размеры:				
			Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (±3кг)
			ШПн-ТС 01-01	725	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-02	750	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-03	800	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-04	850	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-05	900	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-06	950	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-07	1000	1700	3	7
			ШПн-ТС 01-08	725	1750	3	7
			ШПн-ТС 01-09	750	1750	3	7
			ШПн-ТС 01-10	800	1750	3	7
			ШПн-ТС 01-11	850	1750	3	7
			ШПн-ТС 01-12	900	1750	3	7
			ШПн-ТС 01-13	950	1750	3	7
			ШПн-ТС 01-14	1000	1750	3	7
2	Ширма-перегородка медицинская ШПк-ТС 01		Габаритные размеры:				
			Модели	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (± 3кг)
			ШПк-ТС 01-01	725	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-02	750	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-03	800	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-04	850	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-05	900	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-06	950	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-07	1000	1700	3	7
			ШПк-ТС 01-08	725	1750	3	7
			ШПк-ТС 01-09	750	1750	3	7
			ШПк-ТС 01-10	800	1750	3	7
			ШПк-ТС 01-11	850	1750	3	7
			ШПк-ТС 01-12	900	1750	3	7
			ШПк-ТС 01-13	950	1750	3	7
			ШПк-ТС 01-14	1000	1750	3	7
3	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 02 двухсекционная		Габаритные размеры:				
			Модели	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (± 3кг)
			ШПн-ТС 02-01	1450	1700	3	13
			ШПн-ТС 02-02	1475	1700	3	13
			ШПн-ТС 02-03	1500	1700	3	13

			<table><tr><td>ШПн-ТС 02-04</td><td>2000</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-05</td><td>2020</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-06</td><td>2025</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-07</td><td>2050</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-08</td><td>1450</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-09</td><td>1475</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-10</td><td>1500</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-11</td><td>2000</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-12</td><td>2020</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-13</td><td>2025</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 02-14</td><td>2050</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr></table>	ШПн-ТС 02-04	2000	1700	3	13	ШПн-ТС 02-05	2020	1700	3	13	ШПн-ТС 02-06	2025	1700	3	13	ШПн-ТС 02-07	2050	1700	3	13	ШПн-ТС 02-08	1450	1750	3	13	ШПн-ТС 02-09	1475	1750	3	13	ШПн-ТС 02-10	1500	1750	3	13	ШПн-ТС 02-11	2000	1750	3	13	ШПн-ТС 02-12	2020	1750	3	13	ШПн-ТС 02-13	2025	1750	3	13	ШПн-ТС 02-14	2050	1750	3	13																									
ШПн-ТС 02-04	2000	1700	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-05	2020	1700	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-06	2025	1700	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-07	2050	1700	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-08	1450	1750	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-09	1475	1750	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-10	1500	1750	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-11	2000	1750	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-12	2020	1750	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-13	2025	1750	3	13																																																																															
ШПн-ТС 02-14	2050	1750	3	13																																																																															
4	Ширма-перегородка медицинская ШПк-ТС 02 двухсекционная		<table><tr><th colspan="5">Габаритные размеры:</th></tr><tr><th>Модель</th><th>Ширина (+ 4мм)</th><th>Высота (+ 4мм)</th><th>Глубина (+ 1мм)</th><th>Масса (+ 3кг)</th></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-01</td><td>1450</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-02</td><td>1475</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-03</td><td>1500</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-04</td><td>2000</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-05</td><td>2020</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-06</td><td>2025</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-07</td><td>2050</td><td>1700</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-08</td><td>1450</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-09</td><td>1475</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-10</td><td>1500</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-11</td><td>2000</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-12</td><td>2020</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-13</td><td>2025</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>ШПк-ТС 02-14</td><td>2050</td><td>1750</td><td>3</td><td>13</td></tr></table>	Габаритные размеры:					Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)	ШПк-ТС 02-01	1450	1700	3	13	ШПк-ТС 02-02	1475	1700	3	13	ШПк-ТС 02-03	1500	1700	3	13	ШПк-ТС 02-04	2000	1700	3	13	ШПк-ТС 02-05	2020	1700	3	13	ШПк-ТС 02-06	2025	1700	3	13	ШПк-ТС 02-07	2050	1700	3	13	ШПк-ТС 02-08	1450	1750	3	13	ШПк-ТС 02-09	1475	1750	3	13	ШПк-ТС 02-10	1500	1750	3	13	ШПк-ТС 02-11	2000	1750	3	13	ШПк-ТС 02-12	2020	1750	3	13	ШПк-ТС 02-13	2025	1750	3	13	ШПк-ТС 02-14	2050	1750	3	13
Габаритные размеры:																																																																																			
Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)																																																																															
ШПк-ТС 02-01	1450	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-02	1475	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-03	1500	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-04	2000	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-05	2020	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-06	2025	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-07	2050	1700	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-08	1450	1750	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-09	1475	1750	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-10	1500	1750	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-11	2000	1750	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-12	2020	1750	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-13	2025	1750	3	13																																																																															
ШПк-ТС 02-14	2050	1750	3	13																																																																															
5	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 03 трехсекционная		<table><tr><th colspan="5">Габаритные размеры:</th></tr><tr><th>Модель</th><th>Ширина (+ 4мм)</th><th>Высота (+ 4мм)</th><th>Глубина (+ 1мм)</th><th>Масса (+ 3кг)</th></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-01</td><td>2200</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-02</td><td>2225</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-03</td><td>2250</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-04</td><td>2300</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-05</td><td>3000</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-06</td><td>3050</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-07</td><td>3100</td><td>1700</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-08</td><td>2200</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-09</td><td>2225</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-10</td><td>2250</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-11</td><td>2300</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-12</td><td>3000</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-13</td><td>3050</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr><tr><td>ШПн-ТС 03-14</td><td>3100</td><td>1750</td><td>3</td><td>19</td></tr></table>	Габаритные размеры:					Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)	ШПн-ТС 03-01	2200	1700	3	19	ШПн-ТС 03-02	2225	1700	3	19	ШПн-ТС 03-03	2250	1700	3	19	ШПн-ТС 03-04	2300	1700	3	19	ШПн-ТС 03-05	3000	1700	3	19	ШПн-ТС 03-06	3050	1700	3	19	ШПн-ТС 03-07	3100	1700	3	19	ШПн-ТС 03-08	2200	1750	3	19	ШПн-ТС 03-09	2225	1750	3	19	ШПн-ТС 03-10	2250	1750	3	19	ШПн-ТС 03-11	2300	1750	3	19	ШПн-ТС 03-12	3000	1750	3	19	ШПн-ТС 03-13	3050	1750	3	19	ШПн-ТС 03-14	3100	1750	3	19
Габаритные размеры:																																																																																			
Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)																																																																															
ШПн-ТС 03-01	2200	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-02	2225	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-03	2250	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-04	2300	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-05	3000	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-06	3050	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-07	3100	1700	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-08	2200	1750	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-09	2225	1750	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-10	2250	1750	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-11	2300	1750	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-12	3000	1750	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-13	3050	1750	3	19																																																																															
ШПн-ТС 03-14	3100	1750	3	19																																																																															

6	Ширма-перегородка медицинская ШПк-ТС 03 трехсекционная		Габаритные размеры:				
			Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)
			ШПк-ТС 03-01	2200	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-02	2225	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-03	2250	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-04	2300	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-05	3000	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-06	3050	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-07	3100	1700	3	19
			ШПк-ТС 03-08	2200	1750	3	19
			ШПк-ТС 03-09	2225	1750	3	19
			ШПк-ТС 03-10	2250	1750	3	19
			ШПк-ТС 03-11	2300	1750	3	19
			ШПк-ТС 03-12	3000	1750	3	19
			ШПк-ТС 03-13	3050	1750	3	19
			ШПк-ТС 03-14	3100	1750	3	19
7	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 04 четырёхсекционная		Габаритные размеры:				
			Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)
			ШПн-ТС 04-01	2900	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-02	2925	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-03	2950	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-04	2975	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-05	4000	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-06	4050	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-07	4075	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-08	4100	1700	3	24
			ШПн-ТС 04-09	2900	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-10	2925	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-11	2950	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-12	2975	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-13	4000	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-14	4050	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-15	4075	1750	3	24
			ШПн-ТС 04-16	4100	1750	3	24
8	Ширма-перегородка медицинская ШПк-ТС 04 четырёхсекционная		Габаритные размеры:				
			Модель	Ширина (+ 4мм)	Высота (+ 4мм)	Глубина (+ 1мм)	Масса (+ 3кг)
			ШПк-ТС 04-01	2900	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-02	2925	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-03	2950	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-04	2975	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-05	4000	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-06	4050	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-07	4075	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-08	4100	1700	3	24
			ШПк-ТС 04-09	2900	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-10	2925	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-11	2950	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-12	2975	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-13	4000	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-14	4050	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-15	4075	1750	3	24
			ШПк-ТС 04-16	4100	1750	3	24

Комплектность поставки

Наименование	Количество, шт.
Ширма-перегородка медицинская	1
Колеса (колесные опоры) или неподвижные опоры (подсадные ножки)	4-12*
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

*) включение в комплект поставки определяется заказчиком.

Мебель снабжена неподвижными или регулируемыми опорами (подсадными ножками) по ГОСТ 16371 высотой от 50 мм до 100 мм, торцами закрытыми пластмассовыми заглушками.

Передвижные ширмы могут устанавливаться на поворотные колеса (колесные опоры) диаметром 55 мм. Ширина колес не менее 32 мм. Зазор между колесом и полом в пределах 3 мм.

Колеса должны свободно, без заеданий, вращаться на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).

Предельная рабочая нагрузка - 370 Н.

Ширмы должны быть устойчивы при приложении усилия не менее 25 Н / секция в боковом направлении.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Распаковать компоненты мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий (поставляется в собранном виде).

Выполнить санитарную обработку мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации мебели, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в

упакованном виде в вертикальном положении, при температуре -50 °С до +40 °С, влажность 60 – 80 %.

Чистка ширм-перегородок медицинских для клинико-диагностических лабораторий.

Очищение производить посредством влажной тряпки и любого универсального чистящего средства.

Металлические части, из которых произведено изделие, необходимо очищать широко применимыми чистящими средствами (1%-ный раствор хлорамина по МУ-287-113 или 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1%-ным раствором моющих средств по ГОСТ 25644).

7. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие должно быть собрано и передано специальным лицензированным организациям, занимающимся утилизацией медицинских отходов. Мебель относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Все упаковочные материалы должны быть утилизированы. В случае утилизации пластиковые, кожаные и металлические части должны быть отделены друг от друга.

8. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели составляет 18 (восемнадцать) месяцев, если нет других условий в договоре на поставку, со дня поставки, что должно быть отражено в паспорте (гарантийном талоне).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений мебели, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Средний срок службы 7 лет.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений мебели, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие в транспортной таре может транспортироваться любым видом транспорта крытого исполнения на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования – при температуре -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность 60 – 80 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность мебели от механических повреждений, увлажнения и загрязнения.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма-перегородка медицинская _____

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,
603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36,
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:
606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36,
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО «Техстрой»

Директор ООО «Техстрой»
А.Н. Кабин




7. Основные технические характеристики.

1	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 01 ШПк-ТС 01		Ширина (±4мм)		Высота (±4мм)	Глубина(±1мм)	Масса 7 кг ± 3
			725		1700	3	
			750		1700	3	
			800		1700	3	
			850		1700	3	
			900		1700	3	
			950		1700	3	
			1000		1700	3	
			725		1750	3	
			750		1750	3	
			800		1750	3	
			850		1750	3	
			900		1750	3	
			950		1750	3	
			1000		1750	3	
2	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 02 ШПк-ТС 02 (двухсекционная)	v	Ширина	v	Высота	3	13 кг ± 3
			1450		1700	3	
			1475		1700	3	
			1500		1700	3	
			2000		1700	3	
			2020		1700	3	
			2025		1700	3	
			2050		1700	3	
			1450		1750	3	
			1475		1750	3	
			1500		1750	3	
			2000		1750	3	
			2020		1750	3	
			2025		1750	3	
			2050		1750	3	
3	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 03 ШПк-ТС 03 (трехсекционная)		Ширина		Высота	3	19 кг ± 3
			2200		1700	3	
			2225		1700	3	
			2250		1700	3	
			2300		1700	3	
			3000		1700	3	
			3050		1700	3	
			3100		1700	3	
			2200		1750	3	
			2225		1750	3	
			2250		1750	3	
			2300		1750	3	
			3000		1750	3	
			3050		1750	3	
			3100		1750	3	
4	Ширма-перегородка медицинская ШПн-ТС 04 ШПк-ТС 04 (четырёхсекционная)		Ширина		Высота	3	24кг ± 3
			2900		1700	3	
			2925		1700	3	
			2950		1700	3	
			2975		1700	3	
			4000		1700	3	
			4050		1700	3	
			4075		1700	3	
			4100		1700	3	
			2900		1750	3	
			2925		1750	3	
			2950		1750	3	
			2975		1750	3	
			4000		1750	3	
			4075		1750	3	
			4100		1750	3	



Паспорт

	Наименование	Артикул
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 01
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 01
v	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 02
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 02
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 03
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 03
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 04
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 04

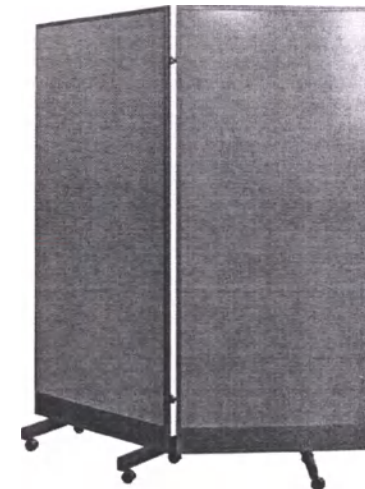

ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

г. Нижний Новгород

Назначение и конструкция

Ширма-перегородка медицинская для клиничко-диагностических лабораторий предназначена для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением рентгенологических, гематологических, иммунологических, цитологических, микробиологических и других исследований.

Изделия выполнены из травмобезопасного анодированного алюминиевого профиля марки F1-17 (19*20*5.3 мм), F1-18 (20*19*5.3 мм), C1-03 (36*16*8 мм), C1-04 (20.2*19*5.3 мм), C1-041 (27*27*4.6 мм), C1-05 (27*36*17.5 мм), C1-06 (16*36*4.6 мм), C1-09 (16*5.4 мм), C1-10 (26*36*4.6 мм), C1-14 (30*16*8 мм), C1-141 (36*16*4.6 мм), C1-17 (10.9*34*4.9 мм).

Каркас эпоксидно-полиэфирной краской, производитель ООО «НПП Ярославский завод лакокрасочных материалов», марки П-ЭП-ПЛ-2060 (белый), П-ЭП-ПЛ-2060 Кифато (синий), П-ЭП-ПЛ-6018 (зеленый, св. зеленый).

Сборка каркаса осуществляется с помощью специальных замков, маркировки C2-01, C2-02, C2-09, C3-04, K-019, и угловых соединений F3-02+винт и закрытых пластмассовых заглушек, C2-11, C2-10, МП2-01.

Соединение каркаса выполнено из химически стойкого двухстороннего пластика, марки C2-1600*3мм.

Колесные опоры марки – SC hg 55 сер/рез, без тормоза, Ø55мм сер/рез, марка 7-ИРП-Ширма снабжена неподвижными или регулируемыми опорами (подсадными ножками) высотой от 50 мм до 100 мм, торцами закрытыми пластмассовыми заглушками.

Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Ширма-перегородка медицинская	1
Колеса (колесные опоры) или неподвижные опоры (подсадные ножки)	4-12*
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

*) включение в комплект поставки определяется заказчиком.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

Инструкция по сборке

Упаковать компоненты ширмы перегородки медицинской (поставляется в собранном виде).

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

Изделие в транспортной таре может транспортироваться любым видом транспорта крытого назначения на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг от друга и о стенки транспортных средств.

Условия хранения: температура от +5 до +30 °С, влажность 60 – 80 %).

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (-50 °С до +40 °С, влажность 60 – 80 %).

Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

Наружные поверхности изделия устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина и 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644.

6. Свидетельство о приемке

Ширма-перегородка медицинская для клиничко-диагностических лабораторий:

	Наименование	Артикул
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 01
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 01
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 02
v	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 02
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 03
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 03
	Ширма-перегородка медицинская	ШПн-ТС 04
	Ширма-перегородка медицинская	ШПк-ТС 04

Соответствует ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

Серийный номер:

Дата выпуска изделия:

Упаковщик: Лихачев И.М.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10

Место производства: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д. 1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Мебель медицинская Ширма перегородка медицинская

(наименование и тип изделия)

ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Мебель медицинская Ширма перегородка медицинская

(наименование и тип изделия)

ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10

Место производства: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д. 1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Мебель медицинская Ширма перегородка медицинская

(наименование и тип изделия)

ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Мебель медицинская Ширма перегородка медицинская

(наименование и тип изделия)

ТУ 32.50.30-002-14692415-2017

(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10

Место производства: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д. 1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ООО «Техстрой»

3
Директор ООО «Техстрой»
А.Н. Кабикин

