

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»
В.П. Чувев
2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты безмышьяковистой для девитализации пульпы зуба
«ДЕВИТ-П»
педодонтической
ТУ 9391-062-45814830-2002

НАЗНАЧЕНИЕ

Паста «Девит-П» предназначена для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов в случаях, когда экстирпацию пульпы можно исключить.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Девитализирующая паста «Девит-П» содержит:

- параформ - антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы;
- лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций;
- хлорфенол, камфору и ментол – компоненты, усиливающие антисептическое действие препарата;
- пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру.

Девитализация пульпы временных зубов сопровождается эффективной стерилизацией, что делает возможным не удалять пульпу и избежать болезненной для ребенка процедуры.

Внимание: *Препарат противопоказан для лиц, имеющих повышенную чувствительность к параформу и компонентам пасты.*

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить полость зуба от кариозного дентина и широко вскрыть пульповую камеру. В случаях значительного некроза поверхности пульпы, необходимо под аппликационной анестезией снять часть некротизированной пульпы. Взять шпателем небольшое количество пасты, скатать шарик и внести в полость без давления.

После наложения пасты «Девит-П» необходимо герметично закрыть полость временным пломбировочным материалом «Дентин-паста». Не допускать подтекания препарата на слизистую.

Полная девитализация пульпы происходит за 3-5 дней. Если пациент не ощущает боли, постоянное пломбирование можно проводить уже через 24-48 часов после применения пасты.

После девитализации пульпы пасту удаляют и пломбируют постоянным пломбировочным материалом («Резодент-ВладМиВа» на основе резорцин-формальдегидной смолы, «Крезодент-ВладМиВа» на камфорофенольной основе или «Трикредент» на основе крезол-формальдегидной смолы).

При усилении пульпитной боли после наложения пасты (не вскрыт рог пульпы или паста наложена очень плотно) необходимо выполнить инфильтрационную анестезию лидокаином.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	- 3,0 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытом шприце, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.

При транспортировании в зимнее время (t ниже 0°C) материал необходимо выдержать при t +18°C...+23°C в течение суток.



МАТЕРИАЛ-ПАСТА БЕЗМЫШЬЯКОВИСТАЯ ДЛЯ ДЕВИТАЛИЗАЦИИ ПУЛПЫ ЗУБА «ДЕВИТ»





МАТЕРИАЛ-ПАСТА БЕЗМЫШЬЯКОВИСТАЯ ДЛЯ ДЕВИТАЛИЗАЦИИ ПУЛЬПЫ ЗУБА «ДЕВИТ»



ДЕВИТ®-А

Паста безмышьяковистая АНЕСТЕЗИРУЮЩАЯ
для лечения пульпы зуба

ПАСТА



ДЕВИТ®-С

Материал-паста безмышьяковистая для девитализации
пульпы зуба (СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩАЯ)

ПАСТА



ДЕВИТ®-П

Материал-паста безмышьяковистая для девитализации
пульпы зуба (ТИХОДЕЙСТВУЮЩАЯ)

ПАСТА

