

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В.П. Чуев

2008 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
пасты для окончательной обработки пломб
из композитных материалов, стеклоиономеров и амальгам
"ПОЛИДЕНТ № 4"
ТУ 9391-030-45814830-98

Полирующие пасты "Полидент" для химико-механической обработки эмали зубов выпускаются:

- набором (в банках);
- отдельно (в шприцах).

НАЗНАЧЕНИЕ

Полирующая паста «Полидент № 4» предназначена для окончательной обработки пломб из композитных материалов, стеклоиономеров и амальгам.

СВОЙСТВА

Паста «Полидент № 4» содержит абразив, гидрофильный пастообразователь и инертный наполнитель.

Полировка пломбы выполняется пламевидными головками, чашечками с применением пасты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Алмазными головками удалить излишки пломбировочного материала.

Нанести на рабочую поверхность отделочной головки небольшое количество пасты «Полидент № 4» и обработать предварительно просушенную поверхность пломбы на средней скорости и при среднем давлении. Для усиления блеска поверхности необходимо каплями добавлять воду в процессе полирования.

Для получения идеального блеска процедуру полировки необходимо проводить в течение 30-60 секунд.

Затем смыть пасту с поверхности зуба и отделочной головки.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц) - 8,0 г

Инструкция по применению - 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.

