

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «МедВизит» МиВа
П. Чув
2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора жидкостей эндодонтических для лечения периапикальных
«ПУЛЬПЕВИТ»
ТУ 9391-088-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ:

Набор жидкостей «Пульпевит» предназначен для обезболивания при медикаментозных или травматических пульпитах и периодонтитах, при острых пульпитах перед применением мышьяковой пасты (жидкость № 1), для антисептической обработки каналов при осложненном пульпите, резекции верхней части корня (жидкость № 2), а также для лечения осложненного кариеса молочных зубов (жидкость № 3).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость № 1 содержит: лидокаина гидрохлорид, обеспечивающий болеутоляющее действие; хлорфенол, крезол – антисептики широкого спектра действия, не вызывающие раздражений, и лишь незначительно мумифицирующие нервные волокна. Жидкость можно использовать в качестве компресса длительного действия для «купирования» пульпита в случаях невозможности продолжить лечение.

Жидкость № 2 содержит антисептики: фенол, звенол, а также формальдегид, что обеспечивает антисептические свойства и глубокую мумификацию, а также стерилизацию корневых каналов зубов (в частности, после кисты, абсцесса, свища). В состав входит дексаметазон (0,05%) – кортикостероид, значительно снижающий болезненность периапикальных тканей.

Жидкость № 3 (формокрезол) содержит формальдегид (19%) и крезол (35%). Формокрезол в зависимости от продолжительности воздействия, приводит к частичной или полной мумификации корневой пульпы молочного зуба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкость № 1 применяют, используя турунды или ватные шарики (компрессы), которые пропитывают и слегка отжимают. При глубоком кариесе и острых пульпитах тампон, пропитанный жидкостью № 1, положить в полость (как можно ближе к пульпе) под временную пломбу, стараясь не нажимать. В случаях, когда пациент не может по каким-либо причинам продолжить лечение, препарат можно использовать в качестве непроницаемого компресса (пропитанный ватный шарик) длительного действия под временной пломбой. Через некоторое время (5-10 дней), которое определяется врачом, можно приступить к окончательному лечению зуба.

Жидкость № 2 применяют, используя турунды, которые пропитывают и тщательно отжимают, не допуская подтекание препарата, так как высокая концентрация формальдегида и фенола может вызвать неприятные ощущения. Пропитанными турундами обрабатывают каналы, а также используют для временного компресса. При смешивании жидкости № 2 с окисью цинка образуется незатвердевающая антисептическая лечебная паста для временного пломбирования.

Жидкость № 3 (формокрезол) применяют двумя способами: кратковременно и пролонгированно.

Для кратковременного применения после ампутации ватный тампон, пропитанный формокрезолом, помещают на рану и оставляют на 3-5 минут. Затем

тампон удаляют, ампутационную рану покрывают цинкоксидэвгенольным цементом («Эодент» (быстротвердеющий) и проводят постоянное пломбирование.

Для пролонгированного применения пропитанную формокрезолом ватную турунду помещают на ампутационную рану под временным герметичным покрытием («Дентин – порошок»). Через 5-7 дней турунду удаляют, ампутационную рану покрывают цинкоксидэвгенольным цементом и проводят постоянное пломбирование.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Выпускаются отдельно:

Жидкость № 1 (флакон)	- 15 мл
Жидкость № 2 (флакон)	- 15 мл
Жидкость № 3 (флакон)	- 15 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года

