



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**антисептического стоматологического материала**  
**для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов**  
**«ПУЛЬПОДЕНТ®»**  
**ТУ 9391-083-45814830-2006**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Стоматологический материал «Пульподент» применяется для:

- лечения пульпитов витальных временных и постоянных зубов с несформированными корнями;
- лечения острого очагового и хронического фиброзного пульпита с сохранением жизнеспособной корневой пульпы;
- лечения инфицированных временных моляров методом пульпотомии;
- лечения пульпитов постоянных зубов перед протезированием;
- лечения пульпитов после витальной ампутации пульпы постоянных неправильно расположенных зубов (вестибулярный наклон коронки), а также зубов с искривленными труднодоступными каналами (с целью проведения полноценного эндодонтического лечения).

**ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

Стоматологический материал «Пульподент» выпускается в виде порошка и жидкости. В состав **порошка** входят:

- параформ, антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая частичную девитализацию пульпы;
- иодоформ, обеспечивающий непрерывное антибактериальное действие;
- окись цинка и рентгеноконтрастная добавка.

**Жидкость** содержит:

- эвгенол, обладающий анальгезирующим, антисептическим и успокаивающим свойствами;
- формальдегид – антисептик, обладающий микробоцидной, микростатической активностью и универсальным спектром действия как высоко реакционноактивный стерилизующий агент;
- фенол – антисептик, обладающий бактерицидными, бактериостатическими, мумифицирующими свойствами, а также обеспечивающий стерилизацию остаточной пульпы зубов (в частности, при лечении инфицированных временных моляров методом пульпотомии, как единственное исключение из правила пульпотомии на витальных зубах);
- дексаметазон (0,13%) - наиболее активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие, снижающий болевые реакции после пломбирования.

Содержание мумифицирующих и антисептических компонентов позволяет провести лечение быстро и безболезненно для пациента. Мумификации подвергается только устьевая часть пульпы, непосредственно касающаяся пасты. Апикальная часть пульпы остается жизнеспособной, что позволяет сформироваться апикальной части корня в постоянных зубах с несформированными корнями. В многокорневых каналах сложной морфологии «Пульподент» обеспечивает антисептическое действие на культю пульпы с сохранением ее жизнеспособности и герметизма.

При смешивании в соотношении порошок/жидкость 2:1 образуется однородная пластичная паста, обладающая антисептическими и мумифицирующими свойствами. В течение 5-7 минут пасту сметанообразной консистенции можно легко ввести в пульпарную камеру и устья канала зуба. Паста хорошо адаптируется к стенкам полости зуба и, постепенно теряя пластичность, затвердевает в течение 20-25 минут.

**Внимание!** В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Лечение пульпита методом витальной ампутации проводится в два посещения. В первое посещение после обезболивания и препарирования кариозной полости стерильным бором вскрыть пульповую камеру и острым шаровидным бором провести ампутацию коронковой пульпы. Затем тщательно провести гемостаз во избежание образования сгустка, который может препятствовать контакту пасты с культей пульпы и при наличии инфицирования привести к осложнениям. После полной остановки кровотечения полость необходимо высушить стерильным ватным тампоном и культю пульпы покрыть пастой, полученной при смешивании порошка с жидкостью.

Для этого на стеклянной пластине при температуре  $22\pm 1^{\circ}\text{C}$  и влажности  $55\pm 10\%$  смешивают 1 мерник (0,10-0,12 г) порошка с 2 каплями жидкости (0,05-0,06 г) до получения однородной массы.

Пасту, помещенную на культю пульпы, покрывают временным безэвгенольным материалом («Дентин-порошок»), который тщательно уплотняют с целью создания герметизма в области культи. Количество пасты должно быть оптимальным, чтобы не допустить подтекание на десну при уплотнении пасты. Для обеспечения хорошего прилегания пасты к стенкам и устью канала между верхними и нижними молярами можно поместить ватный валик и попросить пациента накусить на валик без особых усилий.

Во второе посещение через 8-10 дней при отсутствии болевых ощущений и после проведения рентгенографии зуба, подтверждающих успех лечения, временную пломбу и материал рекомендуется убрать, в полость зуба внести свежую порцию пасты «Пульподент» более плотной консистенции. Затем препарат следует изолировать безэвгенольным материалом, коронку зуба восстановить композитом или компомером или с использованием стеклоиономерного цемента.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Порошок (банка)          | - 25,0 г  |
| Жидкость (флакон)        | - 15,0 мл |
| Крышка-капельница        | - 1 шт.   |
| Мерник                   | - 1 шт.   |
| Инструкция по применению | - 1 шт.   |
| Картонная упаковка       | - 1 шт.   |

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытой таре, при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Срок годности – 2 года.



МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ  
ПЛОМБИРОВАНИЯ УСТЬЕВ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ  
ВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ  
«ПУЛЬПОДЕНТ»





# МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ УСТЬЕВ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ «ПУЛЬПОДЕНТ»

**ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

## ПУЛЬПОДЕНТ

Материал  
стоматологический  
антисептический  
для пломбирования  
устьев корневых  
каналов витальных зубов

порошок 25 г  
жидкость 15 мл

**ПУЛЬПОДЕНТ®**  
для пломбирования устьев  
корневых каналов  
витальных зубов  
ПОРОШОК