



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора жидкостей для обработки стоматологических оттисков
«ОРТОСОЛ»
ТУ 9391-091-45814830-2004

В набор жидкостей «Ортосол» входят:

- «Ортосол-ДЕЗ» - для дезинфекции оттисков из силиконовых и альгинатных материалов в условиях стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории;
- «Ортосол-Импрес» - для сохранения качества оттисков из альгинатных материалов (задерживает обезвоживание и предохраняет от размерных деформаций);
- «Ортосол-Адгезив» - для создания ретенционного слоя на слепочных ложках;
- «Ортосол-Клинз» - для очистки стоматологических инструментов от альгинатных и гипсовых оттисковых масс (концентрат).
- «Ортосол-Дент» - для очистки съемных зубных протезов от бактериального налета, остатков пищи или фиксирующих материалов, а также для хранения протезов (концентрат).

Жидкости «Ортосол» выпускаются комплектом и отдельно.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Ортосол-ДЕЗ» предназначен для дезинфекции стоматологических оттисков с целью профилактики внутрибольничных инфекций вирусной, бактериальной и грибковой этиологии.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

На поверхности оттисков, имеющих непосредственный контакт со слизистой оболочкой полости рта, слюной и кровью (при микротравмах пациентов) содержится до $6 \cdot 10^9$ микробных клеток. Инфекция может перейти от пациента медицинскому работнику и другому пациенту. С целью профилактики внутрибольничных инфекций вирусной, бактериальной и грибковой этиологии необходимо проводить дезинфекцию стоматологических оттисков перед передачей их в зуботехническую лабораторию.

«Ортосол-ДЕЗ» гарантирует такую дезинфекцию, не искажая точный рисунок поверхности оттисков и не изменяя их размеры.

«Ортосол-ДЕЗ» представляет собой антисептическую жидкость, содержащую в своем составе:

- диметилкарбинол, оказывающий микробоцидное и микробостатическое действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии и некоторые виды грибов;
- глутаровый альдегид, оказывающий бактерицидное и антисептическое действие, обладающий фунгистатической активностью;

- четвертичное аммониевое соединение, оказывающее микробостатическое и микробоцидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии;
- отдушку, краситель и наполнитель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дезинфекция оттисков проводится в три этапа.

1. Оттиск промыть под струей проточной воды в течение одной минуты.
2. Нанести «Ортосол-ДЕЗ» на оттиск так, чтобы равномерно увлажнить его. Обработанный оттиск поместить в плотно закрывающийся пакет и выдержать в течение 15-20 минут.
3. Оттиск повторно промыть под струей проточной воды в течение 1 минуты.

Вниманию стоматологов!

***В случае попадания в глаза немедленно промыть
большим количеством воды.
Не распылять вблизи огня.***

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон)	- 400 мл	или 1 л
Пакеты	- 6 шт.	
Инструкция по применению	- 1 шт.	

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, темном месте при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности - 2 года

