

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ОЭЗ" ВладМиВа"
В.П. Чуев
" 19 " 03 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
цемента стоматологического водозатворимого
«ОРТОФИКС-АКВА»
ТУ 9391-037-45814830-99

Для повышения качества ортопедического лечения пациентов с использованием несъемных зубных протезов, увеличения сроков пользования коронками и мостовидными протезами разработана система стоматологических водоотверждаемых цементах "Ортофикс-Аква", объединяющая:

- стеклоиономерный цемент;
- поликарбоксилатный цемент;
- кальцийсодержащий цемент для временной фиксации;

«ОРТОФИКС-АКВА» СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ [С]

НАЗНАЧЕНИЕ

- «Ортофикс-Аква» стеклоиономерный предназначен для:
- постоянной фиксации коронок, вкладок, штифтов, мостовидных протезов;
 - фиксации ортопедических и ортодонтических конструкций;

СВОЙСТВА

«Ортофикс-Аква» стеклоиономерный представляет собой механическую смесь алюмофторсиликатного стекла и сухой полиакриловой кислоты. Порошок стеклоиономерного цемента «Ортофикс-Аква» легко смешивается с водой до получения необходимой консистенции. Стеклоиономерная реакция начинается сразу же после смешивания.

«Ортофикс-Аква» стеклоиономерный обладает хорошей адгезией к эмали и дентину, низкой растворимостью, высокой механической прочностью, постепенно выделяет ионы фтора, что препятствует развитию вторичного кариеса. Материал соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом работы капельницу заполняют дистиллированной водой. Флакон с порошком перед применением необходимо хорошо встряхнуть. Порошок дозируют ложкой-мерником, жидкость – капельницей, удерживая ее в вертикальном положении. Рекомендуются порошок и воду смешивать в весовом соотношении 4,7:1, что соответствует 1 мерной ложке порошка без верха (0,23-0,24 г) и 1 капле воды (0,05 г).

Замешивают «Ортофикс-Аква» стеклоиономерный на стекле пластмассовым или металлическим шпателем порциями в течение 30 секунд. При температуре 18-23°C и относительной влажности 45-55% рабочее время цемента 2,0-2,5 минуты. При повышении температуры рабочее время цемента сокращается, материал следует замешивать на охлажденном стекле. Время

твердения цемента в полости рта 6-7 минут. Фиксацию проводят общепринятым способом. Затвердевшие излишки цемента удаляют через 10-12 минут после фиксации зубных протезов.

Примечание: Металлические инструменты сразу после использования рекомендуется промыть холодной водой.

Вниманию стоматологов!

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

Предостережение

Не допускайте попадания материала на мягкие ткани полости рта, на кожу и в глаза. При попадании немедленно промыть водой. При попадании препарата в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (флакон)	-	30,0 г
Капельница	-	1 шт.
Мерная ложка	-	1 шт.
Инструкция по применению	-	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Внимание!!! Избегать попадания влаги (для сохранения порошка во флакон введена капсула с осушителем).

Разработчик Лягина Л.А.Лягина
«19» сентября 2007 г.

