


«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В.П. Чуев
« 17 » 2011 г.

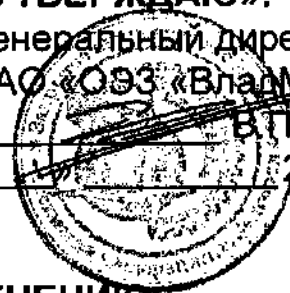

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
жидкости для отбеливания изделий из нержавеющей стали
«ОТБЕЛ»
ТУ 9391-009-45814830-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отбеливания изделие погружают в нагретый до 50-60⁰С раствор и выдерживают в нем 1-3 минуты. Затем протез извлекают, промывают водой и сушат.

При более высокой температуре и увеличении времени выдержки возможно частичное растворение конструкционного материала.

Внимание! Избегать попадания раствора в глаза и на открытые участки кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон)	- 125 мл или 1 л или 3 л
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5⁰С до +25⁰С.

Срок годности - 2 года.

При транспортировании в зимнее время (t ниже 0⁰С) материал необходимо выдержать при t +18⁰С...+23⁰С в течение суток.