

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ПМК-МЕДЭК»



_____ Качмазова Л.Г.
_____ 200__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: «Салфетки дезинфицирующие спиртовые из нетканого полотна, одноразовые, для обработки кожного покрова до и после инъекции, СД-«МЕДЭК» производства ООО «ПМК-МЕДЭК» РФ. ТУ 9398-005-52544100-2003

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетки дезинфицирующие предназначены для обработки кожного покрова до и после инъекции в условиях экстренной медицины, службы скорой помощи, стационарных и бытовых условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки изготовлены из нетканого полотна (крепированной бумаги) «WEST-OST COSULTING Австрия. Салфетки пропитаны равномерно 70% водно-спиртовым раствором (спирт этиловый, ректификованный по ГОСТ Р 51632 и вода дистиллированная по ГОСТ 6709). Салфетки упакованы в комбинированный материал: бумагу с металлизированной алюминиевой фольгой и полиэтиленовым покрытием фирмы «Frantschach Coating Austria GmbH» Австрия. Упаковка салфеток герметична. Салфетки – не стерильны. На упаковке имеется маркировка с указанием изделия, предприятие изготовителя, его адреса, размера изделия, дата изготовления, срока годности.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний нет. Нетоксичны.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Вскрыть пакет, развернуть салфетку и обработать ею инъекционное поле на кожном покрове до и после инъекции.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальная температура хранения от +50 С до – 50 С.
Условия хранения 2(С) ГОСТ 15150.

Зав.производством _____

А.Е.Тимофеева