

Инструкция по применению

Ланцеты однократного применения стерильные

Назначение

Ланцеты для прокола кожи пальца с целью получения капиллярной крови.

Использование

Ланцеты предназначены для получения капиллярной крови (преимущественно из пальцев, но возможно и из других участков тела). Ланцеты разработаны для максимально комфортного, безопасного и безболезненного получения капиллярной крови.

Хранение

Находящиеся в упаковке ланцеты следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без какого либо контакта с бактериальным, тепловым либо коррозирующим материалом.


Применение

- **снять защитный колпачок/ наконечник**
- **поднести к поверхности пальца**
- **плотно прижать**
- **надавить/ нажать кнопку**
- **выбросить использованный ланцет**

Срок хранения

Максимальный срок хранения ланцетов без потери стерильных свойств составляет 5 лет.




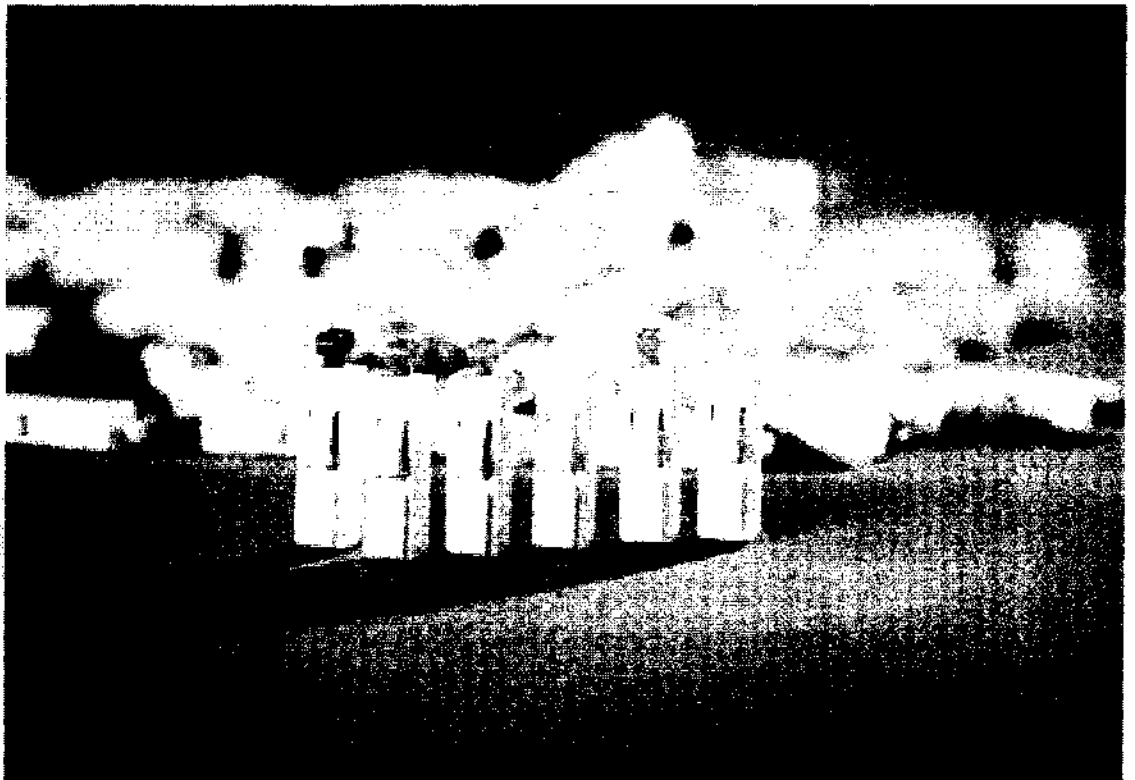

- ◆ **VITREX® STERILANCE Lite II**
- ◆ **Прокол при нажатии кнопки**
- ◆ **Образец капиллярной крови для исследования**
- ◆ **безопасно • просто • удобно**



Эксклюзивный представитель
ЗАО «МедиТренд»
www.meditrend.ru

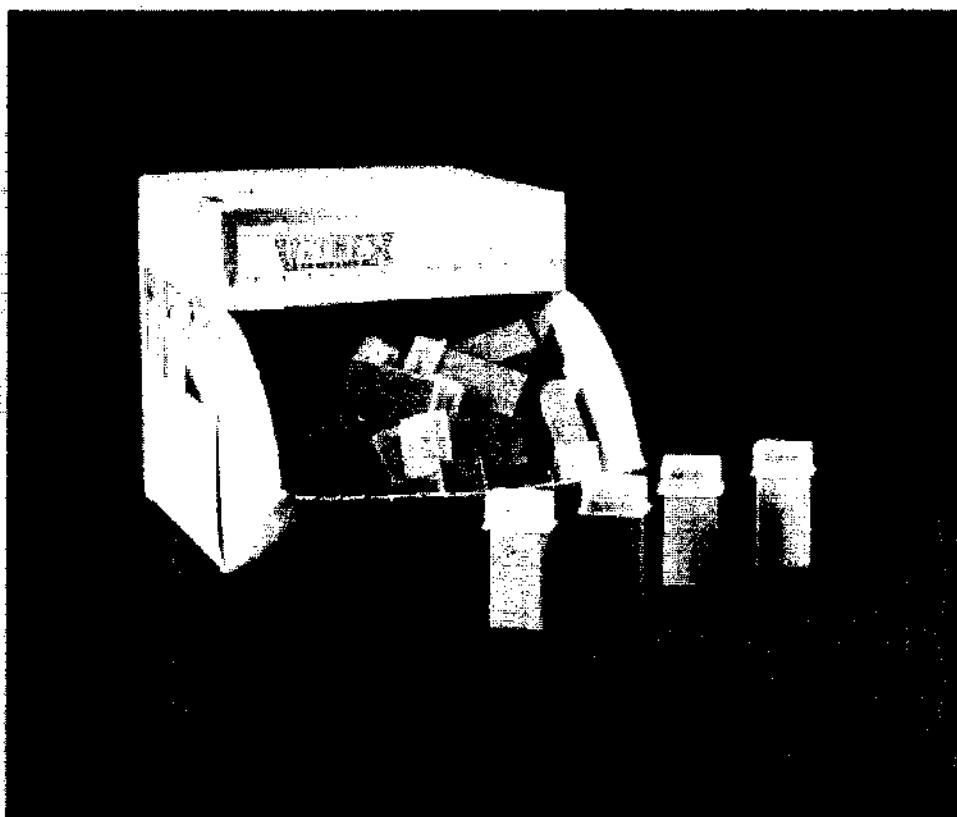

- ◆ **VITREX® STERILANCE Press**
- ◆ **Прижать и надавить для прокола**
- ◆ **Образец капиллярной крови для исследования**
- ◆ **безопасно • просто • удобно**



Эксклюзивный представитель
ЗАО «МедиТренд»
www.meditrend.ru